



Mission Plus Hb Hémoglobine système de surveillance MISE EN ROUTE

Allumer l'appareil

D'abord, insérez les quatre piles AAA inclus au dos de l'appareil. L'appareil s'allume et vous demandera la date et l'heure actuelle. Utilisez les boutons gauche ◀ et droite ▶ pour entrer la date et l'heure, et la bouton d'alimentation ⏻ pour enregistrer.

Après le réglage de la date et l'heure, l'appareil s'éteint.

Configuration initiale de l'appareil

Vous devez configurer l'appareil avant la première utilisation. Cela doit être fait seulement une fois.

1. Appuyer le bouton d'alimentation (⏻) pendant quatre secondes pour passer au mode configuration de l'appareil.
L'appareil affichera N°SET.
Appuyez sur ⏻ pour régler la première journée d'essais. Appuyez une fois gauche ◀ . et choisissez 99 pour démarrer le premier test comme le jour 1,
Appuyez sur ⏻ pour enregistrer et continuer.
2. Appuyez deux fois droite ▶ pour continuer à SET, et ⏻ pour entrer dans le mode de réglage.
3. Utilisez ◀ et ▶ pour choisir un format 12 ou 24 heures.
Appuyez sur ⏻ pour enregistrer et continuer.
4. Utilisez ◀ et ▶ pour choisir l'année correcte.
Appuyez sur ⏻ pour enregistrer et continuer.
5. Utilisez ◀ et ▶ pour choisir le mois et le jour
Appuyez sur ⏻ pour enregistrer et continuer.
6. Utilisez ◀ et ▶ pour choisir l'heure et les minutes actuelle.
7. Utilisez ◀ et ▶ pour activer ou désactiver la réinitialisation du numéro de test. Le numéro de test sera réinitialisé à 1 chaque nouveau jour de test s'il est activé.
Appuyez sur ⏻ pour enregistrer et continuer.
8. Utilisez ◀ et ▶ pour activer le son de l'appareil.
Appuyez sur ⏻ pour enregistrer et continuer.
9. L'écran montrera N°SET.
10. Appuyez une fois gauche ◀ pour naviguer vers ELT
Appuyez sur ⏻ pour finaliser la configuration.

L'appareil est prêt à l'utilisation



Mission Plus Hb Hémoglobine système de surveillance PROTOCOL de TEST


Pour tester vous avez besoin de:

- Hb Mission Plus analyseur Hémoglobine
- Lancette ou lancette de sécurité
- Bandelettes réactives Hb Mission Plus Hémoglobine et sa code puce
- Tubes capillaire 10µL
- Lingettes d'alcool
- Gants en plastique

Important

- Étudiez le manuel d'utilisation de l'analyseur et les bandelettes de test avant l'utilisation.
- La Mission Plus Hb ne doit être utilisée que par des professionnels de la santé.
- Les bandelettes réactives sont très sensibles. Toujours porter des gants.

Test de sang au bout du doigt: Comment mesurer ?

1. Allumez le lecteur avec . Vérifiez que la Code Chip est insérée. Comparez le chiffre montré à l'écran avec le numéro de code imprimé sur la cartouche.


Important: Après ouverture, les bandelettes réactives ont une date de péremption de 3 mois. Lorsqu'une nouvelle cartouche est ouverte, marquez la date d'expiration sur l'étiquette

Important: Fermez la cartouche immédiatement après avoir retiré une bandelette réactive.

Important: N'utilisez pas les bandelettes réactives après plus de 3 mois d'ouverture.

Astuce: laissez la code puce jusqu'à ce que toutes les bandelettes aient été utilisées. Chaque nouveau paquet de bandelettes réactives contient une nouvelle puce de code.

2. **Insérez la bandelette de test** complètement dans la rainure prévue à cet effet, en l'insérant dans le sens indiqué par les flèches imprimées sur la bandelette. Vérifier que la bandelette de test est insérée jusqu'au bout..

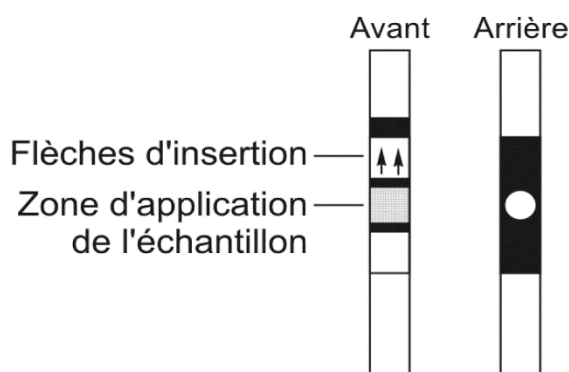

Important: le symbole de la goutte de sang clignote sur l'écran lorsque le lecteur est prêt à appliquer du sang sur la bandelette.

Important: Les bandelettes de test sont très sensible. Ne jamais toucher la partie centrale des bandelettes et de toujours utiliser des gants. Après ouverture, les bandelettes peuvent être conservées pendant 3 mois dans un endroit sec.

3. Prélèvement de sang avec l'autopiqueur ou la lancette de sécurité

Nettoyez le doigt avec une lingette d'alcool et attendez qu'il soit sec et que l'alcool se soit évaporé. Piquez le côté du doigt avec l'autopiqueur. Essayez la première goutte de sang.

Conseil: Si nécessaire appliquez une légère pression pour obtenir une deuxième goutte de sang.

Conseil : Ponction du côté du bout du doigt, qui a moins de terminaisons nerveuses que le bout du doigt lui-même.

4. Remplissez le capillaire avec 10 μ L de sang jusqu'à la ligne de remplissage noir. Orientez le capillaire légèrement incliné vers le bas, avec l'ouverture vers le haut et toucher la gouttelette.

Continuez jusqu'à ce que vous avez recueilli suffisamment de sang.



Attention: Le tube capillaire se remplira automatiquement. Ne jamais presser le tube capillaire.

5. Appliquer l'échantillon de sang sur la région centrale de la zone d'application de la bandelette de test. L'appareil commence la mesure automatiquement et les trois lignes clignotant sur l'écran indiquent que le test est en cours.

important: Éviter à ne pas toucher et endommager les bandelettes

6. Mesurer les résultats

Le résultat sera affiché dans 15 secondes. La valeur Hct est affichée en bas de l'écran. Si la valeur d'Hb est inférieure à 4,5 g / dL ou à 2,8 mmol / L, le lecteur affiche Lo.