



## Mission Plus Hb Hämoglobin Messgerät EINSTELLUNGEN

### Erster Setup

Legen Sie die 4 mitgelieferten Batterien ein. Das Messgerät fordert Sie auf, das aktuelle Datum und die Uhrzeit einzugeben. Verwenden Sie die linke ◀ und rechte ▶ Taste, um das Datum und die Zeit zu ändern, und die Ein/Aus-Taste (⏻), um zu speichern. Nach dem Einstellen von Datum und Zeit schaltet das Messgerät sich aus.

### Einrichtung Messgerät

Sie müssen das Messgerät für den ersten Gebrauch einrichten. Dies muss nur einmal durchgeführt werden.

1. Halten Sie die Aus-Taste ⏻ für vier Sekunden bis das Messgerät <sup>No</sup>SET anzeigt. Drücken Sie die Aus-Taste ⏻ zum Festlegen des Testtages. Drücken Sie einmal (Links) ◀ und wählen Sie Nummer 99 damit der erste Test als Tag 1 startet.  
Drücken Sie die Aus-Taste ⏻ zum Speichern. Das Messgerät zeigt wieder <sup>No</sup>SET an.
2. Drücken Sie zweimal Rechts ▶ bis SET und dann die Aus-Taste ⏻, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
3. Verwenden Sie ◀ und ▶ um ein 12- oder 24-Stunden-Zeitformat auszuwählen.  
Drücken Sie die Austaste ⏻ zum Speichern und Fortfahren.
4. Verwenden Sie ◀ und ▶ um das richtige Jahr einzustellen.  
Drücken Sie die Austaste ⏻ zum Speichern und Fortfahren.
5. Verwenden Sie ◀ und ▶ um den Monat und das Datum einzustellen.  
Drücken Sie die Austaste ⏻ zum Speichern und Fortfahren.
6. Verwenden Sie ◀ und ▶ um die Zeit in Stunden und Minuten einzustellen.  
Drücken Sie die Austaste ⏻ zum Speichern und Fortfahren.
7. Verwenden Sie ◀ und ▶ um RESET des Testnummers ein oder aus zu schalten. Das Testnummer wird jede neue Testtag zurückgesetzt auf 1 wenn dies eingeschaltet ist.  
Drücken Sie die Austaste ⏻ zum Speichern und Fortfahren.
8. Verwenden Sie ◀ und ▶ um zu wechseln zwischen den Einheiten g/dl, g/L of mmol/L.  
Drücken Sie die Austaste ⏻ zum Speichern und Fortfahren.
9. Use ◀ and ▶ um den Ton ein- oder auszuschalten..  
Drücken Sie die Austaste ⏻ zum Speichern und Fortfahren.
10. The display shows <sup>No</sup>SET.  
Drücken Sie einmal die Linketaste ◀ um zu ELT (Exit) zu kommen.  
Drücken Sie die Austaste ⏻ um das Setup zu beenden.

Das Messgerät ist jetzt betriebsbereit.



## Mission Plus Hb Measuring Device TESTING PROTOCOL


Zum Testen braucht man:

- Mission Plus Hb Messgerät
- Stechhilfe mit Lanzetten oder Sicherheitslanzette
- Teststreife Hb Mission Plus Hämoglobin
- Code Chip
- Transfer-Kapillarröhrchen 10µL
- Alcoholtücher
- Plastik Handschuhe

### **Wichtig:**

- Lesen Sie das Handbuch und die Teststreifeneinlagen, bevor Sie das Messgerät verwenden
- Das Mission Plus Hb darf nur von medizinischem Fachpersonal verwendet werden.
- Die Teststreifen sind sehr empfindlich. Tragen Sie immer Handschuhe

### **Bluttest aus der Fingerspitze: Wie wird gemessen?**

1. Schalten Sie das Messgerät an mit der  Taste. Setzen Sie den Code-Chip ein. Setzen Sie den roten Code-Chip in den Schlitz auf der linken Seite des Messgeräts ein. Stellen Sie sicher, dass der Code auf dem Teststreifen-Packung mit dem auf dem Display übereinstimmt.


**Wichtig:** Nach Öffnung haben die Teststreifen ein Verfallsdatum von 3 Monate. Wenn ein neuer Behälter geöffnet wird, markieren Sie das Verfallsdatum auf dem Etikett.

**Wichtig:** Schließen Sie den Kanister sofort nach dem Entfernen eines Teststreifens.

**Wichtig:** Verwenden Sie die Teststreifen nach dem Öffnen nicht länger als 3 Monate.

**Hinweis:** Lassen Sie den Code-Chip, bis alle Streifen verwendet wurden. Jedes neue Packung Teststreifen enthält einem neuen Code-Chip.

2. **Test einfügen:** Schieben Sie den Teststreifen in Pfeilrichtung in das Gerät. Stellen Sie sicher, dass der Teststreifen bis zum Ende eingesetzt ist. Der weiße Teil über der schwarzen Linie ist nicht mehr sichtbar.

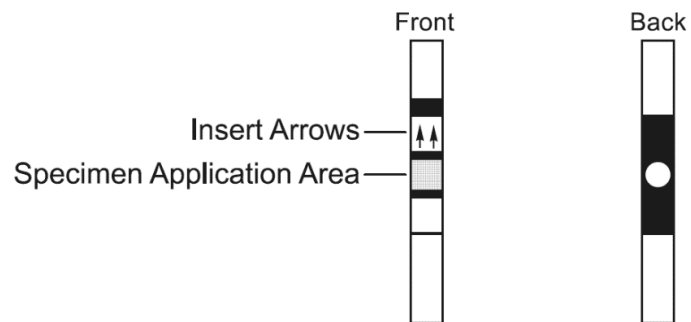

**Hinweis:** Das Blutstropfensymbol blinkt auf der rechten Seite des Bildschirms, um anzuzeigen, dass der Teststreifen und das Messgerät einsatzbereit sind.

**Hinweis:** Die Hb-Teststreifen sind sehr empfindlich. Achten Sie darauf, den mittleren Teil des Streifens nicht zu beschädigen. Immer mit Handschuhen. Nach dem Öffnen können die Streifen bei trockener Lagerung 3 Monate aufbewahrt werden.


### 3. Blutentnahme mit der Stechhilfe oder Sicherheitslanzette

Reinigen Sie den Finger mit einem Alkoholtupfer und warten Sie, bis der Finger trocken ist und der Alkohol verdunstet ist. Stechen Sie die Seite der Fingerspitze mit der Stechhilfe / Sicherheitslanzette. Wischen Sie den ersten Blutstropfen ab.

**Tipp:** Falls nötig, massieren Sie die Hand und den Finger sanft in Richtung der Punktion, um einen Tropfen zu bilden.

**Tipp:** Stechen Sie die Seite der Fingerspitze, die weniger Nervenenden hat als die Fingerspitze.

4. Füllen Sie die Kapillare mit 10  $\mu$ L Blut bis zum schwarzen Linie. Halten Sie das Kapillarröhrchen mit der Öffnung schräg nach oben und berühren Sie vorsichtig mit der Spitze den Blutstropfen.

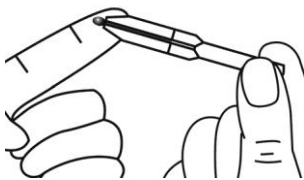

**Hinweis:** Die Pipette niemals beim Aufnehmen des Blutes zusammendrücken. Es füllt sich von selbst.

5. Blutprobe auf den Teststreifen geben: Verwenden Sie das Kapillarrohr, um Blut auf den Teststreifen aufzutragen. Das Messgerät beginnt mit dem Test und zeigt drei blinkende Linien.
- Hinweis:** Mit der Pipette nicht die Teststreifen berühren, um eine Beschädigung zu vermeiden

### 6. Messergebnisse

Das Ergebnis wird in 15 Sekunden angezeigt. Der Hct-Wert wird am unteren Bildschirmrand angezeigt. Wenn der Hb-Wert unter 4,5 g / dl oder 2,8 mmol / l liegt, zeigt das Messgerät Lo an.