




Dubbelzijdige Elektrische Borstkolf

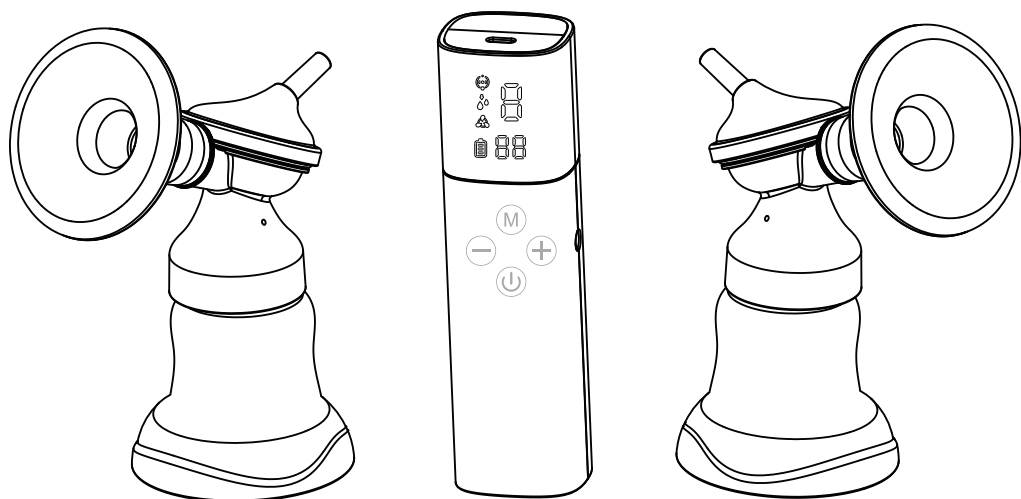

Gebruiksaanwijzing

Gefeliciteerd met de geboorte van uw baby. Uw baby borstvoeden is een waardevolle ervaring. Moedermelk geeft uw baby de meest geschikte voedingsstoffen voor een gezonde ontwikkeling.



Bewaar deze gebruiksaanwijzing

1 Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Bij het gebruik van elektrische producten moeten altijd basisveiligheidsmaatregelen worden genomen vooral wanneer er kinderen aanwezig zijn.

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Onderstaande vetgedrukte woorden verwijzen naar belangrijke veiligheidsinstructies. Het niet in acht nemen van deze instructies kunnen leiden tot letsel of schade aan de borstkolf of uzelf. Wanneer gebruikt in combinatie met de volgende tekst, staan de gedefinieerde iconen voor:



WAARSCHUWING: Kan leiden tot ernstig letsel of de dood.



VOORZICHTIG: Kan leiden tot licht letsel.



OPMERKING: Kan materiële schade veroorzaken.



TIP: Nuttige of belangrijke informatie die geen verband houdt met veiligheid.



WAARSCHUWING: Om brand, elektrocutie of ernstige brandwonden te voorkomen:

- Koppel het elektrische product altijd onmiddellijk na gebruik los, behalve tijdens het opladen.
- Plaats of bewaar het product niet op een plek waar het in een badkuip of gootsteen kan worden getrokken of vallen.
- De borstkolf en accessoires zijn niet hittebestendig: blijf uit de buurt van verwarmde oppervlakken of open vuur.
- Niet gebruiken in de buurt van brandbare materialen.
- De borstkolf mag nooit onbeheerd worden achtergelaten wanneer deze op een voedingsbron is aangesloten.
- Gebruik een elektrisch apparaat nooit als het een beschadigde kabel of stekker heeft, niet goed werkt of als het gevallen of beschadigd is. Als er schade wordt opgemerkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
- Gebruik geen stopcontact dat is blootgesteld aan water of andere vloeistoffen, waaronder:
 - Niet gebruiken tijdens het baden of douchen.
 - Nooit in water of andere vloeistoffen plaatsen of laten vallen.
 - Laat geen water over de borstpomp lopen.
- Als een apparaat is blootgesteld aan water of andere vloeistoffen, raak het apparaat dan niet aan, verwijder de stekker uit het stopcontact, schakel het apparaat uit en neem contact op met de fabrikant.



WAARSCHUWING: Om gezondheidsrisico's te voorkomen en het risico op letsel te verminderen:


- Dit is een product voor één gebruiker. Gebruik door meer dan één persoon kan een gezondheidsrisico veroorzaken en laat de garantie vervallen.
- Dit apparaat kan niet onderhouden of gerepareerd worden. Repareer het niet zelf. Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan.
- Gebruik de borstkolf alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding.
- Inspecteer alle kolfonderdelen op gebreken voor elk gebruik.
- Gebruik geen magnetron of kook geen moedermelk. Microgolven kunnen ernstige brandwonden in de mond van de baby veroorzaken door hotspots die zich tijdens het verwarmen in de melk ontwikkelen.
(Verhitten kan ook de samenstelling van moedermelk veranderen)
- Reinig en ontsmet alle delen die in contact komen met uw borst en moedermelk voorafgaand aan het eerste gebruik.
- Was alle delen die in contact komen met uw borst en moedermelk na elk gebruik.
- Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer de borstkolf of accessoires in de buurt van kinderen worden gebruikt.

2 Onderdelen


Uw borstkolf bevat

- A - Stofkap
- B - Borstschild-24mm
- C - Connector
- D - Diafragma kap
- E - Diafragma
- F - Ventiel
- G - Melkfles
- H - Flesstandaard
- I - AC Adapter
- J - USB Kabel
- K - Kolfmotor
- L - Slang

Power in: 110-240V 50-60Hz
Power Out: 5V 1A
Accu Capaciteit-Type: 3.7V 1400mAh Li-ion

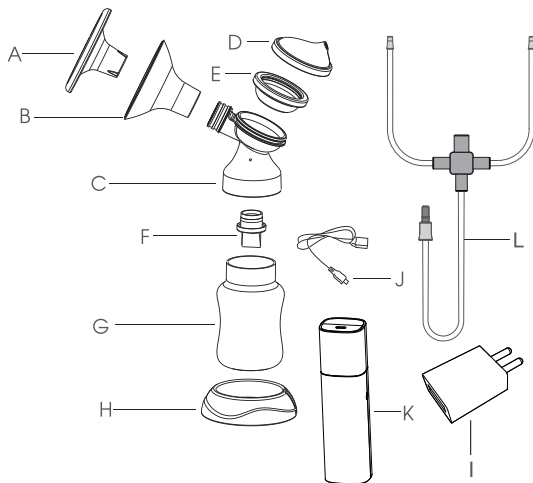

Display iconen:

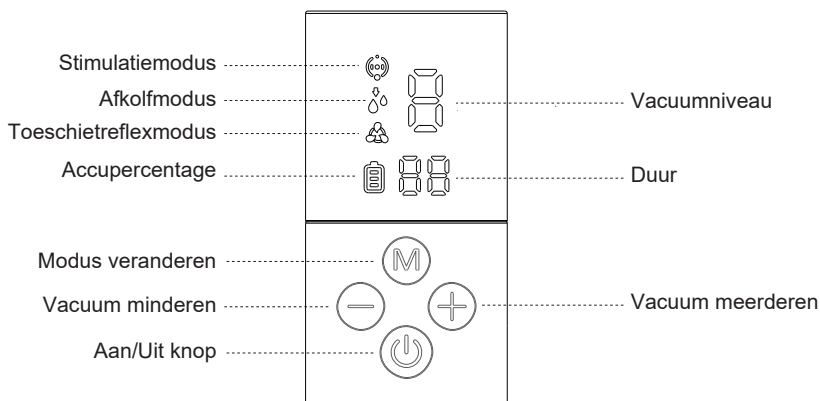


- **Aan / uit-knop:** Druk 2 seconden om de borstkolf te starten of uit te schakelen. Tik op om de modus te veranderen. U kunt kiezen uit 3 modi.
- **Initiële set-up:** de initiële stimulatiemodus verandert automatisch na 2 minuten in de afkolmodusmodus . Digitaal display geheugenfunctie en timer voor eenvoudig volgen en opslaan van kolfinstellingen. Indien ingeschakeld, gebruikt het geheugen van de kolf automatisch de vacuuminstellingen van de vorige kolfsessie. De pomp schakelt automatisch uit na 30 minuten gebruik.
- **Vacuumniveau:** zuigkracht verhogen zuigkracht verminderen
(Stimulatiemodus: L1-L5 Afkolmodus: L1-L9 TSR-modus: L1-L5)
- **Accupcentage:** geeft de resterende batterijduur aan. Laad de borstkolf op wanneer de batterij bijna leeg is.
- **Sessieduur:** geeft de tijdsduur van uw kolfsessie aan. De pomp schakelt automatisch uit na 30 minuten gebruik.
- **Vacuumniveau:** toont het niveau aan dat u momenteel hebt gekozen.

3 Starten

! NB

Voordat u uw borstkolf voor het eerst gebruikt:


1. Sluit de borstkolf aan op een externe stroombron. Laad de accu 2 uur op.
2. Haal alle onderdelen van de afkolfset uit elkaar voordat u ze schoonmaakt.
3. Reinig de pomp - zie paragraaf 5

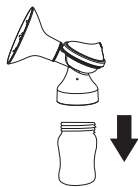

Draai de melkfles los van de connector



Verwijder het ventiel uit de connector

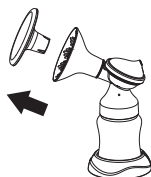

Verwijder de stofkap en haal het borstschild van de connector



Verwijder de diafragmakap en het diafragma van de connector

4 Schoonmaakoverzicht

Wassen en ontsmetten zijn twee verschillende activiteiten. Ze moeten afzonderlijk worden gedaan om u en uw baby te beschermen en de prestaties van uw borstkolf te onderhouden.

Wassen - Onderdelen reinigen door het fysiek verwijderen van vervuiling.

Ontsmetten - Levende organismen, zoals bacteriën of virussen doden die op de afkolfset aanwezig kunnen.

	Borstschild	Borstkolfondere delen	melkfles
Wanneer reinigen			
Voor het 1e gebruik	☑ Wassen ☑ Ontsmetten	☑ Wassen ☑ Ontsmetten	☑ Wassen ☑ Ontsmetten
Na elk gebruik	☑ Wassen	☑ Wassen	☑ Wassen
Eens per dag	☑ Ontsmetten	☑ Ontsmetten	☑ Ontsmetten

! NB

Kolfmotor, laadkabel en AC adapter kunnen niet in water worden gewassen of ontsmet.

5 Schoonmaakinstructies

5A

Benodigheden:

- Mild afwasmiddel
- Schone theedoek
- Schoon drinkwater

Onderdelen te reinigen/ontsmetten

- Borstschild
- Melkfles
- Connector
- Ventiel
- Membraanap
- Membraan
- Stofkap



Let op

- Haal alle onderdelen, die blootgesteld zijn aan moedermelk, na gebruik uit elkaar. Dit helpt om melkresten te verwijderen en voorkomt groei van ziektekiemen.
- Gebruik voor reiniging alleen kraanwater van drinkkwaliteit of flessenwater.
- Gebruik bij het reinigen van de ventielen geen kleine voorwerpen zoals borsteltjes. Wees voorzichtig om het ventiel niet te beschadigen.
- Demonteer, was en spoel alle onderdelen van de afkoffset, die in contact met moedermelk komen, behalve kolfmotor.

1. Wassen

Voor het eerste gebruik en na gebruik



Stap 1 - Spoel alle afzonderlijke delen die in contact komen met moedermelk af in koud water om melkresten te verwijderen.
Stap 2 - Laat 5 minuten weken in warm water met afwasmiddel. Daarna wassen en spoelen.
Stap 3 - Laat onderdelen aan de lucht drogen. Sla droge onderdelen op een kiemvrije plaats wanneer niet in gebruik.

2. Ontsmetten

Vóór het eerste gebruik en eenmaal per dag

Fornuis



Stap 1 - Vul de pan met ruim water zodat alle onderdelen onder water staan. Breng het water aan de kook.
Stap 2 - Leg onderdelen 10 minuten in kokend water voor. Zorg dat de onderdelen niet klem liggen tegen de wand van de pan.
Stap 3 - Laat onderdelen aan de lucht drogen. Sla droge onderdelen op een kiemvrije plaats op wanneer niet in gebruik.

5B

Benodigde onderdelen:

- Kolfmotor


Benodigdheden:

- Mild afwasmiddel
- Schone theedoek



Waarschuwing

- Dompel de kolfmotor niet onder in water.
- Laat geen water over de kolfmotor lopen.
- Gebruik een vochtige, zachte doek met mild afwasmiddel voor het reinigen van het display van de kolfmotor. Andere reinigingsmiddelen of ruwe doeken kunnen de weergaveprestaties van het display beïnvloeden.

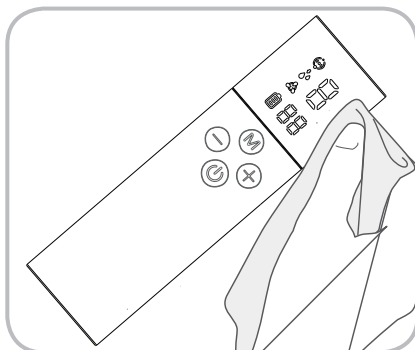

6 Uw kolf samenstellen


Benodigde onderdelen:

- Kolfmotor
- Borstschild
- Melkfles
- Diafragma
- Connector
- Ventiel
- Slang
- Diafragmakap

T Tip

- Controleer vóór gebruik de onderdelen van de afkolfset op slijtage of beschadiging.
- Vervang indien nodig. Inspecteer vóór gebruik altijd alle onderdelen of ze zuiver zijn.
- Om schade aan de borstkolf te voorkomen, moeten alle onderdelen voor gebruik volledig droog zijn.

1

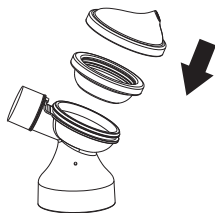


Druk het diafragma en diafragmakap op de connector.

2




Duw het borstschild op de connector.

3

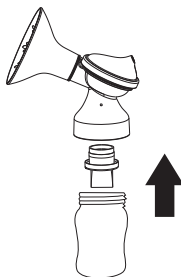


Plaats het ventiel in de connector. Draai de melkfles strak op de connector door rechtsom te draaien.

4

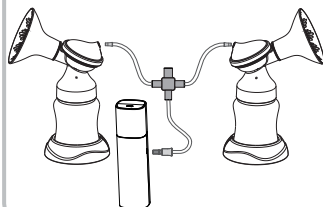


Druk een zijde van de slang in de diafragmakap en de andere zijde in de kolfmotor. Plaats twee slangen als u kiest om dubbelzijdig te kolven. Tik op het scherm om de kolfmotor te starten.

T Tip Sluit de Y slang aan zoals hieronder afgebeeld

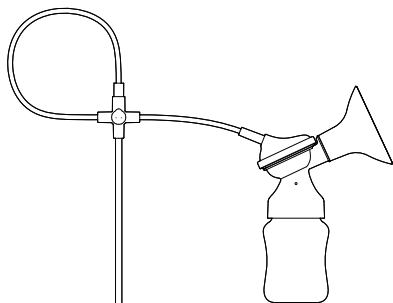


Enkel kolven

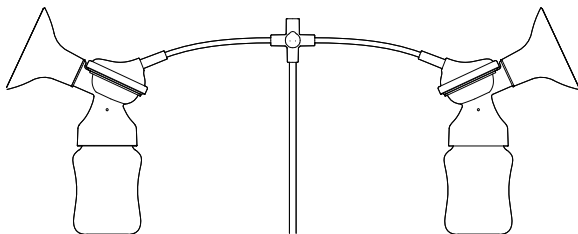

Dubbel kolven

7 Uw borstkolf opladen

7A. Oplaadbare batterij

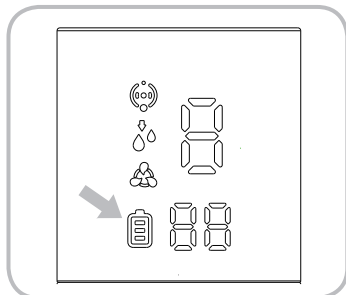

• Laad voor het eerste gebruik de batterij van de borstkolf 2 uur op door de motor via USB op een voedingsbron aan te sluiten. Wanneer het opladen is voltooid, zal het accupictogram  als 'volledig opgeladen' worden weergegeven op het display.

• Ga verder naar Hoofdstuk 8 'Uw borstkolf bedienen' om te beginnen met uw kolfessie.

7B. Accu onderhoud

Uw borstkolf bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij.



Tip

- U kunt, tijdens het opladen van de accu, uw borstkolf gebruiken. De accu wordt opgeladen zodra de borstkolf is aangesloten op een stroombron. Het laadt niet op terwijl de pomp draait.
- Bewaar uw pomp op een koele plaats.
- Laad de accu volledig op voordat u uw kolfmotor voor langere tijd opbergt.
- Laad de accu op voordat deze helemaal leeg is. Dit is beter voor de levensduur van de accu.
- Als uw borstkolf op een warme plek opgeborgen is geweest, werkt deze mogelijk niet goed op accu. Om de normale accufunctie te hervatten, moet u de borstkolf een uur laten afkoelen.

Accu statuscodes:



(knippert)

Batterij bijna leeg, moet worden opgeladen



(knippert)

Laadstatus van de accu: de batterijbalk knippert tijdens het opladen




Volledig opgeladen


7C. Reizen buiten Europese landen

Als u internationaal reist, raden we u aan een universele stekkeradapter aan te schaffen (niet inbegrepen). Neem contact op met het land dat u bezoekt om erachter te komen welk type adapter het zal beste werken. Deze borstkolf heeft een Lithium ION-batterij. Raadpleeg het land dat u bezoekt om erachter te komen of dat er eventuele beperkingen zijn die betrekking hebben op reizen met Lithium ION.


8 Uw borstkolf bedienen

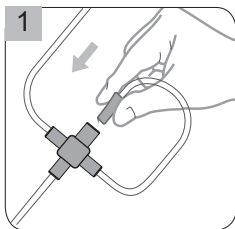


Steek het ongebruikte slanguiteinde in de splitter wanneer u enkelzijdig wilt kolven.

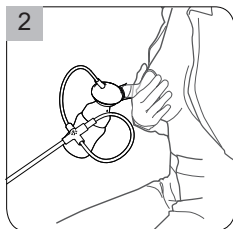

Houd het borstschild en de connector met uw duim en wijsvinger op uw borst. Ondersteun je borst met de palm van je hand.

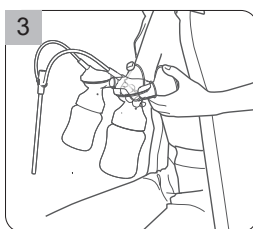

Plaats de borstschilden op uw borsten zodat uw tepels goed in het midden van de tunnels zitten.

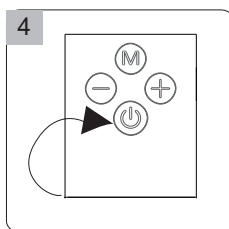

Schakel de borstkolf in door op de aan/uit-knop te tikken en kies de gewenste modus en kolfinstelling.

T Tip

- 1 Uw borstkolf begint in de stimulatiefase . Pas het vacuumniveau aan met behulp van de bedieningselementen om een comfortabel niveau te vinden.
Stimulatiefase : een snel kolfrtme dat het natuurlijke zuigpatroon van de baby nabootst om de melkstroom te stimuleren.
- 2 Na 2 minuten schakelt uw kolfmotor automatisch over naar de afkolfmodus .
Pas het vacuumniveau aan met behulp van de bedieningselementen om het, voor u, maximale comfortabele vacuüm te vinden.
Als uw melk binnen 2 minuten begint te stromen, drukt u op de knop om over te schakelen naar de afkolfmodus.
De afkolfmodus : een langzamer kolfrtme voor een zachte en efficiënte melkopvang nadat de melk is begonnen te stromen.
- 3 Als u eenmaal in de afkolfmodus pompt, verhoogt u het vacuüm totdat het kolven enigszins ongemakkelijk (niet pijnlijk) aanvoelt om vervolgens iets verminderen in vacuum.
- 4 **Let-down Phase** : Aan het einde van een kolfsessie wanneer de borst leeg raakt.

9 Producteigenschappen



Slimme instellingen

5 stimulatie niveaus + 5 TSR niveaus + 9 afkolfniveaus

2-Fase Technologie: stimulatie / expressie.

4 slimme instellingen: stimulatie / expressie / automatisch / geheugen.



Anti-back Flow ontwerp voor hygiëne

Gesloten systeem om te voorkomen dat moedermelk terugloopt naar de motor, om infectie te voorkomen en de melk schoon te houden.



Superzacht silicone borstschild

Het flexibele, ultrazachte silicone borstschild voelt comfortabel aan, vermindert druk en stimuleert de borst toe te schieten voor een optimale melkstroom.



Stil en lichtgewicht

De stille borstkolf maakt discreet kolven overal mogelijk.

De superlichte, draagbare pomp is ontworpen voor moeders die onderweg zijn en meerdere keren per dag kolven.



Gemakkelijk schoon te maken en te monteren

Nieuw ontwikkeld borstschild uit één stuk, waardoor het zeer eenvoudig te monteren, schoon te maken en te gebruiken is.



Slimme touchscreen-technologie

Het digitale display beschikt over een geheugenknop en een timer om de kolf sessie eenvoudig te volgen en instellingen op te slaan.



USB oplaadbare accu

Micro-USB-poort met standaard USB-kabel voor aansluiting op stroombron.

De duurzame lithiumbatterij heeft een batterijlevensduur van 90 minuten.



BPA-vrij materiaal

Kolf en accessoires zijn gemaakt van BPA-vrije materialen. De kolfset is compatibel met de meeste standaard brede nek babyflesjes.

10 Problemen oplossen


De borstkolf gaat niet aan	• Controleer of de borstkolf is aangesloten op een werkend stopcontact. • Als er geen stroom is, licht het display niet op en verschijnt er geen foutmelding.
Als de borstkolf niet werkt na het tikken op de aan / uit-knop	• Zorg ervoor dat u de borstkolf heeft ingeschakeld. • Zorg ervoor dat de borstkolf is aangesloten en / of opgeladen.
Geen of weinig vacuüm	• Controleer of alle aansluitingen van de borstkolf en de afkolfset goed vast zitten. • Demonteer de afkolfset en controleer of alle onderdelen schoon en niet beschadigd zijn. • Monteer de afkolfset zoals aangegeven in Uw borstkolf monteren (hoofdstuk 6). • Zorg er tijdens het kolven voor dat de borstschilden goed aansluiten op de borst (geen kleding ertussen). • Controleer bij enkelzijdig kolven of het ongebruikte slanguiteinde correct in de Y slang is opstoken.
Als melk terugloopt richting de motor	• Schakel de borstkolf uit en haal de stekker uit het stopcontact. • Gebruik een vochtige (niet natte) doek om de borstkolf af te vegen. • Als er melk in de slang zit: Verwijder de slang van de kolfmotor en van de kolfset. Reinig zoals aangegeven in hoofdstuk 5. • Controleer het diafragma op beschadigingen • Zet alle onderdelen weer in elkaar als ze droog zijn.

11 Langdurig opbergen


Uw borstkolf bevat een oplaadbare accu. Om uw borstkolf te beschermen, wanneer die langdurig ongebruikt is, zal het automatisch overschakelen naar de opslagmodus.

Om de opslagmodus te deactiveren, sluit u uw borstkolf volledig aan op een externe voedingsbron en laad u de batterij maximaal 2 uur op.


Denk eraan voordat u uw borstkolf langere tijd opbergt:

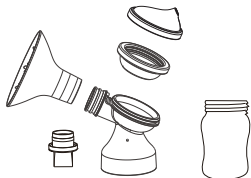

De borstkolfset te reinigen
(Sectie 5)

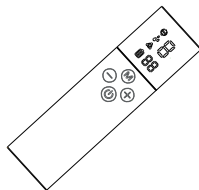

De kolfmotor te reinigen
(Sectie 5)

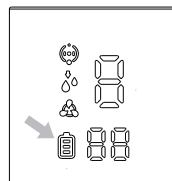

De batterij van de borstkolf
volledig is op te laden

12 Technische specificatie

Stimulatiemodus	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5					
Vacuum (mmHg)	109	121	142	154	164					
Afkolfmodus	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 6	L 7	L 8	L 9	
Vacuum (mmHg)	152	161	191	213	231	253	282	302	322	
TSR modus	L 1		L 2		L 3		L 4		L 5	
Vacuum (mmHg)	Snel 113	Traag 224	Snel 113	Traag 256	Snel 113	Traag 287	Snel 113	Traag 299	Snel 113	Traag 318

13 Garantie

Stichting Moedermelk Netwerk garandeert de oorspronkelijke koper dat dit product vrij is van gebreken in materiaal en de uitvoering daarvan gedurende de periode van 1 jaar voor pompmechanisme en 90 dagen voor anderdelen en toebehoren vanaf de aankoopdatum indien toegepast overeenkomstig het bedoelde gebruik hiervan, zoals in de productinformatie beschreven, en mits alle gebruikers- en onderhoudsinstructies nauwkeurig in acht worden genomen.

MoM&e

Stichting Moedermelk Netwerk

Textielstraat 2A, 5126WG, Dongen The Netherlands

Phone: +31 6 24585483

info@moedermelknetwerk.nl

www.moedermelknetwerk.nl