

Montagevoorstel *

Toiletbeugelset inclusief zitting en deksel

Artikelnummering:

244200 (RVS gepolijst) / 244200C (RVS wit) / 244200SC (staal wit) WITTE ZITTING + DEKSEL
244210 (RVS gepolijst) / 244210C (RVS wit) / 244210SC (staal wit) ZWARTE ZITTING + DEKSEL



Toiletbeugelset

1. Closet goed schoon en droog maken
2. Zwart rubberen ringen plaatsen op de bevestigingsopeningen van het closet
3. Toiletzitting met opzetklem vastzetten met bijgeleverde bevestigingsset;
 - 2 RVS bouten, samen met afdichtingsring, aanbrengen door bevestigingsopeningen in het closet
 - op iedere bout een kunststof volgring plaatsen
 - RVS volgring plaatsen
 - 2 RVS moeren M8 aanbrengen en vastdraaien

ATTENTIE: Overige kunststofbevestiging niet gebruiken!
Zie tekening.

4. Mocht de toiletzitting vooraan geen vloeiende aansluiting hebben op het closet dan kan deze d.m.v. de stelring verticaal veresteld worden totdat deze goed aansluit

Tip:

- Optioneel closetrolhouder 249000(C/SC) zowel links als rechts onder de armleggers aan te brengen zodat er altijd toiletpapier binnen handbereik is!



Reinigingsadvies: Reinigen met zachte schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld groene zeep. Het gebruik van chloorhoudende of schurende middelen wordt afgeraden.

* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik

Uitgave 2017