

Bevor Sie beginnen

Waschen Sie Ihre Hände und trocknen Sie sie sorgfältig ab. Setzen Sie sich vor den Spiegel.

Wichtige Hinweise

- Verwenden Sie die Paste innerhalb von 7 Tagen, damit sie während der Lagerung nicht hart wird.
- Entnehmen Sie die Paste nicht aus dem Abdrucklöffel, da dieser dadurch für das Labor unbrauchbar wird.
- Wenn Sie glauben, dass der Abdruck nicht korrekt ist, machen Sie bitte einige Fotos davon und senden Sie diese per E-Mail an info@SleepPro.eu. Wir werden Ihnen dann so schnell wie möglich mit Ratschlägen antworten.
- Es ist wichtig, dass Sie bei der Rücksendung Ihres Zahnabdrucks ausreichend Porto verwenden, um Verzögerungen bei der Zustellung zu vermeiden.

Nach Fertigstellung

Legen Sie Ihren Zahnabdruck zusammen mit einer Kopie Ihrer Bestelldaten/des Lieferscheins in den Rückumschlag. Wenn Sie Ihre Daten oder Ihren Zahlungsbeleg nicht beilegen, kann das Labor Ihre Bestellung nicht nachverfolgen und nicht das richtige Mundstück für Sie anfertigen.

Über uns

SleepPro ist ein britisches Unternehmen, das führend in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von erschwinglichen Mundvorrichtungen zum Schutz der Zähne und zur Verbesserung des Schlafes ist.

Kundenservice

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu den Anweisungen oder zur Erstellung eines Zahnabdrucks haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

SleepPro Europe


Postfach 995
1180 AZ Amstelveen
Niederlande

+31 20 8225110

info@sleeppro.eu
www.sleeppro.eu
www.snurkgids.nl



Erstellen Sie selbst einen Zahnabdruck Gebrauchsanweisung

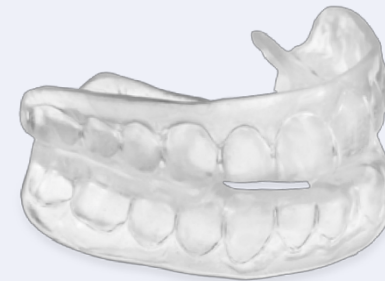

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie beginnen.

Wichtig

Nicht geeignet für Personen mit festsitzenden kieferorthopädischen Apparaturen

Abformlöffel



1 Bereiten Sie den Abdrucklöffel vor

Legen Sie den Abdrucklöffel 20-30 Sekunden lang in eine Tasse oder einen Becher mit frisch



Nehmen Sie den Abdrucklöffel vorsichtig aus dem Wasser, schütteln Sie überschüssiges Wasser ab und **setzen Sie den Abdrucklöffel direkt auf Ihre Zähne**.

Beißen Sie auf den Abdrucklöffel, während Sie Ihre Wangen nach innen saugen und Ihre Zunge gegen den Abdrucklöffel drücken, um ihn **an Ihren Mund anzupassen**.



Wenn Sie mit dem ersten Ergebnis nicht zufrieden sind, **wiederholen Sie Schritt 1**. Der Abdrucklöffel muss nicht perfekt passen, sondern sollte sich leicht in Ihren Mund einfügen.




2 Mischen Sie die Zahnpasta und füllen Sie damit den Abdrucklöffel

Nehmen Sie die weiße und die farbige Paste aus den Plastikbehältern und mischen Sie sie zu einer Farbe. Mischen Sie nicht länger als 45 Sekunden, da die Paste sonst zu schnell aushärtet. Rollen Sie die Paste zu einer Wurst.



3 Füllen Sie den Abdrucklöffel

Legen Sie die „Pastenrolle“ in den Abdrucklöffel. Füllen Sie den Abdrucklöffel bis zum Rand.

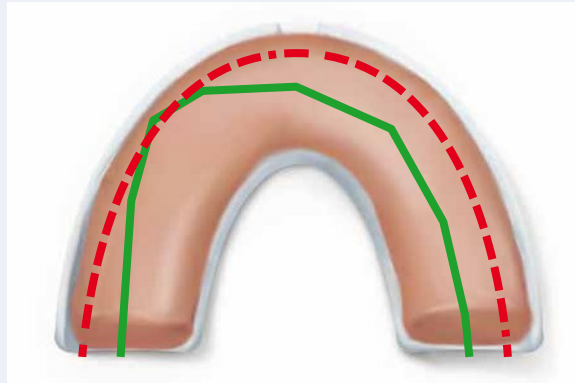

4 Erstellen Sie den Zahnabdruck

Setzen Sie den Abdrucklöffel wieder in Ihren Mund ein und beißen Sie langsam, aber fest auf die Paste, wobei Sie darauf achten sollten, dass Sie in der Mitte der Paste beißen, an der markierten **grünen Linie**, und nicht zu weit vorne an der **roten Linie**.

Lassen Sie die Paste um Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch herum laufen, bis Sie spüren, dass Ihre Zähne Kontakt mit dem harten Abdrucklöffel haben. Sobald Ihre Zähne Kontakt mit dem Abdrucklöffel haben, entspannen Sie sich und halten



halten Sie Ihre Zähne leicht zusammen, um den Abdrucklöffel an seinem Platz zu halten. Versuchen Sie, Ihre Wangen nach innen zu saugen und mit Ihrer Zunge und Ihren Fingern gegen den Abdrucklöffel zu drücken, um die Paste gleichmäßig über Ihr Zahnfleisch zu verteilen und so einen guten Zahnabdruck zu erhalten.

- Während des Aushärtens darf sich der Abdrucklöffel **nicht bewegen**.
- **Bewegen Sie den Abdrucklöffel nicht** in Ihrem Mund und halten Sie Ihren Kopf gerade.
- Atmen Sie **langsam durch die Nase**.
- Halten Sie ein **Handtuch oder Taschentücher** bereit, um Speichel abzuwischen.

5 Entfernen Sie gleichzeitig den Zahnabdruck und den Abdrucklöffel

Nach 3 Minuten können Sie den Zahnabdruck und den Abdrucklöffel **gemeinsam entfernen**.

Wenn Ihr Abdruck ungefähr **so** aussieht↓, können wir ein Qualitätsprodukt herstellen.

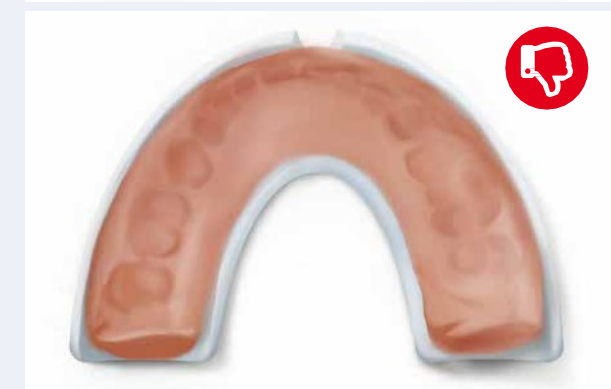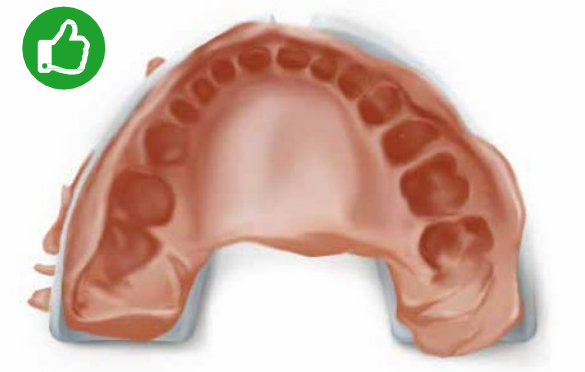

Wenn es **so** aussieht↑, senden Sie uns bitte eine E-Mail, damit **wir Ihnen** Anweisungen zum **Versand einer neuen Paste zusenden können**, damit Sie es erneut versuchen können.

Wenn Sie Zweifel hinsichtlich des Zahnabdrucks haben, senden Sie uns bitte ein Bild Ihres Abdrucks per E-Mail, dann teilen wir Ihnen mit, ob dieser gut genug ist, um ihn einzusenden.

6 Zahnabdruck fertig und in Ordnung. Senden Sie uns Ihren Abdruck gemäß den Anweisungen zu und wir sorgen dafür, dass Sie in Kürze ein wunderschönes Produkt erhalten!