


Instructie gebruik eSwab® .

De eSwab® verpakking bevat het volgende materiaal:

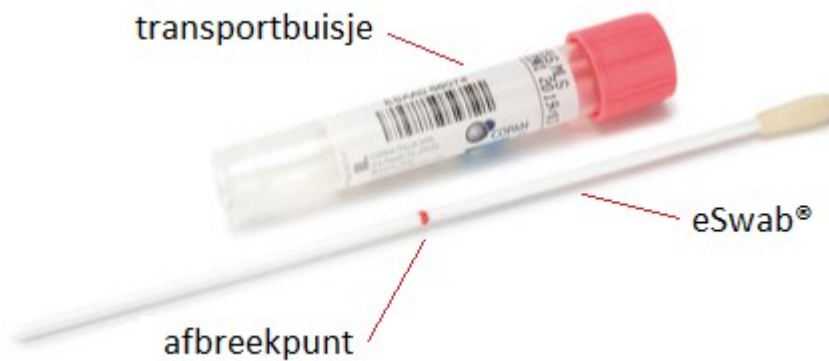

A

Open de verpakking aan de bovenzijde.



B

Haal de eSwab er aan de bovenzijde uit de verpakking. Houd hem boven het rode afbreekpunt vast.



C

Neem het te onderzoeken materiaal af en plaats de eSwab zonder neer te leggen in het transportbuisje.



D

Breek de steel af ter hoogte van de rode afbreekpunt.



E

Sluit het transportbuisje en controleer of deze lekdicht is.



F

Voorzie het transportbuisje van uw barcodestikker en stuur deze in de seal bag op naar het laboratorium.



Let op !

- De eSwab is alleen voor microbiologisch onderzoek.
- De vloeistof in het transportbuisje conserveert de micro-organismen en moet dan ook in het transportbuisje aanwezig blijven, zonder is onderzoek niet mogelijk.