



Deze bijsluiter is bedoeld om u te informeren over de effectiviteit en het gebruik van de wasbare DermaSilk® verbandmiddelen zodat u er maximaal effect van heeft.

WAT IS DERMASILK®?

DermaSilk® verbandmiddelen zijn gemaakt van 100% natuurlijke zijden vezels met daaraan een permanent gebonden antibacterieel molecuul dat daardoor niet in de huid komt en niet los laat met wassen. DermaSilk® verbandmiddelen zijn bedoeld voor huidandoeningen met jeuk, zoals eczeem en blijven werkzaam, ook na het wassen.

Deze unieke combinatie van eigenschappen:

- > Kalmeert en verzacht de gevoelige huid
- > Vermindert de jeuk en ontsteking
- > Reguleert de juiste vochtbalans, temperatuur en zuurgraad van de huid
- > Voorkomt groei van bacteriën en schimmels
- > Bevordert het herstel van de huid.

Dit resulteert in een significante verbetering van de klachten in vergelijking met conventionele katoenen verbanden.

DermaSilk® verbandmiddelen zijn verkrijgbaar voor kinderen en volwassenen.



HOE TE GEBRUIKEN?

DermaSilk® verbandmiddelen draagt gemakkelijk direct op de huid en direct op de zalf. DermaSilk® kan overdag onder de gewone kleding gedragen worden en 's nachts onder de pyjama. Door de warmteregulerende eigenschappen van DermaSilk® voelt DermaSilk® nooit te koud of te warm aan en is daarom uitermate geschikt om het gehele jaar te dragen. DermaSilk® kan worden gebruikt om de symptomen in de acute fase van de ziekte (roodheid) te verminderen, maar ook in de periode erna, om de klachten onder controle te houden en verergering te voorkomen.

U moet gewoon doorgaan met de gebruikelijke zalven en voorgeschreven medicijnen, maar zodra u met DermaSilk® begint zult u merken dat het gebruik hiervan vaak afneemt. Geef de zalven en crèmes de tijd om in de huid te trekken voordat u DermaSilk® aantrekt. Het is belangrijk dat DermaSilk® in contact is met de huid.

KUNNEN DE NADEN DE HUID IRRITEREN?

Nee. In de ontwerpfase is al rekening gehouden met dit aspect.

Bij de verbandpakken tot 3 jaar zitten de naden aan de buitenkant. Bij de grotere maten zitten de naden aan de binnenkant. De naden voelen echter zo zacht aan dat ze de huid niet irriteren. Een DermaSilk® naad is altijd zacht.

DERMASILK® ONDERHOUD

Behandel DermaSilk® verbandmiddelen met zorg en volgens de wasvoorschriften zodat ze langer mee gaan. DermaSilk® verbandmiddelen zijn wasbaar en herbruikbaar. Het zijn Klasse I medische hulpmiddelen en moeten ook als zodanig onderhouden worden.

WASSEN

DermaSilk® verbandmiddelen bij voorkeur wassen op 30-40° C, op de hand met een beetje neutrale shampoo (zonder balsem) of in de wasmachine met een wasmiddel zonder wasverzachter, chloor, bleekmiddel, parfum of enzymen (i.v.m. contact allergie)

– Wasmachine wassen: Gebruik het wol- en/of zijdewas programma voor de fijne was en plaats de verbandmiddelen bij voorkeur in een apart netje. Het wordt aanbevolen om 4/5 eetlepels witte azijn aan het wasmiddel in de lade toe te voegen.

– Met de hand wassen: Na het wassen kunt u de verbandmiddelen nog een half uur in witte azijn laten weken (1 eetlepel op 3 liter water). Goed naspoelen met ruim water.

DROGEN

Zijde heeft dezelfde eigenschappen als menselijk haar en droogt het best op een natuurlijke manier. Centrifugeren mag, maar het is beter om de zijde op te hangen en te laten drogen, of de zijde in een droge handdoek te rollen zodat het daardoor kan drogen. DermaSilk® verbandmiddelen mogen niet in een wasdroger.

HARDNEKKIG VUIL

Leg de zijde in een bak en vul deze met een liter zeer heet water (de hoogste temperatuur die u kunt verkrijgen uit de kraan), zorg ervoor dat de zijde goed is ondergedompeld. Voeg 5 eetlepels (75 ml) zuiveringszout (soda) en 10 eetlepels (150 ml) witte azijn toe. Het vuil wordt verwijderd door de vrijgekomen zuurstof. Laat de kleding weken gedurende 5/6 uur, of de hele nacht, en dan wassen zoals hierboven.

KLEUREN

DermaSilk® verbandmiddelen hebben de natuurlijke kleur van zijde en hebben geen verfproces ondergaan.

VOORKOM VERKLEURING

Was de DermaSilk® verbandmiddelen bij voorkeur apart of met andere witte was. Kledingstukken die kleur afgeven tijdens het wassen kunnen de DermaSilk® verbandmiddelen blijvend verkleuren. DermaSilk® verbandmiddelen krimpen niet maar door het wassen kan de gebreide stof strakker worden zodat het gekrompen lijkt. Als dat het geval is dan kan de zijde met een stoomstrijkijzer (koud) licht in de lengterichting gestreken worden.

DE WASSYMBOLLEN



Het verbandmiddel bij voorkeur wassen op een temperatuur van 30-40 °C



Het verbandmiddel niet bleken



Het verbandmiddel kan niet worden gedroogd in een wasdroger



Het verbandmiddel kan worden gestreken bij een lage temperatuur (maximum 100 °C)



Het verbandmiddel kan chemisch worden gereinigd

Alle DermaSilk® verbandmiddelen zijn gepatenteerd, klasse I medische hulpmiddelen, CE en geproduceerd door Alpretec Srl, Viale Primavera 93, 30027 San Donà di Piave (VE) - Italië.

BAP MEDICAL • Laan van de Maagd 119 • 7324 BT Apeldoorn • the Netherlands
Telefoon 0031 (0)55 355 25 80 • Fax 0031 (0)55 355 91 98

www.bap-medical.com • info@bap-medical.com • www.dermasilk.nl • www.dermasilk.be