



Urifoon

GEBRUIKSAANWIJZING

Apollo 24

Apollo 24

DE BETERE PLASWEKKERTRAINING!

Ook voor overdag!



Urifoon

Mennonietenbuurt 29 • 1427 AX Amstelhoek

Tel: 0297 - 760 001 • Fax: 0297 - 760 002

www.urifoon.nl • info@urifoon.nl

Apollo 24

Gefeliciteerd met de aanschaf van de Apollo 24 dagwekker!



De Apollo 24 heeft vele voordelen: Het is de kleinste en lichtste dagwekker van Nederland en is met de trifunctie zeer discreet. En indien nodig kan ook het instelbare geluid worden gebruikt. Kortom, een zeer compleet product!

Op onze site www.urifoon.nl/apollo24 kunt u een scorekaart downloaden. Zo kunt u het dagelijkse resultaat vermelden en de voortgang inzichtelijk krijgen.

De effectiviteit van de training is het grootst wanneer u de Apollo 24 zoveel als mogelijk na school en in het weekend gebruikt. Vaak merkt u binnen een aantal dagen al vooruitgang en bij veel gebruikers is het probleem binnen 8 weken opgelost. De belangrijke succesvoorwaarden hierbij zijn een goede motivatie van u én uw kind. En stop niet te snel. Blijf de Apollo 24 gebruiken totdat het plasprobleem is verholpen.

Uit angst voor het alarm kunnen kinderen onnodig vaak naar het toilet gaan of juist de plas heel lang ophouden. Beide situaties zijn ongewenst. Het is belangrijk dat uw kind tijdens het gebruik van de Apollo 24 naar het toilet gaat bij het gevoel van een volle blaas.

Tot slot, voordat u het alarm kunt gebruiken, dient u eerst de batterij te plaatsen! Zie "Klaar maken voor gebruik".

Veel succes met de training!

Het Urifoon team.



DE APOLLO 24

De mogelijke onderdelen van de Apollo 24 dagwekker



- De ontvanger
- Schroevendraaier
- CR2450 batterij


Hoe wilt u de Apollo 24 gebruiken:

- 1 In combinatie met uw eigen ondergoed?
Gebruik het snoer met de blauwe clip!
- 2 In combinatie Urifoon sensor ondergoed?
Gebruik het snoer met de 2 drukknopen!
- 3 In combinatie met Dry-Mate inlegger?
Gebruik het snoer met de oranje clip! Vanwege de scherpe tandjes deze niet op uw eigen kleding bevestigen!

Om te proberen zijn 2 stuks Dry-Mate bijgevoegd.

Alle onderdelen zijn los verkrijgbaar op www.urifoon.nl.

BEDIENING APOLLO 24 ONTVANGER

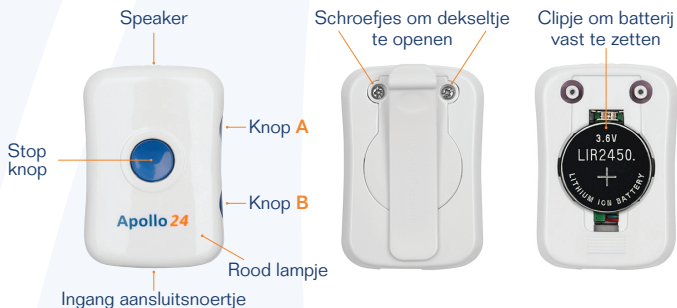

Klaar maken voor gebruik

Open de 2 schroefjes van batterij deksel met de meegeleverde schroevendraaier. Plaats de batterij met de tekst naar boven (zie afbeelding). Plaats de deksel terug en schroef de 2 schroefjes vast. Het rode lampje aan de voorkant geeft eens in de 20-30 seconden een korte flits.

Instellen type alarm signaal

U heeft de keuze uit trillen, geluid of een combinatie van beiden. Standaard staat het alarm op alleen geluid ingeschakeld. Als u dit wil aanpassen houdt u de Stop knop (zie "afbeelding") 3 seconden ingedrukt, totdat het rode lampje aan de voorkant constant gaat branden. Druk op knop A of B aan de zijkant van de dagwekker. Elke keer dat u drukt verandert de instelling van alleen geluid alarm, alleen trillen of de combinatie geluid én trillen. Als het gewenste type alarm is gevonden, drukt u ter bevestiging op de stop knop. Het constante rode lampje gaat weer uit. Let op dat het rode lampje constant moet branden als u het type alarm signaal wilt instellen!

Instellen gewenst volume geluidsignaal

Er zijn 3 standen: zacht, medium en hard. De fabrieksinstelling is medium. Door minimaal 1 seconde op knop A (zie "afbeelding") te

drukken wordt het volume harder. Herhaal dit om steeds een stapje harder te gaan. Met knop B gaat het volume in stapjes omlaag.

Low battery signaal

Als het rode lampje spontaan continu gaat branden is de batterij bijna leeg. Zie "Klaar maken voor gebruik" om batterij te verwisselen.

Gebruik Apollo 24

Bevestig de clip over de kraag van het shirt, stop het in een (broek)zak, hang de Apollo 24 met een keykoord om uw nek



Ingang
bevestiging
veiligheidsspel

of plaats de Apollo 24 met een veiligheidsspel waar u maar wilt. Leidt het snoer onder de kleding door naar de onderbroek.

Als het alarm gaat, kunt u op de Stop knop drukken om het alarm tijdelijk uit te schakelen. Als het aansluitsnoertje nog aan beide uiteinden is bevestigd, zal het alarm na 20 seconden weer af gaan. Net zolang tot het aansluitsnoertje wordt los gemaakt aan 1 van de uiteinden.

De Training

Een training met de dagwekker heeft als doel dat uw kind het gevoel van een (te) volle blaas gaat koppelen aan het tijdig naar de wc gaan. De dagwekker geeft een alarm op het moment dat in de broek wordt geplast. In een reflex stopt uw kind met plassen en gaat naar de wc om de plas af te maken. De correctie met het alarm zorgt ervoor dat met een aantal weken uw kind zelf de aandrang tijdig voelt, de plas ophoudt en tijdig naar de wc gaat.

Voor een effectieve training is het belangrijk dat het plasmoment snel wordt gesignaleerd.

U kunt de Apollo 24 op 3 manieren gebruiken.

1. GEBRUIK APOLLO 24 MET EIGEN ONDERGOED

De blauwe clip wordt aan de buitenkant van de onderbroek bevestigd, daar waar de eerste druppels urine worden verwacht.

Voordelen

+ Geen extra kosten

Aandachtspunt

→ Zeer klein sensorbereik. De stof tussen de clip moet nat worden om het alarm te activeren.



2. GEBRUIK APOLLO 24 MET URIFOON SENSOR ONDERGOED

Het snoer met de 2 drukknoopjes wordt aan de voorkant van het speciale sensorbroekje bevestigd.

Voordelen


+ Groot sensorbereik.

+ Snel alarm bij plasmoment.



3. GEBRUIK APOLLO 24 MET DRY-MATE INLEGGER

De oranje clip wordt aan de bovenkant van de inlegger bevestigd. Het is belangrijk dat de metalen tanden van de clip precies op het begin van de zwarte lijnen worden geplaatst! Met de plakrand wordt de inlegger in de onderbroek vast gelegd.

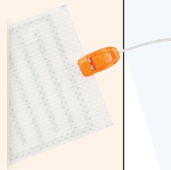

Voordelen

- + Groot sensorbereik dus snel alarm bij plasmoment.
- + Te gebruiken in eigen ondergoed.
- + Lekt niet door, dus bij snelle reactie hoeft ondergoed niet te worden verschoond.

Let op! Vanwege de scherpe tandjes de oranje clip alleen gebruiken i.c.m. de Dry-Mate inlegger! Het zal uw kleding beschadigen indien de oranje clip hier rechtstreeks op wordt bevestigd. Gebruik de blauwe clip, indien u een clip wel rechtstreeks op uw kleding wilt bevestigen!

GARANTIE

Op de Apollo 24 zit een garantietermijn van 12 maanden na aanschaf (factuurdatum). De garantie geldt voor fabricage- of materiaalfouten en voor een defect dat is ontstaan onder normaal gebruik, zulks ter beoordeling van Urifoon BV.

De garantie omvat geen batterijen, batterijdeksel, schroevendraaier en aansluitsnoertjes.

Urifoon is niet voor iets meer of anders aansprakelijk dan voor de hierboven omschreven garantieverplichtingen. Alleen op vertoon van de aankoopbon kan de eerste koper een beroep doen op de hierboven omschreven garantie.

Apollo 24



DE BETERE PLASWEKKERTRAINING!

Ook voor overdag!