

# WASVOORSCHRIFT



Wasmachine 40 graden.



Niet in de droger.



## Na ontvangst adviseren wij u de volgende stappen te doorlopen:

1. Pas eerst het sensorbroekje. Voor een goede werking dient het sensorbroekje goed op het lichaam aan te sluiten.
2. Was het sensorbroekje volgens het wasvoorschrift.
3. Het sensorbroekje is klaar voor gebruik.



## Houd tijdens gebruik aub rekening met de volgende aandachtspunten:

- Gebruik bij voorkeur geen vloeibaar wasmiddel. Het veel of veelvuldig gebruik van wasmiddel en/of wasverzachter heeft negatieve invloed op de gevoeligheid van het sensorbroekje en daarmee het alarmsignaal.
- Droog het sensorbroekje niet op een hete verwarming en wring het niet uit. Ook niet strijken aub.
- Haal het zendertje overdag van het sensorbroekje af. Hierdoor gaat de batterij langer mee en voorkomt u het per ongeluk meewassen van het zendertje.

Op een sensorbroekje zit een garantietermijn van 3 maanden.

Voor vragen zijn wij tijdens kantooruren uiteraard voor u bereikbaar.



Mennonietenbuurt 29  
1427 AX Amstelhoek  
Tel: 0297 - 760 001  
Fax: 0297 - 760 002

WWW.URIFOON.NL • INFO@URIFOON.NL





SCHONE EN VEILIGE WAS?  
VOLG DE REGELS VAN JUF SAS!