

O15 Medicijn- en plashorloge





Opladen

- 1. Haal de klok uit het bandie en de USB poort komt tevoorschijn.
- 2. Steek de USB poort in uw PC of oplader. Een blauw lampje geeft aan dat het horloge oplaadt. Ziet u geen blauw lampje? Draai de USB poort om en steek het opnieuw in de oplader.
- 3. Het volledig opladen duurt +/- 1 uur.
- 4. Een volledig opgeladen batterij gaat tussen de 5 en 15 dagen mee (afhankelijk van gebruik).
- 5. Laad op tijd op om de instellingen te bewaren. Bij een volledig lege batterij verdwijnen de tijd en de countdown. De ingestelde alarmtijden blijven wel bewaard
- 6. Wilt u weten of het trillen bij alarm nog goed werkt? Druk op 1 van de knoppen tijdens het opladen.

Instellen van de tijd

- 1. Klik kort op de bovenste knop als het scherm helemaal zwart is. U ziet nu de tijd.
- 2. Houdt direct daarna de bovenste knop ingedrukt. De uren gaan knipperen. Met de bovenste knop gaan de uren naar voren. Met de ondersten knop naar achteren.
- 3. Juiste uur zichtbaar? Houd de bovenste knop weer ingedrukt totdat de minuten gaan knipperen. Gebruik de knopjes om de minuten aan te passen.
 4. Juiste minuten zichtbaar? Houd bovenste knop ingedrukt totdat u 12 H of 24 H ziet. Gebruik de knopjes om de gewenste 12 of 24 uur notatie in te stellen.
 Bevestie de gewenste instelling door de bovenste knop ingedrukt te houden.

Standaard acties

- 1. Tijd aflezen: Klik 1x op bovenste knop.
- 2. Check niveau batterij: Klik 2x op bovenste knop (100 is vol).
- 3. Alarm instelling: Klik 3x op bovenste knop (ALM).
- 4. Countdown timer instelling: Klik bij zwart scherm 1x op de onderste knop (Cdn).
- 5. Stilte modus: Druk beide knopjes tegelijkertijd in totdat u SIL ziet. Het horloge zal niet meer trillen. Door daarna beide knopjes weer tegelijkertijd in te drukken zet u het trillen weer aan (Vib).

Instellen tot 15 alarmmomenten

Druk de bovenste knop 3x in en u ziet ALM. Door daarna op de bovenste knop te blijven drukken loopt u door de 15 alarm momenten heen (alarmtijd 1, A10F, alarmtijd 2, A20F, alarmtijd 3, A30F, ..., alarmtijd 15, 150F).

Druk meerdere keren kort op de bovenste knop totdat alarmtijd 1 zichtbaar is. Houdt dan direct de bovenste knop ingedrukt totdat de uren knipperen. Gebruik de knopjes om de uren aan te passen. Als de uren juist zijn, houd u de bovenste knop ingedrukt totdat de minuten knipperen. Gebruik de knopjes om de minuten aan te passen. Bevestig door de bovenste knop ingedrukt te bouden.

Nu ziet u A10F staan. Houd de bovenste knop ingedrukt totdat er A10N staat (horloge trilt dan ook). Het alarm uitschakelen kan door bij A10N weer de bovenste knop ingedrukt te houden totdat er A10F staat.

Om meerdere alarmmomenten in te schakelen herhaalt u bovenstaande

door per gewenst alarmmoment eerst de tijd en daarna de status van het alarm (ON/OF) aan te passen tot een maximum van 15 in te stellen alarmmomenten is hereikt

Instellen Countdown

Klik bij een zwart scherm op de onderste knop. Door dit te herhalen ziet u achtereenvolgens Cdn. 1. 5. 10. 15. 20. 30. 45. 60. 90. 120. 180 min.

Houd de onderste knop ingedrukt totdat ON zichtbaar is (horloge trilt dan ook) als de gewenste duur van de timer is bereikt. De countdown is direct gestart.

Druk 1x op de onderste knop om de resterende tijd te zien. Bij 2x drukken op de onderste knop komt de tijd en bij 3x de batterij level.

Uitschakelen countdown

Klik bij een zwart scherm 1x op de onderste knop. De resterende tijd van de timer is zichtbaar. Houdt dan direct de onderste knop ingedrukt totdat OFF zichtbaar is (het horloge trilt dan ook kort).

Belangriik

Tijd en alarmmomenten kunnen alleen worden aangepast als de countdown is uitzeschakeld.

Het alarm kan direct worden uitgeschakeld door 1 van de knopjes in te drukken. Anders stopt het alarm automatisch. Alarm 1 na 60 seconden en de andere alarmen na 30 seconder.

Zolang het alarm is ingeschakeld, zal het elke dag af gaan.

Het horloge is spatwaterdicht (douchen en handen wassen kan, zwemmen niet).

Developed in The Netherlands - Made in China





O15 Erinnerungsuhr





Aufladen

- Nehmen Sie die Uhr vom Armband ab und der USB-Anschluss kommt zum Vorschein.
- Schließen Sie den USB-Anschluss an Ihren PC oder Ihr Ladegerät an. Ein blaues Licht zeigt an, dass die Uhr geladen wird. Wenn Sie kein blaues Licht sehen, drehen Sie den USB-Anschluss um und schließen Sie ihn erneut an das Ladegerät an.
- das Ladegerat an.
- Das vollständige Aufladen dauert +/- 1 Stunde.
 Eine vollständig geladene Batterie hält zwischen 5 und 15 Tagen (je nach Gebrauch).
- 5. Rechtzeitig aufladen ist wichtig, um die Einstellungen zu erhalten. Wenn die Batterie vollständig entladen ist, werden die Uhrzeit und der Countdown nicht mehr angezeigt. Die eingestellten Alarmzeiten bleiben jedoch erhalten
- 6. Möchten Sie wissen ob die Alarmvibration noch richtig funktioniert?

 Drücken Sie während des Ladevorgangs eine der Tasten.

Einstellen der Uhrzeit

- Klicken Sie kurz auf dem oberen Knopf, wenn der Bildschirm vollständig schwarz ist. Sie sehen nun die Uhrzeit.
- 2. Halten Sie unmittelbar danach den obersten Knopf gedrückt. Die Stunden beginnen zu blinken. Mit dem oberen Knopf werden die Stunden vorwärts gezählt. Mit dem unteren Knopf nach hinten.
- 3. Korrekte Uhrzeit sichtbar? Halten Sie den oberen Knopf erneut gedrückt, bis die Minuten zu blinken beginnen. Verwenden Sie die Knöpfe um die Minuten einzustellen.

4. Korrekte Minuten sichtbar? Halten Sie den oberen Knopf gedrückt bis Sie 12 H oder 24 H sehen. Verwenden Sie die Knöpfe um die gewünschte 12- oder 24-Stunden-Notation einzustellen. Bestätigen Sie die gewünschte Einstellung durch langes Drücken des oberen Knopfes.

Standard-Aktionen

- Zeit lesen: Klicken Sie einmal auf dem obersten Knopf
- 2. Batteriestand prüfen: 2x auf dem oberen Knopf klicken (100 ist voll)
- Alarmeinstellung: Klicken Sie 3x auf dem oberen Knopf (ALM).
 Einstellung des Countdown-Zeit: Klicken Sie bei schwarzem Bildschirm
- einmal auf dem unteren Knopf (Cdn).

 5. Stiller Modus: Drücken Sie beide Knöpfe gleichzeitig bis Sie SIL sehen.
 Die Uhr wird nicht mehr vibrieren. Durch erneutes gleichzeitiges Drücken
 beider Knöpfe wird die Vibration wieder eingeschaltet (Vib).

Bis zu 15 Alarme einstellen

Drücken Sie dem oberen Knopf 3x und Sie sehen ALM. Wenn Sie dann dem oberen Knopf weiter drücken, durchlaufen Sie die 15 Alarmzeit punkte (Alarmzeit 1, A10F, Alarmzeit 2, A20F, Alarmzeit 3, A30F, ..., Alarmzeit 15, 150F).

Drücken Sie dem oberen Knopf mehrmals kurz bis die Alarmzeit 1 sichtbar ist. Halten Sie dann sofort den oberen Knopf gedrückt bis die Stunden blinken. Verwenden Sie die Knöpfe um die Stunden einzustellen. Wenn die Stunden richtig eingestellt sind, halten Sie den oberen Knopf gedrückt, bis die Minuten blinken. Verwenden Sie die Knöpfe um die Minuten einzustellen. Bestätigen kann beim oberen Knopf drücken und eedrückt halten.

Jetzt werden Sie A10F sehen. Halten Sie den oberen Knopf gedrückt, bis A10N angezeigt wird (die Uhr vibriert ebenfalls). Sie können den Alarm ausschalten, indem Sie den oberen Knopf bei A10N erneut drücken und gedrückt halten, bis A10F angezeigt wird.

Um mehrere Alarmzeitpunkte zu aktivieren, wiederholen Sie die obigen Schritte, indem Sie zuerst die Zeit für jeden gewünschten Alarmzeitpunkt und dann den Alarmstatus (ON/OF) einstellen. Bis die maximale Anzahl von 15 einstellbaren Alarmzeitpunkten erreicht ist.

Einstellung Countdown

Klicken Sie bei einem schwarzen Bildschirm auf dem unteren Knopf. Wenn Sie dies wiederholen, sehen Sie nacheinander Cdn, 1, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 und 180 Minuten.

Ist die gewünschte Countdown Zeit erreicht? Drücken Sie den unteren Knop und halten Sie ihn gedrückt, bis ON sichtbar ist (die Uhr vibriert ebenfalls). Der Countdown wird sofort gestartet.

Drücken Sie einmal auf dem unteren Knopf um die verbleibende Zeit anzuzeigen. Wenn Sie dem unteren Knopf 2x drücken, wird die Uhrzeit und bei 3x der Batteriestand angezeigt.

Countdown deaktivieren

Klicken Sie bei einem schwarzen Bildschirm einmal auf dem unteren Knopf. Die verbleibende Zeit des Timers ist sichtbar. Drücken Sie dann sofort den unteren

Knopf und halten Sie ihn gedrückt, bis OFF sichtbar ist (die Uhr vibriert auch

Wichtig

Uhrzeit und Alarmzeiten können nur eingestellt werden wenn der Countdown deaktiviert ist.

Der Alarm kann durch Drücken einer der Knöpfe sofort abgeschaltet werden. Sonst wird der Alarm automatisch beendet. Alarm 1 nach 60 Sekunden und die anderen Alarme nach 30 Sekunden.

Solange der Alarm aktiviert ist, wird er jeden Tag ausgelöst.

Die Uhr ist spritzwassergeschützt (Duschen und Händewaschen ist möglich, Schwimmen ist nicht möglich).

Developed in The Netherlands - Made in China

