



Urifoon

GEBRUIKSAANWIJZING



Apollo 24

DE BETERE PLASWEKKERTRAINING!



Urifoon

Mennonietenbuurt 29 • 1427 AX • Amstelhoek

Tel: 0297 - 760 001 • Fax: 0297 - 760 002

www.urifoon.nl • info@urifoon.nl • www.bedplassen.nl

Apollo 24

Gefeliciteerd met de aanschaf van de Apollo 24 dagwekker!



De Apollo 24 heeft vele voordelen: Het is de kleinste en lichtste dagwekker van Nederland en is met de trilfunctie zeer discreet. En indien nodig kan ook het instelbare geluid worden gebruikt. Kortom, een zeer compleet product!

Op onze site www.uriflex.com/apollo24 kunt u een scorekaart downloaden. Zo kunt u het dagelijkse resultaat vermelden en de voortgang inzichtelijk krijgen.

De effectiviteit van de training is het grootst wanneer u de Apollo 24 zoveel als mogelijk na school en in het weekend gebruikt.

Vaak merkt u binnen een aantal dagen al vooruitgang en bij veel gebruikers is het probleem binnen 8 weken opgelost.

De belangrijke succesvoorwaarden hierbij zijn een goede motivatie van u én uw kind en het doorzetten in gebruik.

Uit angst voor het alarm kunnen kinderen onnodig vaak naar het toilet gaan of juist de plas heel lang ophouden. Beide situaties zijn ongewenst. Het is belangrijk dat uw kind tijdens het gebruik van de Apollo 24 naar het toilet gaat bij het gevoel van een volle blaas.

Voordat u het alarm kunt gebruiken, dient u eerst de batterij te plaatsen! Zie "Klaar maken voor gebruik".

Veel succes met de training!

Het Urifoon team.



INHOUD VERPAKKING

De onderdelen van de Apollo 24 dagwekker



- De ontvanger
- Schroevendraaier
- CR2450 batterij
- Handleiding
- Afhankelijk van gekozen model Apollo 24:
Aansluitsnoertje met blauwe clip: Vanwege gladde binnenkant alleen voor gebruik op eigen onderbroek
- Afhankelijk van gekozen model Apollo 24:
Aansluitsnoertje met 2 drukknopen voor bevestiging aan Urifoon sensor onderbroek
- Afhankelijk van gekozen model Apollo 24:
Aansluitsnoertje met scherpe tandjes en oranje clip: Alleen voor gebruik i.c.m. Dry-Mate inlegger. Vanwege de scherpe tandjes niet op eigen kleding bevestigen! Dit kan uw kleding kapot maken!
- 2 Dry-Mate inleggers: 2 stuks om te proberen.
Ze zijn los bij te bestellen via www.uriflex.com/dry-mate

BEDIENING

Klaar maken voor gebruik
Open de 2 schroefjes van batterij deksel met de meegeleverde schroeven-draaier. Plaats de batterij met de tekst naar boven (zie afbeelding). Plaats de deksel terug en schroef de 2 schroefjes vast. Het rode lampje aan de voorkant geeft eens in de 20-30 seconden een korte flits.

Schroefjes om dekseltje te openen



Clipje om batterij vast te zetten



Instellen type alarm signaal

U heeft de keuze uit trillen, geluid of een combinatie van beiden. Standaard staat het alarm op alleen geluid ingeschakeld.

Als u dit wil aanpassen houdt u de Stop knop (zie "Bediening") 3 seconden ingedrukt, totdat het rode lampje aan de voorkant constant gaat branden. Druk op knop A of B aan de zijkant van de dagwekker. Elke keer dat u drukt verandert de instelling van alleen geluid alarm, alleen trillen of de combinatie geluid én trillen.

Als het gewenste type alarm is gevonden, drukt u ter bevestiging op de stop knop. Het constante rode lampje gaat weer uit.

Let op dat het rode lampje constant moet branden als u het type alarm signaal wilt instellen!

Instellen gewenst volume geluidsignaal

Er zijn 3 standen: zacht, medium en hard. De fabrieksinstelling is medium.

Door minimaal 1 seconde op knop A (zie "Bediening") te drukken wordt het volume harder. Herhaal dit om steeds een stapje harder te gaan. Met knop B gaat het volume in stapjes omlaag.

BEDIENING

Low battery signaal

De Apollo 24 werkt op een CR2450 knoopcel batterij. Als het rode lampje spontaan continu gaat branden is de batterij bijna leeg. Zie "Klaar maken voor gebruik" om batterij te verwisselen.

Gebruik Apollo 24

Bevestig de clip over de kraag van het shirt, stop het in een (broek) zak, hang de Apollo



Ingang
bevestiging
veiligheidspeld

24 met een keykoord om uw nek of plaats de Apollo 24 met een veiligheidsspel waar u maar wilt. Leidt het snoer onder de kleding door naar de onderbroek.

Als het alarm gaat, kunt u op de Stop knop drukken om het alarm tijdelijk uit te schakelen. Als het aansluitsnoertje nog aan beide uiteinden is bevestigd, zal het alarm na 20 seconden weer af gaan. Net zolang tot het aansluitsnoertje wordt los gemaakt aan 1 van de uiteinden. U kunt ook direct na het drukken op de Stop knop het aansluitsnoertje aan 1 van de uiteinden los maken om het alarm definitief uit te zetten.

Een training met de dagwekker moet ervoor zorgen dat uw kind het gevoel van een (te) volle blaas gaat koppelen aan het tijdig gaan naar de wc. De dagwekker geeft een alarm op het moment dat in de broek wordt geplast. In een reflex stopt het met plassen en gaat naar de wc om de plas af te maken. De correctie met het alarm zorgt ervoor dat met een aantal weken het zelf de aandrang tijdig voelt, de plas ophoudt en naar de wc gaat, voordat in de onderbroek wordt geplast.

Om de aandrang goed te voelen en daarop te trainen is het voor een effectieve training cruciaal dat het plasmoment snel wordt gesignaleerd. Vooral bij jongens wordt een groot sensorbereik dan ook sterk aangeraden!

GEBRUIK APOLLO 24 MET URIFOON SENSOR ONDERGOED

Het snoer met de 2 drukknoopjes wordt aan de voorkant van het speciale sensorbroekje bevestigd.



Voordelen

- + Groot sensorbereik.
- Snel alarm bij plasmoment

Aandachtspunt

- Na het alarm en plasmoment moet de sensorbroek worden verschoond.

GEBRUIK APOLLO 24 MET DRY-MATE INLEGGER

De oranje clip wordt aan de bovenkant van de inlegger bevestigd. Het is belangrijk dat de metalen tanden van de clip precies op het begin van de zwarte lijnen op de inlegger worden geplaatst! Met de plakrand wordt de inlegger in de onderbroek vast gelegd, zodat de positie tijdens het gebruik goed blijft.



Voordelen

- + Groot sensorbereik
- Snel alarm bij plasmoment
- + Te gebruiken in eigen ondergoed
- + Lekt niet door, dus bij snelle reactie hoeft ondergoed niet te worden verschoond.

Aandachtspunt

- Geen

Let op! Vanwege de scherpe tandjes de oranje clip alleen gebruiken i.c.m. de Dry-Mate inlegger! Het zal uw kleding beschadigen indien de oranje clip hier rechtstreeks op wordt bevestigd. Gebruik de blauwe clip, indien u de clip wel rechtstreeks op uw kleding wilt bevestigen!

Alle onderdelen zijn los verkrijgbaar bij uw verkoopkanaal of op www.urifoon.nl

GARANTIE

Op de Apollo 24 zit een garantietermijn van 12 maanden na aanschaf (factuurdatum). De garantie geldt voor fabricage- of materiaalfouten en voor een defect dat is ontstaan onder normaal gebruik, zulks ter beoordeling van Urifoon BV.

De garantie omvat geen batterijen, batterijdeksel, schroevendraaier en aansluitsnoertjes.

Urifoon is niet voor iets meer of anders aansprakelijk dan voor de hierboven omschreven garantieverplichtingen. Alleen op vertoon van de aankoopbon kan de eerste koper een beroep doen op de hierboven omschreven garantie.

De garantie vervalt indien de Apollo 24 ondeskundig of niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing is gebruikt of reparaties door derden zijn uitgevoerd.

Urifoon behoudt zich het recht voor om specificaties en garantieverplichtingen zonder opgave van reden en aankondiging eenzijdig te wijzigen.



A large, thick pink swoosh that starts from the top left, curves around the top and right, and ends at the bottom right, framing the top half of the page.

Apollo24



DE BETERE PLASWEKKERTRAINING!

Ook voor overdag!