

Seatar



WheelAble

douche-toilet-vouwrolstoel



Gebruikershandleiding

V3.0 NL

ALGEMENE INFORMATIE.....	3
Inleiding.....	3
Levering.....	3
Gebruik.....	3
Levensduur.....	3
Garantie.....	3
(KLACHTEN)SERVICE.....	4
VEILIGHEID.....	4
Gebruik.....	4
Waarschuwingen.....	4
<i>Slipgevaar.....</i>	<i>4</i>
<i>Kantelgevaar.....</i>	<i>4</i>
<i>Breukgevaar.....</i>	<i>5</i>
<i>Valgevaar.....</i>	<i>5</i>
<i>Knelgevaar.....</i>	<i>5</i>
Symbolen.....	6
PRODUCTSPECIFICATIES.....	7
Afmetingen	7
Technische specificaties.....	7
UITKLAPPEN.....	9
INKLAPPEN.....	14
ACCESSOIRES.....	18
Toiletemmer.....	18
Demontage toiletemmer.....	19
Afdekzitting.....	20
Opbergkoffer.....	21
MEERROLLEN.....	22
ONDERHOUD.....	23
GARANTIE.....	23
VRAGENLIJST.....	24



[Video: Ontdek de WHEELABLE douche-toilet-vouwrolstoel](#)

[Video: Op reis met de WHEELABLE douche-toilet-vouwrolstoel](#)

Let op: Lees voor het eerste gebruik van uw WheelAble douche-toilet-rolstoel deze handleiding goed door!

ALGEMENE INFORMATIE

INLEIDING

In deze handleiding vindt u informatie en advies over het gebruik en onderhoud van uw douche-toilet-rolstoel.

LEVERING

Het product is in de fabriek zorgvuldig gecontroleerd op gebreken en volledigheid. Wij adviseren u bij ontvangst van de WheelAble het product nogmaals te checken op eventuele incompleetheid of transportschade.

GEBRUIK

De indoor WheelAble dient uitsluitend gebruikt te worden bij het toiletteren, douchen en baden of het verplaatsen binnenshuis. De WheelAble is niet geschikt als zitplaats in een taxibusje en niet ontworpen om lang op te zitten.

Let op: Berg uw rolstoel op in een ruimte met een lage luchtvochtigheid!

Omgevingstemperatuur: 0 – 40°C

Relatieve luchtvochtigheid: 30% - 70%

LEVENSDUUR

De verwachte levensduur van de douche-toilet-rolstoel is maximaal vier jaar bij normaal gebruik en goed onderhoud.

GARANTIE

Op uw nieuwe WheelAble rolstoel geldt een garantieperiode van twee jaar.

Buiten de garantie vallen gebreken ontstaan door: niet in acht nemen van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften, abnormaal/niet-gangbaar gebruik, slijtage (stoffering, rubberen onderdelen, verkleuring of krassen zijn uitgesloten), onachtzaamheid, overbelasting, ongeval door derden, toegepaste, niet originele onderdelen en gebreken waarvan de oorzaak is gelegen buiten het product (zoals het laten vallen van het product of brandschade).

Met deze garantie vervalt elke andere garantie; in de wet bepaald, of mondeling medegedeeld, behoudens dat wat door Seatara schriftelijk wordt gegarandeerd.

Garanties gelden uitsluitend binnen de EU.

(KLACHTEN)SERVICE

Om u bij een nalevering van het juiste reserveonderdeel te voorzien en een snelle verwerking van klachten te kunnen garanderen, dient u altijd de productnaam, het serienummer (SN) en het bouwjaar te vermelden. U vindt deze informatie op het naamplaatje van de rolstoel.

VEILIGHEID

Bij gebruik van de douche-toilet-rolstoel dienen de volgende veiligheidsvoorschriften te worden nageleefd:

GEBRUIK

- De indoor WheelAble dient uitsluitend gebruikt te worden bij het toiletteren, douchen en baden of het verplaatsen binnenshuis.
- De WheelAble is niet ontworpen voor dagelijks gebruik of om lang op te zitten.
- De douche-toilet-rolstoel is alleen bedoeld voor mensen die medisch of lichamelijk een WheelAble nodig hebben.
- Zonder fysieke controle mag de WheelAble alleen onder toezicht worden gebruikt.

WAARSCHUWINGEN

SLIPGEVAAR

- Controleer voor gebruik of de gepolsterde zitting goed vastzit.
- Vergrendel de achterwielen bij gebruik om te voorkomen dat de rolstoel weggrolt.
- De gebruiker dient niet op de voorkant van de zitting te gaan zitten, maar juist helemaal achterin de rolstoel.
- Zorg dat de voetsteun helemaal tot 180 graden is uitgeklapt.

KANTELGEVAAR

- Zet de armleuningen in positie bij het zitten en verrijden van de rolstoel.
- Stoot niet tegen de deurposten.
- Gebruik de rolstoel niet op ongelijke en gladde oppervlakken.
- Gebruik de rolstoel alleen binnenshuis, op solide en vlakke ondergrond.
- Kantel de WheelAble niet naar achteren.

BREUKGEVAAR

- Probeer de rolstoel niet te dragen of op te tillen als er iemand in zit.
- De rolstoel is alleen geschikt voor het verplaatsen van personen. Let op: het maximum toelaatbare lichaamsgewicht is 130 kilo!
- De WheelAble is niet meer geschikt voor gebruik* indien deze op een of andere manier is beschadigd (scheuren of breuk).
- Als de WheelAble significant is vervormd, dient u de rolstoel niet meer te gebruiken*.
- De rolstoel is niet geschikt als zitplaats in een taxibusje.

** Laat de productveiligheid beoordelen door uw winkelier.*


VALGEVAAR

- Afhankelijk van de gezondheidstoestand van de gebruiker, dient een gekwalificeerde zorgverlener het zitten, opstaan en verplaatsen te begeleiden.
- Het verplaatsen van de rolstoel op een schuin oppervlak mag alleen met assistentie worden uitgevoerd (Maximale hellingshoek: 10% - zijwaarts: 5%).
- Gebruik de rolstoel niet op de trap.

KNELGEVAAR


- Vermijd bewegende en scharnierende delen om beknelde lichaamsdelen of voorwerpen te voorkomen.
- Zorg ervoor dat uw voeten niet onder de wielen kunnen komen.

SYMBOLLEN

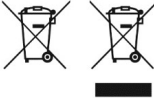	"Serienummer". Dit symbool wordt getoond bij het serienummer van de fabrikant.
	"Fabrikant". Bij dit symbool kunt u de naam en het adres van de fabrikant vinden.
	"Let op!" Raadpleeg de bijbehorende documenten of de gebruikershandleiding.
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.
	Het gewicht van de gebruiker mag niet meer bedragen dan 130 kilo.
	Bij dit symbool vindt u de geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap.
	Dit symbool is een verplichte markering om aan te geven dat het product voldoet aan de essentiële eisen inzake gezondheid en veiligheid, die zijn vastgelegd in Europese richtlijnen.
	De rolstoel kan niet met het normale huisvuil worden afgedankt. Informeer bij de lokale overheid naar de van toepassing zijnde voorschriften rondom het wegdoen van dit product.
	Blijf met het product uit de buurt van zonlicht.
	De verpakking van het product kan worden gerecycled.

PRODUCTSPECIFICATIES

AFMETINGEN

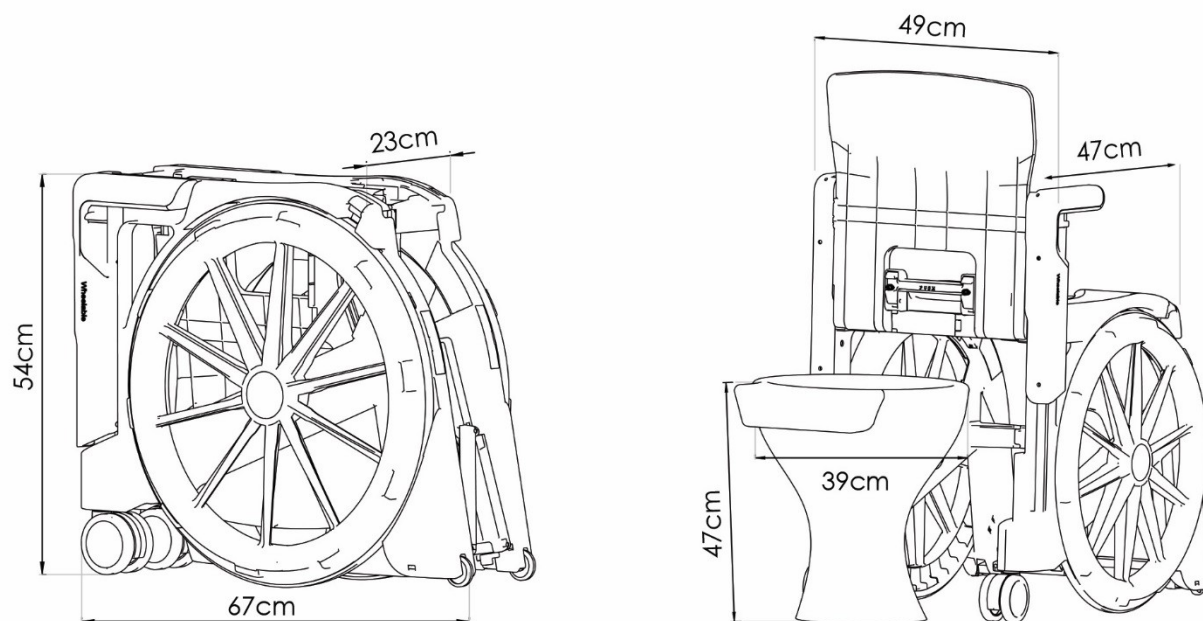


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Gebruik	Binnenshuis op vlakke ondergronden
Temperatuur	0°C tot 40°C
Luchtvochtigheid	30% tot 70%
Formaat	67 x 49 x 92 cm (lxbxh)
Formaat ingeklapt	67 x 23 x 54 cm (lxbxh)
Formaat doos	74 x 30 x 62 cm (lxbxh)
Gewicht doos	15 kg
Gewicht	11,8 kg (excl. gepolsterde toiletzitting: 1,1 kg)
Max. gewicht rolstoelgebruiker	130 kg
Zitbreedte	39 cm
Zitdiepte	44 cm
Zithoogte	53 cm
Rughoogte	73 cm
Draaicirkel (straal)	0 cm
Max. hellingshoek	10% (zijwaarts: 5%)
Max. toiletbreedte	39 cm
Max. toilet diepte	47 cm
Max. toilethoogte	47 cm
Voldoet aan	ISO 13458
Keurmerk	CE / FDA
Patent	EU: 2459437 / US: 9,259,370 B2

Wij behouden ons het recht voor om de ontwikkelingen voort te zetten en technische verbeteringen te maken met betrekking tot het ontwerp dat in deze gebruiksaanwijzing wordt weergegeven.


Exploded view

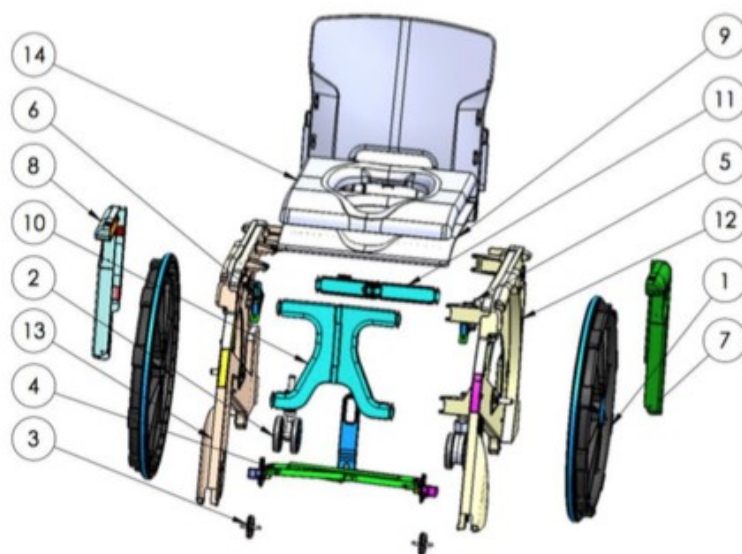


Nummer	Artikelnummer	Omschrijving	Hoeveelheid
1	MR3001-60 Rev-A0	Grote wielen	2
2	MR3001-61 Rev-A0	Wieltjes achter	2
3	MR3001-62 Rev-A0	Wieltjes voor	2
4	MR3001-63 Rev-A0	Voetplaat	1
5	MR3001-64 Rev-A0	Rem links	1
6	MR3001-65 Rev-A0	Rem rechts	1
7	MR3001-67 Rev-A0	Armleuning links	1
8	MR3001-68 Rev-A0	Armleuning rechts	1
9	MR3001-69 Rev-A0	Zitting	1
10	MR3001-70 Rev-A0	Vouwframe voor	1
11	MR3001-71 Rev-A0	Vouwframe achter	1
12	MR3001-72 Rev-A0	Zijframe links	1
13	MR3001-73 Rev-A0	Zijframe rechts	1
14	MR3001-51 Rev-A0	Gepolsterde toiletzitting	1

UITKLAPPEN


1

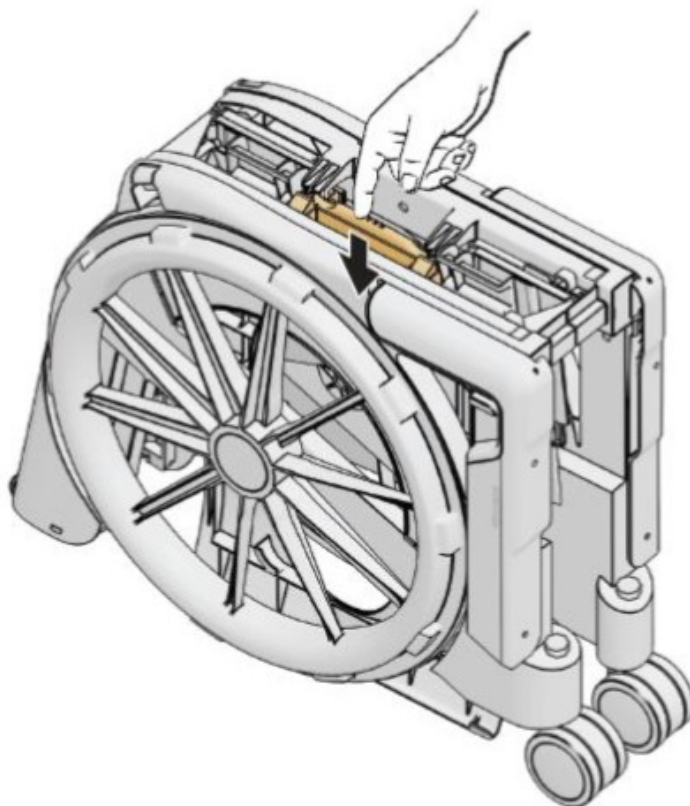


2

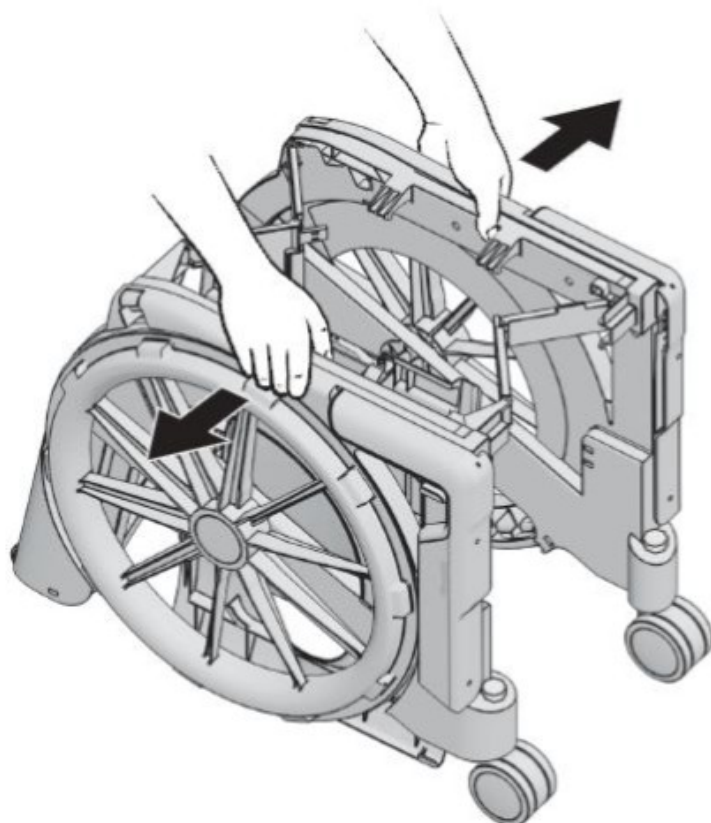


3

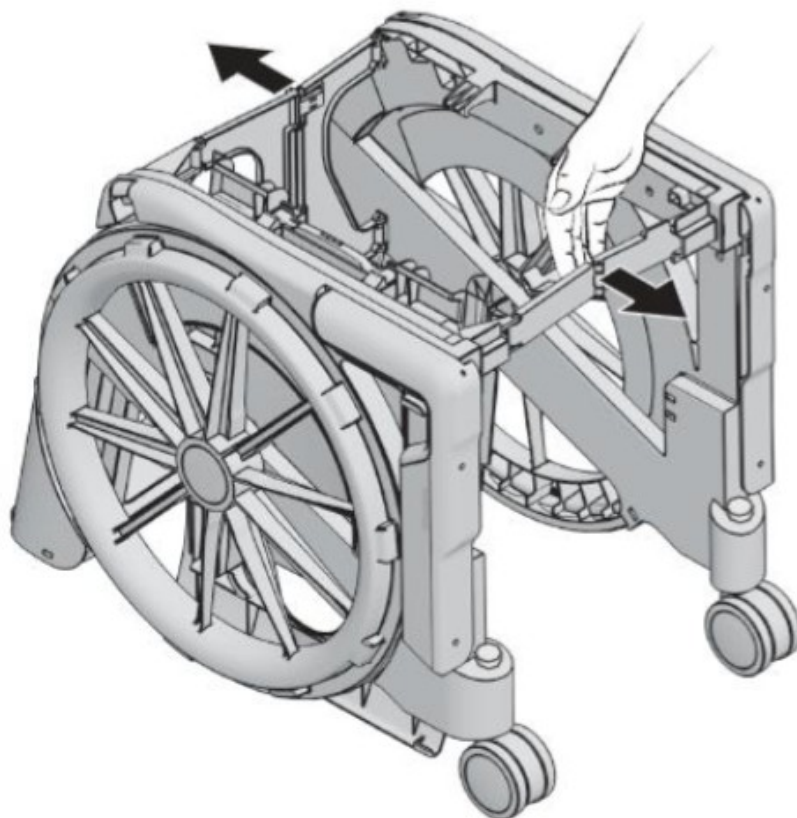


4

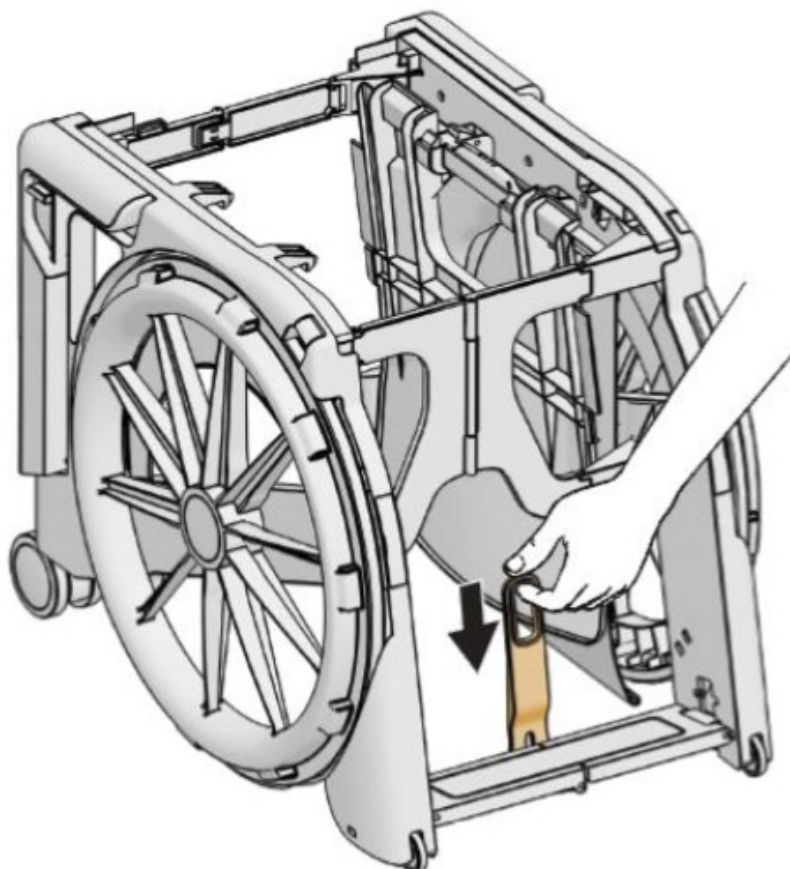


5

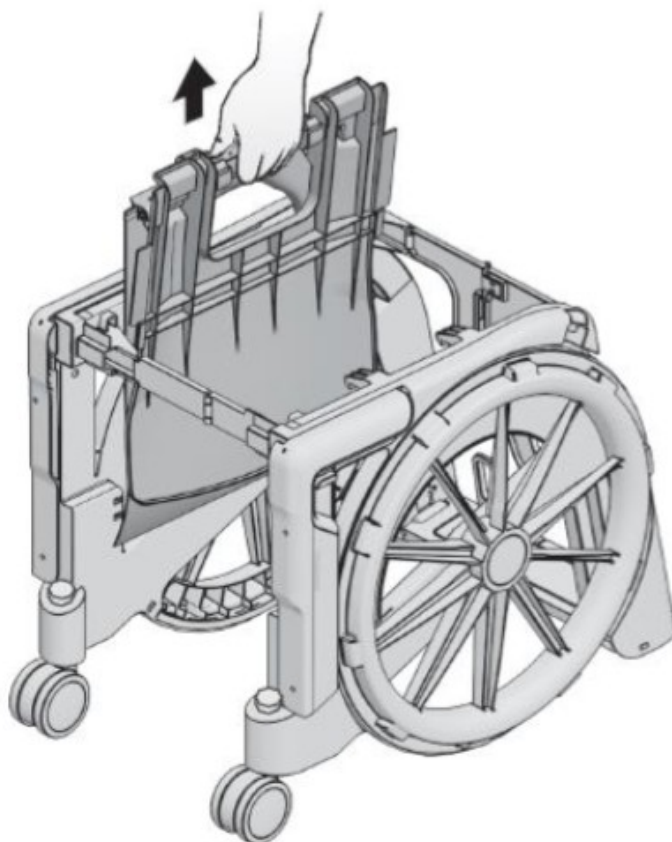


6

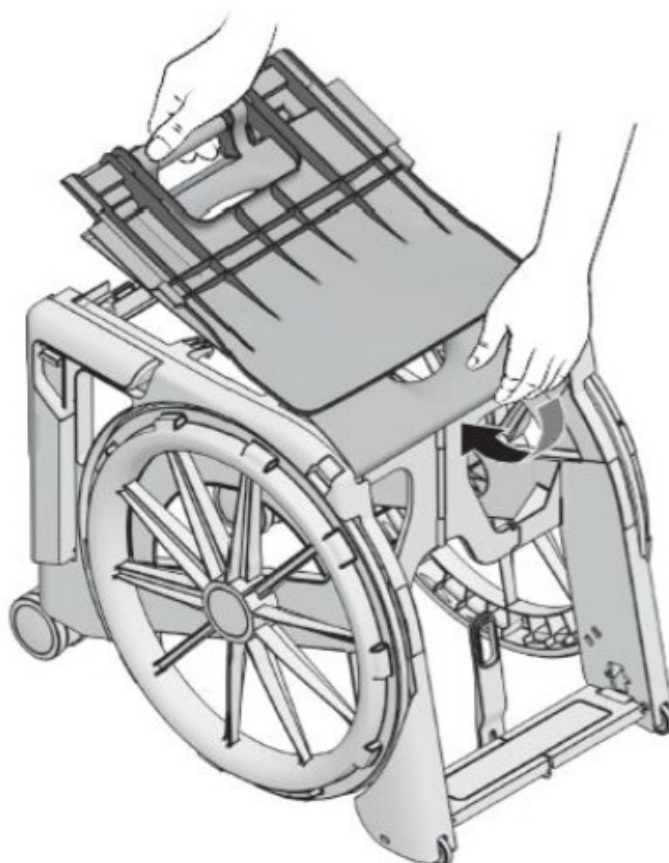


7

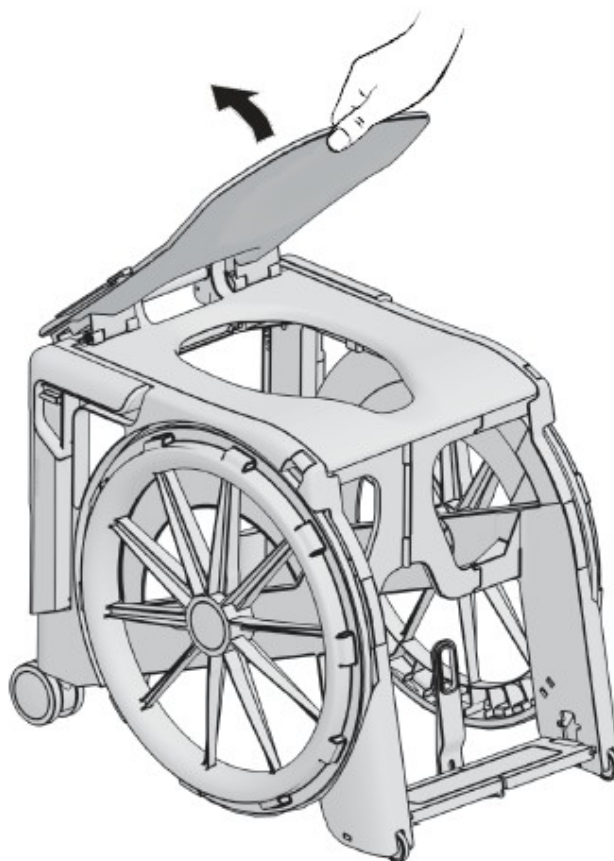

8

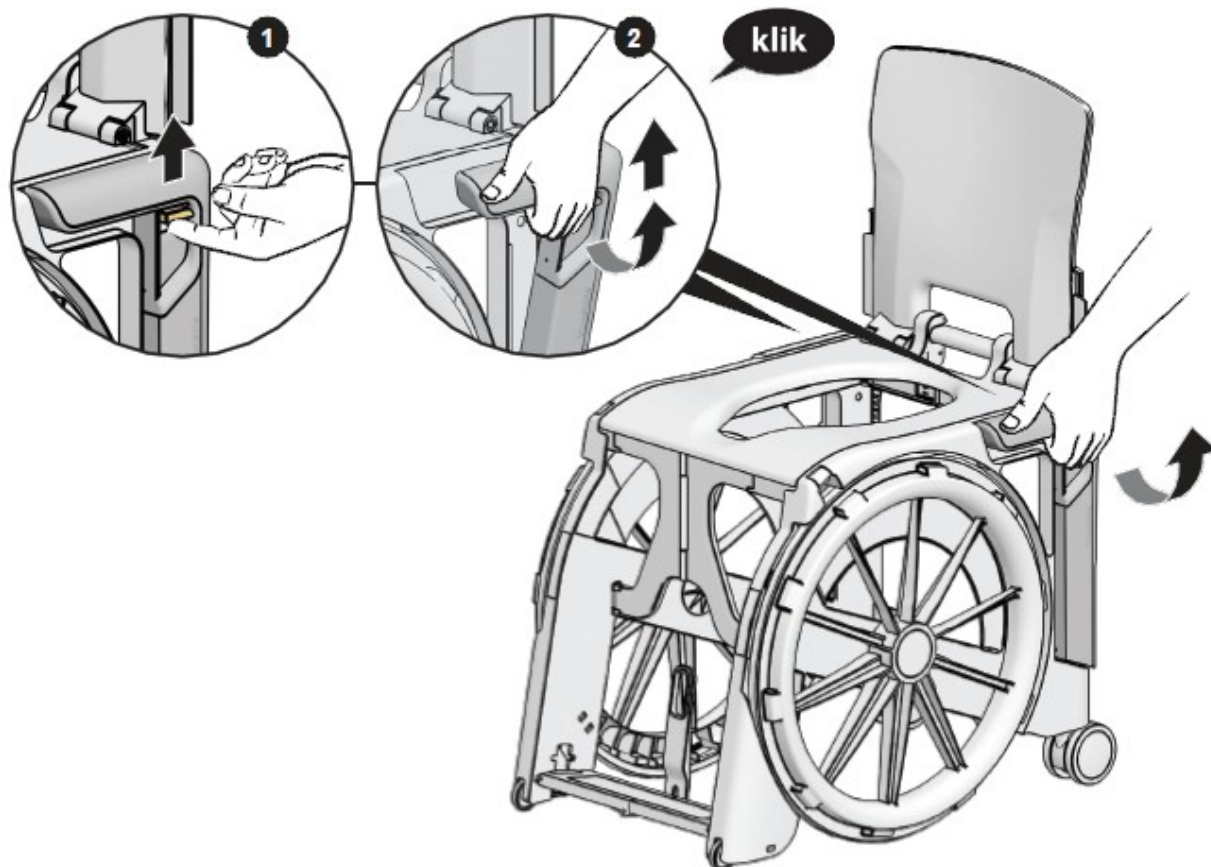

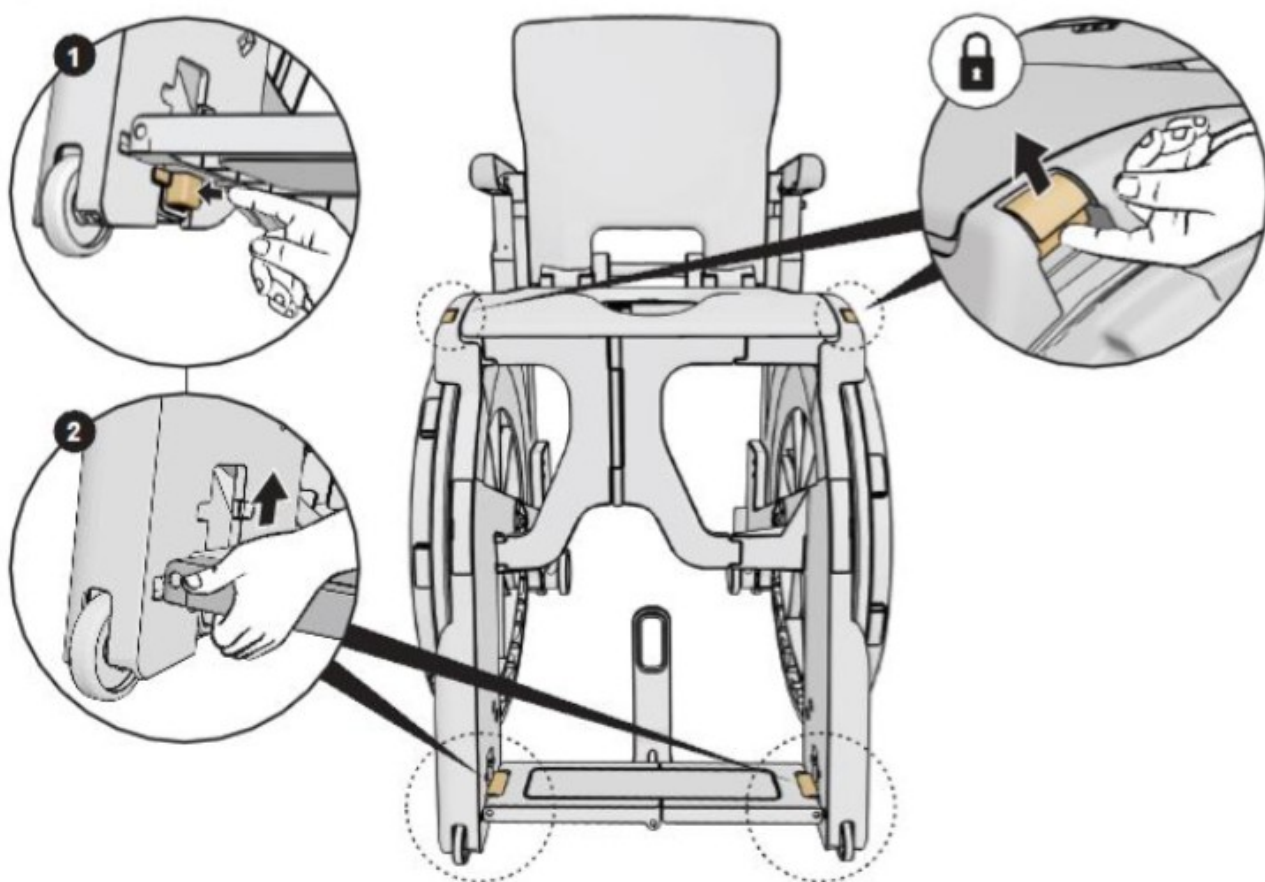

Zie het vouwproces ook op video:




[Video: Ontdek de WHEELABLE douche-toilet-vouwrolstoel](#)


[Video: Op reis met de WHEELABLE douche-toilet-vouwrolstoel](#)

INKLAPPEN


1

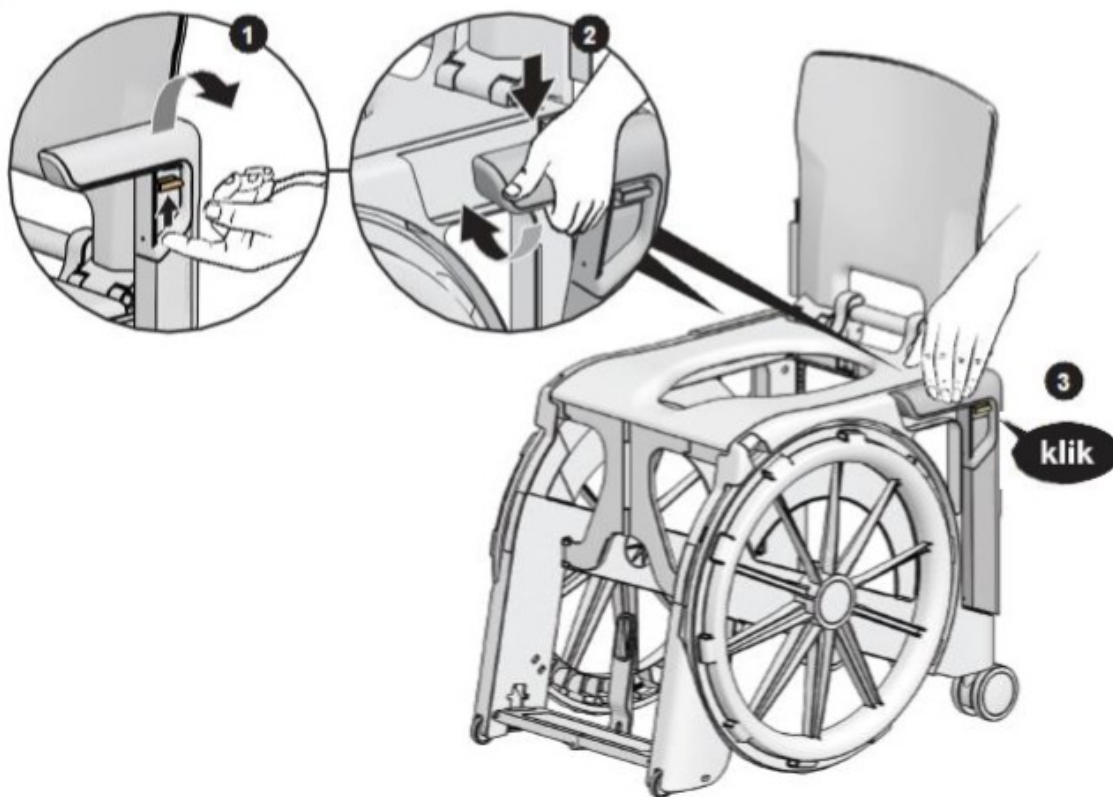


2

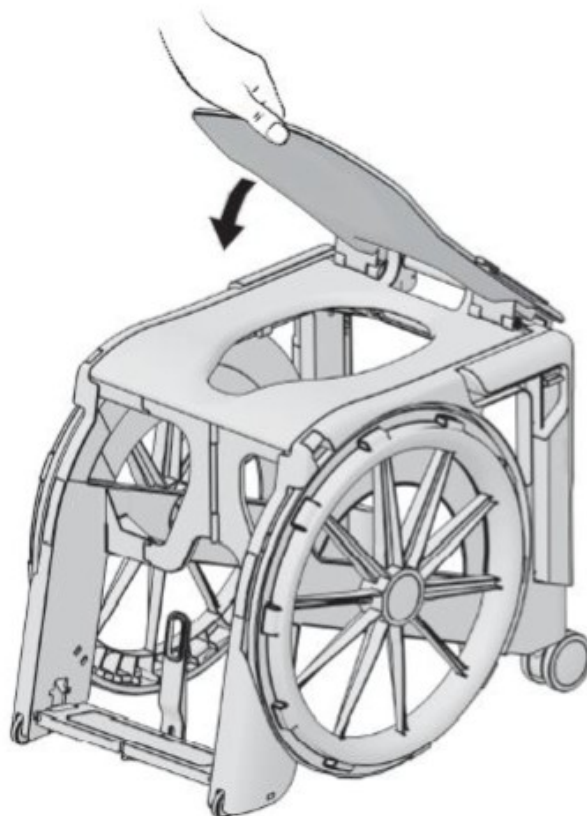


3

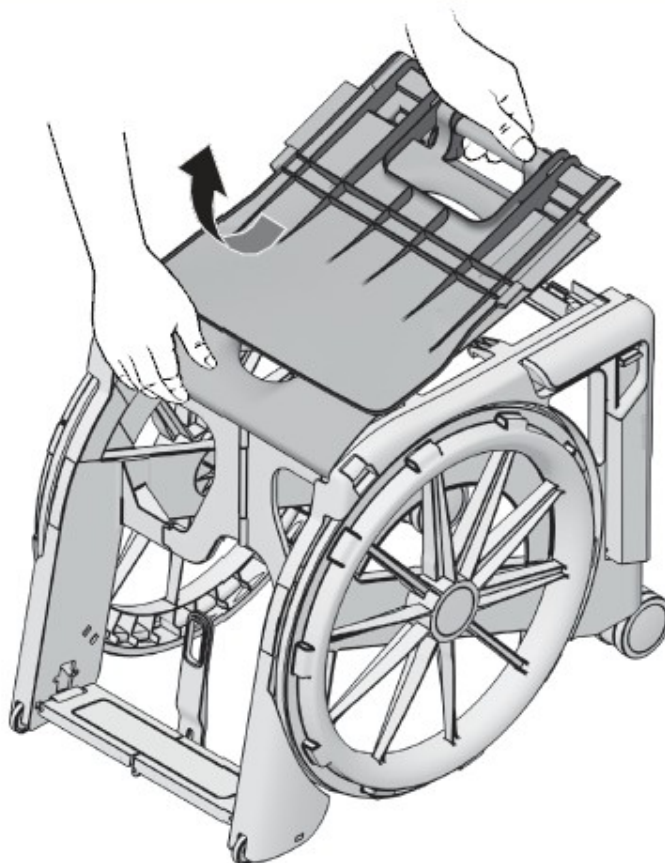


4

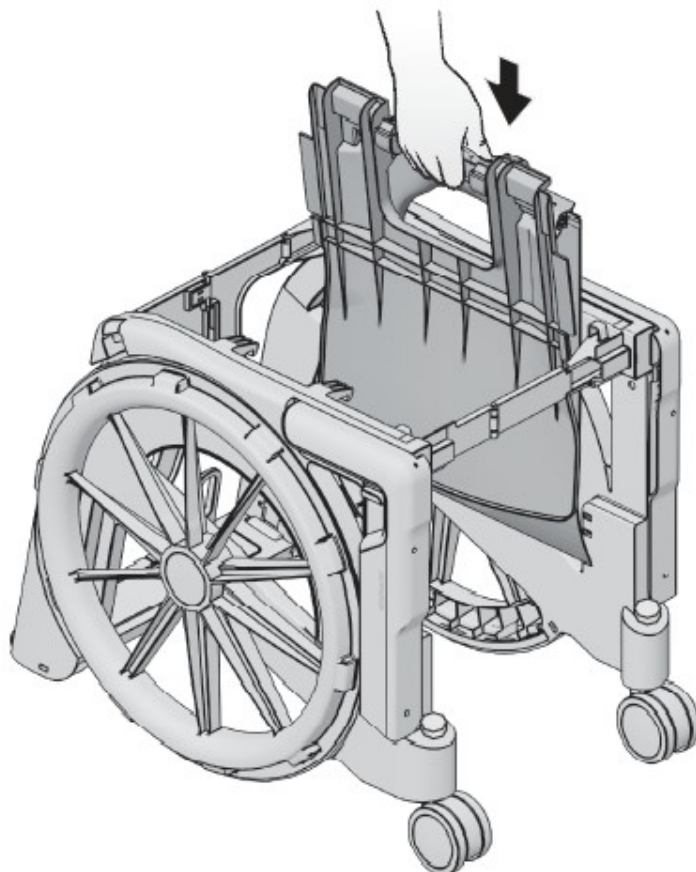


5

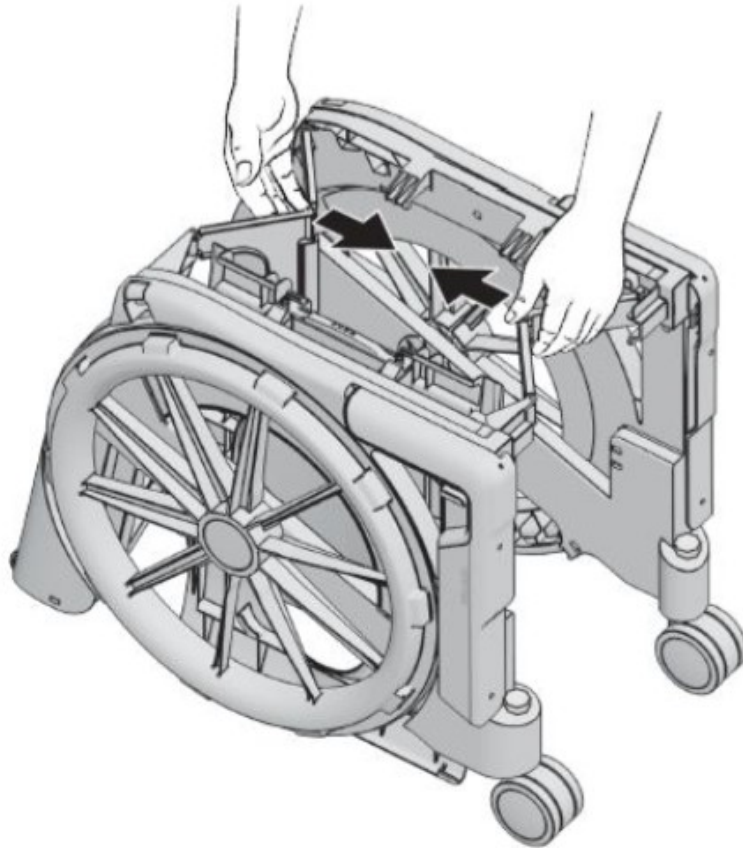


6

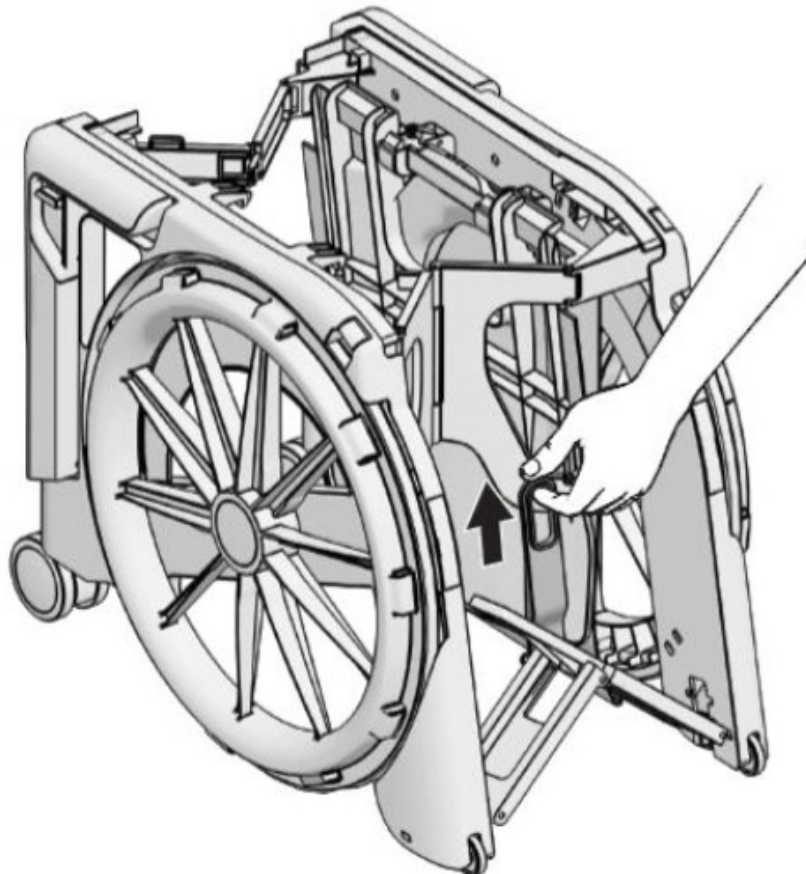

7

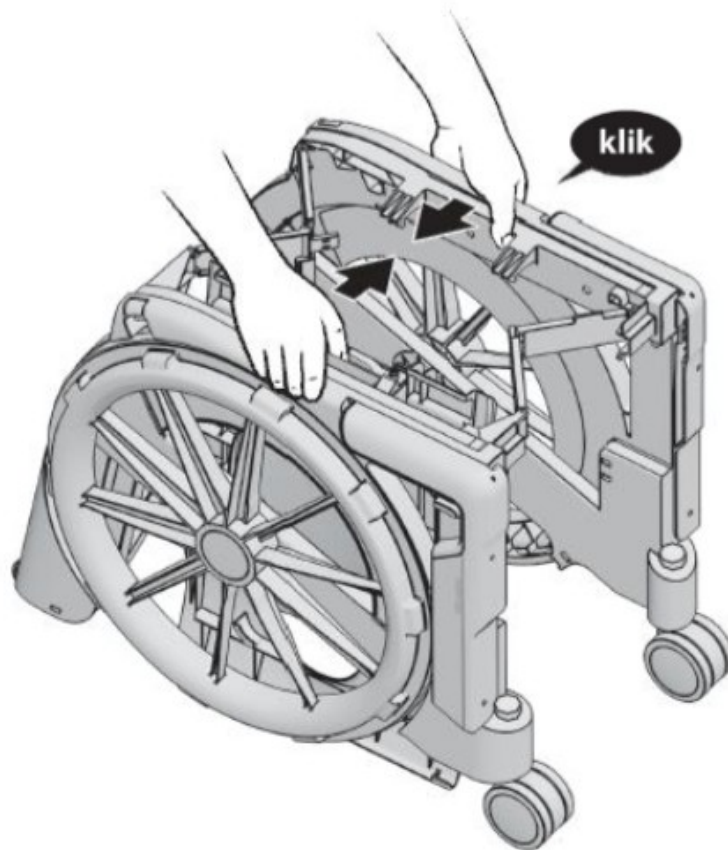


8

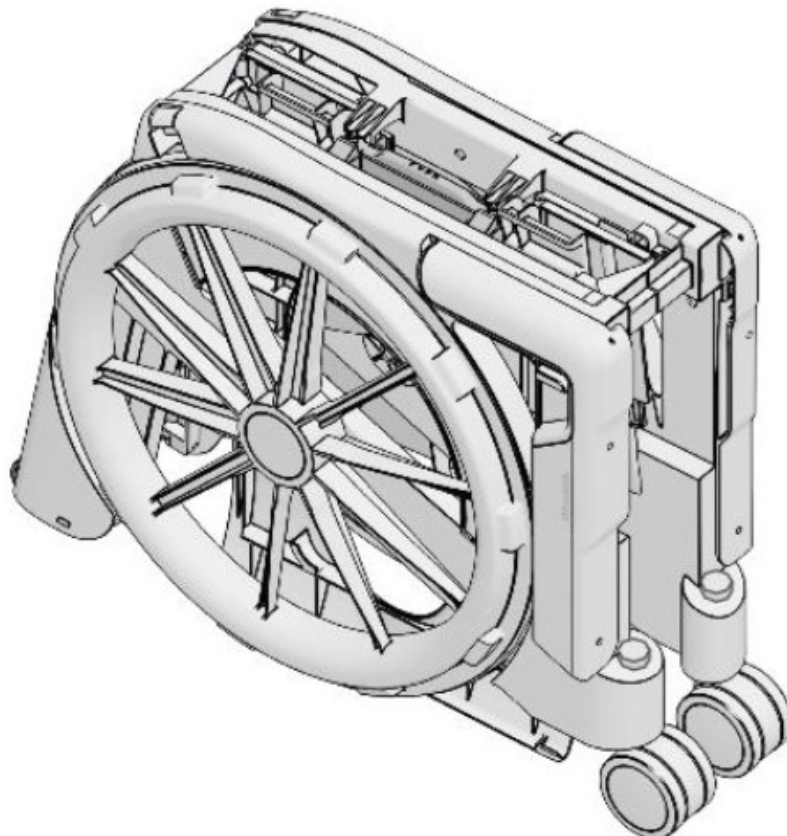


ACCESSOIRES

TOILETEMMER


1

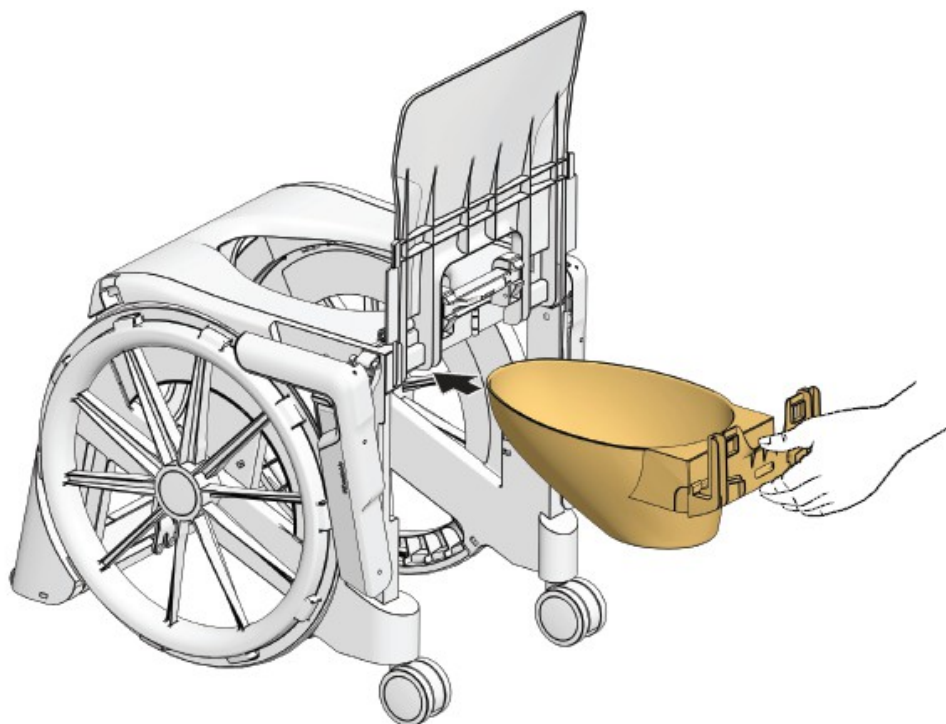


2

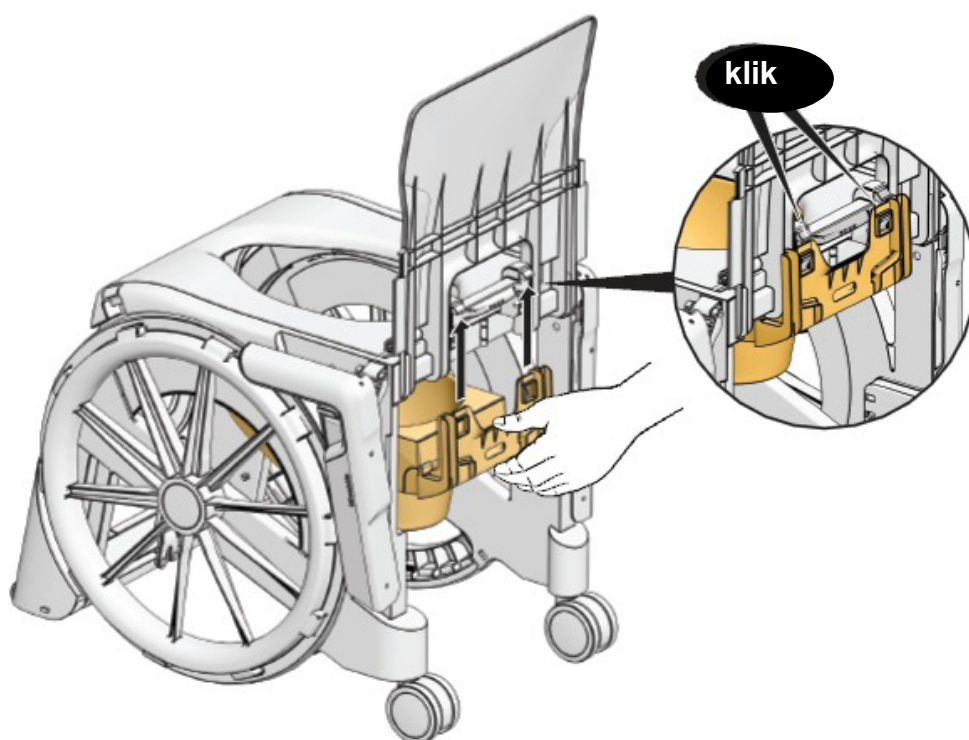


1

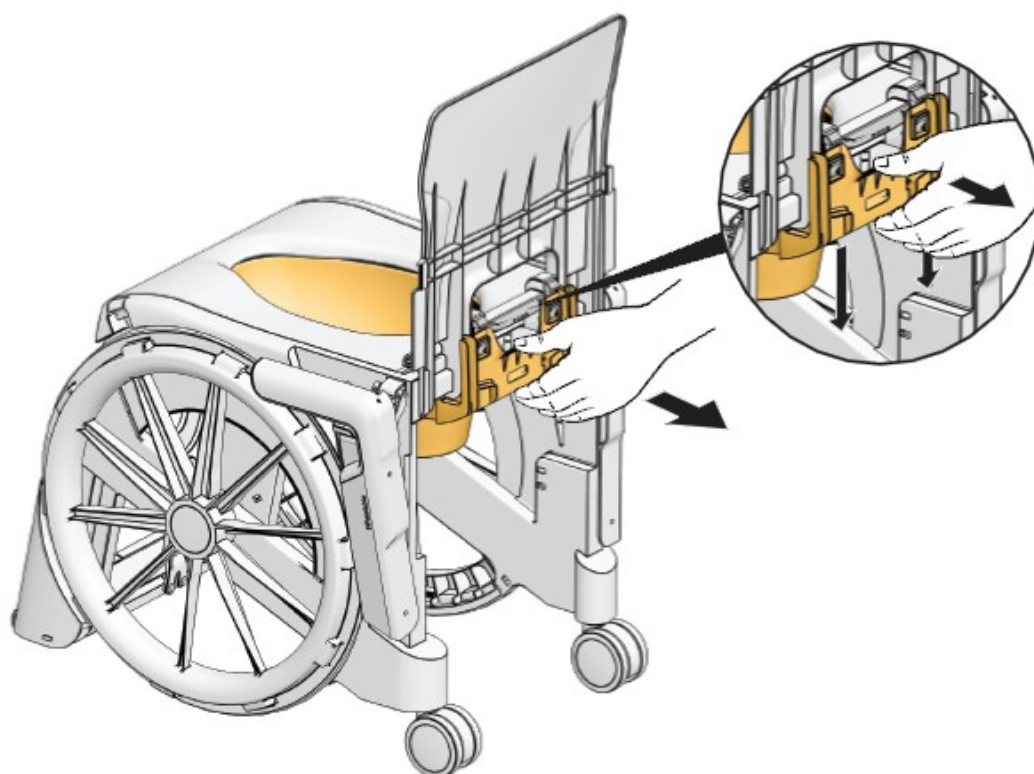


2

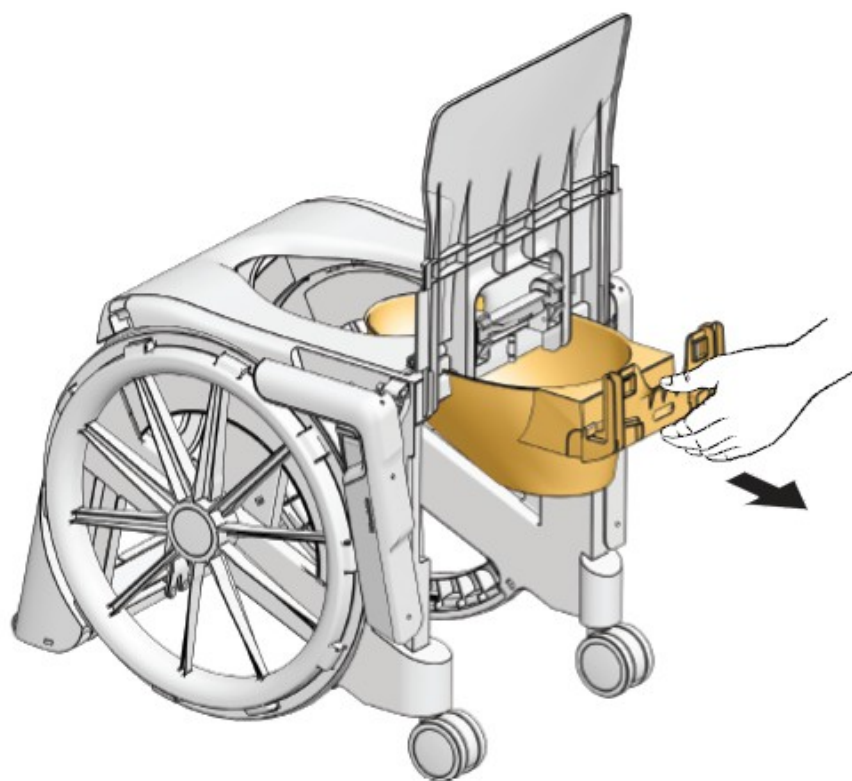

1

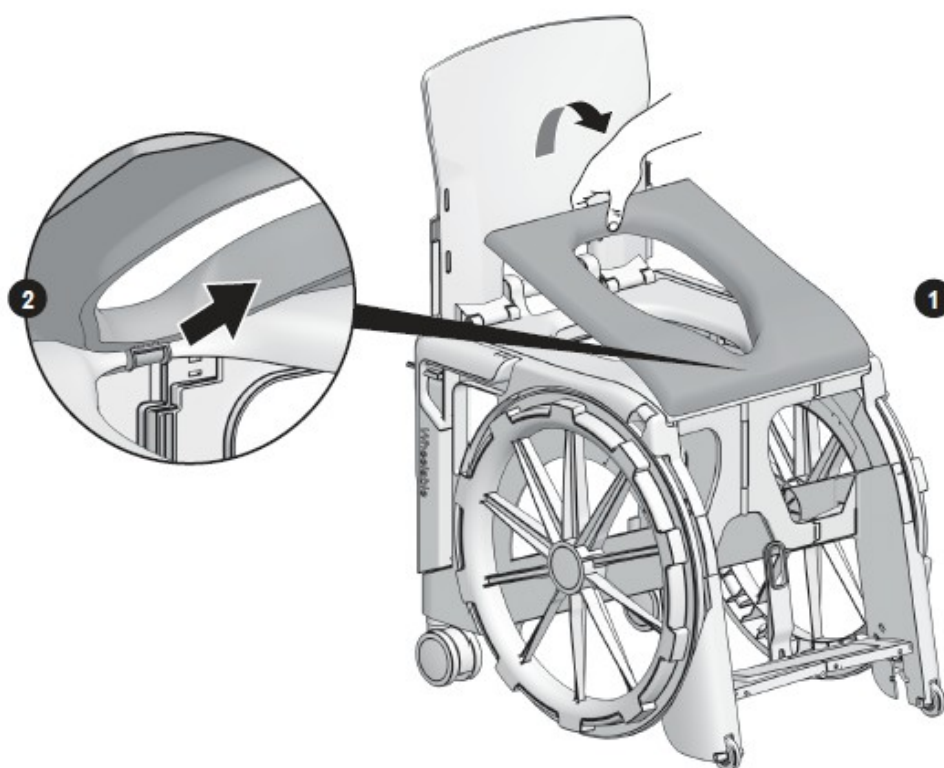


2

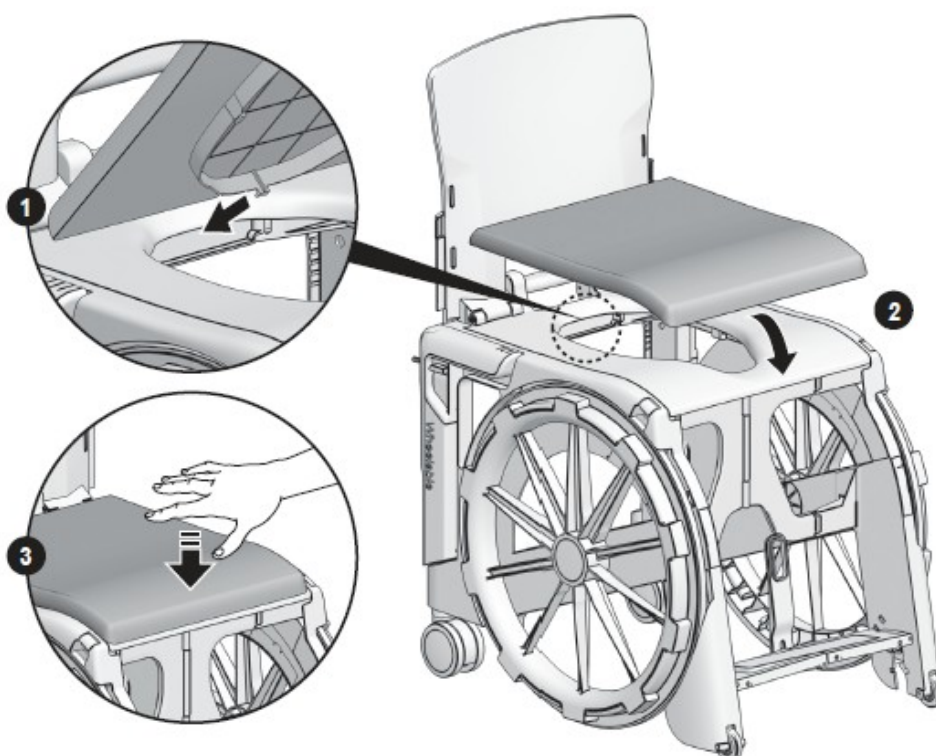

OPBERGKOFFER


1

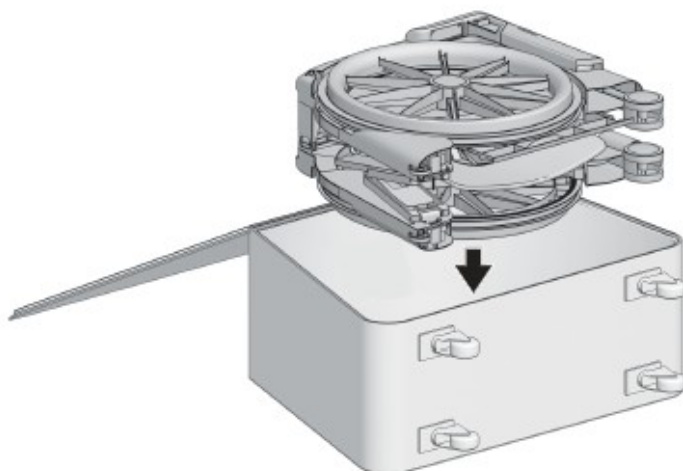


2



3

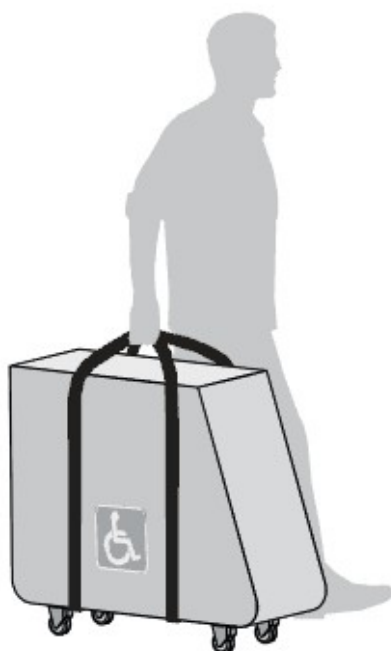

MEERROLLEN

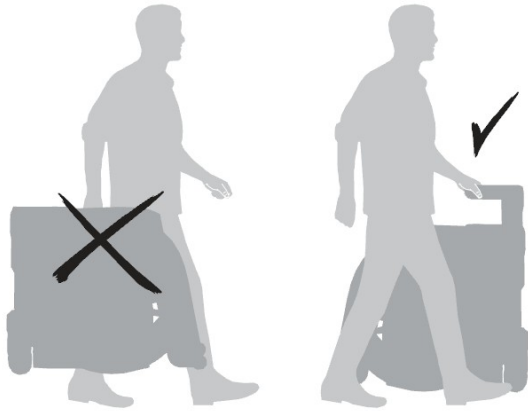

Tip: U kunt de WheelAble als trolley met u mee rollen. Klap één van de armleuningen omhoog en gebruik deze als handvat. Rollen is makkelijker dan tillen.

ONDERHOUD

Maak de douche-toilet-rolstoel schoon met water en droog deze vervolgens met een schone doek af. De WheelAble kan worden gereinigd met een mild reinigings- en ontsmettingsmiddel.

Gebruik geen bleekwater of andere oplosmiddelen. Deze bevatten agressieve zuren. Gebruik ook geen harde reinigingsborstels. Als de kunststof oppervlakken beschadigen kan er schimmelvorming ontstaan.

Let op: Maak geen ongeautoriseerde wijzigingen of aanpassingen aan de WheelAble. Dit kan nadelige invloed hebben op de veiligheid en functie van de douche-toilet-rolstoel. Hiermee komt eveneens uw garantie en de aansprakelijk van de fabrikant te vervallen!

GARANTIE

Op uw nieuwe WheelAble rolstoel geldt een garantieperiode van twee jaar.

Buiten de garantie vallen gebreken ontstaan door: niet in acht nemen van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften, abnormaal/niet-gangbaar gebruik, slijtage (stofferings, rubberen onderdelen, verkleuring of krassen zijn uitgesloten), onachtzaamheid, overbelasting, ongeval door derden, toegepaste, niet originele onderdelen en gebreken waarvan de oorzaak is gelegen buiten het product (zoals het laten vallen van het product of brandschade).

Met deze garantie vervalt elke andere garantie; in de wet bepaald, of mondeling medegedeeld, behoudens dat wat door Seatara schriftelijk wordt gegarandeerd.

Garanties gelden uitsluitend binnen de EU.

VRAGENLIJST

Zet een kruisje naast het meest geschikte antwoord.

Geslacht

Man

Vrouw

Leeftijd

< 18 jaar

18-50 jaar

> 50 jaar

Bent u gebonden aan een douche-toilet-rolstoel?

Ja

Nee

Zo ja, hoeveel jaar gebruikt u de douche-toilet-rolstoel...

0-2 jaar

2-10 jaar

> 10 jaar

... en waarom?

Ongeluk

Ziekte

Verminderde conditie

Hoe vaak gebruikt u de WheelAble?

Nooit

1x per maand

1x per jaar

Heeft u een extra douche-toilet-stoel?

Ja

Nee

Heeft u hulp nodig bij uw alledaagse dingen?

Ja Nee

Kunt u de WheelAble zelfstandig gebruiken?

Ja Nee

Heeft u een probleem met de WheelAble geconstateerd?

Ja, vermeld het ons alstublieft: Nee

.....

.....

Waar bergt u de WheelAble gedurende dag op?

Thuis In de auto Ergens anders, nl.:

Heeft de WheelAble uw leven veranderd?

Ja, vermeld het ons alstublieft: Nee

.....

.....

Hoe bent u in aanraking gekomen met de WheelAble?

Winkel Google Forum Kennis Beurs Zorgprofessional

Wat zou u willen verbeteren aan het product?

.....

.....

.....

.....

.....

Namens het team van Seatara bedankt voor het invullen van de vragenlijst.



Skyline Mobility BV
Gildeweg 22
2632 BA Nootdorp
The Netherlands

T +31 (0)15 82 00 320
E info@skylinemobility.com
I www.skylinemobility.com
IBAN NL93RABO0181028123
KvK 60502088
BTW NL853938726B01

