

ESRI Bubbelpad opleg anti decubitus systeem

Technische kenmerken

- ✓ Oplegmatras
- ✓ Maximaal toegelaten gebruikersgewicht; 150kg
- ✓ Dikte: 6,35cm
- ✓ Preventief bruikbaar, wisselhouding verplicht
- ✓ 2 jaar garantie
- ✓ Mechanische pomp 6L
- ✓ Netvoeding pomp: 220V/50Hz
- ✓ Zekeringswaarde: 1.5A/250V



Handleiding

BELANGRIJK: lees de gebruikershandleiding vóór gebruik.

1. Plaats de pomp op een plat oppervlak of hang ze over het uiteinde van de voetenplank van het bed
2. Leg het systeem op de onderliggende matras.
3. Sluit de luchtslangen van de luchtmatras aan op de zijkant van de pomp in de daarvoor bestemde openingen.
4. Controleer of de luchtslangen niet verdraaid zijn of onder de matras gekneld worden.
5. Zorg ervoor dat de stroomschakelaar UIT staat (positie OFF). Steek vervolgens het AC snoer in een gewoon geaard AC stopcontact.
6. Schakel de stroom IN (positie ON). De pomp begint lucht in de luchtmatras te blazen.
7. De druk kan ingesteld worden van 40 kg tot 150 kg (zie schaal)



Omrekenchaal kg – mmHg

Lichaamsgewicht in kg	indicatie nummer
35 - 50	1
50 - 60	2
60 - 70	3
70 - 80	4
80 - 90	5
90 - 100	6
100 - 110	7
110 - 120	8
120 - 130	9
>130	10