

Heel efficiënt patiënten herpositioneren en transfereren dankzij de GlideComfort!

De GlideComfort is een ergonomisch en economisch verantwoord hulpmiddel voor verplegend personeel waarbij de patiënt op een zeer comfortabele en veilige manier verplaatst kan worden.

De patiënt kan met behulp van de Glide Comfort zeer gemakkelijk behandeld, getransfereerd of opgeheven worden.

De GlideComfort kan eveneens ingezet worden als trauma transfer materiaal van de brancard naar RX tafel en OK tafel.

Dit trauma transfer hulpmiddel geeft geen hinder bij RX opnames (examen protocol test mat radiopaque RZ H. Hartziekenhuis Tienen)

De GlideComfort is tevens een incontinentie laken met een absorberende kracht tot 3l.

Voordelen:

- Vermindert de fysieke belasting van hulpgevers.
- Efficiënter werken.
- Ergonomisch: rugsparend.
- Economisch: kostenbesparend: Er zijn geen inco onderleggers of andere onderlagen meer nodig.
- Tijdswinst.
- Kan tot 3l absorberen.
- Door zijn structuur zal de patiënt niet wegglijden wanneer de rugleuning omhoog staat.
- De patiënt zal minder pijn ervaren door verminderde wrijving en druk tijdens transfer.
- De patiënt kan op een comfortabele en veilige manier verplaatst worden.

Kenmerken:

- Een meerlagige beschermstof voor het absorberen van vloeistof/urine in combinatie met een glijzeil en handvaten om handelingen uit te voeren.
- Tot 200 kg draagkracht.
- 6 handvaten aan elke kant voor een stevige en veilige grip.

- De zilveren, satijnen kant langs onder, het groene protectie materiaal langs boven.
- De patiënt ligt rechtstreeks op het groene beschermmateriaal.
- De GlideComfort wordt rechtstreeks op het hoeslaken van de matras gelegd.
- De GlideComfort wordt geplaatst voorbij de schouders wat inhoudt dat de patiënt op elk moment kan verschoven worden of klaar is voor transfer.

Afmetingen: 100 cm op 118 cm

Wasinstructie:

- Aangewezen temperatuur 70°C - maximum temperatuur is 90°C.
- Niet wassen met ritsen of velcro materialen.
- Geen bleekmiddelen, wasverzachters of andere chemische additieven gebruiken.
- Drogen kan op 70°C, maximum 80°C.

Opgepast!

- Niet te gebruiken bij schade.
- Maximum gewicht: 200 kg!
- Bij voorkeur met 2 zorgverleners werken.
- Niet gebruiken met tilliften.

