


Tandbescherming tegen slijtage door bruxisme Medisch hulpmiddel

Instructies voor thermische vervorming en gebruik

Inhoud verpakking

- Soepel, thermisch vervormbaar bitje voor de **bovenkaak** (1)
- Plaat om afdrukken te nemen (2)
- Thermometer met vlotter (zwarte schrijf met groen centrum) (3)
- Geventileerd opbergdoosje
- Gebruiksaanwijzing

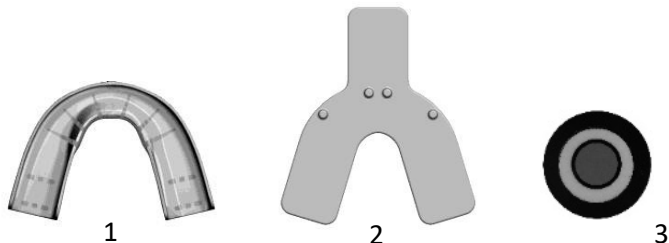

Indicaties

Beschermt de tanden tegen slijtage door bruxisme, tandenknarsen en kaakklemmen.

Contra-indicaties

- Ernstige parodontale problemen.
- Minder dan 8 tanden op bovenste tandboog.
- Gelieve bij instabiliteit van het tandstelsel en broze of afbrokkelende tanden advies te vragen aan uw tandarts.
- Gebruiker jonger dan 18 jaar.

Mogelijke bijwerkingen

- Gevoelige tanden.
- Overvloedige speekselvloed, vermindert na een paar dagen regelmatig gebruik, droge mond, een eventuele braakreflex werd heel zelden vastgesteld (verdwijnt snel).



Indien de hinderlijke bijwerkingen zich blijven voordoen, het knarsbitje niet langer gebruiken en medisch advies inwinnen.

In geval van een ernstig incident, contacteer de producent of de bevoegde autoriteit.

Onderhoud, levensduur, garantie

Het knarsbitje 's ochtends verwijderen, afspoelen en de hele dag bewaren in een recipiënt met warm water en een tandsteenwerend, antibacterieel tablet voor kunstgebitten bijvoorbeeld. Voor u het knarsbitje voor het slapengaan in uw mond steekt, moet u de vloeistof weggieten en het bitje grondig spoelen met zuiver water.

De levensduur van het hulpmiddel hangt af van het onderhoud van het hulpmiddel, de zuurtegraad van de mondholte, het tandenknarsen (bruxisme). Enkel een fabricagefout is gegarandeerd.



Controleer regelmatig de staat van het hulpmiddel.

Vervang het hulpmiddel in geval van scheuren en breuken of bij een aanzienlijke verslechtering van het materiaal.

Aanpassing aan gebit (thermische vervorming)

1 ● Leg de thermometer in een pot met 7 tot 8 cm koud water en laat het water op temperatuur komen. Zet de warmtebron uit wanneer het groene centrum van de thermometer rood wordt. Laat de **bovenbeugel 3 minuten** in het warme water liggen.

OPGELET : Laat de beugel niet in kokend water liggen.

OPGELET : voor een goede afdruk moet het materiaal warm zijn en mag de tijd tussen het verwijderen van de beugel uit de pot en het maken van de afdruk niet meer dan 10-15 seconden bedragen.

2 ● Ga voor een spiegel zitten. Haal de beugel met een lepel uit het warme water en schud ermee om het overtollige water te verwijderen. Steek de beugel in uw mond en zorg ervoor dat het middelste haakje tussen de voorste snijtanden valt. Druk de beugel verticaal aan met uw vingers en pas de breedte van de beugel (fig. 2) aan uw kaak aan. Zorg ervoor dat uw kiezen in de beugel geïntegreerd zijn. Ga onmiddellijk naar punt 3.

3 ● Houd de beugel met één hand in uw mond en steek met uw andere hand de afdrukplaat in uw mond (fig. 3). Bijt hard om een tandafdruk te maken. Houd uw tanden op elkaar geklemd en druk met uw vingers tegen de voorkant van de beugel voor een perfecte afdruk van uw tanden. Ontspan uw tanden en spoel uw mond met koud water. Laat de beugel 2 minuten afkoelen in de mond.

4 ● Steek het bitje in uw mond voor het slapengaan of in geval van stress.

Kwaliteit van de afdruk

Het comfort en de hechting van de beugel hangen af van de vorm van de tanden, het aantal tanden en de kwaliteit van de afdruk. Controleer of de vorm van de tanden duidelijk in de beugels is gedrukt; zo niet een nieuwe afdruk maken bij de juiste temperatuur en voldoende bijtkracht. Het eventuele overtollige materiaal kan worden weggesneden.



Elke andere wijziging van de beugel is strikt verboden.



Beschermen tegen het licht.

Het apparaat in de vuilbak gooien aan het einde van de levensduur.


Betekenis van de symbolen

De veiligheidsinstructies lezen / Producent / Partijnummer / luidbaarheidsdatum /

Referentienummer van de catalogus / In het donker bewaren / Niet vochtbestendig /

Lees de instructies / Opgelet / Medisch hulpmiddel van klasse I in overeenstemming met de Europese normen /

Erkend vertegenwoordiger in de Europese unie.

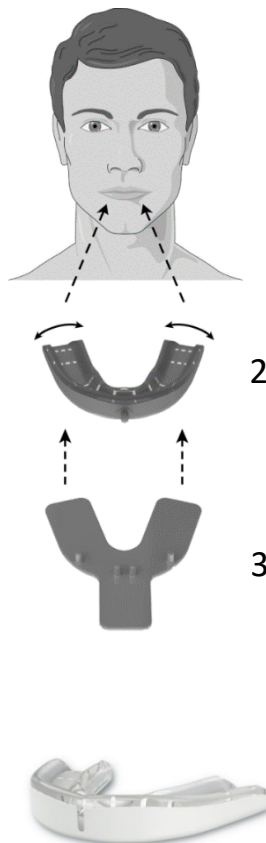

EUROPECERT / Alsstr. 97 / DE-41063 Mönchengladbach



OSCIMED SA / Allée du Quartz 3 / CH-2300 La Chaux-de-Fonds / Tel: 0041 32 926 63 36
info@oscimedsa.com / www.oscimedsa.com