

MONTAGEHANDLEIDING

ROLLINOVA® Rollatorhouder afstellen op uw rollator



Afbeelding 1

Inleiding

Voor deze uitleg is de Rollinova® rollatorhouder weergegeven zónder montagesteun van rug, zitting, of bumper. De twee onderdelen welke ingesteld worden zijn: de juiste breedtemaat van de buis van de framesteun (3) en de juiste hoogte van de framesteun compleet (2). Zie afbeelding 1.

BELANGRIJKE STAP

Stap 1: Na het samenvouwen van de rollator **moet** het rechter duwhandvat altijd boven de zitbuis uitsteken! De remkabel of een rugband mogen echter nooit boven de rechter zitbuis uitsteken! Indien dit wel het geval is dient u bij plaatsing altijd de rechter duwstang van de rollator wat lager in te stellen. Dit gaat overigens vaak heel eenvoudig met de aanwezige knop hiervoor op de rollator. Indien er geen kabel of band is hoeft u niets te doen.



✓ positie handvat goed. (Deze mag overigens ook hoger zitten als er maar geen remkabel of rugband zit)



× remkabel zit in de weg



× handvat zit lager dan zitbuis

Afbeelding 2

Stap 2:


Meet de afstand van de samengevouwen rollator vanaf de buitenzijde van het rechter achterwiel, tot aan buitenzijde van het linker framedeel van de rollator. Zie afbeelding 3.



Afbeelding 3

MONTAGEHANDLEIDING

ROLLINOVA® Rollatorhouder afstellen op uw rollator

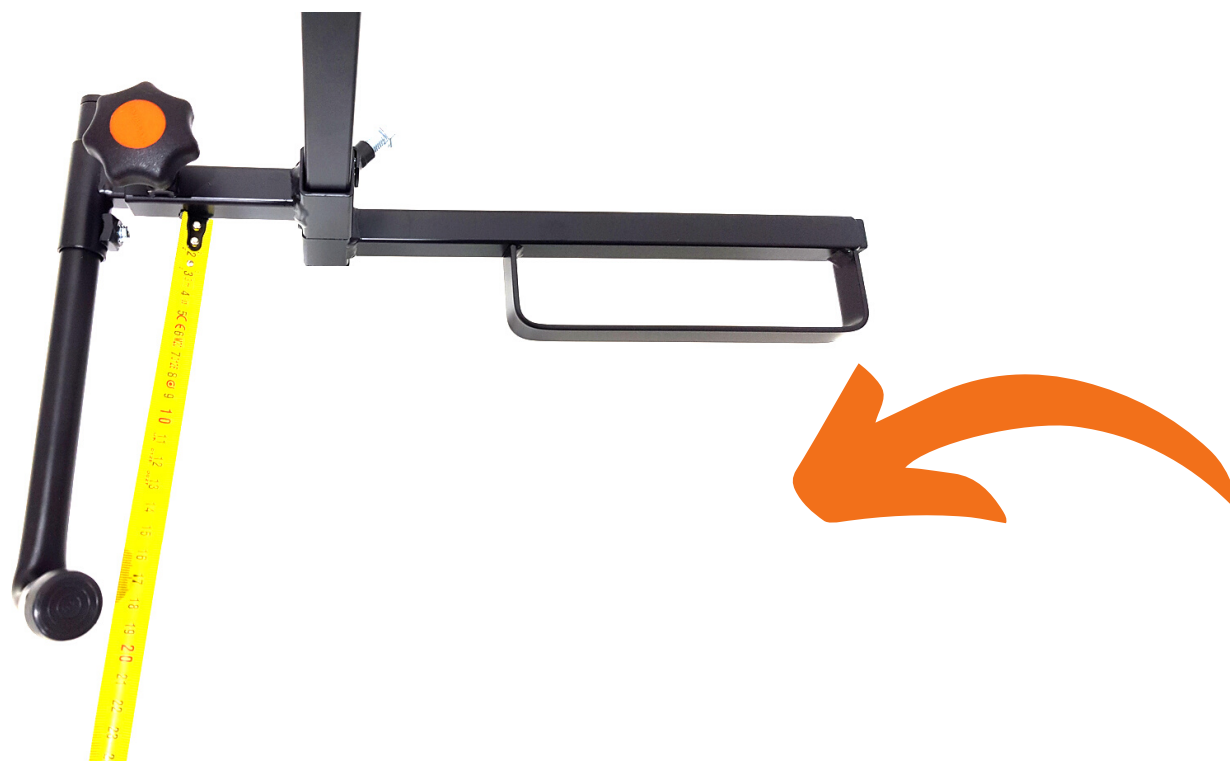

Afbeelding 4

Stap 3:

Steek nu de buis van framesteun (3) in de framesteun (2). De maat tussen de stootdop en de framesteun (2) moet ongeveer gelijk zijn aan de maat die bij stap 2 is gemeten. Zet met inbussleutel 4 de buis van framesteun (3) vast, met hierbij de stootdop naar boven gericht. Zie afbeelding 4.

(de nummers verwijzen naar afbeelding 1)

Stap 4:

Neem de losse vergrendelsteun (5) in uw rechterhand en plaats nu het rechter achterwiel van de samengevouwen rollator in de wielsteun (4). Met de linker hand dient u nu de voorkant van de zitbuizen omhoog te houden. Nu plaats u met de rechterhand de vergrendelsteun (5) in de Rollinova®buis (1). Zie afbeelding 5.

(de nummers verwijzen naar afbeelding 1)



Afbeelding 5

ROLLINOVA
-ROLLATORHOUDER-



Afbeelding 6

ROLLINOVA
-ROLLATORHOUDER-

Stap 5:

Terwijl u met de linkerhand de zitbuis vast blijft houden, laat u met de rechterhand de vergrendelsteun (5) naar beneden zakken tot op de zitbuis vlak bij het rechter handvat. Zoals de detail afbeelding laat zien valt hierbij de pen van de vergrendelsteun (5) tussen de zitbuizen en moet er een kleine ruimte (+/- 1cm) zijn tussen de rechter duwstang en de vergrendelsteun (5). Zet nu de sterknop (7) van Rollinova®buis (1) vast. Zie afbeelding 6.

(de nummers verwijzen naar afbeelding 1)

MONTAGEHANDLEIDING

ROLLINOVA® Rollatorhouder afstellen op uw rollator

Stap 6:

Blijf met de linkerhand de rollator omhoog duwen tegen de vergrendelsteun (5) aan. Duw nu met de rechterhand de framesteun compleet (2) naar boven. De buis van de framesteun (3) duwt nu tegen de onderkant van beide framebuizen van de rollator aan. Blijft de framesteun aangedrukt houden door nu met de linkerhand ook de framesteun (2) naar boven gedrukt te houden. Zet nu de tapbout van de framesteun (2) goed vast op de Rollinova®buis (1).

Zie afbeelding 7

(de nummers verwijzen naar afbeelding 1)



Duw deze tegen de onderkant van de rollator aan en zet de tapbout vast



De vergrendelsteun (5) duwt tegen de zitbuis aan



De buis van framesteun (3) zit tegen de rollator aan



Zet tapbout goed vast

Afbeelding 7 ROLLINOVA
-ROLLATORHOUDER-

Controleer nu of de vergrendelsteun (5) makkelijk omhoog en omlaag kan. Indien de vergrendelsteun (5) niet op de zitbuis komt, dient u de framesteun compleet (2) iets hoger te plaatsen op de Rollinova®buis (1). Controleer als laatste of de stootkop van de buis van de framesteun (3) goed aansluit tegen de zijkant van de rollator. Eventueel is deze nog wat verstellen. Plak nu als laatste de 2 rubbers op het punt waar de onderkant van de rollator de buis van de framesteun (3) raakt. U kunt de Rollinova® nu gaan gebruiken.