

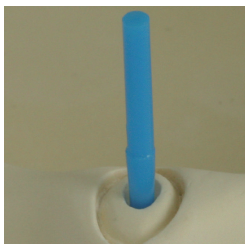
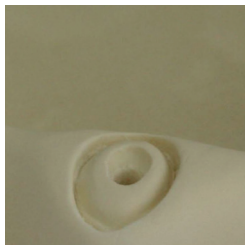
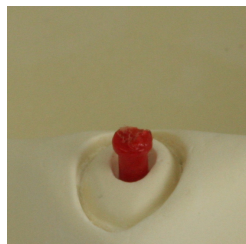
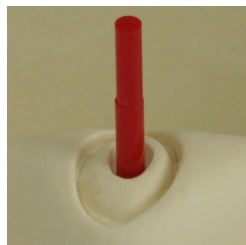


PRECI-POST M

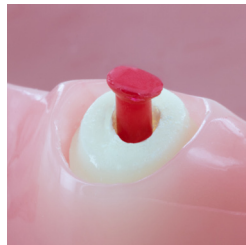

PRECI-POST CC

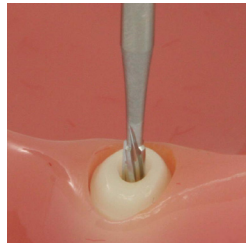

AXIALE

ATTACHMENTS

CEKA AXIAL
PRECI-CLIX AXIAL
PRECI-CLIX RADIKULÄR
PRECI-BALL

EXTRAKORONALE

ATTACHMENTS

CEKA EXTRAKORONAL
PRECI-VERTIX
PRECI-CLIX EXTRAKORONAL
PRECI-SAGIX
PRECI-S2

PROFIL

ATTACHMENTS

PRECI-BAR
PRECI-HORIX
PRECI-CLIP

DIGITALE

BIBLIOTHEKEN

SPEZIALITÄTEN

PRECI-PROFILE

PRECI-POST

CEKA SOL
CEKA SITE
CEKA BOND
3C-BOND
CEKA Multi - CEKA Multi O
PERMA-RET
PRECI-SEP
PLASTICWAX
EXPANDO
MESSINSTRUMENT

CEKA
PRECI-LINE

WWW.CKPL.EU

NEBENWIRKUNGEN, WARN- UND VORSICHTSHINWEISE

- Die Attachments sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
 - Die Produkte sind nicht steril.
 - Es besteht die Gefahr einer mangelnden Passung, wenn sich der Zustand des Patienten ändert.
 - Bakterienadhäsion kann durch Hygienemaßnahmen vermieden werden.
 - Unsachgemäße Verwendung oder mangelhafte Herstellung kann zur vorzeitigen Abnutzung der Attachments führen.
 - Die Funktionalität der Attachments wird von Traumen wie Zähneknirschen (Bruxismus) negativ beeinflusst.
 - Zum Zweck der Rückverfolgbarkeit raten wir Ihnen, die Chargennummer der verwendeten Produkte in die Patientenakte aufzunehmen.
 - Titan enthaltende Produkte nicht erhitzen.
- Keine nickelhaltigen Produkte benutzen im Falle einer Nickelallergie.
Die Hilfstteile RE H 79 und H 35 müssen außerhalb des Mundes verwendet werden.

CE0197

Prospekt Nr. 261.DE-ed.E
© Copyright ALPHADENT NV 02/2019
BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk



ALPHADENT NV
Mannebeekstraat 33,
8790 Waregem, Belgium
T +32 56 629 531
E info@ckpl.eu

CEKA
PRECI-LINE

SPEZIALITÄTEN PRECI-POST

DEUTSCH



WWW.CKPL.EU

PRECI-POST

PRECI-POST M

Rationelles System mit einer Konizität von $2^\circ 30'$ über die ganze Nutzlänge. Form und Abmessungen nach Dr. Mooser.
Für Stiftwurzelkappen und provisorische Stifzähne mit einer bzw. mehreren Wurzeln. Gelbe und blaue Farbkodierung.



PRECI-POST M-SATZ



PRECI-POST CC

Zylindrokones System: $5^\circ 30'$ an der Basis und dann zylindrisch über die ganze Nutzlänge für perfekte Retention.
Für Stiftwurzelkappen und provisorische Stifzähne mit einer bzw. mehreren Wurzeln. Gelbe, rote, blaue und grüne Farbkodierung.



PRECI-POST CC-SATZ



PRECI-POST M



**PRECI-POST M-SATZ
2001**

1 Erweiterer, gelb
1 Erweiterer, blau
25 Abdruckstifte, gelb opak
25 Abdruckstifte, blau opak
25 Laborstifte, gelb transparent
25 Laborstifte, blau transparent

PRECI-POST M-LABORSTIFT

Transparente Laborstifte aus Kunststoff. Nur zur Verwendung im Labor.

# 2003GL	50 st.	gelb	Spitze ø 0,80 mm	Konuslänge 10,70 mm	Gesamtlänge 18,60 mm
# 2003BL	50 st.	blau	Spitze ø 1,00 mm	Konuslänge 12,30 mm	Gesamtlänge 22,90 mm
# 2003L	2 x 50 st.	Kombinationspackung gelb & blau			

PRECI-POST M-ABDRUCKSTIFT

Opake Abdruckstifte aus Kunststoff (mit Retention), zu verwenden in Verbindung mit allen Abdruckmethoden (auch Versilbern bzw. Kunststoffstümpfe).



# 2002G	50 st.	gelb	Spitze ø 0,80 mm	Länge 14,10 mm
# 2002B	50 st.	blau	Spitze ø 1,00 mm	Länge 16,70 mm
# 2002	2 x 50 st.	Kombinationspackung gelb & blau		

PRECI-POST M-ERWEITERER

Erweiterer nach dem Mooser-System



# 2004G	1 st.	gelb	Spitze ø 0,80 mm
# 2004B	1 st.	blau	Spitze ø 1,00 mm

PRECI-POST CC



PRECI-POST CC-SATZ

Nur zur Verwendung im Labor

2050 50 gelbe Stifte,
50 rote Stifte,
50 blaue Stifte,
50 grüne Stifte
2060 20 gelbe Stifte,
15 rote Stifte,
10 blaue Stifte,
5 grüne Stifte

PRECI-POST CC-KUNSTSTOFFSTIFT

Kunststoffstifte, nur zur Verwendung im Labor



# 2051A	50 st.	gelb	ø 1,40 mm	Spitze ø 0,65 mm	Konuslänge 4,60 mm	Gesamtlänge 16,60 mm
# 2052B	50 st.	rot	ø 1,60 mm	Spitze ø 0,70 mm	Konuslänge 5,60 mm	Gesamtlänge 18,60 mm
# 2053C	50 st.	blau	ø 1,80 mm	Spitze ø 0,75 mm	Konuslänge 6,40 mm	Gesamtlänge 20,00 mm
# 2054D	50 st.	grün	ø 2,00 mm	Spitze ø 0,80 mm	Konuslänge 7,05 mm	Gesamtlänge 22,40 mm

PRECI-POST CC-ERWEITERER

Zylindrokonescher Erweiterer



# 2951A	1 st.	gelb	Spitze ø 0,65 mm
# 2952B	1 st.	rot	Spitze ø 0,70 mm
# 2953C	1 st.	blau	Spitze ø 0,75 mm
# 2954D	1 st.	grün	Spitze ø 0,80 mm