


## Tele-Fit Friktionsstifte

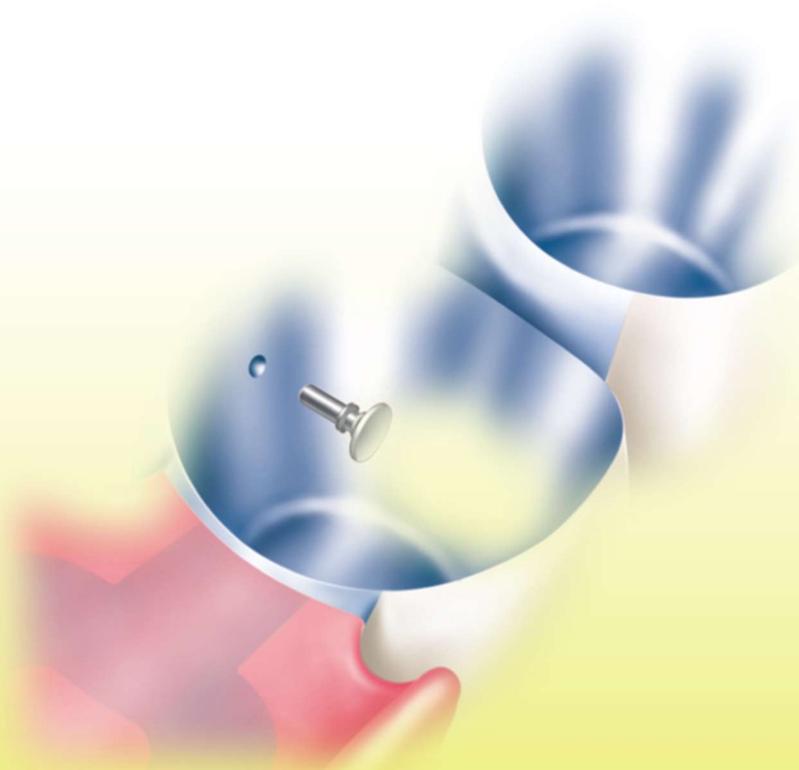

**Die schnelle Hilfe bei Friktionsverlust**

Für Teleskop-, Konus- und Doppelkronen

Einfache Verarbeitung • leicht auswechselbar • effektiv und preiswert

Tele-Fit-Friktionsstifte werden bei Teleskop, Konus- und Doppelkronen eingesetzt, um die Friktion wiederherzustellen.

Die Friktionsstifte sind aus dauerelastischem und hochpräzisem Kunststoff gefertigt, der sich perfekt der Kroneninnenwand anpasst. Tele-Fit-Friktionsstifte sind in zwei Stärken erhältlich.

#### Verarbeitung:

- Bohren Sie mit dem HM-Bohrer ein Loch durch die Außenkrone.
- Drücken Sie den Friktionsstift von innen in die Bohrung. Eine Verrippung am Kopfende gewährleistet den sicheren Halt.



- Drücken Sie den Friktionsstift mit Hilfe eines Modellierinstrumentes in seine endgültige Position.
- Kürzen Sie den überstehenden Teil des Tele-Fit-Friktionstiftes bündig an der Kronenaußenfläche.
- Die Friktion ist unkompliziert wiederhergestellt.



## Tele-Fit Sets und Einzelteile

- ArtNr. 9880 10 Tele-Fit weiß, 10 Tele-Fit beige, 1 Zentrierbohrer, 1 HM-Bohrer
- ArtNr. 9881 Tele-Fit weiß (0,10 mm), 6 Stück
- ArtNr. 9882 Tele-Fit beige (0,15 mm), 6 Stück
- ArtNr. 9884 Zentrierbohrer
- ArtNr. 9885 Hartmetallbohrer für EM und NEM

## SSP SCHULZ DENTAL – Service-Leistungen



### **Diamantieren von Teleskoptangen**

Sie haben bei uns die Möglichkeit, Ihre wertvollen Zangen, Pinzetten oder andere metallische Oberflächen neu diamantieren zu lassen. Die hochwertige Diamantierung ist qualitativ einem Neukauf gleich, allerdings viel preiswerter. Dazu benötigen wir nur die gewünschte Korngröße: **grob**, **mittel** (bevorzugt) oder **fein**.



### **Nachschleifen von Hartmetall-Fräsern**

Lassen Sie Ihre Hartmetall-Fräser nachschleifen. Zu empfehlen sind Gips- und Kunststoff-Fräser. Sie sparen dabei bis zu 2/3 gegenüber einem Neukauf. Fräser mit 2,35 mm Schaft lassen sich bis zu dreimal nachschleifen, Fräser mit 6,00 mm Schaft bis zu fünfmal. Weitere Schaftgrößen auf Nachfrage. Für alle Hersteller.



Schellingstrasse 27  
D-73431 Aalen/Germany  
Telefon +49 (0) 73 61 / 9 38 70  
Telefax +49 (0) 73 61 / 3 20 29  
E-Mail [info@ssp-schulz.de](mailto:info@ssp-schulz.de)