



SOLDER LV



DENTALLOTE mit integriertem Flussmittel



SSP SCHULZ DENTAL produziert und vertreibt seit 1973 hochwertige rotierende Instrumente und Werkzeuge. Qualität, Kreativität und Neugierde sind unser Erfolgsrezept, um den Anforderungen, die Material und Technik in einer immer komplexer werdenden Dentalwelt stellen, gerecht zu werden.

Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Zahntechnik bieten wir ein einzigartiges Sortiment an Instrumenten zur Bearbeitung sämtlicher zahntechnischer Werkstoffe. Unsere im Stammsitz in Aalen gefertigten Polierbürsten und Polierschwabbel werden in unzähligen Dentallaboren aufgrund ihrer hohen Materialqualität und ihrer überzeugenden Standzeiten geschätzt.

Als CEKA-PRECI-LINE und NOBIL METAL Vertrieb für Deutschland und Österreich bieten wir Ihnen den vollen Service für alle attachment-Systeme und Lote: Fachberatung, schnelle Lieferzeiten, attraktive Preise, digitale Bibliotheken – und mit unserem Außendienst können wir sogar direkt vor Ort sein.

Ihre Zufriedenheit ist unser Anspruch.

SSP SCHULZ DENTAL Produkte
& CEKA PRECI-LINE Fachhändler



SOLDER LV - DentalLote mit integriertem Flussmittel

Das SOLDER LV Lot-Programm ist ein breites Sortiment von weich zu verarbeitenden Loten in Röhrenform.

Bisher unter dem Markennamen CEKA Sol bekannt, wird es seit mehr als 4 Jahrzehnten in der Zahntechnik aufgrund seines einzigartigen Fließverhaltens geschätzt. Das besondere ist dabei sein integriertes Flussmittel. Es sorgt für höchsten Verarbeitungskomfort und garantiert optimale Ergebnisse und Effizienz. Aufgrund seiner hervorragenden Fließeigenschaften lässt es sich problemlos platzieren und sparsam dosieren.

Ob in der Attachment-, Teleskop- oder Implantat-Technik, ob für Kronen oder Brückenarbeiten oder in der Kieferorthopädie: Mit SOLDER CROCHET, AUCROM, UNISOLDER, CROMOPAL und LV15 haben Sie für jeden Anwendungsbereich und jede Legierung das optimale Lot parat.



+49 (0) 73 61 - 9 38 70 & 9 38 717

info@ssp-schulz.de

Wir helfen und beraten gern.

SSP SCHULZ DENTAL

LV SOLDER – Dentallote in Röhrenform mit integriertem Flussmittel

Bezeichnung	ArtNr.	Farbe	Schmelzintervall	Indikation
SOLDER CROCHET	LV00	gelb	780 – 820°	EM / NEM / CR-CO / INOX
SOLDER CROCHET Filigran	LV00F	gelb	780 – 820°	EM / NEM / CR-CO / INOX
AUCROM 1	LV22	weiß	865 - 930°	EM / NEM / CR-CO / INOX
UNISOLDER	LV21	gelb	615 – 630°	EM / CR-CO / INOX
CROMOPAL	LV23	weiß	1000 – 1030°	CR-CO
SOLDER LV 15	LV15	weiß	655 – 680°	universell

Legierungstabelle

Au Pd Ag Cu In Zn Ni

80 - - 13 5 2 -

80 - - 13 5 2 -

76,5 - - 0,4 6,5 - 16,5

42 - 38,5 - 8,5 11 -

10 37 37 12 - 4 -

- - 59 16 - 25 -

Legierungsbestandsanteile in %



FLUSSMITTEL

In allen SOLDER LV Loten ist das Flussmittel bereits integriert. Sie werden in der einzigartigen Technik des Faltens einer dünnen Folie zum Einfüllen des Flussmittels produziert.

Der Vorteil dieser gefalteten Röhren ist der direkte Abtransport des beim Lötvorgang entstandenen Gases. Hierdurch wird das Verschließen des Lötstabendes verhindert und es entstehen keine durch aufgestauten Gas verursachte "Miniexplosionen".

Das integrierte Flussmittel gewährleistet eine gleichbleibende optimale Fließfähigkeit des Lotes. Es verhindert dabei jegliche Oxidation der Oberfläche und hinterlässt keine Rückstände an der Lotstelle.

VERARBEITUNGSEMPFEHLUNG

Säubern Sie die Lötfläche und entfernen Sie jegliche Oxydspuren. Erwärmen Sie die Lotstelle mit einer kleinen, nicht oxydierenden Flamme. Achten Sie darauf, dass die Lötstelle nicht überhitzt wird.

Wenn ein Farbumschlag von der Legierungsfarbe zu hellrot erfolgt, führen Sie das Lotmaterial entgegengesetzt und horizontal zu der Flamme ein.

Dank des integrierten Flussmittels schmilzt das Lot unverzüglich und fließt gleichmäßig in den vorgesehenen Lötspalt.





KATALOG

DEUTSCH



Alle Infos zur Bestellung und Verarbeitung
Die handlichen SSP-Service-Broschüren
erhalten Sie kostenlos:

- # SSP-Druckknopf-Handbuch
- # PRECI-VERTEX & PRECI-HORIX kompakt
- # PRECI-CLIX RADIKULÄR System
- # SOLDER LV Lotprogramm mit Flussmittel



Ihr CEKA PRECI-LINE Fachhändler

+49 (0) 73 61 – 9 38 7 17

+49 (0) 73 61 – 9 38 70

+49 (0) 163 – 645 77 25

SSP SCHULZ DENTAL | Schellingstraße 27 | D-73431 Aalen/ Germany
Telefon +49 (0) 73 61 / 9 38 70 | Telefax +49 (0) 73 61 / 3 20 29
ceka-preciline@ssp-schulz.de | webshop: www.schulzdental.de