

## Gebruiksaanwijzing

# Nourisil™ MD

**Nourisil™ MD – een siliconengel ter preventie en behandeling van nieuwe en oude keloïden en hypertrofische littekens.**

### Wat is Nourisil™ MD?

Nourisil™ MD is een zeer lichte, transparante, zelfdrogende siliconengel die ontwikkeld is voor de behandeling en preventie van nieuwe en oude keloïden en hypertrofische littekens, als gevolg van chirurgische ingrepen, verwondingen, trauma's of brandwonden. Het unieke mengsel van siliconen en vitamine E zorgen voor een goede vochtbalans en verbeteren het uiterlijk van littekens.

Nourisil™ MD voelt zijdezacht en niet vet aan op de huid. Het is eenvoudig op littekens aan te brengen op alle delen van het lichaam, zelfs op het gezicht en de gewrichten. Indien gebruikt volgens de instructies, vormt Nourisil™ MD een laag die de huid en het litteken hydrateert en beschermt.

### Toepassing

Nourisil™ MD wordt gebruikt ter preventie en behandeling van nieuwe en oude keloïden en hypertrofische littekens als gevolg van chirurgische ingrepen, verwondingen, trauma's of brandwonden. Nourisil™ MD helpt littekens te verzachten, maakt ze vlakker en gladder, verlicht jeuk en ongemak van de huid en vermindert eventuele bijbehorende pijn en roodheid. Nourisil™ MD kan worden aangebracht nadat de wond is genezen en wanneer het huidoppervlak intact is.

Nourisil™ MD is geschikt voor gebruik bij alle huidtypen, zelfs de gevoelige huid en bij kinderen.

Nourisil™ MD is een medisch hulpmiddel.

### Gebruiksaanwijzing

- Was de handen voor en na gebruik.
- Zorg ervoor dat de huid schoon en droog is.
- Verwijder de dop van de pompflacon.
- Druk enkele malen op de pomp tot de gel uit de flacon komt.
- Masseer voorzichtig een kleine hoeveelheid Nourisil™ MD op het litteken en laat drogen.
- Veeg indien nodig zorgvuldig de overtollige gel af met een tissue om vlekken op kleding te voorkomen.
- Zodra de gel is opgedroogd, kunnen cosmetica of zonbescherming worden aangebracht.
- Breng Nourisil™ MD tweemaal daags aan; éénmaal 's ochtends en éénmaal 's avonds.

De aanbevolen behandelingsduur is 60-90 dagen. Voor grotere of oudere littekens kan een langere behandelingsduur nodig zijn.

### Waarschuwingen

- Nourisil™ MD mag niet worden aangebracht op open wonden of derdegraads brandwonden.
- Nourisil™ MD mag niet gebruikt worden indien er sprake is van aandoeningen die de huid beschadigen. Raadpleeg bij twijfel uw apotheker of arts.
- Rechtstreeks contact met de slijmvliezen en de ogen moet worden vermeden.
- Indien een aanvullende behandeling is vereist op dezelfde plek, raadpleeg uw apotheker of arts.
- Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor een van de bestanddelen.
- Indien irritatie optreedt, dient het gebruik onmiddellijk stopgezet en een arts geraadpleegd te worden.
- Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

**Bewaarcondities**

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Bewaren tussen 4 en 25°C.
- Niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum vermeld op de pompflacon (EXP). Na openen 12 maanden houdbaar.

**Ingrediënten**

Cyclopentasiloxane, Caprylyl Methicone, Tocopheryl Acetate, Dimethicone Crosspolymer, PEG-12 Dimethicone/PPG-20 Crosspolymer, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Dimethicone.

**Inhoud**

30 g

**Verdere informatie**

Voor meer informatie, neem contact op met uw apotheker, arts of ga naar [fagron.nl](http://fagron.nl).

** Fabrikant**

Fagron BV, Lichtenauerlaan 182,  
3062 ME Rotterdam, Nederland

**Producent**

Herkel B.V. Nobelweg 6,  
3899 BN Zeewolde, Nederland

**Distributeur**

Fagron NL BV, Venkelbaan 101,  
2908 KE Capelle a/d IJssel, Nederland  
[fagron.nl](http://fagron.nl)

**Fagron Advanced Derma**

Fagron Advanced Derma is wereldwijd de standaard voor geavanceerde en geïndividualiseerde dermatologische zorg. Het omvat een reeks huidvriendelijke producten voor verschillende huidtypen en condities, ontwikkeld aan de hand van recente wetenschappelijke inzichten binnen de dermatologie.

De ingrediënten zijn zorgvuldig geselecteerd en mild voor de kwetsbare en gevoelige huid. De zachtheid en elegantie van de producten bieden bovendien maximaal gebruikskomfort.

Voor aanvullende informatie over de Fagron Advanced Derma producten kunt u contact opnemen met uw apotheker, arts of bezoek [fagronadvancedderma.nl](http://fagronadvancedderma.nl).

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juni 2016 (versie: 126129832300, 109025B/01).

[fagron.nl](http://fagron.nl)

Fagron NL BV - Venkelbaan 101 - 2908 KE Capelle a/d IJssel  
Nederland - Tel. +31 (0)88 33 11 133 - Fax +31 (0)88 33 11 111  
[info@fagron.nl](mailto:info@fagron.nl)

