

# Afleverinstructie



*Uw welzijn, onze passie!*



# Inhoud

1.	Algemene afleverinstructie	4
2.	Afleverinstructie wielsysteem zelfremmend / Mobility Kit	5
3.	Afleverinstructie draaiplateau	6
4.	Afleverinstructie infrarood bediening	7
5.	Afleverinstructie arthrodese zitting	7
6.	Afleverinstructie hemiplegie armlegger	8
7.	Afleverinstructie kyphose rugleuning instelbaar	8
8.	Afleverinstructie wegklapbaar zijpand	9
9.	Afleverinstructie transparantie werktafel	10
10.	Afleverinstructie ILP rugleuning en ILP Extra rugleuning	10
11.	Afleverinstructie APPR zitsysteem	11

# 1. Algemene afleverinstructie

1. Volg de aanwijzingen die met stickers zijn aangebracht op de plastic hoes altijd zorgvuldig op.

2. Verwijder vervolgens de verpakkingsmaterialen in en om de fauteuil.

Om de plastic hoes om de beensteun te verwijderen, is het raadzaam de stoel eerst aan te sluiten door de stekker in het stopcontact te plaatsen en vervolgens de beensteun uit te laten komen middels het handbedieningskastje uit het opbergetui of middels de geïntegreerde bediening op het zijpand.

3. Controleer of er opties/accessoires aanwezig zijn waar u mogelijk de transportbeveiliging van dient te verwijderen. De instructie hiertoe treft u verderop in dit boekje aan.

4. Controleer of er metalen pootjes onder de stoel aanwezig zijn. Zo ja, dan is om beschadiging te voorkomen een multiplex strook onder de pootjes door geplaatst. Deze zitten met 2 schroeven vast. Verwijder deze stroken. Er zijn speciale zelfklevende viltjes meegeleverd om vloerbeschadiging te voorkomen.

5. Controleer de werking van de fauteuil.

6. Maak uw klant erop attent dat er zich in de doos op de zitting van de fauteuil belangrijke gebruiksaanwijzinginformatie bevindt. Hierin kan de klant op zijn/haar gemak bekijken wat de stoel aan mogelijkheden biedt. Ook staat er hoe de klant zijn/haar stoel het beste kan onderhouden. In het geval er geen doos in de zitting aanwezig is, bevindt deze gebruiksaanwijzinginformatie zich in het opbergetui aan één van de zijpanden.

7. Controleer of er een verstelbare lendensteun aanwezig is. Deze kan zich bevinden:



a. Achter de ritssluiting op de achterzijde van de rugleuning. U treft dan aan: een metalen plaat met een sleuf en daarin in hoogte verstelbare knop en een los blaasbalgje.

b. Aan de voorzijde van de fauteuil tussen de zitting en de onderzijde van rugleuning.

Door uw hand hiertussen te steken treft u indien aanwezig aan: een gestoffeerde lus en een los blaasbalgje, welke u beide naar buiten kunt halen.

Attendeer uw cliënt erop dat in de gebruiksaanwijzing is vermeld hoe deze verstelbare lendensteun in dikte en in hoogte kan worden ingesteld.


8. Controleer of de hoofdsteun van de stoel naar voren en achteren verstelbaar is. Indien dit het geval is, attendeert u de klant hier dan op.

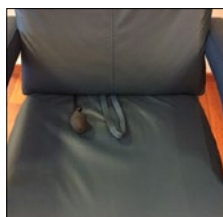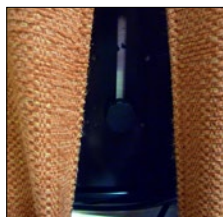

**Na uitvoering van deze stappen kan uw klant gaan genieten van zijn/haar eigen Fitform-fauteuil!**

# 2. Afleverinstructie wielsysteem zelfremmend / Mobility Kit

Indien de fauteuil is uitgerust met een wielsysteem zelfremmend of een Mobility Kit systeem, dan is bij aflevering onder beide sloffen een multiplex strook geplaatst, die de wieltjes tijdens het transport van de grond af houden. Deze stroken zitten met tie-wraps aan de sloffen vastgebonden en dienen te worden verwijderd alvorens u het wielsysteem in gebruik kunt nemen. De tie-wraps zijn eenvoudig door te knippen terwijl de fauteuil op de grond staat.

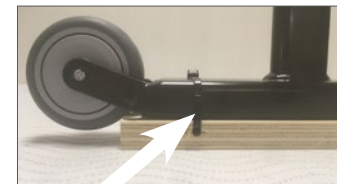

## Voordat u de stoel gaat verrijden

- Zet de fauteuil in de neutraalpositie.
- Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is verwijderd voordat u de stoel gaat verplaatsen. Het snoer kunt u opbergen in één van de opbergetui's aan het zijpand van de stoel.

## Het verrijden van de stoel

Bij een stoel met **zelfremmend wielsysteem** vindt u achter de ritssluiting aan de achterzijde van de rugleuning een hendel. Wanneer u de hendel omhoog beweegt komen de wielen op de grond en is de stoel verrijdbaar (zonder een persoon erin). Wanneer de hendel omlaag staat, zijn de wielen ingeklapt en is de stoel automatisch geremd. Dankzij dit systeem kunt u niet vergeten de wielen op de rem te zetten en wordt voorkomen dat de stoel plotseling verrijdt.

In het geval van een **Mobility Kit wielsysteem** heeft de stoel een beugel aan de achterzijde van de rugleuning. Door deze naar beneden te drukken wordt de rem losgelaten en kunt u de stoel verrijden (met een persoon erin).



### 3. Afleverinstructie draaiplateau

Om transportschade te voorkomen, is de Fitform-fauteuil met draaiplateau op een plaat geplaatst. Hiervoor zijn twee stroken geplaatst over de draaischijf van het draaiplateau om te voorkomen dat de fauteuil tijdens transport verschuift. Bovendien staat de fauteuil iets in de opstastand om de draai te blokkeren.

**Voordat u de fauteuil kunt gebruiken, dienen onderstaande stappen gevolgd te worden:**


- Leg de fauteuil voorzichtig op de zijkant (let op voor de handbediening).
- Verwijder de 4 schroeven aan de onderzijde van de plaat middels een kruiskopschroevendraaier
- Plak de meegeleverde plakviltten onder de draaischijf. (Doe dit om de ondergrond te beschermen en om oneffenheden te nivelleren). Plak de plakviltten recht onder de plaats waar de wielen over de plaat lopen. Controleer of de vloer goed vlak is. Wanneer u onregelmatigheden aantreft, plak dan extra vilt onder het draaiplateau om het risico op beschadiging van de ongelijke delen van de vloer te voorkomen.



**Let op indien de fauteuil ook is voorzien van een sta-opfunctie.**

De kabel van de fauteuil is veilig gefixeerd aan een zijpand van uw fauteuil en kan binnen de stoel niet beklemd raken. Echter wanneer de kabel aan de buitenkant van de stoel teveel ruimte krijgt, de stoel verdraaid wordt en vervolgens de sta-opfunctie wordt gebruikt, dan kan het zijn dat de kabel alsnog beklemd raakt tussen het mechaniek. Het is daarom belangrijk de stoel als volgt te installeren:

Aan de kant waar de kabel de stoel uitkomt, wordt de stekker in het stopcontact gestoken. M.a.w. komt de kabel rechts achter uit de stoel, dan moet de kabel ook rechts in een stopcontact gestoken worden. Mocht dit echt niet mogelijk zijn, zorg er dan voor dat de kabel buiten de stoel niet dusdanig lang is, dat deze beklemd raakt tussen het mechaniek.

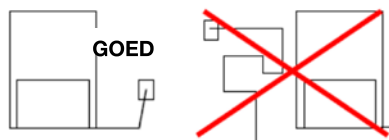

### 4. Afleverinstructie infrarood bediening

**Verwijderen van de transportbeveiliging**

Om te voorkomen dat de infrarood ontvanger beschadigt tijdens transport, is deze aan de binnenzijde van het zijpand geplaatst.

**Voordat deze kan worden gebruikt dient u eerst de ontvanger te verplaatsen:**

- Leg de fauteuil voorzichtig op haar zijkant (let op voor de handbediening).
- Aan de binnenzijde van het zijpand (inzittend rechts) bevindt zich de infrarood ontvanger (bevestigd middels klittenband). Verwijder deze.
- Plaats de ontvanger vervolgens aan de onderzijde van het zijpand, middels het daar aanwezige klittenband.



### 5. Afleverinstructie arthrodesese zitting

**Instelling van de zittingdelen**

De valling van de zittingdelen is aan beide zijden naar beneden instelbaar met behulp van de bouten die vastzitten aan het zittingraam. De maximale instelmogelijkheid is 8 cm naar beneden.

**In gebruik nemen van de Fitform-fauteuil met arthrodesese zitting**

Bij het uitkomen van de elektrisch bedienbare voetenbank, gaat het naar beneden gestelde zittingdeel automatisch weer naar een horizontale positie. Een hoekcorrectie kan nu gemaakt worden met behulp van de elektrisch bedienbare rugverstelling.



## 6. Afleverinstructie hemiplegie armlegger

### Instellen van de hemiplegie armlegger op de juiste diepte

Indien er een hemiplegie armondersteuning is gemonteerd, is het belangrijk dat deze afgesteld wordt op de juiste zitdiepte. Door middel van het losdraaien van de bout en de moer in het schuifstelsel van de hemiplegie armondersteuning, kunt u deze desgewenst naar voren of achteren instellen. Daarnaast is de hemiplegie armlegger op hoogte instelbaar.

### In gebruik nemen van de Fitform-fauteuil met hemiplegie armlegger

Leg uw aangedane arm in de hemiplegie armlegger voor optimale ondersteuning. U kunt alle stoelverstellingen gewoon gebruiken. Bij het naar achteren kantelen van de rugleuning en de zitting gaat de hemiplegie armlegger mee, doordat deze aan de zitting is bevestigd.



## 7. Afleverinstructie kyphose rugleuning instelbaar

### Instellen van de kyphose rugleuning

Opent u de rits aan de achterzijde van de rug. Maakt u vervolgens de flappen los door het klittenband aan de onderkant van de flap van elkaar te trekken. Links en rechts in het mechanisme bevinden zich 2 schroeven (op  $\pm 30$  cm hoogte (gemeten van de onderzijde van de rug)). Draait u met behulp van een inbussleutel de schroeven los. U kunt nu het knikpunt naar wens instellen. Draait u met behulp van een inbussleutel de schroeven weer vast. Het andere knikpunt is de hoofdsteun, deze stelt u in door de hoofdsteun naar voren of naar achteren te bewegen.

*Indien de fauteuil aan de zijkant van de rugleuning knoopsgaten heeft (sommige modellen), dan kunt u hierachter de inbusbouten losdraaien.*

Het middengedeelte van de rugleuning is extra zacht uitgevoerd middels zachter schuim.


## 8. Afleverinstructie wegklapbaar zijpand

Voordat het wegklapbaar zijpand in gebruik kan worden genomen dienen de transportschroeven te worden verwijderd. Deze transportschroeven zijn geplaatst om transportschade te voorkomen. Deze kunnen als volgt verwijderd worden:

- Laat de voetenbank geheel uitkomen
- Zet de fauteuil in de kantelstand (rugleuning en zitting achterover gekanteld.)
- Aan de voorzijde van de fauteuil (binnenzijde schetsplaten) bevinden zich de transportschroeven (één aan iedere kant), die u dient te verwijderen. De transportschroeven zijn gemerkt met een rode sticker.

### In gebruik nemen van de Fitform-fauteuil met wegklapbaar zijpand

Zorg dat de rolstoel zo dicht mogelijk tegen het zijpand van de stoel staat. Pak zittend in de fauteuil het zijpand aan de voorzijde beet en til deze langzaam zover mogelijk naar achteren. Het zijpand kan nu niet meer naar voren vallen. De rolstoeltransfer kan nu gemaakt worden.

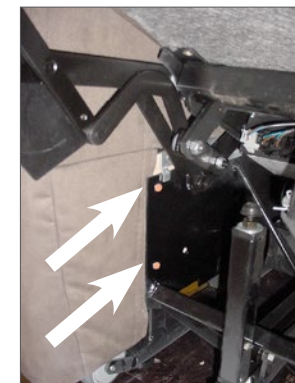

## 9. Afleverinstructie houten/transparante werktafel


### Gereed maken voor gebruik

Verwijder de tape aan de bovenzijde van de staander, deze zorgt ervoor dat de hoogte verstelling pen er niet uit kan vallen tijdens transport.

Het van hout resp. plexiglas gemaakte blad ligt verpakt op de zitting van de stoel. De staander is hier al aan bevestigd. Na het uitpakken van het tafelblad en de stoel kan de staander over de houder aan de zijkant van de stoel geschoven worden.

### Gebruik van de houten/transparante werktafel

Doordat de werktafel rust op een in hoogte verstelbare staander, kunt u alle stoelverstellingen gewoon gebruiken zonder dat de tafel dreigt af te breken. Neem de pen uit de metalen staander en plaats deze naar wens hoger of lager in de houten hoogteversteller. U kunt de werktafel zwenken in iedere gewenste richting.

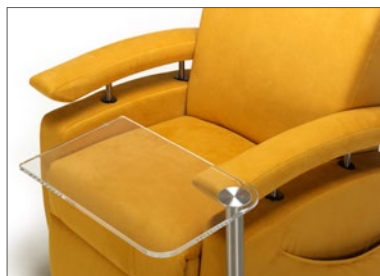

## 10. Afleverinstructie ILP rugleuning en ILP Extra rugleuning

Het instellen van de hoogte en dikte van de ILP en ILP Extra rugleuning dient door een daartoe opgeleid deskundig adviseur of ergotherapeut te worden gedaan.



ILP rugleuning



ILP Extra rugleuning




## 11. Afleverinstructie APPR zitsysteem

Controleer of een losse handpomp is meegeleverd. Met deze handpomp kunt u zowel de luchtcompartimenten in de rug als het ROHO zitkussen oppompen.

### Instellen zitting

Aan de voorzijde van de fauteuil waar de zitting overgaat in de voetenbank (1) vindt u het ventiel om het ROHO zitkussen op te blazen. Aan de onderzijde van de zitting (2) vindt u de instelknoppen waarmee de hoeveelheid lucht in de compartimenten van het zitkussen onafhankelijk van elkaar opgeslagen kan worden.

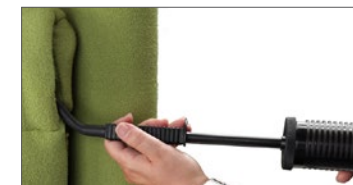

In de meegeleverde gebruiksaanwijzing van ROHO staan alle instructies voor het gebruik van dit zitkussen uitgebreid omschreven. Het instellen van een ROHO zitkussen dient altijd door een deskundig antidecubitus adviseur te worden uitgevoerd.



### Instellen rugleuning

In de rug bevinden zich meerdere opblaasbare compartimenten die voor een optimaal individuele ondersteuning zorgen. Aan de achterzijde van de rug vindt u een rits. Achter deze rits bevinden zich 4 luchtslangen met nippels (zie afbeelding) die ieder een eigen kleur hebben:

- Groen-geel gestreept ventiel is voor de lendesteun.
- Blauw ventiel is voor de zijdelingse ondersteuning (links en rechts) in de onderrug.
- Rood ventiel is voor de zijdelingse ondersteuning (links en rechts) in de bovenrug.
- Zwart ventiel is voor het luchtcompartiment aan de voorzijde van de rug waarmee de effecten van de overige luchtcompartimenten een beetje gecompenseerd kunnen worden zodat een zachter en comfortabeler gevoel ontstaat en de luchtstromen continu in beweging zijn.



Dit kunt u ook terugvinden op de meegeleverde kleurenkaart! De lucht zal niet snel uit de opblaasbare compartimenten verdwijnen. Desondanks is het toch belangrijk dit regelmatig te controleren, alsmede ook om te kijken of de instellingen nog steeds correct zijn voor u.

Fitform is een merk van Wellco International BV  
Postbus 247  
5680 AE Best

Tel.: +31 (0)499 - 33 88 88  
Fax: +31 (0)499 33 88 89

[www.fitform.nl](http://www.fitform.nl)  
[www.wellco.nl](http://www.wellco.nl)

Dit product is vervaardigd in een  
bedrijf dat is gecertificeerd met het  
Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen.

[www.nationaalkeurmerkhulpmiddelen.nl](http://www.nationaalkeurmerkhulpmiddelen.nl)



Fitform-fauteuils beschikken  
over het AGR Keurmerk voor  
rugvriendelijke producten.

[www.agr-ev.de](http://www.agr-ev.de)

