

Gebruiksaanwijzing voor uw eigen Fitform Wellness fauteuil!

Uw welzijn, onze passie!



Inhoud

1.	Voorwoord	4
2.	Belangrijke algemene informatie	5
2.1	Fitform	5
2.2	Algemene instructie en waarschuwingen	5
3.	Gebruiksaanwijzing elektrisch bedienbare fauteuils	10
3.1	Met losse handbediening	10
3.2	Met geïntegreerde bediening	15
4.	Gebruiksaanwijzing mechanisch verstelbare fauteuils	16
5.	Gebruiksaanwijzing verstelbare lendensteun	17
6.	Gebruiksaanwijzing diverse opties- en accessoires	18
6.1	Accu	18
6.2	Draaiplateau	20
6.3	Elektrisch bedienbare lendensteun en/of hoofdsteun	21
6.4	Handbediening met magneet	21
6.5	Infrarood	22
6.6	Memory	23
6.7	RCPM zitsysteem	24
6.8	Verwarming	24
6.9	Wielsysteem	25
7.	Meest gestelde vragen	26

1. Voorwoord

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Fitform-fauteuil. U heeft de juiste keuze gemaakt! Met deze aankoop heeft u zich verzekerd van jarenlang optimaal zitcomfort en een prima productkwaliteit.



Deze gebruiksaanwijzing is geschreven voor de gebruikers van Fitform-fauteuils. Leest u de informatie in dit boekje, voor in gebruik name, daarom zorgvuldig door. Naast adviezen en waarschuwingen rondom gebruik en een algemene gebruiksaanwijzing, vindt u hierin ook gebruiksaanwijzingen voor specifieke opties en/of accessoires.

Leest u ook de informatie in het apart bijgesloten Fitform informatieboekje.

Daarin vindt u tevens onderhoudsadviezen voor de bekleding van uw stoel.

Als u de instructies in deze gebruiksaanwijzing en in het Fitform informatieboekje goed opvolgt, kunt u jarenlang plezier hebben van uw Fitform-fauteuil!

Wij wensen u veel zitplezier toe.

2. Belangrijke algemene informatie

2.1. Fitform

Fitform is een Nederlands merk dat is gespecialiseerd in het design van functioneel, ergonomische technologie voor juist zitten. Fitform produceert moderne en comfortabele fauteuils met vele mogelijkheden en verstelmogelijkheden. Alle zitoplossingen voldoen aan de laatste wetenschappelijke inzichten met betrekking tot ergonomie.

Fitform is een merk van Wellco International BV.

Het adres van Wellco International BV is:
Randweg 17
5683 CL BEST
Nederland

Telefoon : +31 (0)88 3388100
Fax : +31 (0)88 3388199
Web : www.fitform.nl, www.wellco.nl

2.2. Algemene instructie en waarschuwingen

Uw Fitform-Wellnessfauteuil is grondig gecontroleerd door Wellco en wordt gereed voor gebruik geleverd. Uw leverancier zal aanwezig zijn op het moment dat u begint met het gebruik van de Fitform-fauteuil. Uw leverancier is getraind om de fauteuil nogmaals te controleren en zal, indien nodig, direct contact opnemen met Wellco International BV.



Wij adviseren u dit onderdeel van de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen omdat dit zaken bevat m.b.t. veiligheid en mogelijke gevaren. Volgt u alle instructies in deze gebruiksaanwijzing te allen tijde op.



Mechaniek

WAARSCHUWING: Deze fauteuil is voorzien van een krachtig motor mechaniek. Kijk eerst of er niets beklemd kan raken tussen de bewegende onderdelen van het mechaniek voor u de verstelmogelijkheden gaat gebruiken (kijk vooral goed uit wanneer er kinderen of huisdieren in de buurt zijn).



Plaatsing van de fauteuil

- Elke fauteuil moet zo worden geplaatst dat alle verstelmogelijkheden zonder enige obstructie kunnen worden gebruikt.
- Controleer of het elektriciteits snoer geen struikelgevaar op kan leveren.
- Om kanteling van de Fitform-fauteuil tijdens gebruik te voorkomen, moet de fauteuil geplaatst worden op een vaste, horizontale ondergrond.
- Ten alle tijden moet de netstroom van de fauteuil af te halen zijn. Zorg er dus voor dat u gemakkelijk de stekker uit het stopcontact kunt halen. Om de netstroom van de Fitform-fauteuil af te halen kunt u ook de transformator loskoppelen.
- Gebruik de fauteuil niet op een hellend vlak, of op een instabiel oppervlak (bijv. zand).
- De Fitform Wellnessfauteuil mag alleen binnenshuis gebruikt worden.



Gebruik

- De Fitform-fauteuil is ontworpen om 1 persoon tegelijkertijd in te laten zitten.
- Het maximum gewicht van de persoon in de fauteuil mag niet meer zijn dan 150 kg.
- Gebruik de fauteuil niet wanneer deze wordt belast met een gewicht groter dan 150 kg.
- Belast de actuator niet door herhaaldelijk op de handbedieningknoppen te drukken.
- Laat de stoel niet alleen bij kinderen.
- De gebruiker mag de fauteuil op geen enkele manier modificeren.
- Het is niet toegestaan om op de zitting of beensteun te gaan staan.
- Het is niet toegestaan om op een andere plek dan de zitting te gaan zitten (bijv. armluning of beensteun).
- Wellco zal geen verantwoordelijkheid op zich nemen voor onrechtmatig gebruik van de fauteuil.
- Hoewel de Fitform-fauteuil uitgebreid getest is, kan het nooit worden uitgesloten dat de fauteuil invloed heeft op de werking van elektromagnetische velden (bijv. alarm systemen).
- De beweging van de Fitform-fauteuil kan worden beïnvloed door sterke elektromagnetische velden (bijv. mobiele telefoons, elektrische generatoren of kracht bronnen). Wanneer uw fauteuil reageert op een stralingsbron en onverwacht gedrag vertoont, trek de stekker uit het stopcontact en probeer de stralingsbron te achterhalen.



Transport

Het is niet de bedoeling dat de Fitform-fauteuil wordt vervoerd nadat de fauteuil bij u is afgeleverd. Wanneer u verhuist naar een andere woning, moet de fauteuil net zo behandeld worden als de andere meubels in de woning. Zorg ervoor dat de fauteuil tijdens het transport niet kan verschuiven. Daarnaast adviseert Wellco om de stoel iets in de sta-oppositie te brengen (houten poten aan voorzijde ongeveer 2 cm. omhoog). Bescherm de fauteuil tegen extreme hoge of lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid of andere negatieve weersinvloeden. Voor optimale bescherming tegen stof en ander vuil is het verstandig om een laken over de fauteuil te leggen.

De Fitform-fauteuil moet vervoerd, gebruikt en opgeslagen worden volgens de volgende voorwaarden om zolang mogelijk gebruik te kunnen maken van het product.

Omgevingstemperatuur: 10 °C - 40 °C

Relatieve vochtigheid: 30% - 75%

Luchtdruk: 70kPA – 106kPA



Storing & mankementen

Controleer bij storing altijd eerst of de stekker in het stopcontact zit. In alle andere gevallen van storing, adviseren wij u de stekker uit het stopcontact te verwijderen en contact op te nemen met uw leverancier die de storing zo spoedig mogelijk zal trachten te verhelpen.

Bij schade aan het frame, motor, mechanisme of elektrische onderdelen, dient u direct contact op te nemen met uw leverancier.

Fitform is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke veroorzaakt is door onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik. In de gebruiksaanwijzing kunt u terugvinden over welke bewegingen uw fauteuil beschikt.

Onderhoud








Om ervoor te zorgen dat de smeermiddelen in het mechaniek niet uitdrogen is het verstandig om 1x per jaar de draaiende delen van het mechaniek in te spuiten met spuitbus-olie (bij voorkeur met Teflondeeltjes). Deze spuitbus-olie kunt u bij iedere Doe-het-zelf zaak aanschaffen of bij ons bestellen.

Indien het mechaniek bij het verstellen geluid maakt, is het waarschijnlijk dat de smeermiddelen ten gevolge van hoge kamertemperaturen zijn uitgedroogd. Wij adviseren u om ook dan bovenstaande procedure te volgen.

Wij raden de gebruiker aan om, na een periode van 5 jaar, de fauteuil elk jaar te controleren op veiligheid en onderhoud.

Het is niet toegestaan om zelf reparaties aan uw Fitform-fauteuil uit te voeren, of de fauteuil te laten repareren door een niet door Wellco geautoriseerde dealer. Wanneer een fauteuil door uzelf of door een niet geautoriseerde dealer is gerepareerd valt de fauteuil niet langer meer onder de garantie bepalingen van Wellco International BV en vervalt de product aansprakelijkheid.

Identificatielabel

	Well co International B.V. Randweg 17 5683 CL Best The Netherlands		Waarschuwingen/Warnings/Warnings <ul style="list-style-type: none"> • Alleen op vaste en vlakke ondergrond gebruiken Nur auf festem und ebenem Untergrund verwenden Only for use on solid and horizontal grounds • Niet voor vervoer van personen Nicht zum transport von Personen verwenden Do not use for transportation of persons • Lees de gebruiksaanwijzing Bedienungsanweisung lesen Read the manual
	Product Type/Typ: Wellness Datum/Date: Mm/yyyy Serie Nummer/Serialnumber: Xxxxxx Max. Gewicht/Max. weight: 150 kg		
Nom. spanning/Nennspannung/Rated supply voltage: 230 V Nom. vermogen/Nennaufnahme/Rated input power: 55 VA Max. inschakelduur/Max. Einschaltdauer/Duty cycle: 15% Max. inschakelduur/Max. Einschaltdauer/Duty cycle: 5 Minuten/Min.	 		
 50/60 Hz			IP20

3. Gebruiksaanwijzing elektrisch verstelbare relax- en / of sta-opfauteuil

3.1. Met losse handbediening



De bedieningsknoppen op de handbediening zijn erg gevoelig. Houd hier rekening mee, wanneer de handbediening in de zak wordt gestoken.

Handbediening HB1 (M1)

A. Naar de opststand

Met knop A komt de fauteuil langzaam in de opststand. De opstabeweging tilt u als het ware uit de stoel.

B. Terug naar de zitstand en de relaxstand

Met knop B komt u vanzelf weer terug in de zitstand. Indien u deze knop vasthoudt komt er een beensteun uit. Vervolgens kantelt de stoel naar achteren en bereikt u de relax/ruststand.

NB

Indien uw fauteuil beschikt over een zogenaamd veiligheidsslot heeft u onderin een extra grijze knop met een sleutel erop. Wanneer u deze indrukt tot het lampje gaat knipperen (ca. 10 sec), vergrendelt u de verstelbewegingen van de stoel. Wanneer u het knopje opnieuw indrukt en het lampje stopt met knipperen (ca. 10 sec) is deze weer ontgrendeld. Extra veilig bij kleine kinderen in huis.



Handbediening HB2 (M2)

A. Beensteun in

Met een druk op knop A, sluit de beensteun zich.

B. Beensteun uit

Met een druk op knop B komt de beensteun omhoog. Als u de beensteun hoger wilt dan de uiterste stand, dan kunt u dit doen middels knop D. Hierbij worden tegelijkertijd de rugleuning en de zitting wat naar achteren gekanteld om ervoor te zorgen dat u minder belasting op uw rug krijgt. Als de fauteuil in de opststand staat, kan de beensteun niet bediend worden. Controleer of de fauteuil geheel op de grond staat (knop D) als de beensteun niet uitkomt.

C. Naar de zitstand en de opststand

Met knop C komt de fauteuil vanuit de relaxstand weer terug in de zitstand. Door de knop vast te houden gaat de fauteuil door in de opststand en klapt de eventueel uitstaande beensteun automatisch in. Met deze knop wordt u als het ware uit de stoel getild.

D. Naar de zitstand en de relaxstand

Met knop D komt de fauteuil weer terug in de zitstand. Wanneer u de knop langer vasthoudt, gaat deze vanzelf over in de relax stand. Door daarna knop B in te drukken komt de beensteun uit en komt u in de ideale rusthouding.

NB

Indien uw fauteuil beschikt over een zogenaamd veiligheidsslot heeft u onderin een extra grijze knop met een sleutel erop. Wanneer u deze indrukt tot het lampje gaat knipperen (ca. 10 sec), vergrendelt u de verstelbewegingen van de stoel. Wanneer u het knopje opnieuw indrukt en het lampje stopt met knipperen (ca. 10 sec) is deze weer ontgrendeld. Extra veilig bij kleine kinderen in huis.



Handbediening HB3 (M3)

A. Beensteun in

Met een druk op knop A, sluit de beensteun zich.

B. Beensteun uit

Met een druk op knop B, komt de beensteun omhoog. Als u de beensteun hoger wilt dan de uiterste stand, dan kunt u dit doen middels knop D. Hierbij worden tegelijkertijd de rugleuning en de zitting wat naar achteren gekanteld om ervoor te zorgen dat u minder belasting op uw rug krijgt. Als de fauteuil in de opstand staat, kan de beensteun niet bediend worden. Controleer of de fauteuil geheel op de grond staat (knop D) als de beensteun niet uitkomt.

C. Naar de zitstand en de opstand

Met knop C komt de fauteuil vanuit de relaxstand weer terug in de zitstand. Door de knop vast te houden gaat de fauteuil door in de opstand en klapt de eventueel uitstaande beensteun automatisch in. Met deze knop wordt u als het ware uit de stoel getild.

D. Naar de zitstand en de relaxstand

Met knop D komt de fauteuil weer terug in de zitstand. Wanneer u de knop langer vasthoudt, gaat u vanzelf over in de relaxstand. Door daarna de knop B in te drukken komt de beensteun uit en komt u in de ideale rusthouding.

E. Rugleuning naar voren

Hiermee komt u 'rechter' te zitten.

F. Rugleuning naar achteren

Dit kan voor twee doeleinden gebruikt worden:

1. In de zitstand kan men de zithoek persoonlijk instellen. Let op, dat in de zitstand de rugleuning niet te ver naar achteren gesteld wordt, wat onderuitzakken tot gevolg heeft.
2. Wanneer u zich in de relaxstand bevindt, kunt u hiermee de rugleuning nog verder naar achteren bewegen, zodat u kunt slapen.

NB

Indien uw fauteuil beschikt over een zogenaamd veiligheidsslot heeft u onderin een extra grijze knop met een sleutel erop. Wanneer u deze indrukt tot het lampje gaat knipperen (ca. 10 sec), vergrendelt u de verstelbewegingen van de stoel. Wanneer u het knopje opnieuw indrukt en het lampje stopt met knipperen (ca. 10 sec) is deze weer ontgrendeld. Extra veilig bij kleine kinderen in huis.



Handbediening HB4 (M4)

A. Beensteun in

Met een druk op knop A, sluit de beensteun zich.

B. Beensteun uit

Met een druk op knop B komt de beensteun omhoog. Als u de beensteun hoger wilt dan de uiterste stand, dan kunt u dit doen middels knop D. Hierbij worden tegelijkertijd de rugleuning en de zitting wat naar achteren gekanteld om ervoor te zorgen dat u minder belasting op uw rug krijgt.

C. Naar de zitstand

Met knop C komt de fauteuil vanuit de relaxstand weer terug in de zitstand.

D. Naar de relaxstand

Met knop D komt u in de relaxstand. Door daarna knop B in te drukken komt de beensteun uit en komt u in de ideale rusthouding.

NB

Indien uw fauteuil beschikt over een zogenaamd veiligheidsslot heeft u onderin een extra grijze knop met een sleutel erop. Wanneer u deze indrukt tot het lampje gaat knipperen (ca. 10 sec), vergrendelt u de verstelbewegingen van de stoel. Wanneer u het knopje opnieuw indrukt en het lampje stopt met knipperen (ca. 10 sec) is deze weer ontgrendeld. Extra veilig bij kleine kinderen in huis.



Handbediening HB5 (M5)

A. Beensteun in

Met een druk op knop A, sluit de beensteun zich.

B. Beensteun uit

Met een druk op knop B komt de beensteun omhoog. Als u de beensteun hoger wilt dan de uiterste stand, dan kunt u dit doen middels knop D. Hierbij worden tegelijkertijd de rugleuning en de zitting wat naar achteren gekanteld om ervoor te zorgen dat u minder belasting op uw rug krijgt.

C. Naar de zitstand

Met knop C komt de fauteuil vanuit de relaxstand weer terug in de zitstand.

D. Naar de relaxstand

Met knop D komt u in de relaxstand. Door daarna knop B in te drukken komt de beensteun uit en komt u in de ideale rusthouding.

E. Rugleuning naar voren

Hiermee komt u 'rechter' te zitten.

F. Rugleuning naar achteren

Dit kan voor twee doeleinden gebruikt worden:

1. In de zitstand kan men de zithoek persoonlijk instellen. Let op dat in de zitstand de rugleuning niet te ver naar achteren gesteld wordt, wat onderuitzakken tot gevolg heeft.
2. Wanneer u zich in de relaxstand bevindt, kunt u hiermee de rugleuning nog verder naar achteren bewegen zodat u kunt slapen.

NB

Indien uw fauteuil beschikt over een zogenaamd veiligheidsslot heeft u onderin een extra grijze knop met een sleutel erop. Wanneer u deze indrukt tot het lampje gaat knipperen (ca. 10 sec), vergrendelt u de verstelbewegingen van de stoel. Wanneer u het knopje opnieuw indrukt en het lampje stopt met knipperen (ca. 10 sec) is deze weer ontgrendeld. Extra veilig bij kleine kinderen in huis.



3.2. Met geïntegreerde bediening

Het is mogelijk dat uw fauteuil is uitgevoerd met een in de stoel zelf geïntegreerde bediening in plaats van met een losse handbediening. Vergelijk uw fauteuil met de afgebeelde foto's en lees dan de voor u juiste gebruiksaanwijzing.

Zwarte 2-knopsbediening

Mogelijk is uw fauteuil uitgevoerd met een zwarte 2-knopsbediening aan de binnenzijde van het zijpand. De ene knop beweegt de stoel naar achteren tot uiteindelijk in de ligstand. De andere knop beweegt de stoel naar voren tot uiteindelijk in de sta-opstand. Vaak wordt deze knop gecombineerd met een opstaschakelaar.



Opstaschakelaar

Mogelijk is uw fauteuil uitgevoerd met een opstaschakelaar onder de voorzijde van de armligger. De ene kant van de schakelaar beweegt de stoel naar achteren tot uiteindelijk in de kantelstand. De andere kant van de schakelaar beweegt de stoel naar voren tot uiteindelijk in de sta-opstand. Deze schakelaar is altijd aanwezig in combinatie met andere bedieningsvormen. Voor een optimaal gebruik passend bij uw eigen natuurlijke zit-, relax-, en opstabeving adviseren wij u om voor het opstaan en weer gaan zitten de opstaschakelaar te gebruiken en voor het relaxen (beensteun uit, achterover kantelen) de andere aanwezige bediening.



Zilverkleurige bedieningsstrip

Mogelijk is uw fauteuil uitgevoerd met een tiptoets bedieningsstrip onder de armléuning of op het zijpand van uw fauteuil. De bedieningsstrip bevat 6 verschillende bedieningsknoppen. Door de bedieningsknop licht in te drukken, beweegt de desbetreffende functie van de fauteuil. De bedieningsstrip is zo geplaatst dat u deze vanuit de positie waarin u zich op dat moment bevindt, goed kunt bedienen.



RVS 4- of 6 knopsbediening

Mogelijk is uw fauteuil uitgevoerd met een RVS knopsbediening. Bij een 4-knops bediening heeft u 2 knoppen voor de beensteun en 2 knoppen voor de kantel- en sta-opverstelling. Bij een 6-knopsbediening zijn er ook nog 2 knoppen voor het verstellen van de rugleuning aanwezig. De knoppen die tegenover elkaar liggen heffen elkaar op, dat wil zeggen dat als de ene de beensteun uitklapt, dan zorgt de knop ertegenover dat de beensteun weer inklapt. De knoppen zijn zo geplaatst dat u deze vanuit de positie waarin u zich op dat moment bevindt, goed kunt bedienen.



“Easy touch” knoppen onder de armleuning

Mogelijk is uw fauteuil uitgevoerd met zogenaamde “easytouch” knoppen, bijvoorbeeld onder de armleuning van uw fauteuil. Deze knoppen activeren een verstelfunctie al zodra de vingers dicht in de buurt komen van de knop.



Handbediening HB3 (M3) met fitMotion

Uw Fitform-fauteuil is uitgerust met fitMotion. fitMotion is een automatisch beweegstelsel in de Fitform-fauteuil. Dit systeem wordt automatisch geactiveerd, zodra u plaatsneemt in de stoel.

Pressure Relief: deze bewegingmodule wordt automatisch geactiveerd wanneer U zit in de Fitform-fauteuil met de benen aan de grond (beensteun staat niet uit). Om de minuut kantelt de stoel 2x2 graden naar achteren en daarna 2x2 graden naar terug naar de uitgangspositie. Dit herhaalt zich continue.

Slow Motion: deze bewegingmodule wordt automatisch geactiveerd wanneer U zit in de Fitform-fauteuil met de beensteun uit. Om de 15 minuten krijgt U een trilsignaal, met als doel U erop te attenderen dat het tijd is om te gaan bewegen. Wanneer U de stoel zelf niet verstelt en/of uit de stoel gaat, gaat de stoel automatisch bewegen naar de Slow Motion uitgangspositie (dit is een relaxstand). Vanuit die positie gaat de stoel op 30% van de reguliere motorsnelheid heen en weer kantelen (schommelen). De beweging houdt 15 minuten aan, tenzij U deze onderbreekt door op iedere willekeurige knop op de handbediening te duwen. Ook dit herhaalt zich continue.

A. Beensteun in

Met een druk op knop A, sluit de beensteun zich.

B. Beensteun uit

Met een druk op knop B, komt de beensteun omhoog. Als u de beensteun hoger wilt dan de uiterste stand, dan kunt u dit doen middels knop D. Hierbij worden tegelijkertijd de rugleuning en de zitting wat naar achteren gekanteld om ervoor te zorgen dat u minder belasting op uw rug krijgt. Als de fauteuil in de opstastand staat, kan de beensteun niet bediend worden. Controleer of de fauteuil geheel op de grond staat (knop D) als de beensteun niet uitkomt.

C. Naar de zitstand en de opstastand

Met knop C komt de fauteuil vanuit de relaxstand weer terug in de zitstand. Door de knop vast te houden gaat de fauteuil door in de opstastand en klapt de eventueel uitstaande beensteun automatisch in. Met deze knop wordt u als het ware uit de stoel getild.

D. Naar de zitstand en de relaxstand

Met knop D komt de fauteuil weer terug in de zitstand. Wanneer u de knop langer vasthoudt, gaat u vanzelf over in de relaxstand. Door daarna de knop B in te drukken komt de beensteun uit en komt u in de ideale rusthouding.

E. Rugleuning naar voren

Hiermee komt u ‘rechter’ te zitten.

F. Rugleuning naar achteren

Dit kan voor twee doeleinden gebruikt worden:


1. In de zitstand kan men de zithoek persoonlijk instellen. Let op, dat in de zitstand de rugleuning niet te ver naar achteren gesteld wordt, wat onderuitzakken tot gevolg heeft.
2. Wanneer u zich in de relaxstand bevindt, kunt u hiermee de rugleuning nog verder naar achteren bewegen, zodat u kunt slapen.

G. Slow Motion functie activeren

Hiermee kunt u zelf de Slow Motion functie aan en uitschakelen. Wanneer het groene ledlampje brandt, is de Slow Motion beweging in werking.

H. Fitmotion systeem aan en uit zetten

Wanneer het groene ledlampje brandt is het automatische beweegstelsel geactiveerd. (Alleen wanneer iemand in de fauteuil zit).

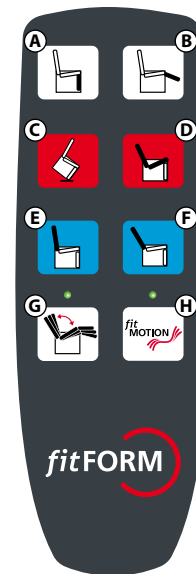

4. Gebruiksaanwijzing mechanisch verstelbare relaxfauteuils

Kanteling en beensteun

Door lichte lichaamsdruk naar achteren, waarbij u zich afzet op de armléuningen, ver stelt u de stoel in een kanteling naar achteren en komt de beensteun uit. De hoek tussen de rugleuning en de zitting verandert hierbij niet, waardoor u niet de neiging krijgt om onderuit te zakken. U bevindt zich nu in de relaxstand. Door nog wat verder te drukken kantelt de stoel nog verder naar achteren. U bevindt zich nu in de ligstand en u heeft minimale belasting op uw rug.

Door met uw benen tegen de beensteun te duwen en tevens wat voorover te gaan zitten, komt de stoel weer terug in de zitstand.

Rugverstelling

Middels de rugverstelling van de stoel krijgt u een grotere hoek tussen rugleuning en zitting. Zorgt u ervoor dat u de rugleuning niet zover ver stelt, dat u de neiging krijgt om onderuit te gaan glijden. Dit is geen verantwoorde zithouding en geeft onnodige belasting op uw rug. Vanuit de relaxstand kunt u de rugverstelling gebruiken om in een plattere ligstand te geraken.

5. Gebruik verstelbare lendensteun en hoofdsteun

Verstelbare lendensteun

Voor een optimale ondersteuning voor uw onderrug (lendengebied) is de Fitform-fauteuil voorzien van een in hoogte verstelbaar en met lucht in dikte aanpasbaar lendensteunkussentje (de lendensteun) dat gestoffeerd is in de rugleuning van uw fauteuil. Er zijn twee verschillende bedieningssystemen voor de verstelbare lendensteun

1. Fitform-fauteuil met ritssluiting achterop de rugleuning

Achter de ritssluiting bevindt zich een draaiknop en een blaasbalgje. Door de draaiknop los te draaien kunt u m.b.v. de knop zelf de lendensteun op de juiste hoogte instellen. Door in het blaasbalgje te knijpen wordt er lucht in de lendensteun gepompt en krijgt u meer ondersteuning. Door op het knopje te drukken dat zich op het blaasbalgje bevindt kunt u de lendensteun leeg laten lopen.

2. Fitform-fauteuil zonder ritssluiting achterop de rugleuning

Wanneer u uw hand steekt tussen de voorkant van de rugleuning en de zitting van uw fauteuil, treft u de bedieningselementen van de verstelbare lendensteun aan, zijnde een lus waarmee u de hoogte van de lendensteun kunt instellen en een blaasbalgje waarmee u de dikte van de lendensteun kunt instellen. Haal deze naar voren en leg ze op de zitting. Door voorzichtig te trekken aan een van de kanten van de lus, ver stelt u de lendensteun in hoogte. Door in het blaasbalgje te knijpen wordt er lucht in de lendensteun gepompt en krijgt u meer ondersteuning. Door op het knopje te drukken dat zich op het blaasbalgje bevindt, kunt u de lendensteun leeg laten lopen. Probeer u verschillende hoogten en dikten uit om de juiste ondersteuning te creëren. Wanneer u deze gevonden heeft, plaatst u dan de lus en het blaasbalgje weer terug tussen rugleuning en zitting. U kunt deze in de toekomst altijd weer ver stellen.



N.B. Voor beide systemen geldt dat de lendensteun ALTIJD leeg dient te zijn om deze goed in de hoogte te kunnen ver stellen.

Verstelbare hoofdsteun (topswing)

Wanneer uw fauteuil is uitgerust met een verstelbare hoofdsteun dan kunt u zelf de gewenste steun van uw hoofd bepalen door de rugleuning op de hoogte van ongeveer 30 cm. vanaf de bovenkant naar voren of naar achteren te bewegen. De hoofdsteun is bewust zo vervaardigd om ervoor te zorgen dat de hoofdsteun niet zomaar naar achteren omklapt op het moment dat u uw hoofd tegen de hoofdsteun plaatst.



6. Gebruiksaanwijzing opties & accessoires

(indien aanwezig op uw fauteuil)

5.1 Accusysteem

Dankzij het accusysteem heeft u niet meer continue een snoer in uw woonkamer. Om ervoor te zorgen dat uw Fitform-fauteuil met accusysteem te allen tijde goed blijft functioneren, is het belangrijk dat u deze gebruiksinstructies goed in acht neemt.

Belang van tijdig opladen van het accusysteem.

Het is belangrijk dat u het accusysteem van uw fauteuil tijdig oplaadt. Wij adviseren u om direct na levering, het systeem van uw Fitform-fauteuil 12 uur op te laden. Tijdens het opladen kan de fauteuil gewoon worden gebruikt.

Momenteel zijn er 2 verschillende accusystemen in omloop.

Systeem 1 (analoog)



Opladen bij systeem 1 (analoog)

Bij dit systeem is het raadzaam alléén op te laden wanneer de accusysteem bijna leeg is. Wanneer het accusysteem bijna leeg is, hoort u tijdens het bedienen van uw fauteuil een hoge pieptoon met korte interval. **Wanneer u continue om de paar seconden dit piepsignaal hoort, zijn de accu's diep ontladen en dienen deze, om blijvende schade te voorkomen, onmiddellijk en ca. 36 uur opgeladen te worden.** Na het opladen is het bij dit systeem altijd raadzaam om de acculader na het laden los te koppelen.

Systeem 2 (digitaal)



Opladen bij systeem 2 (digitaal)

Bij dit systeem is het raadzaam om (bij normaal gebruik) iedere 2 weken de accu ca. 6 uur op te laden. Bij dit systeem hoeft u na het opladen de acculader niet los te koppelen.

Methode van opladen van het accusysteem

1. Lokaliseer de aansluiting voor de accu oplader.

Deze bevindt zich meestal achter de ritssluiting aan de achterzijde van de rugleuning van uw fauteuil. Afhankelijk van het type Fitform-fauteuil dat u heeft aangeschaft kunt u deze ook aantreffen onder de (open) armleuning van uw fauteuil of onder het Fitformlabel aan de achterzijde van uw fauteuil.

2. Bij systeem 1 treft u een kunststof blokje aan dat met klittenband tegen de metalen plaat is bevestigd. Maak deze los en plug de laadsnoer in, sluit vervolgens uw stoel aan op het elektriciteitsnet (wandcontactdoos). Nu wordt het accusysteem opgeladen

3. Bij systeem 2 sluit u het laadsnoer en de los bijgeleverde accu oplader / trafo aan op de aansluiting in de armlegger of de plug achter de rits. Sluit het netsnoer van de los bijgeleverde accu oplader aan op het elektriciteitsnet (wandcontactdoos). Nu wordt het accusysteem opgeladen.

Lange tijd geen gebruik

Gaat u op vakantie of is er een andere reden waarom uw fauteuil lange tijd niet wordt gebruikt? De accu's in uw accusysteem lopen dan heel langzaam leeg. Het is daarom raadzaam deze op te laten voor vertrek en direct na uw terugkeer wanneer u de fauteuil weer in gebruik neemt.

Neutraalpositie

Indien uw fauteuil over een accusysteem beschikt, stopt deze niet automatisch in de neutraal positie.

Beensteunbeveiliging

Bij een accusysteem trekt de beensteun van uw Fitform-fauteuil automatisch in op moment dat de stoel ca. 5 cm in de sta-opstand staat. Wanneer de stoel hoger dan 5 cm in de sta-opstand staat, kan deze niet meer uitgeklapt worden.

6.2 Draaiplateau

Dankzij dit draaiplateau kunt u uw fauteuil gemakkelijk draaien.

Afleverinstructie Fitform-fauteuil met draaiplateau

Om transportschade te voorkomen, is de Fitform Wellness met draaiplateau op een plaat geplaatst. Hiervoor zijn twee stroken geplaatst over de draaischijf van het draaiplateau om te voorkomen dat de fauteuil tijdens transport verschuift. Bovendien staat de fauteuil iets in de opstand om de draai te blokkeren. Voordat u de fauteuil kunt gebruiken, dienen onderstaande stappen gevolgd te worden:

- Leg de fauteuil voorzichtig op de zijkant (let op voor de handbediening).
- Verwijder de 4 schroeven aan de onderzijde van de plaat middels een kruiskopschroevendraaier.
- Plak de meegeleverde plakviltten onder de draaischijf. (Doe dit om de ondergrond te beschermen en om oneffenheden te nivelleren.) Plak de plakviltten recht onder de plaats waar de wielen over de plaat lopen.



In gebruik nemen van de Fitform-fauteuil met draaiplateau

Met het draaiplateau kunt u de fauteuil laten draaien door met uw benen af te zetten tegen de grond. De fauteuil mag niet meer dan 180 graden naar beide zijden verdraaid worden (draai hiervoor de uitstulping van de onderplaat van het draaiplateau aan de rechter voorzijde van de fauteuil), aangezien er dan de kans bestaat dat de 220V voedingskabel tussen het mechaniek geraakt. (Dit geldt niet wanneer u een fauteuil heeft die is uitgerust met een accu.)

Bij aanwezigheid van een opstaliftfunctie in uw fauteuil wordt het draaiplateau automatisch zwaar geremd, wanneer de fauteuil in de opstand wordt gezet ivm de veiligheid. Het is dan ook raadzaam om de fauteuil bij het verlaten altijd (een stukje) in de opstand te zetten (of te laten staan), zodat deze niet wegdraait wanneer u opnieuw plaats neemt in uw fauteuil.



6.3 Elektrisch bedienbare lendensteun en/of hoofdsteun

Wanneer uw fauteuil beschikt over een elektrisch opblaasbare lendensteun en/of een elektrisch bedienbare hoofdsteun ontvangt u een zgn. "topline" handbediening. Alleen de functies die daadwerkelijk in uw stoel aanwezig zijn, kunnen worden bediend met deze handbediening.

De overige knoppen zijn zgn. "loze" knoppen.

Met de oranje knoppen kan de elektrisch verstelbare hoofdsteun naar voren en naar achteren versteld worden.

Met de lichtblauwe knoppen kan de lendensteun elektrisch worden opgeblazen. Met behulp van de knop die u vindt achter de ritssluiting op de achterzijde van de rugleuning kunt u de lendensteun ook op de gewenste hoogte plaatsen. Daarmee is uw rug altijd voorzien van de juiste ondersteuning. Let op: het in hoogte verstellen gaat alleen als de lendensteun helemaal leeg is!



6.4 Handbediening met magneet

Uw handbediening kan worden bevestigd aan het zijpand via een magneet.



Waarschuwing

Voor mensen die een pacemaker dragen is het raadzaam om deze bediening niet op de borst te leggen en op veilige afstand te houden (± 20 cm).

Wanneer de bediening dicht bij de pacemaker wordt gehouden kan de magneetschakelaar worden gesloten waardoor de pacemaker asynchroon gaat werken. Asynchroon houdt in dat herkenning van het eigen ritme is uitgeschakeld. Wanneer de magneet weer buiten het bereik is dan doet de pacemaker weer gewoon haar werk.

Een permanente magneet zoals op deze bediening veroorzaakt geen elektromagnetisch veld en zal derhalve geen schade toebrengen aan de pacemaker.

6.5 Infrarood handbediening

Dankzij de infrarood bediening heeft u geen snoer aan uw bedieningskastje.

Afleverinstructie: verwijderen van de transportbeveiliging

Om te voorkomen dat de infrarood ontvanger beschadigt tijdens transport, is deze aan de binnenzijde van het zijpand geplaatst. Voordat deze kan worden gebruikt dient u eerst de ontvanger te verplaatsen:

- Leg de fauteuil voorzichtig op haar zijkant (let op voor het bedieningskastje).
- Aan de binnenzijde van het zijpand (inzittend rechts) bevindt zich de infrarood ontvanger (bevestigd middels klittenband). Verwijder deze.
- Plaats de ontvanger vervolgens aan de onderzijde van het zijpand, middels het daar aanwezige klittenband.



In gebruik nemen van de Fitform-fauteuil met infrarood bediening

Als u de stekker van het zwarte snoer in het stopcontact steekt, is uw fauteuil klaar voor gebruik. Bij normaal gebruik dient u de batterij van het bedieningskastje om de ca. 2 jaar te vervangen.

In een erg grote ruimte is een infrarood besturing minder geschikt. Voor gebruik in de huiselijke sfeer werkt het systeem echter optimaal en is het zelfs mogelijk meerdere stoelen te voorzien van een onafhankelijk bedienbare infrarood bediening.



6.6 Memory functie

Wanneer uw fauteuil beschikt over een memory functie ontvangt u een zgn. "topline" handbediening. Alleen de functies die daadwerkelijk in uw stoel aanwezig zijn, kunnen worden bediend met deze handbediening. De overige knoppen zijn zgn. "loze" knoppen.

Dankzij de ingebouwde memory functie kunt u uw gewenste positie vastzetten in het geheugen (memory) zodat de fauteuil altijd met één druk op de knop in de door u vooraf ingestelde stand komt te staan.

Instellen

Stel eerst de gewenste positie van de stoel in.

Wanneer u deze positie wilt opslaan in het geheugen, drukt u 2x op de donkerblauwe knop 'MEM' en vervolgens op de donkerblauwe knop '1' (of '2'). Deze positie is nu opgeslagen in het geheugen van de fauteuil. Steeds wanneer u terug wilt naar deze positie, hoeft u alleen maar knop '1' (of '2') ingedrukt te houden, totdat de positie is bereikt.

Het is mogelijk om 2 voorkeursposities op te slaan in het geheugen.

Bij storing

Deze fauteuil is uitgerust met sensoren. In het geval dat er een storing optreedt, kunt u de motoren resetten.

U kunt dat doen door de stekker uit het stopcontact te halen terwijl u een van de motoren laat lopen door een willekeurige gele functiekноп op de handbediening ingedrukt te houden. Zodra de stekker uit het stopcontact is gehaald, kunt u de gele knop weer loslaten. Steek nu de stekker weer in het stopcontact. Op de handbediening zal er een blauw lampje gaan knipperen. Dan dient u de 'MEM' knop in te drukken (motoren beginnen te lopen) en ingedrukt te houden totdat alle motoren weer gestopt zijn. Het knipperen van het lampje zal nu ook stoppen en het systeem is gereset.



6.7 RCPM zitsysteem

Dankzij het RCPM zitsysteem blijft uw rug tijdens het zitten in beweging en worden rugklachten geminimaliseerd.

Het RCPM zitsysteem

RCPM is een nauwelijks merkbare draaibeweging. Gedurende 4 keer per minuut draait het zitgedeelte 0,8 graad naar links en naar rechts. De resultaten van RCPM zijn niet alleen wetenschappelijk erkend, ook de Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten 'de Wervelkolom' en inmiddels vele gebruikers zijn vol lof over de RCPM-technologie.

In gebruik nemen van het RCPM zitsysteem

Het RCPM zitsysteem kan worden aan- en uitgeschakeld middels de schakelaar die u vindt in de opbergtas van uw fauteuil of (indien er geen opbergtas aanwezig is) achter de ritssluiting aan de achterzijde van de rugleuning. Het RCPM zitsysteem wordt alleen geactiveerd wanneer er iemand plaatsneemt in de stoel. Op de aan/uit schakelaar brandt een rood lampje, wanneer deze geactiveerd is.



WAARSCHUWING

Wanneer fixatie van rug of bekken nodig is, wordt het gebruik van RCPM zitsysteem afgeraden. Tevens geen RCPM gebruiken bij een gebroken ruggenwervel en bij bekkeninstabiliteit.

6.8 Verwarming

Dankzij de ingebouwde verwarmingselementen beleeft u nog meer zitplezier, met een voor u aangename temperatuur.

Het aparte bedieningskastje (eventueel i.c.m. de optie Elektrisch opblaasbare lendesteun) voor de verwarming vindt u in een van de zakken aan de zijkant van de fauteuil. In zowel de rug als het zitkussen is een verwarmingselement aanwezig. Al na enkele minuten kunt u de warmte voelen.

U schakelt de verwarming aan door op de rode knop te drukken. Het led lampje op de bediening knippert langzaam. De verwarming is nu op de laagste stand ingeschakeld. Wanneer u nogmaals op de rode knop drukt, gaat het lampje sneller knipperen en is de verwarming hoger ingesteld. Wederom indrukken en u heeft de hoogste stand bereikt. Wanneer u vervolgens nogmaals drukt, schakelt de verwarming uit.



Aantal keer drukken

1x = aan
2x = hoger
3x = hoger
4x = uit

Temperatuur ca. onbelast

23 graden Celcius
25 graden Celcius
27 graden Celcius

Temperatuur ca. belast

30 graden Celcius
32 graden Celcius
34 graden Celcius

Temperaturen zijn indicatief, dit is namelijk ook sterk afhankelijk van soort bekleding en aard van de vulling die is gebruikt.

Na 20 minuten schakelt de verwarming automatisch uit. U kunt deze hierna direct weer inschakelen indien gewenst.

6.9 Wielsysteem

Dit wielsysteem maakt het mogelijk om uw fauteuil onbelast (zonder dat er iemand in zit) gemakkelijk te verrijden.

Afleverinstructie wielsysteem

Het wielsysteem is bij aflevering voorzien van zogenaamde transportpootjes. Deze moeten worden verwijderd alvorens u het wielsysteem in gebruik kunt nemen. Dit kan worden gedaan door de fauteuil voorzichtig op de zijkant te kantelen (let op: niet de zijkant waar de handbediening is gevestigd!). Nu kunt u de twee plastic transportpootjes die zijn bevestigd aan de voorzijde van de fauteuil verwijderen met een kruiskopschroevendraaier.



Voordat u de stoel gaat verrijden

- Zet uw fauteuil in de neutraalpositie.
- Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is verwijderd voordat u de stoel gaat verplaatsen. Het snoer kunt u opbergen in één van de opbergtui's aan het zijpand van de stoel.

Het verrijden van de stoel

Achter de ritssluiting aan de achterzijde van de rugleuning vindt u een hendel. Wanneer u de hendel omhoog beweegt komen de wielen op de grond en is de stoel verrijdbaar. Wanneer de hendel omlaag hangt zijn de wielen ingeklapt en is de stoel automatisch geremd. Dankzij dit systeem kunt u niet vergeten de wielen op de rem te zetten en wordt voorkomen dat de stoel plotseling verrijdt.



6. Meest gestelde vragen

Wat moet ik doen als de fauteuil niet meer werkt?

- controleer of de stekker in het **stopcontact** zit.
- controleer of de (eventueel aanwezige) **accu** leeg is.
- controleer of de handbediening op het **veiligheidsslot** staat.

Hoe werkt het veiligheidsslot?

Indien uw fauteuil beschikt over een zogenaamd veiligheidsslot heeft u onderin een extra grijze knop met een sleutel erop. Wanneer u deze 10 seconden indrukt tot het lampje gaat knipperen, vergrendelt u de verstelbewegingen van de stoel. Wanneer u het knopje opnieuw 10 seconden indrukt en het lampje stopt met knipperen is deze weer ontgrendeld. Extra veilig bij kleine kinderen in huis.

Het kan voorkomen dat u fauteuil ineens **niet** meer blijkt te **functioneren**. **Controleer** in dit geval dan altijd eerst of u niet per ongeluk het veiligheidsslot heeft ingeschakeld.

Wat moet ik doen als het lampje van de handbediening licht knippert?

U hoeft helemaal niets te doen. Er is niets ingeschakeld.

Hoe verstel ik de hoofdsteen (topswing)?

Veel van de Fitform-fauteuils zijn uitgerust met een **verstelbare** hoofdsteen. U kunt de gewenste steun van uw hoofd bepalen door de rugleuning op de hoogte van **± 30 cm van de bovenkant** van de rugleuning naar voren of naar achteren te bewegen.

Hoe stel ik de lendensteun in?

Indien uw fauteuil beschikt over een **verstelbare** lendensteun bevindt zich aan de achterzijde van de fauteuil een ritssluiting. Achter deze **ritssluiting** bevindt zich een **draaiknop** en een **blaasbalgje**. Door de draaiknop los te draaien kunt u mbv de knop, de lendensteun zelf op de juiste hoogte instellen.

Door in het blaasbalgje te knijpen wordt er lucht in de lendensteun gepompt en krijgt u meer ondersteuning. Door op het knopje te drukken dat zich op het blaasbalgje bevindt kunt u de lendensteun leeg laten lopen.

NB

Voordat u de lendensteun in hoogte gaat verstellen moet u de lendensteun leeg laten lopen.

Hoe kan het dat mijn fauteuil lijkt te wiebelen?

Omdat er een verstelmechaniek in de stoel aanwezig is, zal deze altijd een beetje bewegen. Wanneer de fauteuil niet in de uitgangspositie staat (helemaal op de grond), kan het zijn dat de fauteuil een beetje lijkt te **wiebelen**. Zet de fauteuil met behulp van de handbediening helemaal op de grond en de fauteuil staat weer stevig.

De beensteun komt niet uit?

Op alle Fitform-fauteuils zit een **beveiliging** zodat de beensteun niet uit kan wanneer men de sta-op functie gebruikt. Wanneer de beensteun niet uitkomt controleer dan eerst of de fauteuil niet omhoog staat. Staat de fauteuil goed (helemaal op de grond) en de beensteun komt nog niet uit, kijk dan of de stekker in het stopcontact zit ja/nee.

De fauteuil blijkt opeens te stoppen, wat moet ik doen?

Wanneer u vanuit de sta-op functie weer naar beneden gaat, stopt de beweging van de fauteuil zodra de fauteuil in de neutraal positie (helemaal op de grond) staat (dit is niet het geval bij een fauteuil met accu). Als u de knop even los laat en weer opnieuw indrukt zal de fauteuil weer gaan bewegen.

Mocht er iets aan de hand zijn met uw fauteuil wat u hiermee niet heeft kunnen verhelpen, neemt u dan contact op met ons Cliënt Support Center via 088 - 33 88 100 of e-mail service@wellco.nl. Wij helpen u dan graag verder.

Wat moet ik doen als mijn fauteuil tijdens het verstellen geluid maakt (piept, kraakt)?

Gedurende het gebruik van een verstelbare Fitform-fauteuil kan leder, of kunnen smeermiddelen van het mechaniek, licht uitdrogen. Dit kan geluid veroorzaken bij het verstellen, wat doorgaans vrij gemakkelijk te verhelpen is.

Indien het mechaniek piept of kraakt, is het verstandig om alle draaiende delen een keer in te spuiten met een spuitbusolie met teflon deeltjes. U kunt deze bij iedere doe-het-zelf zaak aanschaffen.

Indien er tijdens het verstellen geluid ontstaat door dat gestoffeerde delen langs elkaar bewegen, dan kunt u het beste bij:

Leder: wat talkpoeder aanbrengen op de plaatsen waar het ene lederen deel het andere raakt bij het verstellen. Indien dit onvoldoende werkt, kunt u bij uw Fitform-dealer of bij een plaatselijke meubelzaak een voor het leder op uw fauteuil geschikt leder onderhoud middel aanschaffen, waarmee u eerst het leder reinigt en vervolgens invet.

Stof: een mengsel maken in een plantenspuit van 1 dop (ca. 30 ml) wasverzachter op ca. 1 liter water. Spuit dit mengsel op de plaatsen waar het ene stoffen deel het andere raakt bij het verstellen.

Wat moet ik doen als er wat speling aanwezig is bij mijn Fitform-fauteuil?

Een verstelbare stoel heeft speling nodig om de ingebouwde electromotoren en het mechaniek voldoende ruimte te geven om te kunnen bewegen. Naarmate een stoel langer in gebruik is, kan die speling wat toenemen. Hier is van te voren in de fabriek goed rekening mee gehouden en dit heeft geen negatieve consequenties voor de duurzaamheid van uw fauteuil. U ontvangt niet voor niets 10 jaar Garantie Waarborg op uw Fitform-fauteuil!

Fitform is een merk van Wellco International BV
Postbus 247
5680 AE Best

Tel.: 0499 - 33 88 88
Fax: 0499 - 33 88 89

www.fitform.nl
www.wellco.nl

Dit product is vervaardigd in een
bedrijf dat is gecertificeerd met het
Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen.

www.nationaalkeurmerkhulpmiddelen.nl



Fitform-fauteuils beschikken
over het AGR Keurmerk voor
rugvriendelijke producten.

www.agr-ev.de

