



REHASENSE

Gebruikershandleiding

SPACE^I

Indoor Rollator



meer dan mobiliteit

1 Algemene informatie

Geachte klant

Deze gebruikershandleiding bevat een beschrijving van dit medische hulpmiddel en belangrijke aanwijzingen voor een correct en veilig gebruik. Het is van belang deze handleiding zorgvuldig door te lezen alvorens de rollator te gebruiken. Het is vooral van belang de veiligheidsvoorschriften te lezen en deze in acht te nemen.

REHASENSE is continue bezig met het verder ontwikkelen van haar producten en behoudt zich het recht voor om bepaalde specificaties en functies te wijzigen zonder daar over te corresponderen.

Indien u vragen heeft, wendt u zich dan a.u.b. tot uw dealer, of direct tot **REHASENSE**. De contactinformatie is op de laatste pagina van deze handleiding weergegeven.

2 Beoogd gebruik, indicaties & contra indicaties

Beoogd gebruik: De **Space I** rollator is ontworpen als een hulpmiddel om mensen te helpen die mobiliteitsproblemen ervaren, bijvoorbeeld met staan of lopen.

Dankzij deze rollator kunnen deze mensen onafhankelijk staan en lopen. Verder stelt dit hen in staat de meeste van hun dagelijkse taken en routines te kunnen blijven uitvoeren zonder dat ze daar direct hulp van anderen bij nodig zijn, de rollator is enkel ontworpen voor gebruik binnenshuis. Elk ander gebruik is niet toegestaan.

Indicatie: Het hulpmiddel is specifiek ontworpen voor mensen die vanwege allerlei mogelijke gezondheidsproblemen additioneel stabiele ondersteuning nodig zijn bij het lopen.

Contra indicatie: Het hulpmiddel mag niet gebruikt worden door mensen die grote problemen hebben met hun evenwicht of met een onvoldoende spierkracht om te kunnen staan of te lopen, zelfs met de extra ondersteuning van een rollator. De noodzaak en het beoordelen van de noodzakelijkheid voor het gebruik van een rollator voor een gebruiker dient altijd beoordeeld en geïndiceerd te worden door een arts of een fysiotherapeut.

3 Levering & algemene productomschrijving

De rollators worden in dozen aangeleverd, ingeklapt om ruimte te besparen en waardoor de doos makkelijker te hanteren is.

De inhoud van een doos:

- 1 ingeklapte rollator Inclusief mandje
- 1 dienblad
- 1 handig nettasje voor op de handgreep
- 1 gebruikershandleiding

Space I is zeer makkelijk wendbaar en zeer stabiel. Het handvat is voor iedere gebruiker op de juiste hoogte instelbaar. De delen zijn voorzien van een poedercoat laklaag.

Hij is opgebouwd uit twee aluminium frame-elementen uit speciaal profiel, verbonden door een scharend kruisframe. Hij is uitgerust met een boodschappentas om wat kleinere artikelen in mee te nemen en een plastic dienblad om niet al te grote of zware dingen op te kunnen vervoeren. De rollator is uitgevoerd met vier wielen van 150 mm doorsnede voor gebruik binnenshuis.

4 Veiligheidsvoorschriften

Vergewis u ervan dat deze handleiding door alle personen die gebruik maken van deze rollator doorgelezen is. De producent draagt geen verantwoordelijkheid voor schade en/of verwondingen opgedaan door het niet juist opvolgen van de voorschriften.




Beperking van gebruik

- De rollator mag in totaal met niet meer dan 110 kg belast worden.
- De boodschappentas heeft een maximaal toegestaan vulgewicht van 5 kg.
- De rollator is ontworpen voor gebruik enkel binnenshuis op een vlakke ondergrond.
- De rollator is niet bedoeld om op te zitten.
- De rollator moet op de handrem gezet worden als men er bij weg loopt.



Ongelukken vermijden

- Gebruik de rollator enkel waarvoor hij bedoeld is
- Gebruik de rollator enkel in goede technische staat.
- Maak geen technische aanpassingen aan de constructie van de rollator, tenzij U hiervoor een verklaring van de producent heeft, dat dit toegestaan is.
- Bij het aanpassen van de verschillende instellingen die mogelijk zijn op deze rollator dient men er goed op te letten dat geen vingers of andere delen van het lichaam bekneld raken tussen de bewegende delen.
- De rollator mag enkel gebruikt worden op een stabiele vloer.
- Tijdens gebruik van de rollator, dienen ALLE 4 de wielen te allen tijde in contact te zijn met de vloer. Dit stelt zeker dat men de rollator op de juiste wijze gebruikt waardoor ongelukken worden voorkomen.
- Indien men de rollator in stilstaande positie gebruikt, dient hij op de handrem te staan.

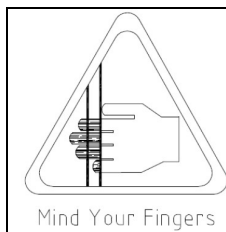

Wees voorzichtig indien U dit symbool op het apparaat ziet. Vingers of andere delen van het lichaam van de gebruiker of van een assistent kunnen bekneld raken wanneer het apparaat ingeklapt wordt of wanneer de beweegbare delen anders ingesteld worden. Wees uitermate voorzichtig bij het instellen van het apparaat. Let vooraf op de ruimte die overblijft tussen te bewegende delen om te voorkomen dat Uw vingers of andere delen van het lichaam bekneld raken.

5 Product details



6 Gebruik


Volgens het bovenstaande plaatje, zou logischerwijs duidelijk moeten zijn hoe de rollator ingesteld moet worden. Echter we raden u aan de onderstaande stappen te volgen:

Eerste controle

Neem in eerste instantie de rollator uit de doos en controleer aan de hand van bovenstaande afbeelding dat er niets mist. Indien U ontdekt dat er een onderdeel mist of dat er iets aan de rollator beschadigd is, dient u onmiddellijk Uw leverancier op de hoogte te stellen

Openen van de rollator

- Pak het handvat met beide handen vast terwijl de achterwielen op de grond staan. Duw het handvat naar beneden opdat het frame helemaal open gaat. Druk de rode sluitknop van het kruisframe op het frame waar het mandje in hangt. Druk door totdat U het mechanisme hoort klikken.

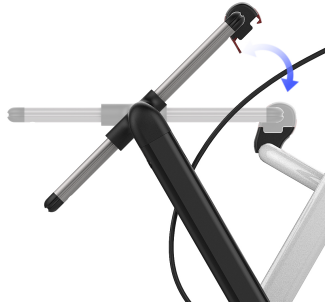


- Probeer het frame weer in te scharen. Als dat niet mogelijk is, dan bevindt het frame zich in de juiste positie op de juiste wijze vergrendeld. Zie de bovenstaande afbeelding voor de open positie.



- *Vergewis U er na het uitklappen van de rollator altijd van dat de frame delen goed vergrendeld zijn en niet meer naar elkaar toe bewogen kunnen worden.*
- *Vergewis U er altijd van dat het in hoogte instelbare handvat met de twee draaiknoppen altijd goed vastgezet is. Dit voorkomt dat het handvat onverwacht naar beneden glijdt zodra er druk op wordt uitgeoefend.*
- *Vergewis U er altijd van dat gemonteerde accessoires op de juiste wijze aangebracht zijn en goed vastgezet zijn voordat de rollator gebruikt wordt.*
- *Het niet goed opvolgen van deze veiligheidswaarschuwingen kan tot verwondingen leiden.*

Inklappen

- Druk op de rode sluitknop welke het frame waar het mandje in hangt verbindt met het scharnierende frame.
- Trek het frame waar het mandje in hangt naar boven en beweeg de twee scharnierende framedelen naar elkaar toe om de rollator in te klappen.

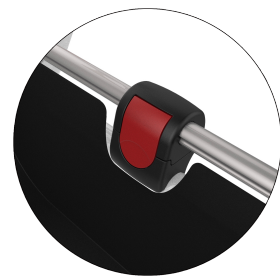

Hoogte-instelling van het handvat

- Draai de vergrendelingsdraaiknoppen linksom los
- Stel het handvat in op de gewenste hoogte.
- Draai de vergrendelingsdraaiknoppen rechtsom vast



- *De beide zijden van het handvat dienen op dezelfde hoogte ingesteld te worden.*
- *Bij correct afgesteld handvat dient deze ongeveer ter hoogte van de heup te staan.*

Het gebruik van de remmen

- Om de rollator te stoppen kunt U de remhendel naar het handvat toe inknijpen.
- Als U wilt blijven staan kunt U de rem ingeknepen houden.
- Als U weer vooruit wilt laat u de remhendel naar onderen los.



- *Houdt altijd de remmen ingeknepen als U niet van plan bent zich te verplaatsen.*
- *Laat de rollator nooit ergens staan zonder eerst de handrem er op te zetten.*
- *Laat de rollator nooit op een helling achter zonder dat de handremmen vastgezet zijn.*

Op de handrem zetten / van de handrem afzetten

- Om de rollator op de handrem te zetten, druk U remhendel helemaal naar beneden totdat U deze hoort of voelt vastklikken.
- Om de rollator van de handrem af te zetten knijpt u de remhendel naar boven totdat U deze los voelt klikken.



- *De rollator dient in een stationaire positie altijd op de handrem te staan.*

7 Reiniging

Algemeen:

- Reinig de rollator regelmatig en houd hem schoon.
- Klein los vuil en stof kan met een vochtige doek worden verwijderd..
- Groter vastzittend vuil kan met een niet-corrosief wasmiddel en warm water worden verwijderd.
- Gebruik geen harde schuurmiddelen of bleekmiddel. Dit kan schade of verkleuringen veroorzaken. Droog alle delen met een zachte doek.

Wielen:

- Reinig de wielen met warm water en een zacht wasmiddel. Droog ze af met een schone doek.
- Smeer de wiellagers regelmatig met een multi-purpose olie en als een wiel begint te piepen.

8 Label

Het productlabel is onderaan op een van de buizen van het zij-frame bevestigd: Het bevat belangrijke informatie betreffende productnaam, serienummer, productiedatum, artikelcode, max. gewicht in het mandje, breedte en hoogtematen en de gegevens van de producent.

9 Technische gegevens

Max. gewicht	110 kg
Max. vulgewicht van het mandje	5 kg
Totaalgewicht inclusief mandje	5,2 kg
Lengte uitgeklaapt	65 cm
Hoogte ingeklapt	91 cm
Breedte	54 cm
Lengte ingeklapt	27 cm
Hoogte van het handvat (instelbaar)	86 – 97 cm
Remmen	1 x handrem op twee wielen met parkeerremfunctie
Wielen (diameter x breedte)	4x 150 x 27 mm – met zachte bandjes uit zwart PU

10 Transport

De indoor rollator is een eenvoudig in te klappen en geschikt om mee te nemen op transport. Indien het noodzakelijk is dat u de rollator meeneemt, bijvoorbeeld in de auto of in een taxi, raden wij u aan deze in ingeklapte toestand mee te nemen.

De indoor rollator dient altijd op veilige wijze te worden vervoerd, zodanig dat hij vast staat en er geen kans bestaat dat hij kan bewegen bij plotseling remmen van het vervoersmiddel waarin hij getransporteerd wordt.

11 Onderhoud

- Vergewis U er van dat elke deel van de rollator zich altijd in goede staat bevindt.
- Controleer regelmatig of alle schroeven nog goed vastzitten. Indien ze niet goed vast zitten dient U deze aan te draaien.
- Gebroken, beschadigde of versleten delen dienen direct te worden vervangen.

12 Hergebruik

De rollator is geschikt voor hergebruik. Alvorens deze aan een andere gebruiker wordt aangeboden dient hij aan een inspectie worden onderworpen door de vakhandel.

De volgende punten dienen te worden gecontroleerd:

- Visuele inspectie van het frame
- Aangedraaid zijn van bouten en moeren
- Conditie van de kunststof delen
- Toestand van wielen en kogellagers
- Conditie en werking van de remmen

Wanneer een van de onderdelen beschadigd of kapot is dient deze te worden vervangen door een nieuwe. Het wordt aanbevolen om bij hergebruik de wielen te vervangen. Alle losse bouten en moeren moeten worden aangedraaid.

Voor het opnieuw in gebruik stellen moet het product grondig worden gereinigd.

LET OP! Het is verboden om de rollator te hergebruiken wanneer het frame verbogen of gebroken is.

Bij hergebruik dient er weer een gebruiksaanwijzing bij de rollator meegegeven te worden.

13 Afvoer van het product

Het apparaat hoort niet bij het normale huisvuil te worden gezet maar aan een recyclingstation te worden aangeboden.

14 Garantie

De producent geeft 2 jaar garantie op productiefouten. Deze garantie is niet geldig wanneer de rollator niet volgens de gegeven voorschriften is gebruikt.

**Neem in geval van technische problemen contact up met Uw dealer.
U kunt ook direct met Rehasense contact opnemen.**

Dealer:

Rehasense® Europe

Manufacturer

Rehasense Sp. z o.o.

Sulejowska 45g
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland

Rehasense Benelux

Markeweg 81
8398 GM Blesdijke
Nederland



REHASENSE

www.rehasense.nl
info@rehasense.nl