

**Natuurlijk medisch huidpoeder (Medisch Hulpmiddel, Klasse IIb) voor de lokale binding van histamine en ontstekingsvocht bij verwondingen en irritaties van de huid.**

*Beste gebruiker,*

*Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u, die u bij het gebruik van dit medisch zelfzorgmiddel in ogenschouw dient te nemen. Neem bij vragen contact op met uw arts of therapeut.*

**Toepassing**

Natuurlijk medisch huidpoeder voor de lokale binding van histamine en ontstekingsvocht bij verwondingen en irritaties van de huid, met name bij:

- schaafwonden en snijwonden;
- huidwonden met beschadigde (gebarsten) onderhuid;
- lichte brandwonden, bijv. zonnebrand;
- insectenbeten/-steken (geen vervanging voor een anti-allergeen!);
- huidirritaties.

**Dosering en duur van het gebruik**

Tenzij anders voorgeschreven door uw arts of therapeut;

- strooi het poeder op het aangetaste gebied van de huid.
- indien nodig de wond bedekken met een steriel verband of een steriel gaasje.
- huidpoeder meerdere keren per dag aanbrengen, op opeenvolgende dagen;
- herhaal de toediening alleen nadat de wond is schoongemaakt;
- verschoon het behandelde gedeelte minimaal eens per 24 uur;
- om de wond schoon te maken, gebruik alleen schoon, gekookt, water dat is afgekoeld tot kamertemperatuur.

**Let op**

- deze huidpoeder is geen vervanging voor een anti-allergeen!
- de huidpoeder mag alleen worden gebruikt voor de toepassingen beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- strooi het huidpoeder niet in het oog!
- stop met het gebruik als u een ongebruikelijk effect bemerkt. Indien nodig, raadpleeg dan een arts of apotheker.
- na het gebruik van medicinale crèmes, zalven, enz. wacht ten minste 60 minuten voor het aanbrengen van deze huidpoeder. In geval van twijfel neemt u contact op met uw arts of apotheker over het gebruik van dit natuurlijke medische huidpoeder samen met andere medicijnen.
- vermijd contact met gebruikt huidpoeder, alsmede de behandelde wond.
- open het potje met huidpoeder zorgvuldig. Verwijder gemorst poeder met een vochtige doek.
- na verwijdering van huidpoeder uit de pot, mag de huidpoeder slechts eenmaal worden gebruikt.

**Bewaring en houdbaarheid**

- buiten bereik van kinderen bewaren.
- bewaar op een droge plaats bij een temperatuur lager dan 60 ° C.
- beschermen tegen direct zonlicht.
- zie voor de houdbaarheid de opdruk aan de rand van het etiket.

**Ingrediënten**

MANC (=geactiveerd natuurlijk Clinoptiloliet Zeoliet)

**Fabrikant van dit medische zelfzorgmiddel**

Froximun AG, Neue Straße 2a, 38838 Schlanstedt, Duitsland

Telefoon: +49 39401 632-0, fax: +49 39401 632-199

E-mail: [info@froximun.de](mailto:info@froximun.de)

Web: [www.froximun.de](http://www.froximun.de)

FROXIMUN TOXAPREVENT SKIN is een Europees gecertificeerd Medisch Hulpmiddel, voorzien van een CE-markering.



**Importeur voor Nederland, België, Luxemburg:**

Zeodetox, Lireweg 5, 7051 HW Varsseveld, Nederland

Tel: +31 (0)315 76 90 29

E-mail: [info@zeodetox.com](mailto:info@zeodetox.com)

Web: [www.zeodetox.com](http://www.zeodetox.com)