



Sonic Alert

**SONIC BOOM WEKKER MET TRILKUSSEN**  
**Model SBA475ss**



**GEBRUIKSAANWIJZING**

**BELANGRIJK-** lees voor gebruik deze instructies aandachtig door en bewaar deze voor naslagwerk in de toekomst.

**Waarschuwing:** Om brand of elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet blootgesteld worden aan regen of vocht. Alvorens de netaansluiting te gebruiken dient u zich ervan te verzekeren dat specificaties die benodigd zijn voor dit apparaat overeen komen met de meegeleverde adapter bijvoorbeeld AC 230 V 60 Hz.

**ALGEMENE GEGEVENS:**

Stroomverbruik: 8w, 120V/60Hz (Adapter AC ~9V 750 MA)


UL gebruikers transformator (Underwriters Laboratories)

Made in China

Sonic Alert 1050 East Maple Rd, Troy, MI 48083

[www.sonicalert.com](http://www.sonicalert.com) 1-800-566-3210 V/TTY

## INSTRUCTIES ANALOGE WEKKER MET TRILKUSSEN MODEL SBA475SS

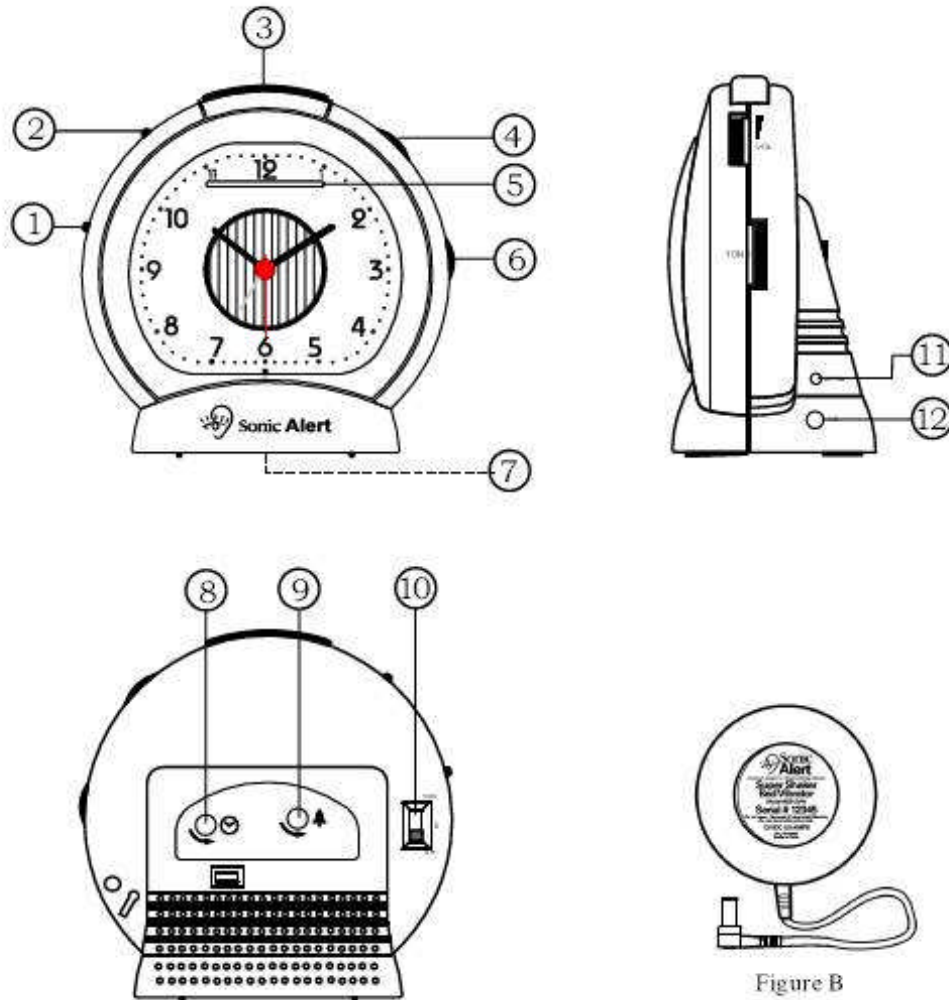

### Kenmerken welke in de figuren hierboven beschreven staan:

- |                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Functie schakelaar            | 7. Batterij compartiment     |
| 2. Nachtverlichting dimmer Hi/Lo | 8. Tijd instelknop           |
| 3. Snooze knop                   | 9. Alarm instelknop          |
| 4. Volume regelaar               | 10. Nachtverlichting aan/uit |
| 5. Knipperend licht display      | 11. Adapter ingang           |
| 6. Toon regelaar                 | 12. Trilkussen ingang        |

### **AC-9V Stroom ingang**

Bevestig de adapter aan de achterzijde van de wekker in de ingang AC-9V (11) naast de VIBRATOR ingang (welke smaller is)

**OPMERKING:** BELANGRIJK: verwar niet de AC POWER INPUT (11) met de VIBRATOR INPUT (12)

### **De correcte tijd instellen**

1. draai de tijd instel knop (8) met de klok mee tot de wijzers van de uren en de minuten de gewenste tijd aangeven

### **Het alarm instellen**

1. Draai de alarm instel knop (9) met de klok mee, tot de alarmwijzer op de gewenste tijd staat.

### **Alarm**

Om het alarm aan te zetten, schuift u de functie schakelaar (1) naar de positie welke u wenst om door gewekt te worden. U kunt kiezen uit: VIB voor het trilkussen, BUZZ voor geluid en VIB/BUZZ voor beide.

**OPMERKING:** welke functie u ook kiest, dit heeft geen effect op het knipperen van licht display en de nachtverlichting. Dit gaat door tot het alarm gestopt wordt.

### **Sluimer functie**

Druk op de Snooze knop (3) nadat het alarm afgegaan is. Het alarm zal na ongeveer 4 minuten weer af gaan.

### **Alarm uitzetten**

Het alarm kan worden uitgezet door de schuif (1) naar OFF te schuiven.

### **Volume regelaar**

Om het volume te regelen, draait u aan de regelaar (4) aan de rechterkant van de wekker

### **Toon regelaar**

Om de klank en toonhoogte aan te passen, draait u aan de regelaar (6) aan de rechterkant van de wekker.

### **Trilkussen –figuur B**


1. plaats de stekker van het trilkussen aan de achterzijde van de wekker in de VIBRATOR input(12)
2. om de trilfunctie te activeren, schuift u de functie schakelaar (1) naar VIB of VIB/BUZZ
3. leg het trilkussen onder uw hoofdkussen of matras.

### **Nachtverlichting**

De blauwe nachtverlichting kan uitgeschakeld worden door middel van knop (10) aan de achterzijde van de wekker. De helderheid van de nachtverlichting kan worden aangepast door middel van de schakelaar (2) Hi/Lo aan de zijkant van de wekker.

### **Batterij back-up**

Om gebruik te kunnen maken van een batterij back-up kunt u een 1.5 V AA alkaline batterij plaatsen aan de onderzijde van de wekker in het batterij compartiment (7). We maken u erop attent dat de nachtverlichting, trilkussen en het geluid niet werken bij stroomuitval. Uw alarm en tijdsinstellingen worden opgeslagen wanneer de stroomtoevoer hervat is.

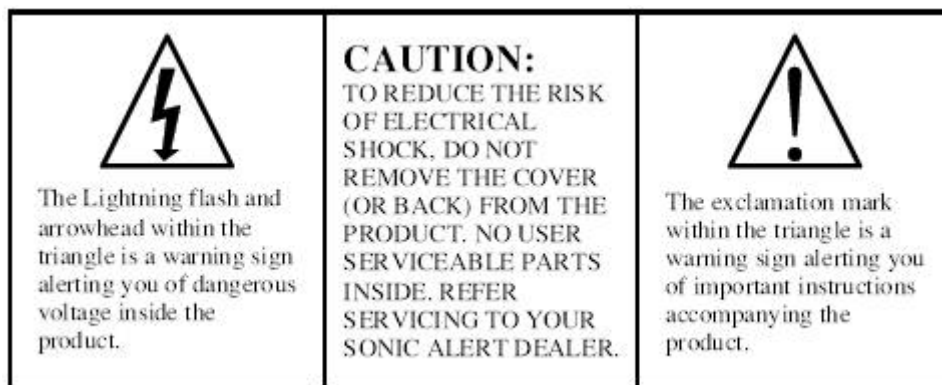

**WAARSCHUWING: Om brand of elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet blootgesteld worden aan regen of vocht**

Sonic Alert's gelimiteerde garantie tot 1 jaar

De Sonic Boom Wekker model SBA475ss is gegarandeerd tegen fabricagefouten voor de periode van één (1) jaar vanaf de datum van aankoop. Binnen deze periode zal Sonic Alert, tegen onze beoordeling, de SBA475ss repareren of vervangen zonder kosten voor onderdelen en werkloon. Verstuurt u gewoon de SBA475ss (voldoende gefrankeerd) en een kopie van uw betalingsbewijs naar:  
Sonic Alert Inc, 1050 E. Maple Road, Toy MI 48083

Dit apparaat voldoet aan regel 15 van de Federal Communications Rules. Gebruik hiervan is toegestaan op de conditie dat dit apparaat geen schadelijke interferentie veroorzaakt.

Opmerking: De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige interferentie van radio of TV, veroorzaakt door niet toegestane modificaties aan dit apparaat. Dergelijke modificaties zorgen voor een nietig verklaring van het gebruik van dit apparaat door de gebruiker.