

behear.smarto

# Gehoorversterker



*Model: ABH-410*

## Korte handleiding

BeHear SMARTO® is een eenvoudige maar krachtige persoonlijke gehoorversterker met Bluetooth-connectiviteit waarmee u de wereld weer beter hoort!

## 1. Wat zit er in de doos?




Hoofdtoestel



Oplaadstation



On-ear  
hoofdtelefoonIn-ear  
hoofdtelefoon  
(oordopjes)

Oplaadkabel

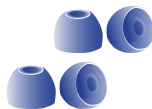
Oordopjes  
(verschillende  
soorten en maten)

Koord

## 2. Een hoofdtelefoon kiezen en verbinden

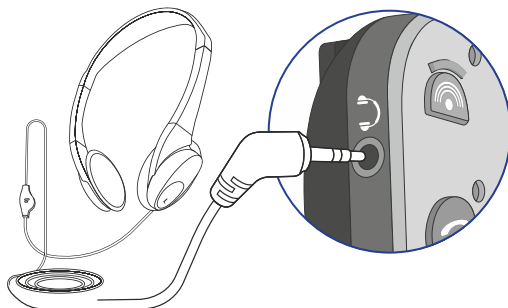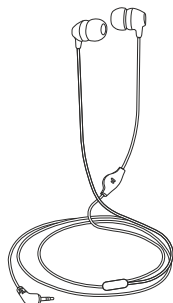

### 3. Zet de hoofdtelefoon op

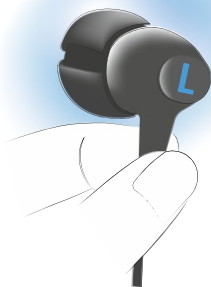

«L» - linkeroor

«R» - rechteroer

### 4. Maak het toestel vast (optioneel)


Met koord




Met clip




## ▶ AAN/UIT

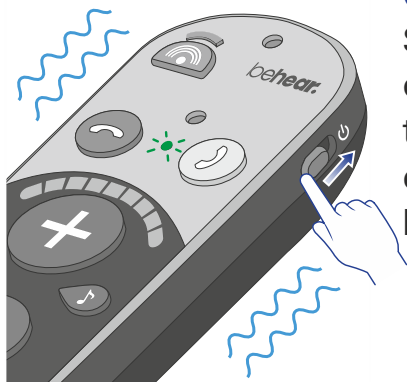**Om AAN te zetten:**


Schuif de aan-uitknop omhoog en houd hem vast totdat het toestel gaat trillen en het ledlampje groen knippert. 

**Om UIT te zetten:**

Schuif de aan-uitknop omhoog en houd hem vast totdat het toestel gaat trillen en het ledlampje rood knippert. 



## ▶ Volume\*

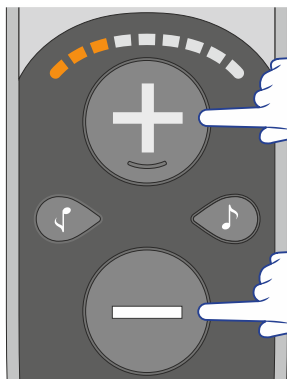



Volume verhogen


Volume verlagen


*\* Er worden drie verschillende  
volumebereiken ondersteund.  
Zie pagina 8 voor meer  
informatie.*

## ▶ Lage/hoge tonen

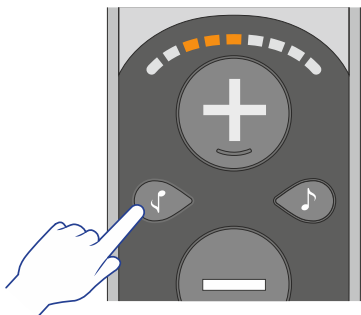




 Lage tonen  
versterken

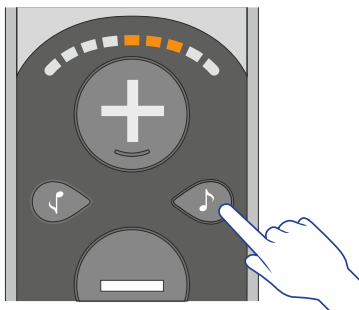

Hoge tonen  
versterken 

## ► Geluidsfocus


Schakel tussen de modus **Omni** (alle richtingen) en **Voorkant**.

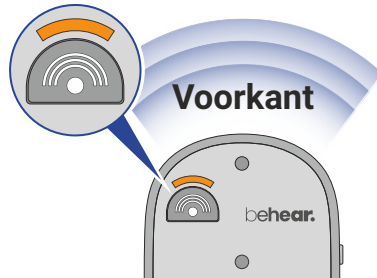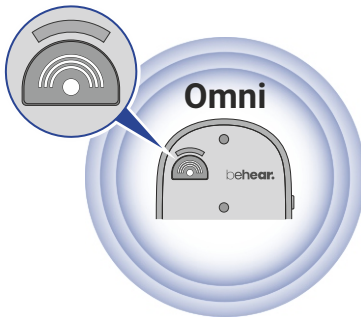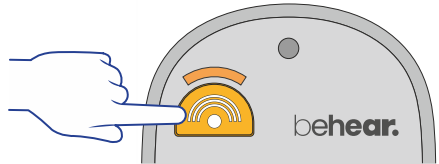



In de **Voorkant**-modus moet u SMARTO richten op het geluid om erop te focussen.

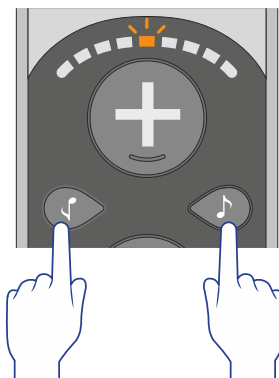

## ▶ Balans tussen links en rechts




Houd  en  5 seconden lang gelijktijdig ingedrukt, totdat de volumeschaal begint te knippen.




Terwijl de volumeschaal knippert doet u het volgende:




Tik op  om de voorkeur in te stellen op het linker oor.



Tik op  om de voorkeur in te stellen op het rechter oor.

## ► Maximaal volume

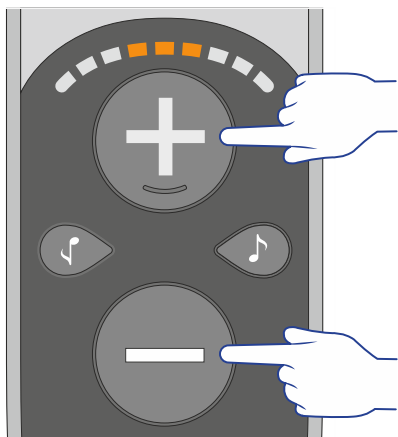

Houd **+** en **-**  
5 seconden lang  
gelijktijdig ingedrukt  
om te scrollen tussen  
de 3 volumebereiken.



Laag



Gemiddeld  
(standaard)



Hoog\*




*\* Als de instelling 'Hoog' niet luid genoeg is, voer dan de gehoorscreening in de app uit om het volume een extra boost te kunnen geven. Zie sectie **G**.*

**WAARSCHUWING:** Gedurende langere tijd op hoog volume naar geluid luisteren kan uw gehoor beschadigen.



## Vergrendelen/ontgrendelen

Om onbedoelde bediening te voorkomen, kunt u alle bedieningsknoppen vergrendelen door deze drie knoppen 5 seconden lang gelijktijdig ingedrukt te houden totdat het rode ledlampje één keer knippert.

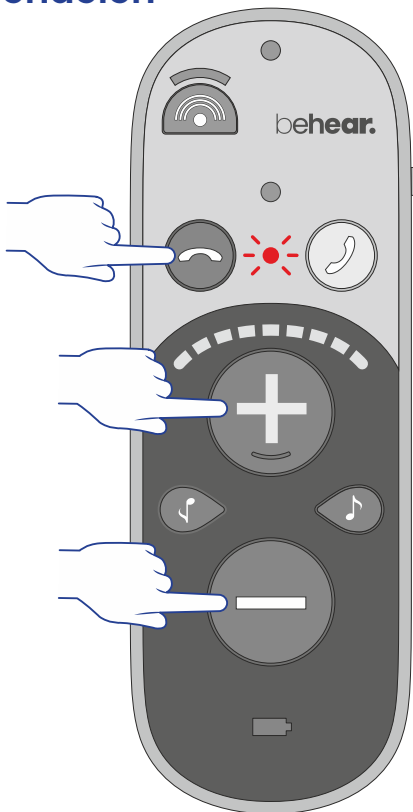


Om de knoppen te ontgrendelen herhaalt u deze actie totdat het groene ledlampje één keer knippert.

# D

## Batterij


### ► Het batterijniveau controleren

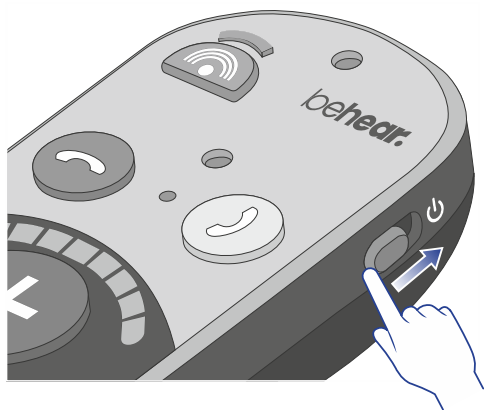


Schuif de aan-uitknop kort omhoog en let op de kleur van het batterijledlampje.




**Goed**  
>50%

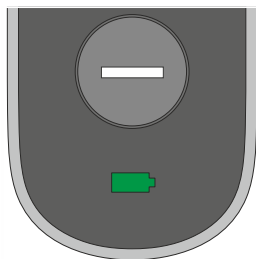


**Redelijk**  
>10%

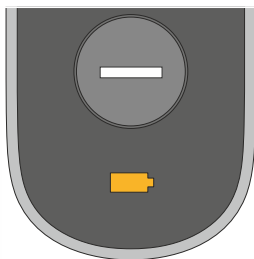

**Laag**  
<10%

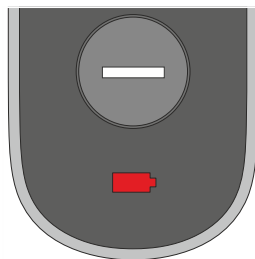

## ▶ Opladen met de houder

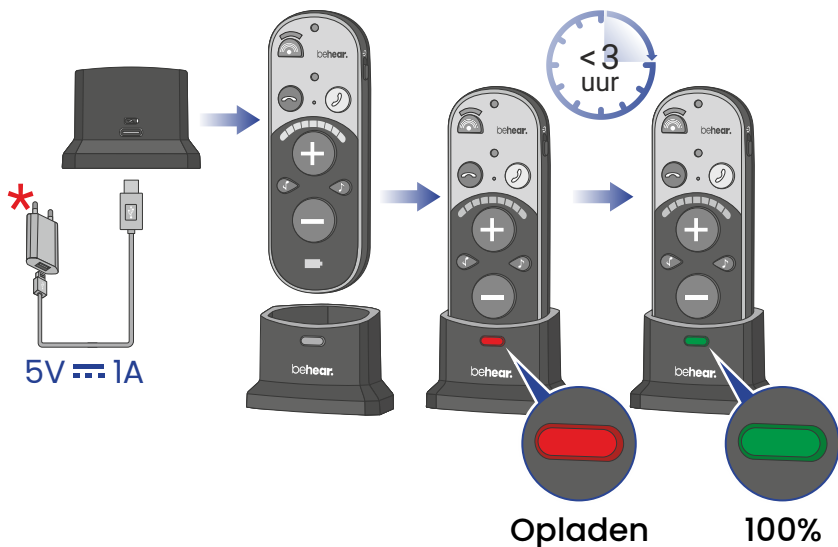


## ▶ Opladen zonder de houder



\* Wandstekker apart verkrijgbaar


## ▶ Eerste keer verbinden



Schuif de aan-uitschakelaar omhoog en houd hem ingedrukt totdat het ledlampje afwisselend **rood** en **blauw** knippert. 




Selecteer 'BeHear SMARTO' in de lijst met beschikbare Bluetooth-apparaten.

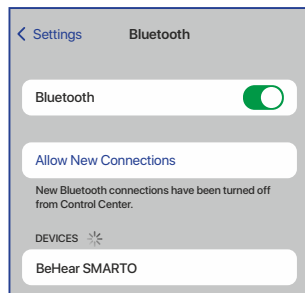


Het ledlampje knippert **blauw** zodra BeHear SMARTO verbonden is.

## ▶ Telefoonoproepen beheren

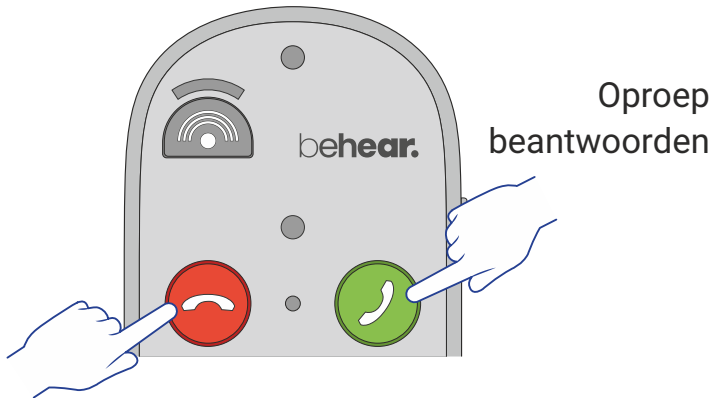


Oproep weigeren/beëindigen


## ▶ Luisteren naar audio

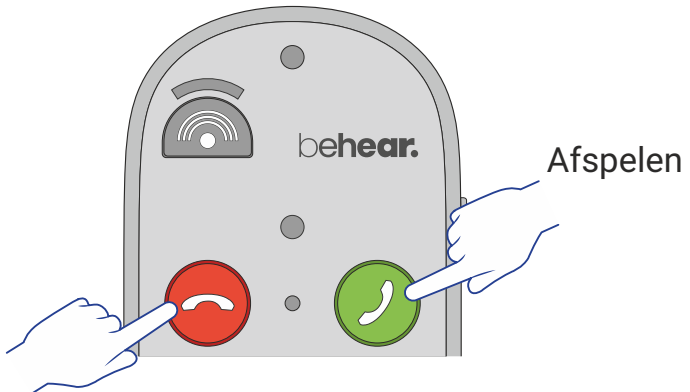

Pauzeren

Gebruik de BeHear-app om het noodtelefoonnummer voor uw SMARTO in te stellen.

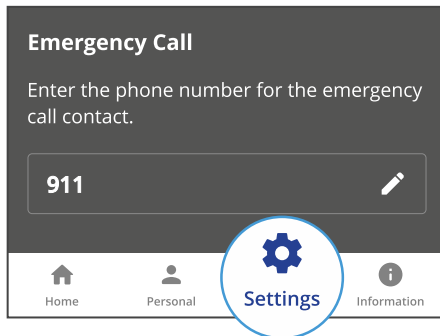

Om het vooraf gedefinieerde telefoonnummer te bellen, drukt u op  en houdt u de knop ingedrukt totdat het ledlampje rood knippert.



*Een Bluetooth-verbinding is vereist.*



## ► Speciale functies in de BeHear-app

**Tinnitus maskeren** – Pas een geluid aan om het ongemak dat veroorzaakt wordt door tinnitus te verlichten. Zie sectie **I** voor meer details.

**Spraak vertragen** – Pas EasyListen™ toe om de verstaanbaarheid van telefoongesprekken te verbeteren.

**Geluid afstellen** – Voor het instellen van ruisonderdrukningsniveaus, de balans tussen de oren, het beste geluidspunt, enz.


**Echte personalisatie** – Voer een gehoorscreening uit voor een aangepaste versterking op alle frequenties.

**Draadloze updates** – Ontvang de nieuwste functies, die draadloos geleverd worden.

**Knoppen vergrendelen/ontgrendelen** – Voorkom onbedoelde bediening voor specifieke functies.

Pas de akoestische prestaties van de versterker aan op basis van uw eigen gehoorvoorkeuren.


1. Zet de hoofdtelefoon op die u wilt personaliseren.

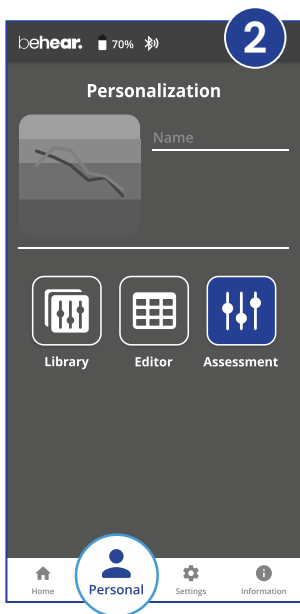


2. Selecteer Persoonlijk >> Screening in de BeHear-app.




3. Bevestig het type hoofdtelefoon dat u draagt.

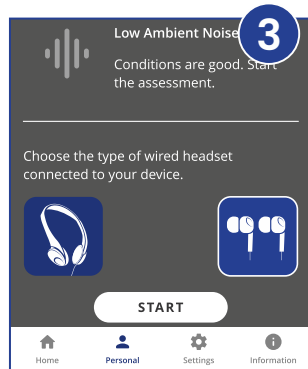

4. Volg de aanwijzingen om de gehoorscreening uit te voeren.

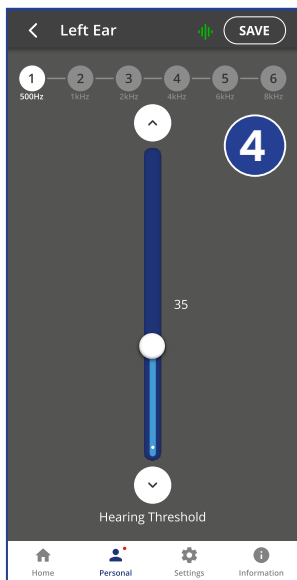


5. Sla de resultaten op en pas ze toe.

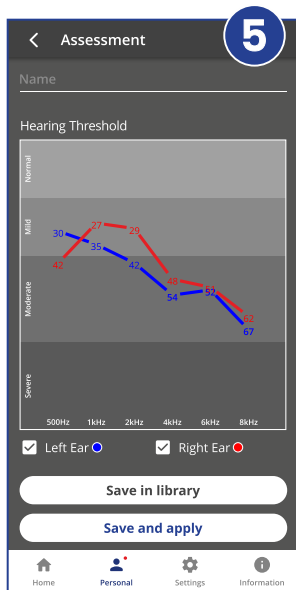


Geluidstherapie voor het maskeren van tinnitus is ontworpen om het ongemak van tinnituspatiënten te verlichten.


In de persoonlijke gehoormodus kunt u het maskerende ruisbestand activeren om uzelf af te leiden van uw tinnitus.

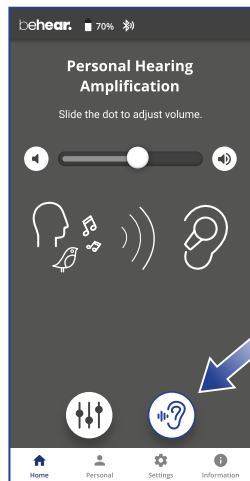

Deze ruis kan worden aangepast qua volume, toon, frequentie, modulatie en balans tussen beide oren met de **BeHear**-app.

U kunt toegang krijgen tot deze parameters door te tikken op het pictogram op het startscherm. 

Zie sectie  voor instructies over het downloaden van de app.

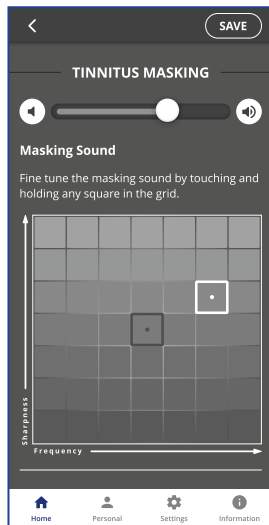

- |  |  |
|--|--|
| Geen geluid  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Controleer of de hoofdtelefoon is aangesloten.</li><li>▶ Controleer of de batterij is opgeladen.</li><li>▶ Pas het volume aan.</li></ul> |
| De oordopjes zitten niet comfortabel                   | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Probeer verschillende siliconen oordopjes uit.</li></ul>   |
| Muziek en/of telefoonoproepen worden niet doorgestuurd | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Controleer of de Bluetooth-verbinding werkt.</li></ul>   |
| De verbinding met Bluetooth wordt vaak verbroken       | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Controleer of u zich niet meer dan 10 meter van het Bluetooth-apparaat bevindt.</li></ul>  |
| Gehooronderbrekingen                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Zet telefoongeluiden (waarschuwingen, meldingsgeluiden, toetsaanslagen, etc.) uit.</li></ul>   |
| Onverwacht gedrag                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Stel SMARTO opnieuw in door hem aan te sluiten op de lader.</li></ul>  |

# Steun



Video-handleidingen:  
<https://bit.ly/smarto-video>



[support@alango-behear.com](mailto:support@alango-behear.com)



[www.alango-behear.com](http://www.alango-behear.com)