



## RS 5200

Digitales kabelloses TV-Hörsystem  
Modell: RS 5200, TR 5000, RR 5200



### Bedienungsanleitung

Nutzen Sie die Suchfunktion, die Navigation (links) oder die folgenden Links:

“Start ”

“Produktübersicht”

“RS 5200 in Betrieb nehmen”

“RS 5200 verwenden”

“RS 5200 Zusatz-Funktionen verwenden”

“Wenn Störungen auftreten”

“Technische Daten”

**Sonova Consumer Hearing GmbH**

Am Labor 1  
30900 Wedemark  
Germany

[www.sennheiser-hearing.com](http://www.sennheiser-hearing.com)

Version: 09/22 A02

## Wichtige Sicherheitshinweise

- ▷ Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Produkt benutzen.
- ▷ Geben Sie das Produkt an Dritte stets zusammen mit dieser Bedienungsanleitung weiter.
- ▷ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es offensichtlich beschädigt ist.
- ▷ Benutzen Sie das Produkt ausschließlich in Umgebungen, in denen die drahtlose 2,4-GHz-Funktechnologie gestattet ist.



### Gesundheitsschäden und Unfälle vermeiden

- ▷ An diesen Kopfhörern kann eine höhere Lautstärke eingestellt werden als bei herkömmlichen Kopfhörern. Schützen Sie Ihr Gehör vor hoher Lautstärke. Hören Sie mit Ihrem Kopfhörer nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden. Kopfhörer der Marke Sennheiser klingen auch bei niedriger und mittlerer Lautstärke sehr gut und sorgen für eine klare Sprachverständlichkeit.
- ▷ Stellen Sie eine geringe Lautstärke ein, bevor Sie das Produkt an Dritte weitergeben, um Gehörschäden zu vermeiden.
- ▷ Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Ihre Umgebung besondere Aufmerksamkeit erfordert (z. B. bei handwerklichen Tätigkeiten).
- ▷ Halten Sie stets einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen Kopfhörer/Ladeadapter MCA 800 und Herzschrittmachern, implantierten Defibrillatoren (ICDs) und anderen Implantaten. Der Kopfhörer/Ladeadapter MCA 800 erzeugt Magnetfelder, die bei Herzschrittmachern, implantierten Defibrillatoren (ICDs) und anderen Implantaten zu Störungen führen können.
- ▷ Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser. Setzen Sie das Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Es besteht die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags.
- ▷ Halten Sie Produkt-, Verpackungs- und Zubehörteile von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle zu vermeiden. Verschluckungs- und Erstickungsgefahr.
- ▷ Benutzen Sie ausschließlich von Sonova Consumer Hearing mitgelieferte Steckernetzteile.



### Produktschäden und Störungen vermeiden

- ▷ Halten Sie das Produkt stets trocken und setzen Sie es weder extrem niedrigen noch extrem hohen Temperaturen aus (Föhn, Heizung, lange Sonneneinstrahlung etc.), um Korrosionen oder Verformungen zu vermeiden. Die normale Betriebstemperatur beträgt 5 °C bis 40 °C.
- ▷ Behandeln Sie das Produkt sorgfältig und bewahren Sie es an einem sauberen, staubfreien Ort auf.
- ▷ Schalten Sie das Produkt nach Gebrauch aus, um die Akkus zu schonen.

- ▷ Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose
  - um das Produkt von der Stromquelle zu trennen,
  - wenn Gewitter auftreten oder
  - das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- ▷ Achten Sie immer darauf, dass das Steckernetzteil
  - in ordnungsgemäßem Zustand und leicht zugänglich ist,
  - fest in der Steckdose steckt,
  - nur im zulässigen Temperaturbereich betrieben wird,
  - nicht längerer Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird, um eine Überhitzung zu verhindern.
- ▷ Lacke und Möbelpolituren können die Füße des Senders angreifen und so Flecken auf Ihren Möbeln verursachen. Stellen Sie den Sender deshalb auf eine rutschfeste Unterlage.
- ▷ Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- ▷ Reinigen Sie das Produkt ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch.
- ▷ Verwenden Sie ausschließlich die von Sonova Consumer Hearing gelieferten oder empfohlenen Zusatzgeräte/Zubehörteile/ Ersatzteile.

#### Sicherheitshinweise für Lithium-Akkus






#### WARNUNG

Bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßem Gebrauch können die Akkus auslaufen. In extremen Fällen besteht die Gefahr von:

- Explosion
- Hitze- und Feuerentwicklung
- Rauch- und/oder Gasentwicklung
- Gesundheits- und/oder Umweltschäden

	Verwenden Sie ausschließlich die von Sonova Consumer Hearing empfohlenen Akkus und dazu passenden Ladegeräte.
	Laden Sie das Produkt / die Akkus nicht unbeaufsichtigt.
	Laden Sie das Produkt / die Akkus nur bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 40 °C und nicht in der Nähe von leicht brennbaren Gegenständen.
	Erhitzen Sie das Produkt / die Akkus nicht über 70 °C. Vermeiden Sie Sonneneinstrahlung und werfen Sie das Produkt / die Akkus nicht ins Feuer.
	Schalten Sie Akku-gespeiste Produkte nach dem Gebrauch aus.

	Laden Sie das Produkt / die Akkus auch bei längerem Nichtgebrauch regelmäßig nach (ca. alle 3 Monate).
	Vermeiden Sie längeren Hautkontakt mit dem Produkt, Akku, Ladegerät oder Ladekabel, wenn dieses/dieser mit dem Stromnetz verbunden ist. Diese Komponenten können sich während des Ladevorgangs erwärmen und zu Hautirritationen führen.
	Geben Sie defekte Produkte inkl. Akku ausschließlich an Sammelstellen oder bei Ihrem Fachhändler zurück, um die Verwertung zu ermöglichen.

### Bestimmungsgemäße Verwendung/Haftung

Dieses kabellose TV-Kopfhörersystem wurde für die Verwendung mit TV-Fernsehgeräten, HiFi-Systemen und Heimkino-Systemen entwickelt und kann an analoge und digitale Audioquellen angeschlossen werden.

Das Produkt darf ausschließlich im privaten, häuslichen Bereich verwendet werden, es ist nicht für eine gewerbliche Nutzung geeignet. Das Produkt ist ebenfalls nicht für die Verwendung mit portablen Audiogeräten geeignet.

Als nicht bestimmungsgemäße Verwendung gilt, wenn Sie dieses Produkt anders benutzen, als in den dazugehörigen Produktdokumentationen beschrieben.

Sonova Consumer Hearing GmbH übernimmt keine Haftung bei Missbrauch oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Produkts sowie der Zusatzgeräte/Zubehörteile.

Vor Inbetriebnahme sind die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften zu beachten.


## Lieferumfang



Kinnbügelhörer mit eingebautem Akku  
Modell: RR 5200



Sender mit Ladestation  
Modell: TR 5000

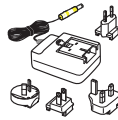

Netzteil mit Länderadaptern (EU, UK, US, AU)  
Modell: NT 5-10AW



1 Paar Ohrpolster aus Silikon, groß  
(bei Auslieferung auf die Hörer aufgesetzt)



1 Paar Ohrpolster aus Silikon, klein



1 Paar Ohrpolster aus Memory-Schaum



1 Paar Ohrpolster aus offenem Schaum



Optisches Digitalkabel, 1,5 m



Stereo-Audiokabel mit 3,5-mm-Klinkensteckern,  
1,5 m



Cinch-Adapter (3,5-mm-Klinkenbuchse auf 2 Cinch-  
Stecker)



Sicherheitshinweise



Kurzanleitung


Online finden Sie:

- diese ausführliche Bedienungsanleitung und weitere Informationen ([www.sennheiser-hearing.com/download](http://www.sennheiser-hearing.com/download)).
- eine Liste der Zubehörteile auf der Produktseite des RS 5200 unter [www.sennheiser-hearing.com](http://www.sennheiser-hearing.com) (zum Online-Kauf oder wenden Sie sich an den Sonova Consumer Hearing-Partner Ihres Landes: [www.sennheiser-hearing.com/service-support](http://www.sennheiser-hearing.com/service-support)).

# Produktübersicht

## Übersicht des Kinnbügelhörers


Modell: RR 5200

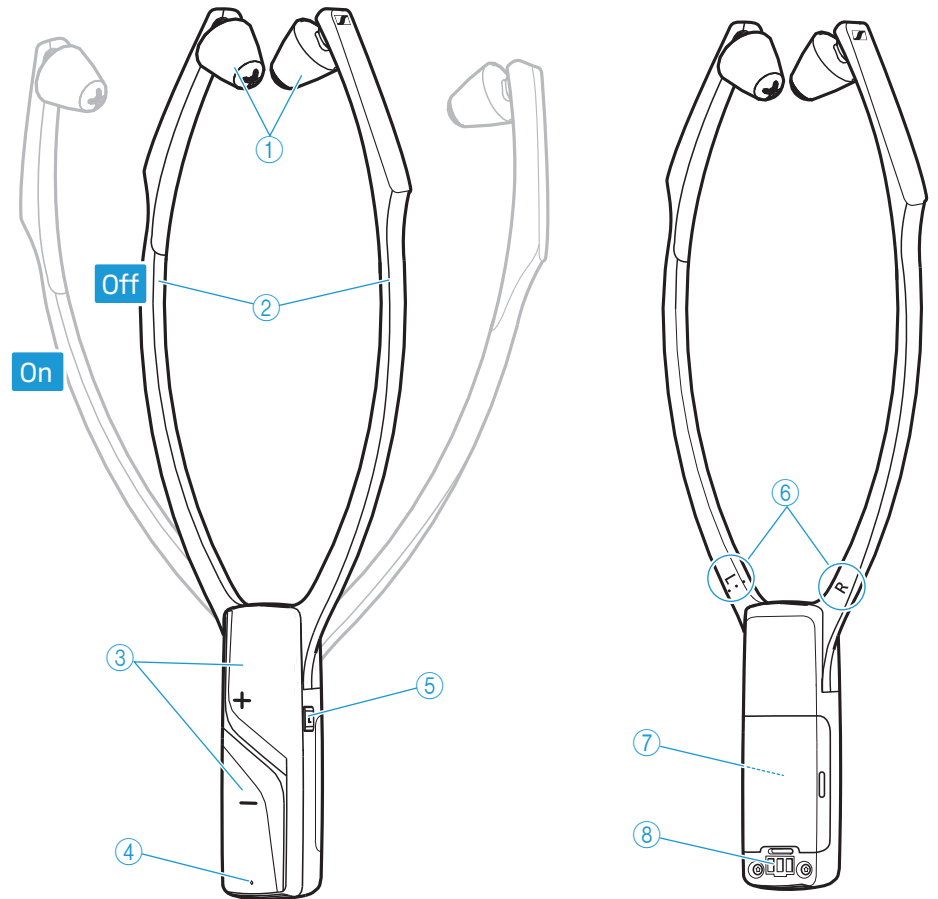

- ① Ohrpolster, austauschbar
- ② Hörerbügel mit Ein- und Ausschalt-Funktion
- ③ Tasten für Lautstärke + und -
- ④ LED *Hörerstatus*  
(siehe Seite 8)
- ⑤ Taste *Sprachverständlichkeit*
- ⑥ Kennzeichnung für rechts **R** und links **L**
- ⑦ Eingebauter Akku
- ⑧ Ladekontakte


# Übersicht des Senders



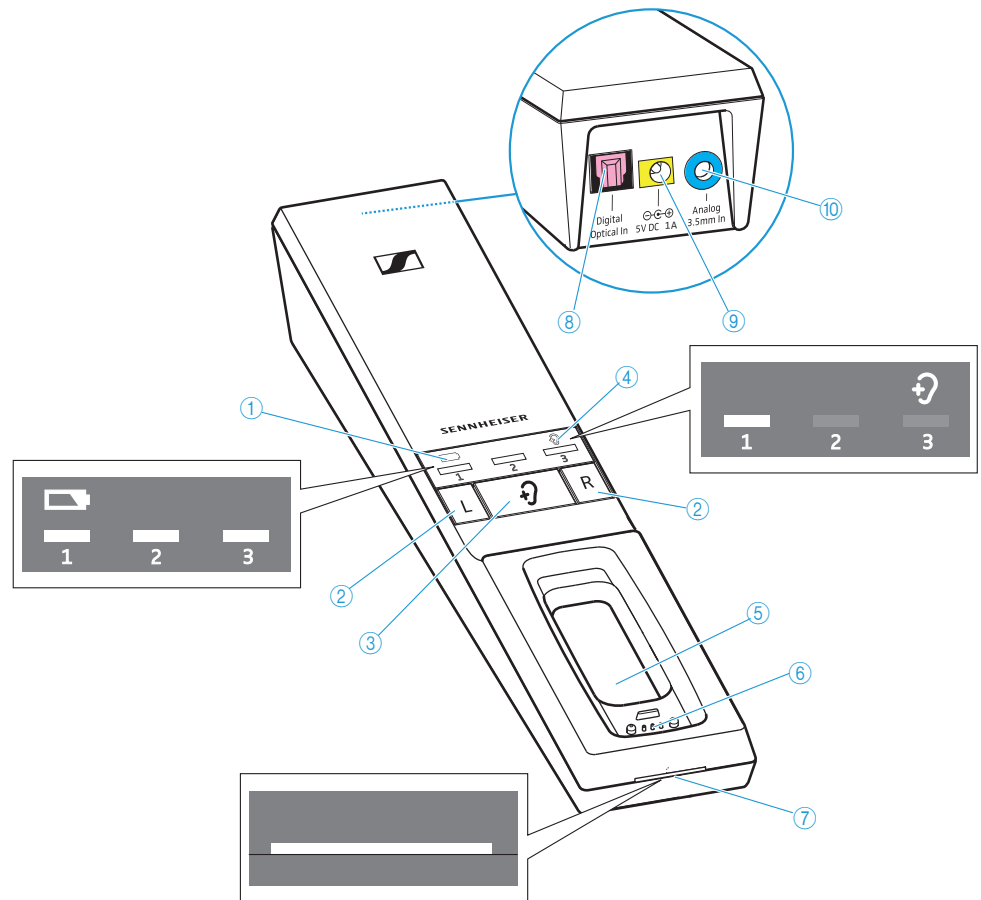

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


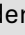




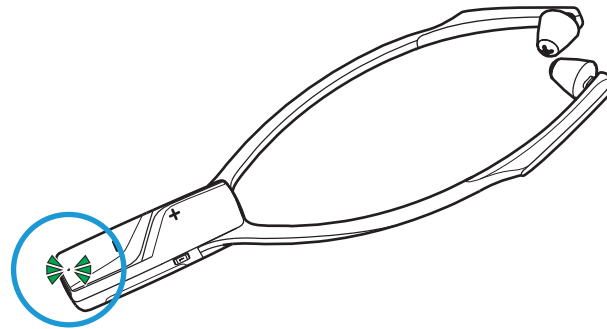

Modell: TR 5000

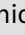


- ① LED *Akku* zur Anzeige des Ladevorgangs/der verbleibenden Betriebszeit des Hörers (siehe Seite 15 und 16)
- ② Tasten Balance für rechts **R** und links **L**
- ③ Taste *Hörprofil* zur Auswahl der Hörprofile (siehe Seite 23)
- ④ LED *Hörprofil* zur Anzeige des eingestellten Hörprofils (siehe Seite 23)
- ⑤ Ladeschale für den Kinnbügelhörer
- ⑥ Ladkontakte für den Kinnbügelhörer mit Haltemagneten
- ⑦ LED *Senderstatus* (siehe Seite 8)
- ⑧ Audioanschluss **Digital Optical In** für eine digital Audioquelle (optisch), rosa markiert
- ⑨ Anschlussbuchse **5V DC 1A** für das Netzteil, gelb markiert
- ⑩ Audioanschluss **Analog 3.5 mm In** für eine analoge Audioquelle (3,5-mm-Klinkenbuchse), blau markiert





## Übersicht LED Hörerstatus

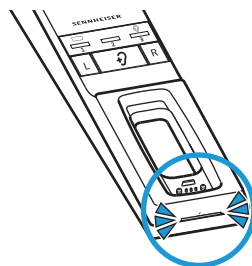

LED Hörerstatus	Kinnbügelhörer...
—	... ist ausgeschaltet.
  -----  ... leuchtet grün	... ist mit dem Sender verbunden.
  -----  ... leuchtet rot	... ist mit dem Sender verbunden, der Akku ist nahezu leer.
        1s     1s   ... blinkt grün	... ist nicht mit dem Sender verbunden bzw. kann sich nicht mit dem Sender verbinden.
        1s     1s   ... blinkt rot	... ist nicht mit dem Sender verbunden bzw. kann sich nicht mit dem Sender verbinden, der Akku ist nahezu leer.

## Übersicht LED Senderstatus



LED Senderstatus	Sender...
—	... befindet sich im Standby-Modus.
  -----  ... leuchtet weiß	... und Kinnbügelhörer sind verbunden. Die Sprachverständlichkeit ist ausgeschaltet (siehe Seite 26).
  -----  ... leuchtet blau	... und Kinnbügelhörer sind verbunden. Die Sprachverständlichkeit ist eingeschaltet (siehe Seite 26).
   -----  ... blinkt blau-weiß	... hat ein inkompatibles digitales Audiosignal festgestellt (siehe Seite 11).



**i** Die LEDs am Kinnbügelhörer und am Sender zeigen den aktuellen Betriebszustand an. Wenn Sie die Tasten des Kinnbügelhörers nicht verwenden, wird die LED-Helligkeit nach ca. 30 Sekunden automatisch reduziert, damit Sie nicht gestört werden.


## Übersicht der Tonsignale

Tonsignale	Bedeutung
im Betrieb, 2 Pieptöne	Akku fast leer, laden Sie den Akku (siehe Seite 15)
im Betrieb, keine Audio- übertragung, 5 Pieptöne	Hörer außerhalb der Sendereichweite des Senders (siehe Seite 39)
beim Verändern der Lautstärke	Maximale oder minimale Lautstärkeinstellung erreicht (siehe Seite 22)
beim Verändern der Balance	Ganz rechte oder linke Einstellung erreicht (siehe Seite 22)

## RS 5200 in Betrieb nehmen

### Sender aufstellen

- ▷ Stellen Sie den Sender in der Nähe Ihrer Audioquelle auf.
- ▷ Stellen Sie den Sender mindestens 50 cm von anderen funkenden Geräten im Raum entfernt auf, um Störungen zu vermeiden.
- ▷ Stellen Sie den Sender nicht in die unmittelbare Nähe von Metallregalen, Stahlbetonwänden oder anderen Metallkonstruktionen. Die Reichweite des Senders kann dadurch beeinträchtigt werden.

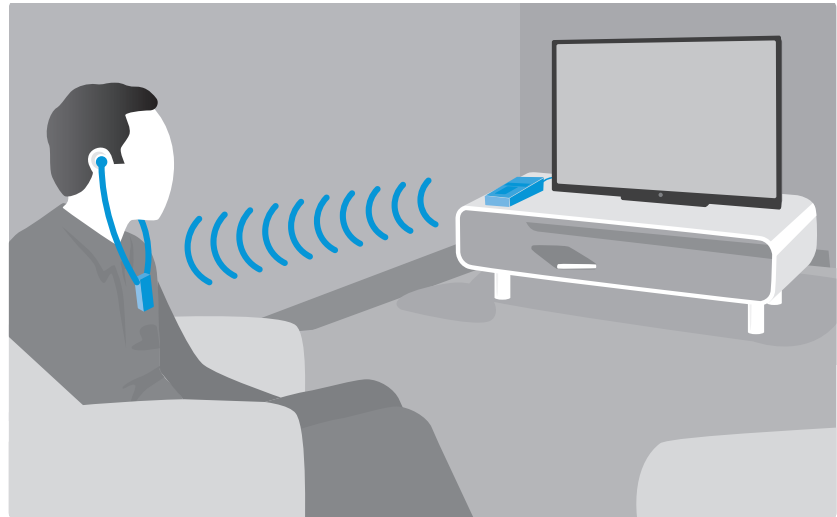









### Sender an Audioquelle anschließen

Sie können den Sender entweder an eine digitale oder eine analoge Audioquelle anschließen (z. B. ein Fernsehgerät und eine Stereoanlage).

Wenn Sie an **beide** Eingänge (digital und analog) eine Audioquelle anschließen, wird nur die analoge Audioquelle wiedergegeben.

**i** Sie können sich auch ein Anleitungsvideo anschauen, um zu erfahren, wie Sie Ihr Funkkopfhörersystem an ein Fernsehgerät anschließen: [www.sennheiser-hearing.com/how-to-videos](http://www.sennheiser-hearing.com/how-to-videos).

- ▷ Schalten Sie Ihre Audioquelle aus, bevor Sie den Sender anschließen.
- ▷ Überprüfen Sie, welche der folgenden Anschlussmöglichkeiten Ihre Audioquelle hat (Audioausgang, meist mit „OUT“ gekennzeichnet).
- ▷ Wählen Sie das entsprechende Anschlusskabel und ggf. einen geeigneten Adapter aus.
- ▷ Entnehmen Sie das für Ihre Audioquelle passende Anschlusschema aus den folgenden Kapiteln, um den Sender an eine Audioquelle anzuschließen. Die Farbmarkierungen am Sender und den Kabeln helfen Ihnen dabei.

Anschlussmöglichkeiten an der Audioquelle			Farbkennzeichnung am Sender	Anschlusskabel	siehe Seite
<b>A</b>	Optisch (digital)			Optisches Digitalkabel	11
<b>B</b>	3,5-mm-Klinkenbuchse (analog)			Stereo-Audiokabel	13
<b>C</b>	Cinch (analog)			Stereo-Audiokabel mit Cinch-Adapter (3,5-mm-Klinkenbuchse auf 2 Cinch-Stecker)	14
<b>D</b>	SCART (analog)			Stereo-Audiokabel mit SCART-Adapter (3,5-mm-Klinkenbuchse auf SCART-Stecker; optionales Zubehör)	14

**i** Wenn Sie den Sender an einen Fernseher anschließen möchten, der nur einen HDMI-Ausgang hat, benötigen Sie einen aktiven HDMI-Audio-Adapter. Mit diesem Adapter können Sie Ihren Fernseher mit dem Sender verbinden.


Einen HDMI-Audio-Adapter und/oder weiteres Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Sonova Consumer Hearing-Partner.

**A** **Anschlussmöglichkeit A: optisch (digital)**

Die bestmögliche Audioübertragung erzielen Sie, wenn Sie den Sender mit dem mitgelieferten optischen Digitalkabel an Ihr Fernsehgerät oder Ihre Stereoanlage anschließen.


Beachten Sie, dass Ihr Funkkopfhörersystem nur digitale Signale wiedergeben kann, die dem Standard **PCM** entsprechen. Wie Sie das Audioformat der angeschlossenen Audioquelle auf PCM ändern können, erfahren Sie im Ton-Menü oder in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.

Wenn ein nicht kompatibles digitales Audiosignal verwendet wird, blinkt die LED *Senderstatus* weiß-blau. Eine Audiowiedergabe ist nicht möglich.

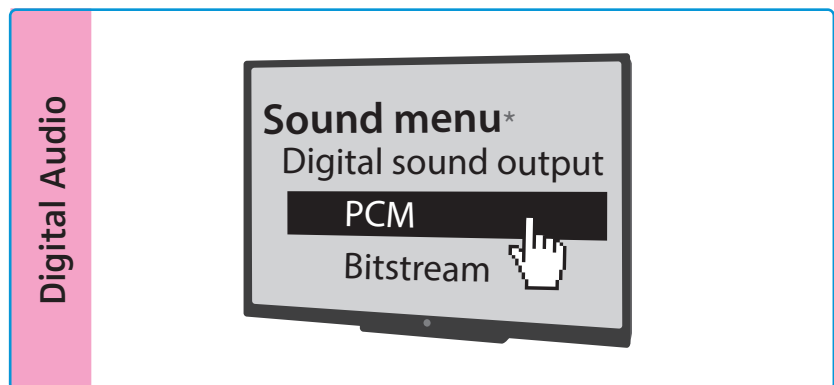

\* Je nach verwendetem Gerät sieht das Ton-Menü unterschiedlich aus


- ▷ Verbinden Sie das optische Digitalkabel mit dem rosa gekennzeichneten Audioanschluss **Digital Optical In** des Senders und mit dem optischen Ausgang Ihrer Audioquelle.

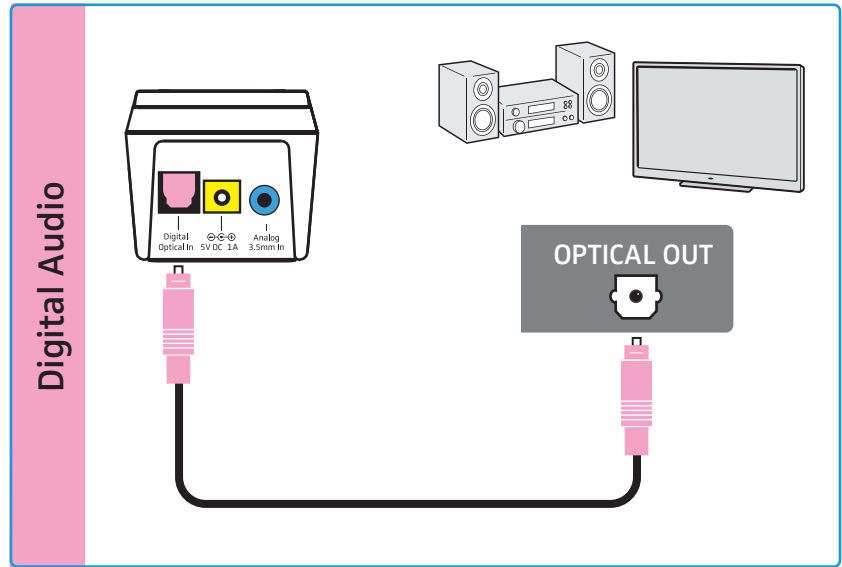

**B**

**Anschlussmöglichkeit B: 3,5-Klinkenbuchse (analog)**

- ▷ Verbinden Sie das Stereo-Audiokabel mit der blau gekennzeichneten 3,5-mm-Klinkenbuchse **Analog 3.5 mm In** des Senders und mit der 3,5-mm-Kopfhörerbuchse Ihrer Audioquelle.

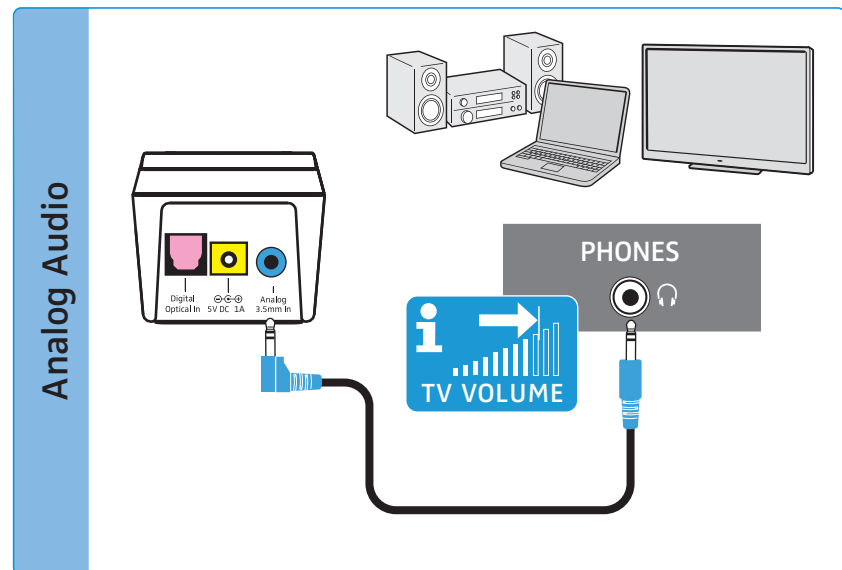

- i** Stellen Sie die Lautstärke der Kopfhörerbuchse an Ihrem Fernsehgerät/Audioquelle auf **mindestens einen mittleren Wert** ein. Dies verbessert die Qualität der Audioübertragung. Nähere Informationen können Sie der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts/Audioquelle entnehmen.


Wenn die Kopfhörerbuchse an Ihrer Audioquelle eine 6,3-mm-Buchse ist, benötigen Sie für das beiliegende 3,5-mm-Stereo-Audiokabel einen Adapter (3,5-mm-Stereoklinkenstecker auf 6,3-mm-Stereoklinkenstecker, optionales Zubehör).

- i** Einige Fernsehgeräte schalten die Lautsprecher stumm, wenn Sie den Sender an die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse anschließen. Andere Modelle haben ein eigenes Einstellmenü für die Lautstärke der Kopfhörerbuchse. Überprüfen Sie in der Menüeinstellung Ihres Fernsehgeräts, wie die Stummschaltung ausgeschaltet oder die Lautstärke eingestellt wird. Verwenden Sie alternativ eine der anderen Anschlussmöglichkeiten (A, C oder D) an Ihrem Fernsehgerät.

**C**

**Anschlussmöglichkeit C: Cinch-Buchsen (analog)**


- ▷ Stecken Sie den Cinch-Adapter auf das Stereo-Audiokabel.
- ▷ Verbinden Sie das Stereo-Audiokabel mit der blau markierten 3,5-mm-Klinkenbuchse des Senders.
- ▷ Verbinden Sie die Cinch-Stecker mit den Cinch-Ausgängen Ihrer Audioquelle (Kennzeichnung meist „AUDIO OUT“ oder  $\leftrightarrow$ ). Verbinden Sie den roten Stecker mit der roten Cinch-Buchse und den weißen Stecker mit der weißen oder schwarzen Cinch-Buchse.

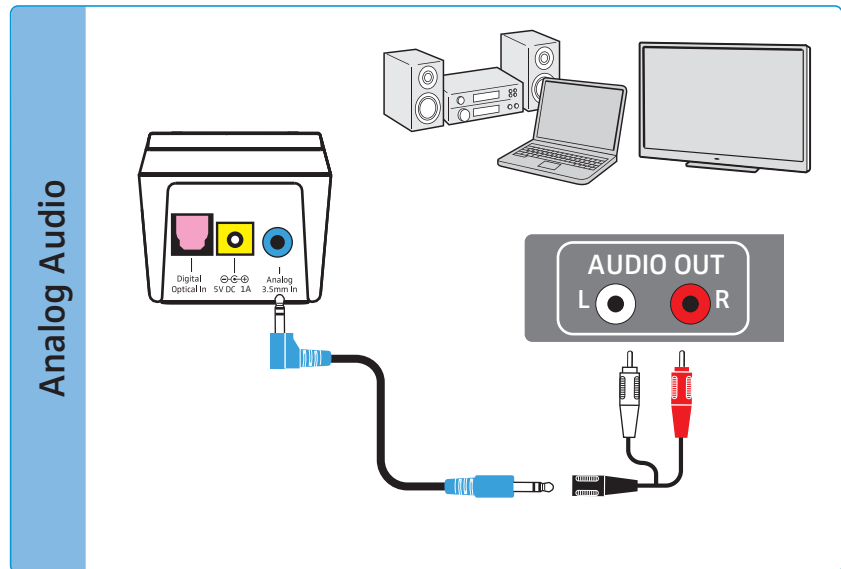

**D**

**Anschlussmöglichkeit D: SCART-Anschluss (analog)**


- ▷ Stecken Sie den SCART-Adapter\* auf das Stereo-Audiokabel.
- ▷ Verbinden Sie das Stereo-Audiokabel mit der blau markierten 3,5-mm-Klinkenbuchse des Senders.
- ▷ Verbinden Sie den SCART-Stecker mit dem SCART-Ausgang Ihrer Audioquelle (Kennzeichnung meist  $\leftrightarrow$  oder  $\square$ ).

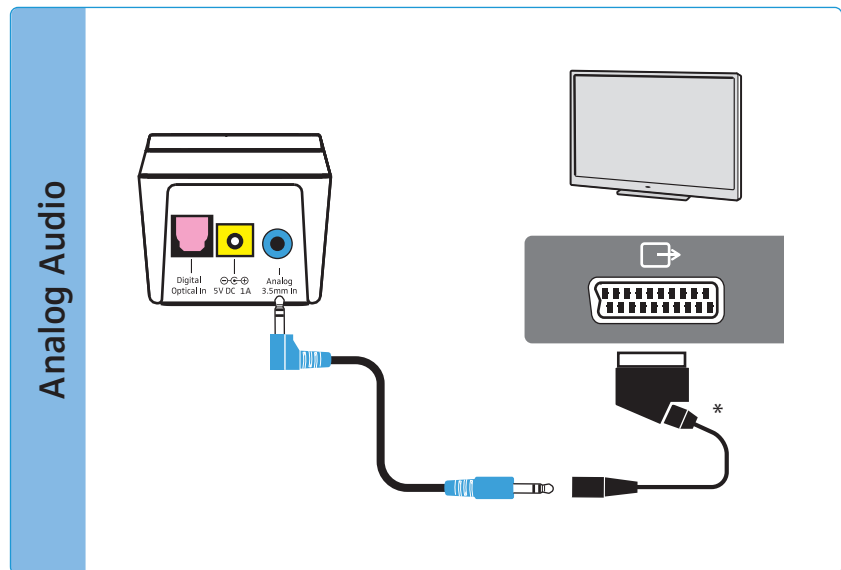

\* optionales Zubehör


## Sender an das Stromnetz anschließen


- ▷ Verbinden Sie den Stecker des Steckernetzteils mit der gelb markierten Anschlussbuchse am Sender.
- ▷ Wählen Sie den passenden Länderadapter aus und schieben Sie diesen auf das Netzteil, bis er hörbar einrastet.
- ▷ Stecken Sie das Steckernetzteil in die Steckdose.
- ▷ Alle LEDs am Sender leuchten für 5 Sekunden auf. Der Sender befindet sich im Standby-Modus.

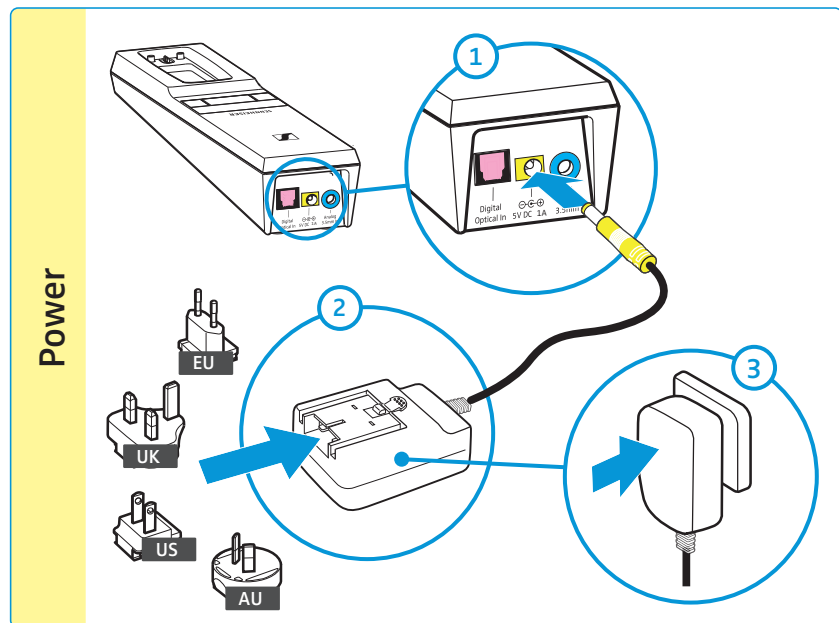


## Akku des Kinnbügelhörers laden

Ein kompletter Ladezyklus dauert ca. 3 Stunden. Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig und ohne Unterbrechung.

Wenn der Akku fast leer ist, leuchtet die LED *Hörerstatus* rot und Sie hören 2 Tonsignale im Kinnbügelhörer. Die LED *Akku*  des Senders blinkt weiß. Nach einigen Minuten schaltet sich der Kinnbügelhörer aus.

- ▷ Legen Sie den Kinnbügelhörer in die Ladeschale des Senders, sodass die Lautstärketasten nach oben zeigen. Der Kinnbügelhörer wird magnetisch in die richtige Position gerückt. Der Kinnbügelhörer schaltet sich automatisch aus und die LED *Akku*  des Senders leuchtet weiß. Die LED-Balken zeigen den Ladestand des Akkus an. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten alle LED-Balken weiß.

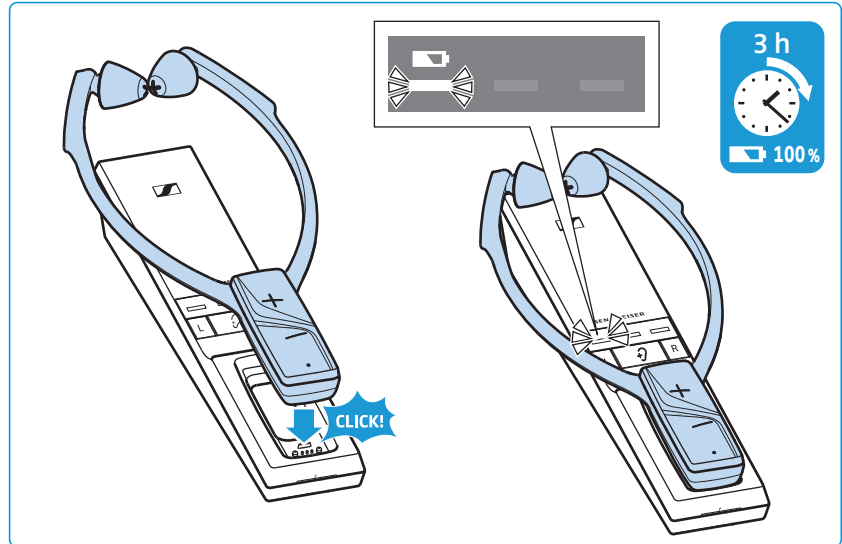

LED Akku		Bedeutung
	-	Der Sender lädt nicht.
	1. Balken blinkt	Der Akku wird geladen. Weniger als 1/3 Ladekapazität erreicht.
	1. Balken leuchtet, 2. Balken blinkt	Der Akku wird geladen. Bis zu 1/3 Ladekapazität erreicht.
	1. und 2. Balken leuchten, 3. Balken blinkt	Der Akku wird geladen. Bis zu 2/3 Ladekapazität erreicht.
	alle Balken leuchten	Der Akku ist geladen.
	LED Akku blinkt schnell	Ein Lade-/Akkufehler ist aufgetreten (siehe Seite 29).

**i** Sie erreichen den besten Ladezustand, wenn Sie den Kinnbügelhörer stets in der Ladeschale des Senders aufbewahren. Die Ladeautomatik verhindert eine Überladung des Akkus und Sie können stets die volle Betriebszeit nutzen.




**i** Die Anzeige während des Ladens können Sie so einstellen, dass sie nach 30 Sekunden ausgeschaltet wird (siehe Seite 32).

## Akku verbleibende Betriebszeit anzeigen

Wenn Sie den Kinnbügelhörer einschalten, wird Ihnen über die LED Akku die verbleibende Betriebszeit/der Ladezustand angezeigt.

LED Akku		Bedeutung
	LED Akku blinkt langsam	Akku erschöpft; Laden Sie den Akku
	1. Balken leuchtet	ca. 4 Stunden Betrieb möglich



LED Akku 	Bedeutung	
	1. und 2. Balken leuchten	ca. 8 Stunden Betrieb möglich
	alle Balken leuchten	ca. 12 Stunden Betrieb möglich


Bevor ein LED-Balken erlischt, wird er langsam dunkler, um die abnehmende Betriebszeit anzuzeigen.

Wenn die tatsächliche Betriebszeit stark von den angegebenen Werten abweicht, ist ggf. der Akku verbraucht und sollte ersetzt werden. Informationen zum Akku: siehe Seite 29.

**i** Die Anzeige der verbleibenden Betriebszeit können Sie so einstellen, dass sie nach 30 Sekunden ausgeschaltet wird (siehe Seite 32).

**i** Wenn Sie mehr als einen Kinnbügelhörer mit dem Sender verbunden haben, wird die verbleibende Betriebszeit/der Ladezustand nicht angezeigt.

## Ladeerinnerung nutzen

Wenn Sie den Kinnbügelhörer ausgeschaltet haben und sich der Sender ausschaltet (Standby), erinnert Sie die LED Akku  für 10 Minuten durch hin- und herblicken an das Laden des Kinnbügelhörers:



▷ Legen Sie den Kinnbügelhörer zum Laden in die Ladeschale (siehe Seite 15).

Das Blinken der Ladeerinnerung schaltet sich aus und der Ladevorgang beginnt.

**i** Die Ladeerinnerungs-Funktion können Sie auch deaktivieren (siehe Seite 33).

## Ohrpolster wählen und austauschen

Sie können wählen zwischen:

- Ohrpolster aus Silikon, groß (bei Auslieferung auf die Hörer aufgesetzt)
  - für die einfache Verwendung durch unkomplizierte Ausrichtung in den Ohren.
  - Leicht zu reinigen und auch bei intensiver Verwendung lange haltbar.



- Ohrpolster aus Silikon, klein
  - kleiner und flacher als die großen Silikonohrpolster, für die einfache Verwendung und Ausrichtung für kleinere Ohren.
  - Leicht zu reinigen und auch bei intensiver Verwendung lange haltbar.



- Ohrpolster aus Memory-Schaum
  - für einen bequemen, umgebungslärmdämpfenden Sitz der Hörer in den Ohren.
  - Bei intensiver Verwendung lässt der Memoryeffekt des Schaums nach wenigen Monaten nach, wodurch sich die Druckentlastung verschlechtert. Tauschen Sie in diesem Fall die Ohrpolster gegen neue aus.




- Ohrpolster aus offenem Schaum
  - für drucksensible Ohren und einem leichten Tragegefühl, auch über lange Nutzungsdauer.
  - Durch den offenen Schaum ist die hygienische Haltbarkeit eingeschränkt. Reinigen Sie die Ohrpolster regelmäßig (siehe Seite 28).



Um die Ohrpolster zu tauschen:

1. Greifen Sie mit den Fingernägeln hinter die Ohrpolster, sodass Sie die Ohrpolster vorsichtig von den Hörern lösen können.
2. Stecken Sie die beiden anderen/neuen Ohrpolster auf die Hörer. Der Gummiring der Ohrpolster rastet leicht am Hörer ein.

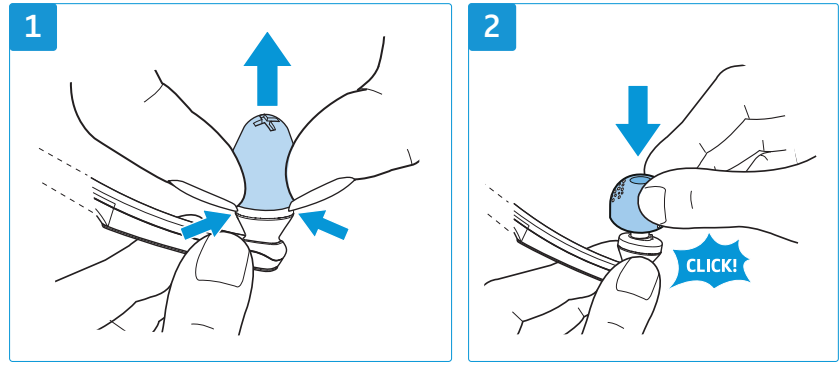

**i** Ersatz-Ohrpolster in unterschiedlichen Material- und Form-Ausführungen erhalten Sie bei Ihrem Sonova Consumer Hearing-Partner.

# RS 5200 verwenden

## Funkkopfhörersystem einschalten



### WARNUNG

#### Gefahr durch hohe Lautstärke!

An diesem Hörer kann eine höhere Lautstärke eingestellt werden als bei herkömmlichen Geräten. Dies kann bei falscher Verwendung zu Hörschäden führen.

- ▷ Stellen Sie, bevor Sie den Kinnbügelhörer aufsetzen, eine niedrige Lautstärke am Kinnbügelhörer ein.
- ▷ Setzen Sie sich nicht über längere Zeit hoher Lautstärke aus.
- ▷ Verwenden Sie ein Hörprofil (siehe Seite 23), mit dem Sie insbesondere Sprachverständlichkeit verbessern können, ohne eine sehr hohe Lautstärke zu brauchen.

#### 1. Schalten Sie Ihre Audioquelle ein.


Wenn Sie den Sender an die Kopfhörerbuchse (siehe Seite 13) Ihres Fernsehgeräts/Audioquelle angeschlossen haben, stellen Sie die Lautstärke der Kopfhörerbuchse an Ihrem Fernsehgerät/Audioquelle auf mindestens einen mittleren Wert ein.



#### 2. Nehmen Sie den Kinnbügelhörer aus der Ladeschale und spreizen Sie die Hörerbügel, sodass Sie die Hörer in Ihre Ohren setzen können.

Der Kinnbügelhörer schaltet sich ein, sobald Sie die Hörerbügel spreizen. Die LED *Hörerstatus* leuchtet grün. Der Sender schaltet sich automatisch ein und die LED *Senderstatus* leuchtet weiß oder blau. Die Tonübertragung zwischen Sender und Kinnbügelhörer startet.

Am Sender wird die verbleibende Betriebszeit des Kinnbügelhörers angezeigt (siehe Seite 16).

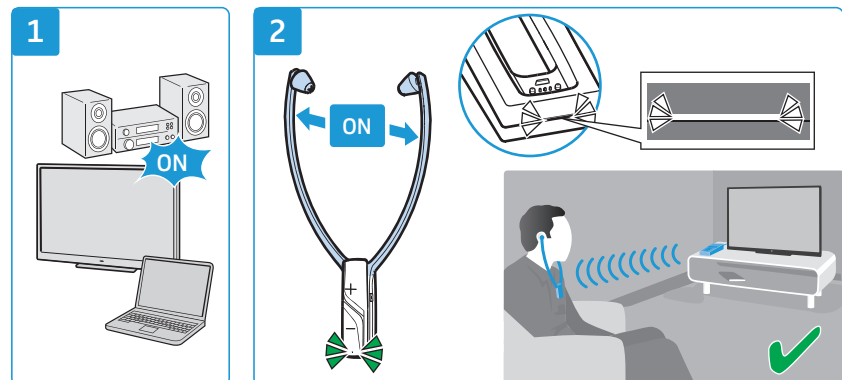


## Funkkopfhörersystem ausschalten

- ▷ Setzen Sie den Kinnbügelhörer ab, sodass die Hörerbügel zusammen klappen.
 

Der Kinnbügelhörer schaltet sich nach 20 Sekunden automatisch aus. Die LED *Hörerstatus* ist aus. Der Sender schaltet sich automatisch aus (Standby), sobald kein Kinnbügelhörer mehr verbunden ist. Die LED *Senderstatus* ist aus.
- ▷ Legen Sie den Kinnbügelhörer stets in die Ladeschale des Senders, um bei der nächsten Verwendung die volle Betriebszeit nutzen zu können.
 

Der Ladevorgang beginnt (siehe Seite 15).

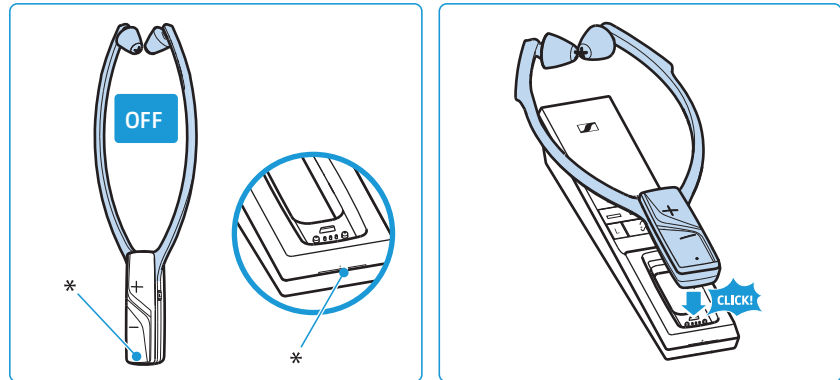

\* LED erlischt

- i** Wenn der Kinnbügelhörer länger als 5 Minuten außerhalb der Reichweite des Senders ist oder der Sender für länger als 30 min keine Audiosignale empfängt, schaltet sich das Funkkopfhörersystem automatisch aus (Standby).


Um den Sender vom Stromnetz zu trennen, wenn Sie z. B. in den Urlaub fahren:

- ▷ Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose.

## Kinnbügelhörer tragen

- ▷ Setzen Sie den Kinnbügelhörer so in Ihre Ohren, dass der Kinnbügel frei herunter hängt und leicht auf Ihrer Brust aufliegt. Achten Sie beim Aufsetzen des Kinnbügelhörers auf die Markierungen **L** (links) und **R** (rechts) auf der Rückseite der Hörerbügel. Die Lautstärketasten zeigen nach vorne, für eine leichte Bedienbarkeit.
- ▷ Tragen Sie den Kinnbügel so, dass:
  - die Ohrpolster direkt vor Ihren Ohrkanälen sitzen.
  - Sie einen leichten Druck auf Ihren Ohren spüren. Die Ohrpolster passen sich Ihrer Ohrform flexibel an. Ein eventuell auftretendes Druckgefühl sollte nach sehr kurzer Zeit verschwinden.
  - Sollte der Druck für Sie unangenehm sein, versuchen Sie andere Ohrpolster (siehe Seite 18).
  - der Kinnbügel frei herunter hängt und leicht auf Ihrer Brust aufliegt.

- i** Wenn Sie die Ohrpolster aus Memory-Schaum verwenden, können Sie die Ohrpolster etwas eindrücken und so die Polster an Ihre Ohrform anpassen.

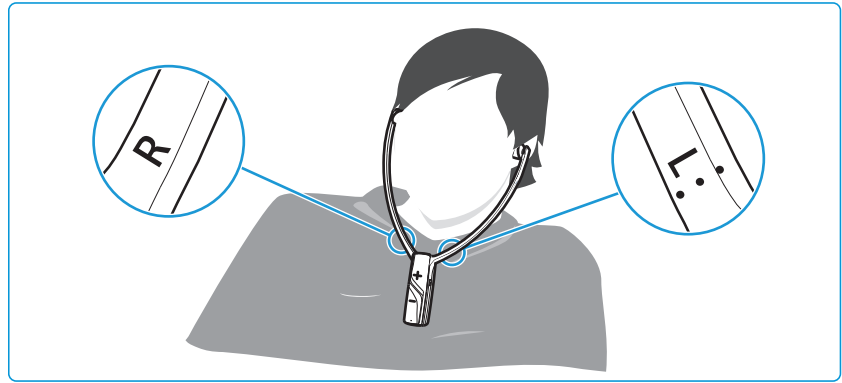


## Lautstärke einstellen



### WARNUNG

#### Gefahr durch hohe Lautstärke!

- ▷ Stellen Sie, bevor Sie den Kinnbügelhörer aufsetzen, eine niedrige Lautstärke am Kinnbügelhörer ein.
- ▷ Setzen Sie sich nicht über längere Zeit hoher Lautstärke aus.
- ▷ Drücken Sie die Taste Lautstärke + oder Lautstärke -, bis die Lautstärke für Sie angenehm ist. Wenn die minimale oder maximale Lautstärke erreicht ist, hören Sie ein Tonsignal.

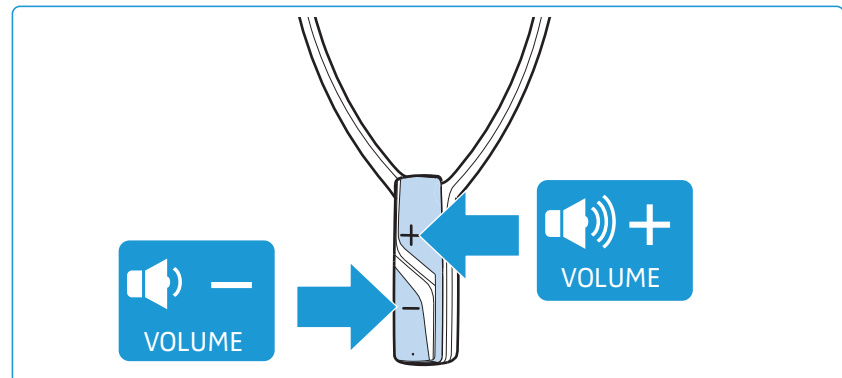


- i** Wenn Sie die Lautstärke sehr laut eingestellt haben und das TV-Kopfhörersystem aus- und wieder einschalten, wird zum Schutz des Gehörs die Lautstärke reduziert.

## Balance einstellen

Die Balance regelt die Lautstärkeverteilung zwischen dem rechten und linken Ohr. Stellen Sie die Balance so ein, dass Sie auf beiden Ohren gleichermaßen gut hören.


**i** Die Einstellung der Balance wird im Kinnbügelhörer gespeichert. Wenn Sie mehrere Hörer mit einem Sender betreiben, sind so die jeweiligen Hörer optimal an die individuellen Hörpräferenzen der Nutzer, z. B. Sie und Ihr Partner, angepasst. Beachten Sie, dass zum Einstellen der individuellen Hörpräferenzen immer nur 1 Kinnbügelhörer mit dem Sender verbunden sein darf.

- ▷ Drücken Sie am Sender die Taste Balance **R** (rechts) oder **L** (links), um schrittweise die Lautstärke auf dem rechten oder linken Ohr zu erhöhen bzw. zu verringern. Wenn die ganz rechte oder ganz linke Einstellung erreicht ist, hören Sie ein Tonsignal.

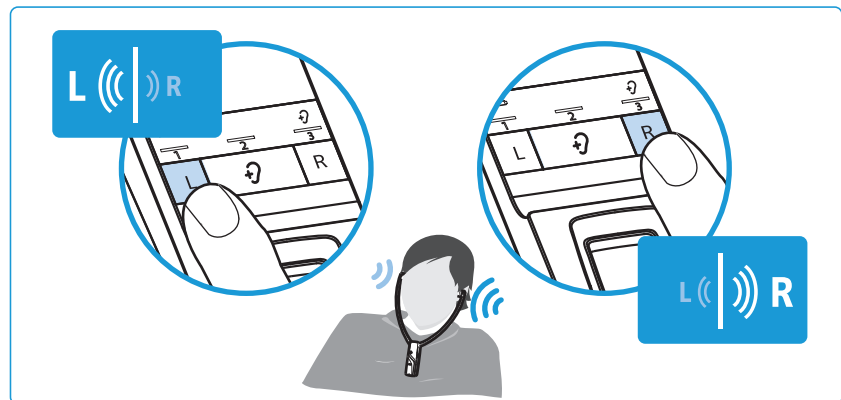

Um die Balance-Einstellung wieder einheitlich in die Mitte zu setzen:

- ▷ Drücken Sie für 3 Sekunden gleichzeitig am Sender die Taste Balance **R** (rechts) und **L** (links).

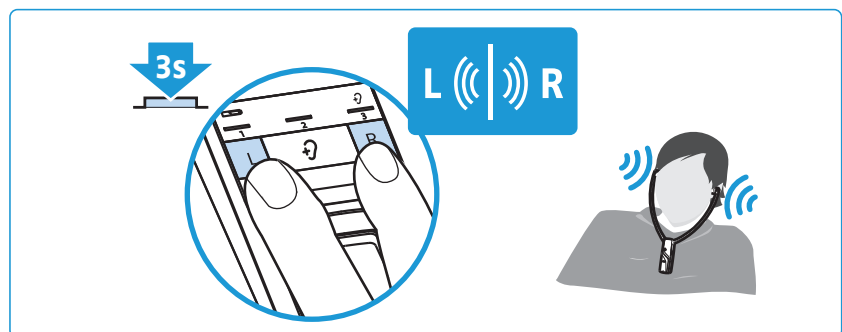

**i** Um ein ungewolltes Verstellen der Balance zu verhindern, können Sie den Balance-Schutz einstellen, der ein Verstellen der Balance unmöglich macht (siehe Seite 33).

## Hörprofil zur Klangverbesserung verwenden

Mit den Hörprofilen wird der Klang des Audiosignals verändert, um insbesondere die Sprachverständlichkeit zu erhöhen. Die Profile verändern gezielt bestimmte Frequenzbereiche, indem Sie z. B. tiefe oder hohe Töne verstärken oder abschwächen (siehe Tabelle).

Bei allen Profilen ist eine Kompression-Funktion aktiviert, die Lautstärkeunterschiede abmildert, indem sie leise Passagen in der Lautstärke anhebt und laute Passagen bei Bedarf absenkt.


**i** Die Einstellung des Hörprofils wird im Kinnbügelhörer gespeichert. Wenn Sie mehrere Hörer mit einem Sender betreiben, sind so die jeweiligen Hörer optimal an die individuellen Hörpräferenzen der Nutzer, z. B. Sie und Ihr Partner, angepasst. Beachten Sie, dass zum Einstellen der individuellen Hörpräferenzen immer nur 1 Kinnbügelhörer mit dem Sender verbunden sein darf.






**Eingestelltes Hörprofil anzeigen**

Das eingestellte Hörprofil wird nicht permanent angezeigt.

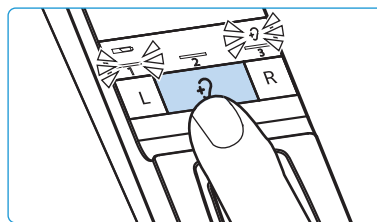Um zu prüfen, welches Hörprofil aktuell eingestellt ist:

- ▷ Schalten Sie Ihren Kinnbügelhörer ein, indem Sie ihn aufsetzen (siehe Seite 20).
- ▷ Drücken Sie kurz am Sender die Taste *Hörprofil*. Das aktuell eingestellte Hörprofil wird für 10 Sekunden angezeigt.



Aktiviertes Hörprofil	LED Hörprofil 	Klanganpassung	Kompression
-	 kein Balken leuchtet	Die angeschlossene Audioquelle wird unverändert wiedergegeben.	nein
Hörprofil 1	 1. Balken leuchtet	Tiefe Töne werden leicht verstärkt für einen warmen, vollen Klang. Hohe Töne werden weniger schrill und klirrend wiedergegeben.	ja
Hörprofil 2	 2. Balken leuchtet	Hohe Töne werden stark verstärkt für kristallklaren Klang, insbesondere für Sprachzischlaute und die Wahrnehmung von hohen Tönen wie Vogelzwitschern.	ja
Hörprofil 3	 3. Balken leuchtet	Tiefe Töne werden abgeschwächt, sodass sie hohe Töne nicht überdecken.	ja

**i** Eine grafische Darstellung der Hörprofile: siehe Seite 41.

**Hörprofil auswählen**


Um das für Sie beste Hörprofil auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie Ihre Audioquelle ein und schalten Sie auf eine Sendung um, bei der die Sprache im Vordergrund steht.







2. Setzen Sie den Kinnbügelhörer auf und stellen Sie sicher, dass nur dieser Hörer mit dem Sender verbunden ist. Anderenfalls ist das Einstellen des Hörprofils nicht möglich.

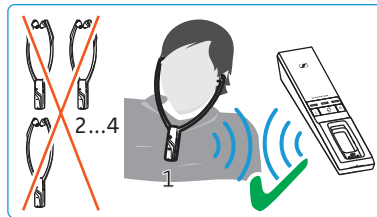

3. Stellen Sie am Sender die Balance mit den Tasten **L** und **R** ein (siehe Seite 22). Dadurch ist jedes folgend eingestellte Hörprofil optimal an Ihr rechtes und linkes Ohr angepasst.

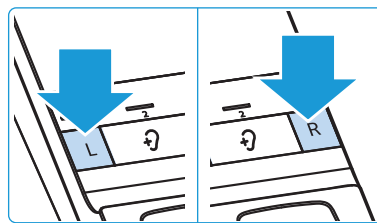

4. Halten Sie am Sender die Taste *Hörprofil* für 2 Sekunden gedrückt, um das nächste Hörprofil auszuwählen. Wiederholen Sie den Tastendruck von 2 Sekunden, um zum nächsten Hörprofil zu springen.

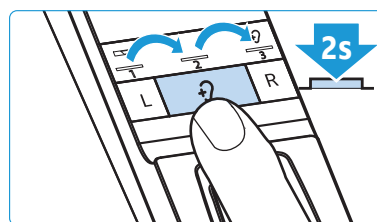

5. Testen Sie, mit welchem Hörprofil 1, 2 oder 3 das für Sie beste Klangbild erzeugt wird und Sie am besten hören. Ihr individuelles Hörprofil ist eingestellt und im Kinnbügelhörer gespeichert.



**i** Wir empfehlen, die Auswahl des Hörprofils von Zeit zu Zeit zu wiederholen, da sich Ihr Gehör mit der Zeit verändern kann.

**i** Wenn Sie das Hörprofil umstellen, wird die Funktion Sprachverständlichkeit automatisch ausgeschaltet, um das Hörprofil unverändert zu hören (siehe Seite 26).

**i** Um ein ungewolltes Verstellen des Hörprofils zu verhindern, können Sie den Hörprofil-Schutz einstellen, der ein Verstellen des Hörprofils unmöglich macht (siehe Seite 33).

## Sprachverständlichkeit ein- und ausschalten


Tritt Sprache in Verbindung mit störenden Hintergrundgeräuschen auf, kann es schwierig sein, die Sprache ausreichend gut herauszuhören.


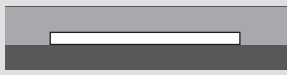
Mit der Funktion Sprachverständlichkeit können diese störenden Hintergrundgeräusche automatisch erkannt und reduziert werden. Das Audiosignal wird permanent analysiert und angepasst, wodurch Sprache in den Vordergrund tritt und klarer zu verstehen ist.


### Anwendungsbeispiele

Anwendung	Sprachverständlichkeit	Vorteil
Spielfilme, TV-Serien oder Hörbücher	eingeschaltet	Sprachdialoge sind klarer zu verstehen, wenn diese durch Hintergrundmusik und Geräusche überlagert werden.
Sport- oder Fußballübertragungen	eingeschaltet	Die Moderation ist klarer zu verstehen, wenn diese durch Hintergrundgeräusche des Stadions überlagert wird.
Musik	ausgeschaltet	keine Sprache, deswegen wird die Funktion nicht benötigt.

▷ Drücken Sie die Taste *Sprachverständlichkeit*, um die Funktion ein- oder auszuschalten.

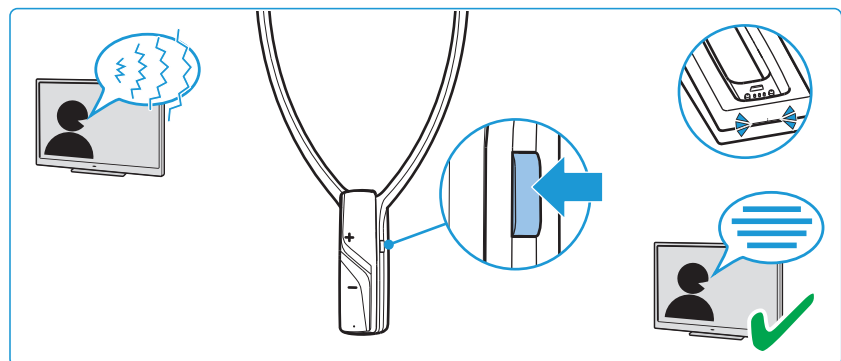

LED Senderstatus	Funktion Sprachverständlichkeit
 leuchtet blau	eingeschaltet; Störende Hintergrundgeräusche werden wirkungsvoll reduziert, Sprache ist klarer zu verstehen.
 leuchtet weiß	ausgeschaltet

 Die Funktion Sprachverständlichkeit können Sie auch ergänzend zu den Hörprofilen 1-3 verwenden.

## RS 5200 reinigen und pflegen



### VORSICHT



#### Flüssigkeit kann die Elektronik des Produkts zerstören!

Flüssigkeit, die in das Gehäuse des Produkts eindringt, kann einen Kurzschluss verursachen und die Elektronik des Produkts zerstören.

- ▷ Halten Sie Flüssigkeiten jeglicher Art von dem Produkt fern.
- ▷ Verwenden Sie auf keinen Fall Löse- oder Reinigungsmittel.



Um das Funkkopfhörersystem zu reinigen:

- ▷ Schalten Sie Ihr Funkkopfhörersystem aus und ziehen Sie den Netzstecker des Senders, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- ▷ Reinigen Sie das Produkt ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch.
- ▷ Reinigen Sie von Zeit zu Zeit die Ladekontakte am Kinnbügelhörer und in der Ladeschale mit z. B. einem Wattestäbchen.

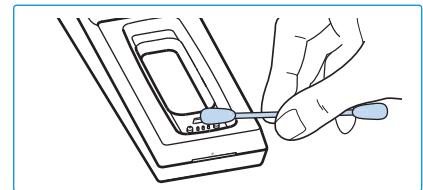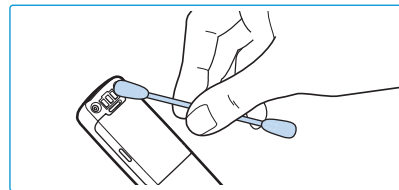

Um die Ohrpolster zu reinigen:

- ▷ Greifen Sie mit den Fingernägeln hinter die Ohrpolster, sodass Sie die Ohrpolster vorsichtig vom Hörer lösen können.
- ▷ Reinigen Sie die Ohrpolster unter fließend lauwarmen Wasser.
- ▷ Lassen Sie die Ohrpolster mindestens 12 Stunden bei Raumtemperatur trocknen, bevor Sie sie wieder verwenden.
- ▷ Stecken Sie die Ohrpolster wieder auf den Hörer. Der Gummiring der Ohrpolster rastet leicht am Hörer ein.

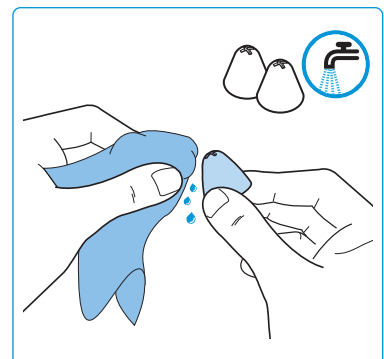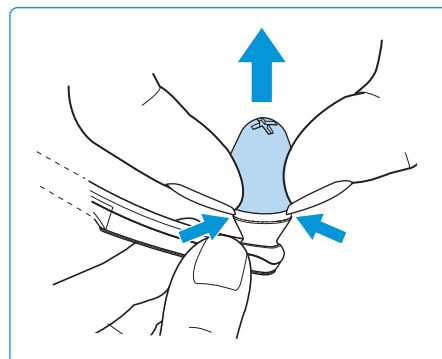

**i** Aus hygienischen Gründen sollten Sie Ihre Ohrpolster von Zeit zu Zeit austauschen (insbesondere die Ohrpolster aus Memory-Schaum und offenem Schaum haben aufgrund der Materialeigenschaft eine Haltbarkeit von wenigen Monaten). Ersatz-Ohrpolster in unterschiedlichen Material- und Form-Ausführungen erhalten Sie bei Ihrem Sonova Consumer Hearing-Partner.

## Akku des Kinnbügelhörers wechseln

Der Akku BAP 800 des Kinnbügelhörers ist besonders kompakt in das Hörergehäuse eingebaut und muss nicht gewechselt oder entnommen werden.

Sollte jedoch die Betriebszeit des Kinnbügelhörers stark nachlassen oder beim Laden des Akkus ein Ladefehler angezeigt werden (siehe Seite 15), kann der Akku verbraucht oder defekt sein und muss ausgetauscht werden.

---

### VORSICHT

#### Gefahr von Schäden am Produkt!

Während der Garantiezeit dürfen die Akkus ausschließlich von einem Sonova Consumer Hearing-Partner ersetzt oder entfernt werden. Anderenfalls erlischt die Garantie.

- ▷ Setzen Sie sich mit Ihrem Sonova Consumer Hearing-Partner in Verbindung, wenn die Akkus gewechselt oder entnommen werden müssen.
- ▷ Schicken Sie ein Produkt mit defektem Akku nicht unaufgefordert an Ihren Händler oder Sonova Consumer Hearing-Partner zurück.

---

Nach Ablauf der Garantiezeit können Sie die Akkus in qualifizierten Fachwerkstätten auf geeignete Art und Weise wechseln oder entnehmen lassen. Eine Anleitung für das Ersetzen oder Entnehmen der Akkus ist für qualifizierte Fachwerkstätten über den Sonova Consumer Hearing-Partner erhältlich.

Für den Austausch benötigen Sie geeignetes Werkzeug. Aus diesem Grunde empfehlen wir, den Akku bei Ihrem Sonova Consumer Hearing-Partner tauschen zu lassen.

Schicken Sie ein Produkt mit defektem Akku nicht unaufgefordert an Ihren Händler oder Sonova Consumer Hearing-Partner zurück. Den Sonova Consumer Hearing-Partner Ihres Landes finden Sie auf: [www.sennheiser-hearing.com/service-support](http://www.sennheiser-hearing.com/service-support).

Am Ende der Lebensdauer muss dieses Produkt mit eingebautem Akku einer getrennten Entsorgung übergeben werden. Weitere Informationen finden Sie hier: siehe Seite 42.


## RS 5200 Zusatz-Funktionen verwenden

Die folgenden Zusatz-Funktionen sind für die normale Verwendung des Funkkopfhörersystems nicht erforderlich. Sie können jedoch die Nutzungsmöglichkeiten erweitern und einige Funktionen individuell anpassen.

### Einen oder mehrere Kinnbügelhörer mit dem Sender koppeln

Der Kinnbügelhörer und der Sender Ihres Funkkopfhörersystems sind im Auslieferungszustand bereits miteinander gekoppelt. Sie müssen die folgenden Schritte nur ausführen, wenn Sie weitere Kinnbügelhörer mit dem Sender koppeln möchten.


Sie können gleichzeitig bis zu 4 gekoppelte Kinnbügelhörer mit Ihrem Sender zur Audiowiedergabe nutzen. Alle weiteren gekoppelten und eingeschalteten Hörer können sich nicht mit dem Sender verbinden.

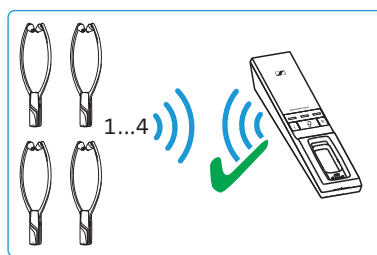

**i** Wenn Sie mehr als einen Kinnbügelhörer mit dem Sender verbunden haben, ist die Anzeige der verbleibenden Betriebszeit/ des Ladezustands und der Hörprofile ausgeschaltet. Die Einstellung der Balance und des Hörprofils sind ebenfalls nicht möglich. Diese Funktionen können Sie nur nutzen/einstellen, wenn 1 Kinnbügelhörer mit dem Sender verbunden ist.

#### Möglichkeit A (Kontakt-Kopplung)


- ▷ Legen Sie den Kinnbügelhörer in die Ladeschale des Senders. Der Kinnbügelhörer wird mit dem Sender gekoppelt.

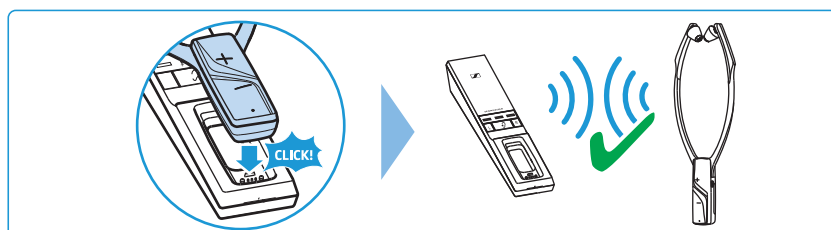

#### Möglichkeit B (Nahbereich-Kopplung)

1. Platzieren Sie den Kinnbügelhörer so nahe wie möglich am Sender.
2. Schalten Sie den Kinnbügelhörer ein, indem Sie die Bügel öffnen.
3. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Lautstärke +/- und halten Sie sie solange gedrückt, bis die LED *Hörerstatus* rot blinkt. Sobald der Kopplungsvorgang abgeschlossen ist, blinkt die LED *Hörer-*

*status* grün und die LED *Senderstatus* weiß.  
Lassen Sie anschließend die Tasten los.

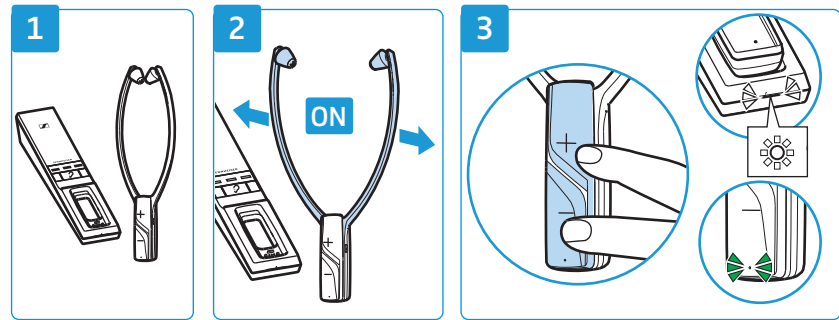


## Erweiterte Einstellungen vornehmen

Mit den erweiterten Einstellungen können Sie das Funkkopfhörersystem individuell anpassen und z. B. gegen ungewolltes Verändern von Einstellungen schützen.

### Geschützte Einstellfunktion aktivieren

Die erweiterten Einstellungen können Sie über eine geschützte Einstellfunktion ändern:

1. Trennen Sie den Sender vom Stromnetz, indem Sie den Stecker des Steckernetzteils abziehen.
2. Halten Sie die Taste *Hörprofil* gedrückt und verbinden Sie den Sender mit dem Stromnetz, indem Sie den Stecker des Steckernetzteils mit der gelb markierten Anschlussbuchse am Sender verbinden.

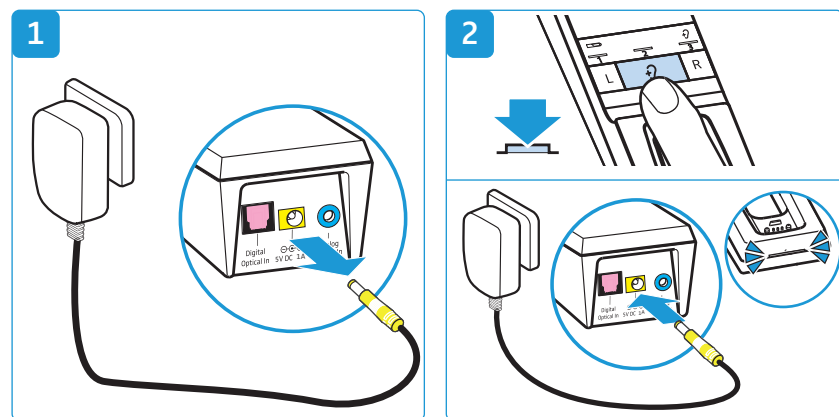

Die geschützte Einstellfunktion ist aktiviert. Die LED *Senderstatus* blinkt blau. Die LED-Balken zeigen die aktuellen Einstellungen an, wie in den folgenden Kapitel angegeben:


- Akkustatus-Anzeige (siehe Seite 32)
- Ladeerinnerung (siehe Seite 33)
- Hörprofil- und Balance-Schutz (siehe Seite 33)

### Geschützte Einstellfunktion deaktivieren und erweiterte Einstel-

### lungen speichern

Um die erweiterten Einstellungen zu speichern und die geschützte Einstellfunktion zu deaktivieren:

3. Trennen Sie den Sender vom Stromnetz, indem Sie den Stecker des Steckernetzteils abziehen.

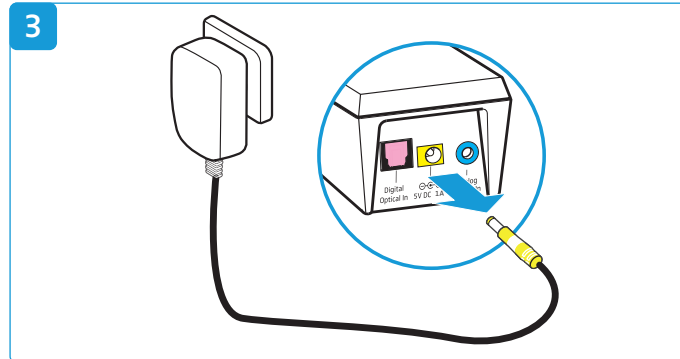



### Akkustatus-Anzeige

Die Einstellung wird im **Sender** gespeichert, unabhängig von dem Kinnbügelhörer, den Sie verwenden.

Um die Anzeige umzuschalten:

- ▷ Stellen Sie sicher, dass die geschützte Einstellfunktion am Sender aktiviert ist (siehe Seite 31).
- ▷ Drücken Sie die Taste Balance **L**.



Status und Anzeige der LED Akku	Funktion/Verhalten
permanent an (Betrieb und Laden)*  1. Balken leuchtet	Während des Ladens wird permanent der erreichte Akku-Ladestand angezeigt. Während des Betriebs wird permanent der verbleibende Akku-Ladestand angezeigt.
30 Sekunden an (für Betrieb und Laden)  1. Balken aus	Während des Ladens wird für 30 Sekunden der Akku-Ladestand angezeigt. Danach erlöschen alle LEDs. Der Ladevorgang wird fortgesetzt. Während des Betriebs wird für 30 Sekunden der verbleibende Akku-Ladestand angezeigt. Danach erlischt die Anzeige.

\* Werkseinstellung

- ▷ Speichern Sie die Einstellung, indem Sie den Sender vom Stromnetz trennen (siehe Seite 31).





### Ladeerinnerung

Die Einstellung wird im **Sender** gespeichert, unabhängig von dem Kinnbügelhörer, den Sie verwenden.

Um die Funktion ein- oder auszuschalten:

- ▷ Stellen Sie sicher, dass die geschützte Einstellfunktion am Sender aktiviert ist (siehe Seite 31).
- ▷ Drücken Sie am Sender die Taste Balance **R**.



Status und Anzeige der Ladeerinnerungs-Funktion	Funktion/Verhalten
eingeschaltet*  3. Balken leuchtet	Wenn Sie den Kinnbügelhörer ausgeschaltet haben und der Sender in Standby geht, erinnert Sie die Akku-Statusanzeige für 10 Minuten an das Laden des Kinnbügelhörers.
ausgeschaltet  3. Balken aus	Nach dem Ausschalten des Funkkopfhörersystem bleiben alle LEDs aus.


\* Werkseinstellung



- ▷ Speichern Sie die Einstellung, indem Sie den Sender vom Stromnetz trennen (siehe Seite 31).

### Hörprofil- und Balance-Schutz

Die Einstellung wird im **Kinnbügelhörer** gespeichert, unabhängig von dem Sender, den Sie verwenden.

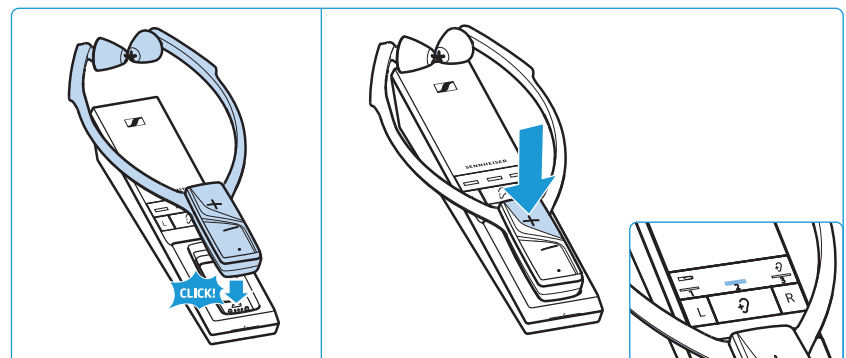- ▷ Stellen Sie sicher, dass für Ihren Kinnbügelhörer die Balance und das Hörprofil korrekt eingestellt sind (siehe Seite 22 und 23).
- ▷ Stellen Sie sicher, dass die geschützte Einstellfunktion am Sender aktiviert ist (siehe Seite 31).
- ▷ Legen Sie den Kinnbügelhörer in die Ladeschale des Senders.
- ▷ Drücken Sie auf dem Kinnbügelhörer die Taste Lautstärke **+**, um den Hörprofil- und Balance-Schutz einzustellen.



Status und Anzeige der Schutz-Funktion	Funktion/Verhalten
eingeschaltet  2. Balken leuchtet	Das eingestellte Hörprofil und die Balance können nicht verändert/ausgeschaltet werden.
ausgeschaltet*  2. Balken aus	Die Hörprofile können jederzeit umgeschaltet werden, indem Sie die Taste <i>Hörprofil</i> für 2 Sekunden gedrückt halten. Die Balance ist veränderbar.

\* Werkseinstellung

- ▷ Speichern Sie die Einstellung, indem Sie den Sender vom Stromnetz trennen (siehe Seite 31).


**i** Wenn Sie mehrere Kinnbügelhörer verwenden und die Hörprofile schützen wollen, können Sie nacheinander die Kinnbügelhörer in die Ladeschale legen und den Hörprofil- und Balance-Schutz einstellen.

## Werkseinstellungen wiederherstellen

Um den Sender auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen:


1. Trennen Sie den Sender vom Stromnetz, indem Sie den Stecker des Steckernetzteils abziehen.
2. Halten Sie gleichzeitig die Tasten **L**, **↻** und **R** gedrückt.
3. Verbinden Sie den Sender mit dem Stromnetz, indem Sie den Stecker des Steckernetzteils mit der gelb markierten Anschlussbuchse am Sender verbinden und halten Sie die 3 Tasten mindestens für 3 Sekunden gedrückt.

Alle LEDs des Senders blinken. Die Einstellungen des Senders werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

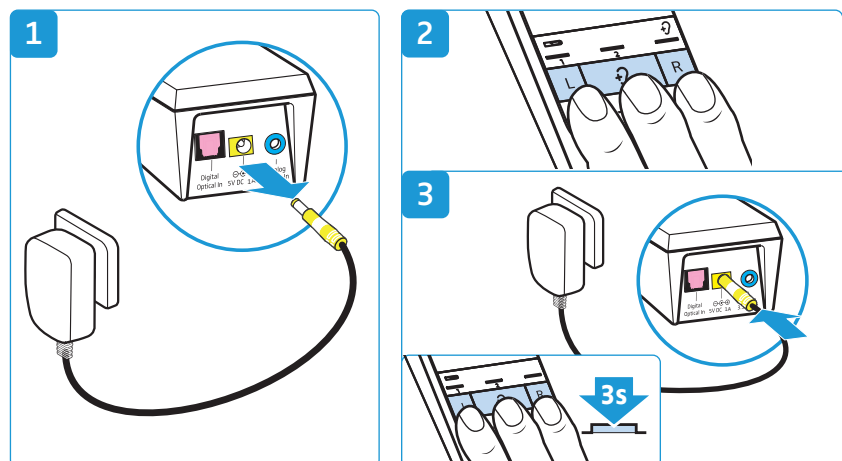


Um einen Kinnbügelhörer ebenfalls auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen:

- ▷ Legen Sie den Kinnbügelhörer in die Ladeschale des Senders. Die LED *Hörerstatus* blinkt grün. Die Einstellungen des Kinnbügelhörers werden ebenfalls auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

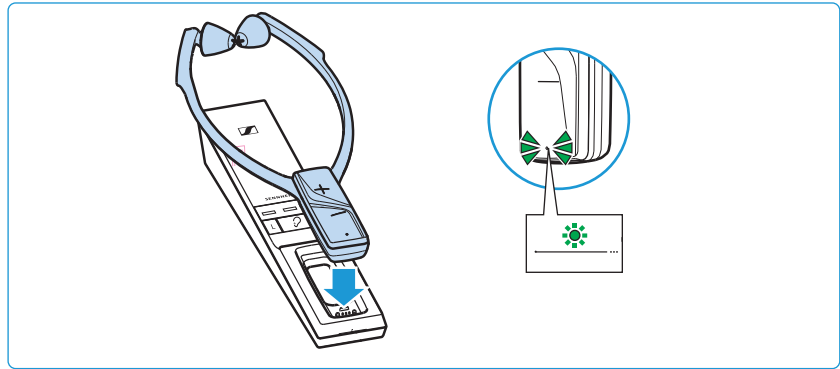

**i** Der Kinnbügelhörer kann auch zu Beginn in der Ladeschale liegen, um gleichzeitig die Werkseinstellungen von Sender und Kinnbügelhörer wiederherzustellen.

- ▷ Trennen Sie den Sender vom Stromnetz, indem Sie den Stecker des Steckernetzteils abziehen.  
Die Werkseinstellungen sind wiederhergestellt und Sie können das Funkkopfhörersystem wieder verwenden.

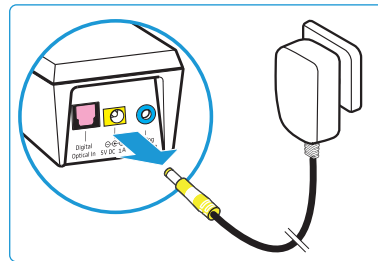

## Akku mit dem Ladeadapter MCA 800 laden

Wenn Sie einen zusätzlichen Kinnbügelhörer und/oder einen optionalen Ladeadapter MCA 800 erworben haben, können Sie den Kinnbügelhörer auch mit dem Ladeadapter laden.

Halten Sie stets einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen Kopfhörer/Ladeadapter MCA 800 und Herzschrittmachern, implantierten Defibrillatoren (ICDs) und anderen Implantaten. Der Kopfhörer/Ladeadapter MCA 800 erzeugt Magnetfelder, die bei Herzschrittmachern, implantierten Defibrillatoren (ICDs) und anderen Implantaten zu Störungen führen können.



### WARNUNG


#### Störungen durch Magnetfelder!

Der Ladeadapter MCA 800 erzeugt stärkere permanente Magnetfelder. Diese können Herzschrittmacher, implantierte Defibrillatoren (ICDs) und andere Implantate stören.

- ▷ Halten Sie stets einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen den Magnethalterungen des Ladeadapters und Herzschrittmacher, implantiertem Defibrillator oder anderen Implantaten.

Wählen Sie den passenden Länderadapter aus und schieben Sie diesen auf das Netzteil, bis er hörbar einrastet.

4. Verbinden Sie den Stecker des Steckernetzteils mit der Anschlussbuchse des Ladeadapters MCA 800.
5. Stecken Sie das Steckernetzteil in die Steckdose.
6. Verbinden Sie den Ladeadapter mit den Ladekontakten am Kinnbügelhörer. Der Ladeadapter wird magnetisch in die richtige Position gerückt.  
Der Akku wird geladen. Am Ladeadapter leuchtet die LED rot.  
Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die LED grün.

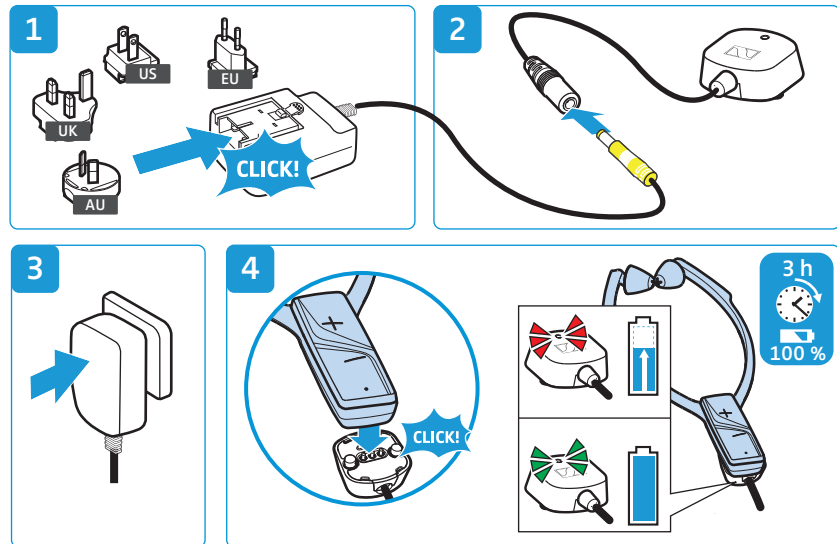

**i** Sie können den Kinnbügelhörer auch während des Ladens verwenden. Beachten Sie jedoch, dass der Empfänger sich während des Ladens leicht erwärmen kann. Am Sender wird der erreichte Ladestand des Akkus angezeigt (siehe Seite 15).

Wenn am Ladeadapter die LED rot-grün blinkt, ist ein Lade-/Akku-fehler aufgetreten. Entfernen Sie in diesem Fall den Ladeadapter von dem Kinnbügelhörer. Weitere Informationen zum Akku: siehe Seite 29.

## Wenn Störungen auftreten

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Abhilfe	siehe Seite
Sender schaltet sich nicht ein	kein Netzanschluss	Prüfen Sie die Anschlüsse des Steckernetzteils.	15
Kinnbügelhörer lässt sich nicht einschalten	Akku ist leer	Laden Sie den Akku.	15
	Akku ist tiefentladen	Laden Sie den Akku für mehrere Stunden. Bei einem tiefentladenen Akku startet der Ladevorgang ggf. erst nach einiger Zeit (bis zu 1 Stunde).	
kein Ton	kein Netzanschluss	Prüfen Sie die Anschlüsse des Steckernetzteils.	15
	Audiostecker ist nicht richtig eingesteckt	Prüfen Sie die Steckerverbindung.	10
	Audioquelle ist ausgeschaltet	Schalten Sie die Audioquelle ein.	–
	Lautstärke der analogen Audioquelle ist auf Minimum eingestellt oder ist stumm geschaltet	Erhöhen Sie die Lautstärke der analogen Audioquelle auf mindestens einen mittleren Wert/deaktivieren Sie die Stummschaltung an der Audioquelle.	–
	Audiokabel ist defekt	Ersetzen Sie das Audiokabel.	–
	Kinnbügelhörer ist nicht richtig mit dem Sender gekoppelt (z. B. zusätzlicher Kinnbügelhörer/Empfänger)	Koppeln Sie Kinnbügelhörer und Sender erneut.	30
kein Ton bei digitaler Audioquelle	sowohl an dem digitalen und an dem analogen Audioeingang sind Kabel angeschlossen	Entfernen Sie das Kabel vom analogen Audioeingang.	10
	Die digitale Audioquelle sendet Signale in einem Audioformat, das nicht unterstützt wird. Die LED <i>Senderstatus</i> blinkt weiß-blau.	Stellen Sie das Audioformat Ihrer Audioquelle auf „PCM“ mit einer Abtastrate von max. 96 kHz ein (siehe die Bedienungsanleitung der Audioquelle).	–
Ton fällt zeitweise aus, ggf. hören Sie 5 Tonsignale im Hörer	Kinnbügelhörer befindet sich außerhalb der Reichweite des Senders	Verringern Sie den Abstand zwischen Kinnbügelhörer und Sender.	–
	Signal ist abgeschirmt	Entfernen Sie Hindernisse zwischen Sender und Kinnbügelhörer.	–
	störende Geräte (z. B. WLAN-Router, Bluetooth-Geräte oder Mikrowellen) in der Umgebung	Verändern Sie den Aufstellort des Senders oder die Position des Hörers. Stellen Sie den Sender mind. 50 cm von anderen funkenden Geräten entfernt auf.	10
Ton zu leise	Die Lautstärke am Kinnbügelhörer ist zu gering eingestellt.	Erhöhen Sie die Lautstärke am Kinnbügelhörer.	22
	Die Lautstärke der analogen Audioquelle ist zu gering eingestellt.	Erhöhen Sie die Lautstärke der analogen Audioquelle auf mindestens einen mittleren Wert (ca. 1 V <sub>eff</sub> ).	–

## Wenn Störungen auftreten

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Abhilfe	siehe Seite
Ton nur auf einer Seite	Balance ist verstellt	Stellen Sie die Balance ein.	22
	Audiokabel ist nicht richtig angeschlossen	Prüfen Sie die Steckerverbindung.	10
	der Fernseher hat nur einen Mono-Kopfhörer-Ausgang	Verwenden Sie für den Anschluss des Senders einen Adapter von Mono- auf Stereo-Klinkensteckerbuchse.	-
Ton ist verzerrt	Audiokabel defekt	Ersetzen Sie das Audiokabel.	-
	Signal der Audioquelle ist verzerrt	Verringern Sie die Lautstärke der Audioquelle.	-
	Lautstärke am Kinnbügelhörer ist zu hoch eingestellt	Verringern Sie die Lautstärke am Kinnbügelhörer.	22
Echos treten auf, bei Verwendung mit einem Fernsehgerät	An einigen Fernsehgeräten kann für das Signal des digitalen Audioausgangs eine Verzögerung oder Latenz eingestellt werden.	Überprüfen Sie die Audioausgangseinstellungen Ihres Fernsehgeräts und stellen Sie die Latenz auf „0“ ein.	-
	Ohrpolster aus offenem Schaum in Benutzung	Stellen Sie den Fernsehgerät-Lautsprecher leiser oder verwenden Sie geschlossene Ohrpolster (Memory-Schaum oder Silikon).	18
Ladezustand- und Akkustatus-Anzeigen erlöschen	Akkustatus-Anzeige ist so eingestellt, dass sie nach 30 Sekunden erlischt.	Schalten Sie die Akkustatus-Anzeige so ein, dass sie permanent sichtbar ist.	32
	mehr als 1 Kinnbügelhörer ist mit dem Sender zurzeit verbunden	Die Funktion ist nur möglich, wenn 1 Kinnbügelhörer/Empfänger mit dem Sender verbunden ist.	-
2 Tonsignale im Betrieb	Akku ist nahezu leer	Laden Sie den Akku.	15
Betriebszeit lässt nach	Akku ist verbraucht	Lassen Sie den Akku von einem autorisierten Sonova Consumer Hearing-Partner ersetzen.	29
Hörprofil oder Balance kann nicht eingeschaltet oder verändert werden	Hörprofil- und Balance-Schutz ist eingeschaltet	Deaktivieren Sie den Hörprofil- und Balance-Schutz.	33
	mehr als 1 Kinnbügelhörer/Empfänger ist mit dem Sender zurzeit verbunden	Die Funktion ist nur möglich, wenn 1 Kinnbügelhörer/Empfänger mit dem Sender verbunden ist.	-
Kinnbügelhörer verbindet sich nicht mit dem Sender	Kinnbügelhörer ist nicht mit dem Sender gekoppelt	Koppeln Sie den Kinnbügelhörer mit dem Sender.	30
	Abstand zum Sender ist zu groß	Verringern Sie den Abstand zwischen Kinnbügelhörer und Sender.	-
	4 Kinnbügelhörer sind mit dem Sender zurzeit verbunden	Maximal 4 Kinnbügelhörer können gleichzeitig mit dem Sender zur Audio-wiedergabe verwendet werden.	-

Wenn mit Ihrem Produkt Probleme auftreten, die nicht in der Tabelle stehen, oder sich die Probleme nicht mit den in der Tabelle aufgeführten Lösungsvorschlägen beheben lassen, besuchen Sie die Produktseite des RS 5200 auf [www.sennheiser-hearing.com](http://www.sennheiser-hearing.com). Dort finden Sie eine aktuelle Liste häufig gestellter Fragen (FAQ).


Sie können ebenfalls Ihren Sonova Consumer Hearing-Partner kontaktieren, wenn Sie Unterstützung benötigen. Den Sonova Consumer Hearing-Partner Ihres Landes finden Sie auf: [www.sennheiser-hearing.com/service-support](http://www.sennheiser-hearing.com/service-support).

## Wenn Sie die Reichweite des Senders verlassen

Die Reichweite des Senders hängt von Umgebungsbedingungen ab, wie z. B. der Dicke und Zusammensetzung von Wänden. Wenn Sie mit dem Kinnbügelhörer die Reichweite des Senders verlassen, fällt der Ton zunächst gelegentlich aus, bevor die Verbindung endgültig abbricht. Sie hören Warntöne im Kinnbügelhörer und die LED *Hörerstatus* blinkt grün (oder rot, wenn der Akku nahezu leer ist).

Wenn Sie innerhalb von 5 Minuten in die Reichweite des Senders zurückkehren, wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt.

Wenn Sie sich länger als 5 Minuten außerhalb der Reichweite des Senders aufhalten, schaltet sich der Kinnbügelhörer automatisch aus.

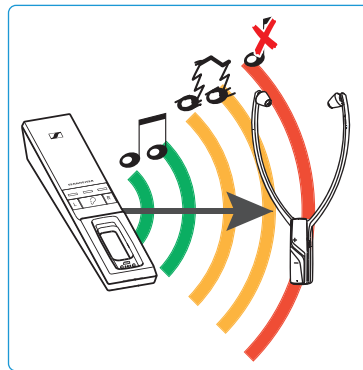

# Technische Daten

## System, Modell: RS 5200

Sendefrequenz	2,4 bis 2,4835 GHz
Modulationsart	8-FSK Digital
Rauschspannungsabstand	Analogeingang: typ. 85 dBA bei 1 V <sub>eff</sub> Digitaleingang: > 90 dBA
HF-Ausgangsleistung	max. 10 dBm
Audiolatenz	< 60 ms
Reichweite	bis zu 70 m (bei Sichtverbindung)
Kinnbügelhörer, die gleichzeitig mit dem Sender verbunden sein können	4
Temperaturbereich	Betrieb: +5 °C bis +40 °C Lagerung: -25 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	Betrieb: 10 bis 80 % Lagerung: 10 bis 90 %

## Kinnbügelhörer, Modell: RR 5200

Typ	Einsteckhörer, geschlossen
Wandlersystem	dynamisch, Neodym-Magnete
Ohrpolstermaterial	Silikon: Silikonelastomer Memory-Schaum: PUR Offener Schaum: PUR
Übertragungsbereich	15 Hz bis 16 kHz
Schalldruckpegel	max. 125 dB bei 1 kHz, 3 % Klirrfaktor
Klirrfaktor	< 0,5 % bei 1 kHz, 100 dB SPL
Betriebszeit	bis zu 12 Stunden
Ladezeit des Akkus	bis zu 3 Stunden
Spannungsversorgung	eingebauter Lithium-Polymer-Akku BAP 800, 3,7 V, 350 mAh
Gewicht (mit Akku)	ca. 61 g
Abmessungen (ausgeschaltet, B x H x T)	ca. 102 mm x 265 mm x 23 mm
Maximaler Wert des statischen Magnetfelds an der Oberfläche	1,15 mT




Sender, Modell: TR 5000

Anschlüsse	Digitaleingang: optisch Unterstützte Datenströme: PCM, 32 - 96 kHz/16 - 24 bit
	Analogeingang: 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse Eingangsspannungsbereich: 0,15 bis 4,0 V <sub>pk</sub>
Spannungsversorgung	5 V $\overline{=}$ , 1 A
Leistungsaufnahme	Betrieb: typ. 1 W Standby: $\leq$ 0,5 W (ohne Ladevorgang)
Abmessungen (B x H x T)	ca. 50 mm x 42 mm x 270 mm

Steckernetzteil, Modell: NT 5-10AW

Nenningangsspannung/-strom	100 - 240 V~/300 mA
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Nennausgangsspannung	5 V $\overline{=}$
Nennausgangsstrom	1 A
Temperaturbereich	Betrieb: 0 °C bis +40 °C Lagerung: -25 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	Betrieb: 10 bis 80 % Lagerung: 10 bis 90 %

Hörprofile 1-3

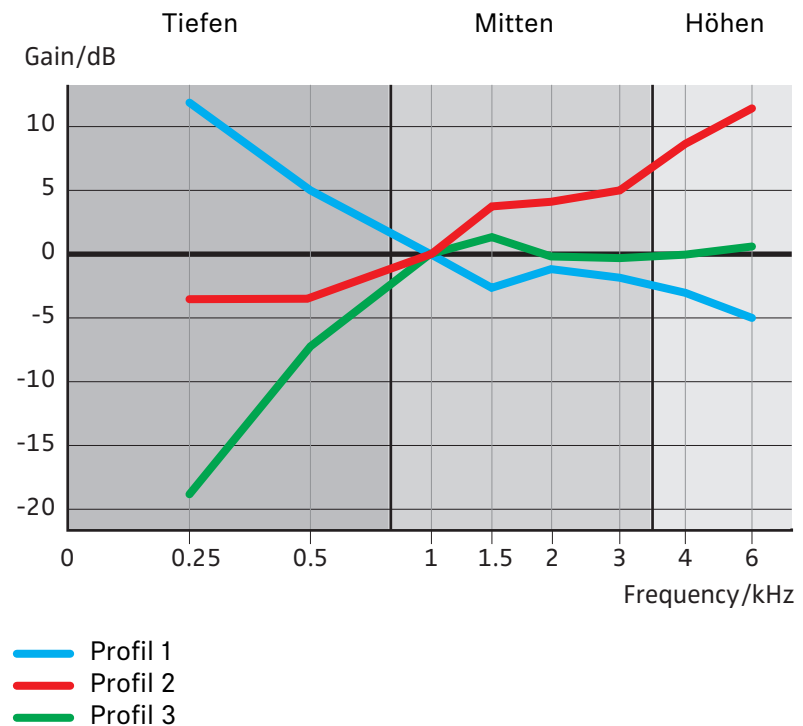

# Herstellereklärungen

## Garantie

Sonova Consumer Hearing GmbH übernimmt für dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten.

Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet unter [www.sennheiser-hearing.com/warranty](http://www.sennheiser-hearing.com/warranty) oder Ihren Sonova Consumer Hearing-Partner beziehen.

## In Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen

EU-Konformitätserklärung



- ErP-Richtlinie (2009/125/EG)
- RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)

Hiermit erklärt Sonova Consumer Hearing GmbH, dass der Funkanlagentyp TR 5000, RR 5200 der Funkanlagen-Richtlinie (2014/53/EU) entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:


[www.sennheiser-hearing.com/download](http://www.sennheiser-hearing.com/download).

UK-Konformitätserklärung



- The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations (2019)
- RoHS Regulations (2012)
- Radio Equipment Regulations (2017)

## Hinweise zur Entsorgung

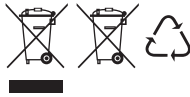

- EU: WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)
- EU: Batterie-Richtlinie (2006/66/EG & 2013/56/EU)
- UK: WEEE Regulations (2013)
- UK: Battery Regulations (2015)

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, Batterie/Akku (falls zutreffend) und/oder der Verpackung weist Sie darauf hin, dass diese Produkte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern am Ende ihrer Lebensdauer getrennt entsorgt werden müssen. Für die Verpackung beachten Sie die Abfalltrennung in Ihrem Land. Nicht sachgerechte Entsorgung von Verpackungsmaterialien kann Ihre Gesundheit und die Umwelt schädigen.

Die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Batterien/Akkus (falls zutreffend) und Verpackungen dient dazu, die Wiederverwendung und das Recycling zu fördern und negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und die Umwelt zu verhindern, z. B. durch potenziell gefährliche Stoffe, die in diesen Produkten enthalten sind. Führen Sie Elektro- und Elektronikgeräte und Batterien/Akkus am Ende ihrer Lebensdauer dem Recycling zu, um enthaltene Wertstoffe nutzbar zu machen und eine Vermüllung der Umwelt zu vermeiden.

## Herstellereklärungen

Wenn Batterien/Akkus zerstörungsfrei entnommen werden können, haben Sie die Pflicht, diese getrennt der Entsorgung zuzuführen (zur sicheren Entnahme von Batterien/Akkus siehe Bedienungsanleitung des Produkts). Gehen Sie insbesondere mit lithiumhaltigen Batterien/Akkus vorsichtig um, da diese besondere Risiken beinhalten wie Brand- und/oder Verschluckungsgefahr bei Knopfzellen. Reduzieren Sie die Entstehung von Abfällen aus Batterien soweit wie möglich, indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder wiederaufladbare Akkus einsetzen.

Weitere Informationen über das Recycling dieser Produkte erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, bei den kommunalen Sammelstellen oder bei Ihrem Sonova Consumer Hearing-Partner. Elektro- oder Elektronikgeräte können Sie auch bei rücknahmepflichtigen Vertreibern zurückgeben. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt und der öffentlichen Gesundheit.