


**De enige ooglidomklapper
voor boven- én onderooglid
Te bedienen met één hand!**

eye/inci

WORD EEN PRO IN ENKELE MINUTEN

- 1 Oefen op jezelf via de spiegel
- 2 Oefen op je collega's
- 3 Moeiteloos het ooglid van jouw klant omklappen

Onderste Ooglid

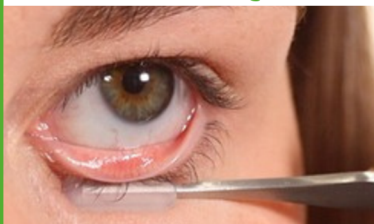

Het onderste ooglid is makkelijk.
Druk de zijkant van het kleinere
tipje tegen de onderooglidrand,
trek het ooglid naar beneden en rol
het vervolgens iets naar voren

5

De 5 stappen om het bovenooglid om te klappen met de Meivertor



Terwijl de klant naar beneden kijkt, plaats je de wimpers tussen de tips van de Meivertor, met het grote tipje aan de bovenzijde.



Pak de wimpers stevig vast, maar zorg ervoor dat je het ooglid zelf niet meeneemt.



Trek het bovenooglid voorzichtig iets naar beneden en van het oog af.



Rol vervolgens de Meivertor naar voren door het handvat tussen vingers en duim te draaien en tegelijkertijd de pols te bewegen.



Ga door met rollen totdat de binnenzijde van het bovenooglid zichtbaar is en het ooglid volledig is omgeklapt.