

Hoofd- en halsset

- Optimaal gevouwen voor steriel gebruik
- Afdekoplossing voor een snel en gemakkelijk gebruik, eenvoudig aan te brengen door één persoon
- Flexibele afdekoplossing voor alle hoofd/hals ingrepen





1 Plaats het laken in de juiste richting (zie pictogram).



2 Vouw het laken open totdat u de pictogrammen ziet.



3 Eén pictogram - richting van het laken. Twee pictogrammen - waar je de handen moet plaatsen.



4 Steek uw handen in de hoeken en vouw het laken volledig open.



5 Plaats het laken onder het hoofd en gedeeltelijk onder de schouders van de patiënt.



6 Neem de hoek van het laminaat en trek het laken over de patient. Opmerking: Houd de hoek van het spunlace materiaal in de andere hand, zie volgende afbeelding.



7 Trek het laken naar de voeten van de patiënt. Doe dit aan beide zijden. Leg het laken over de patiënt.



8 Neem één zijde van het spunlace laken...



9 ... en vouw het rond het gedeelte van het gezicht/hals waar de ingreep zal plaatsvinden.



10 Houd het laken stevig vast aan het hoofd en bevestig de andere zijde van het laken.



11 Gebruik de OP-tape om de tulband te fixeren.



12 Plaats het zelfklevend afdekken en vouw het open in de richting van de voeten.

	artikelnummer
696940	Hoofdset
826900	Hoofd- en halslaken