



## Afsluiten van het Safe Label System

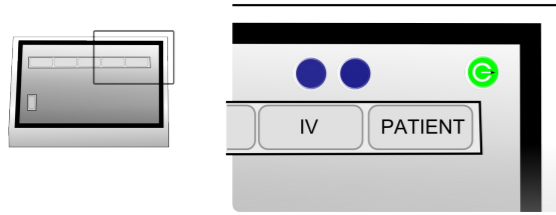

1. Raak het groene rondje aan in de rechter bovenhoek



2. Raak om door te gaan het vakje "Afsluiten" aan.

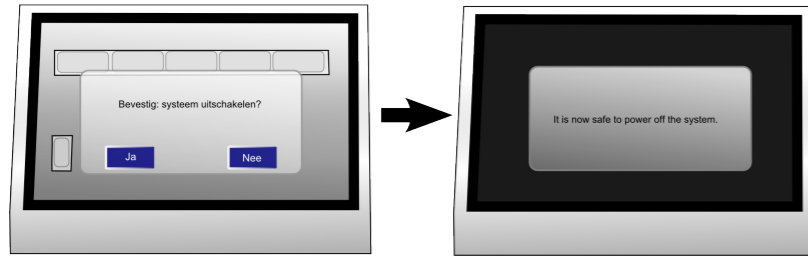


3. Bevestig vraag door het "ja" vakje aan te raken.




4. Zet de schakelaar terug naar stand 0.


## Verdunningen

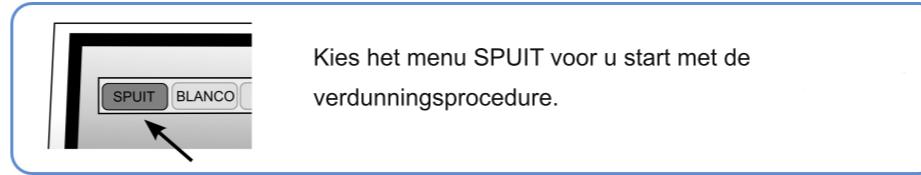


Kies het menu SPUIT voor u start met de verdunningsprocedure.

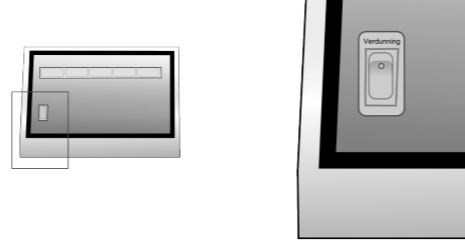

1. Schakel de functie VERDUNNER in door op het scherm het knopje "verdunnen" aan te raken.

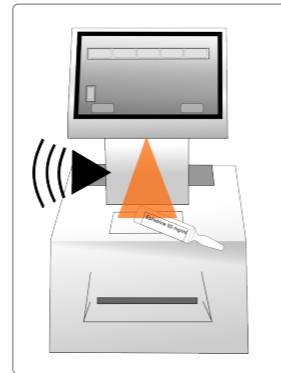

2. Scan de ampul.

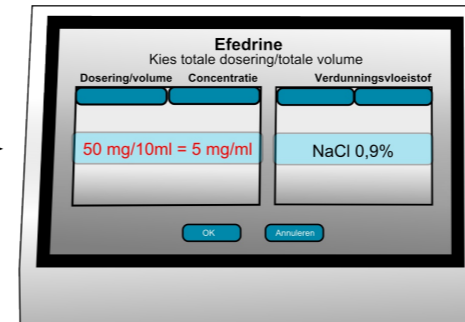

3. Kies de dosering dmv het aanraken van de gewenste dosering (indien meerdere concentraties) en bevestig door het knopje "OK" aan te raken.



4. Volg nu verder de instructies "Bereiding medicatiespuiten" vanaf punt 4.



## Opstarten van het Safe Label System




1. Zet de schakelaar om naar stand 1.



2. Bevestig of stel opnieuw in.




Loginveld verschijnt in display.

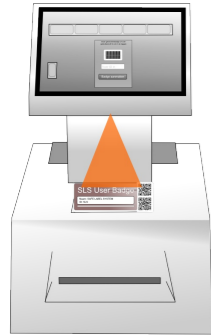





3. Scan gebruikersbadge.




## Bereiding medicatiespuiten

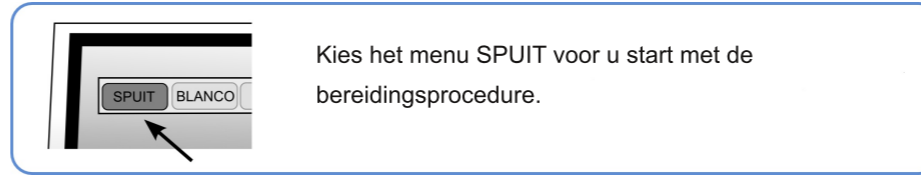

Kies het menu SPUIT voor u start met de bereidingsprocedure.

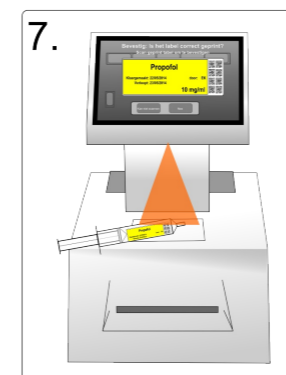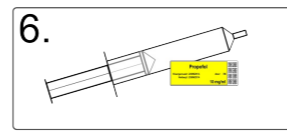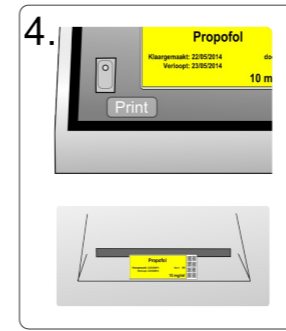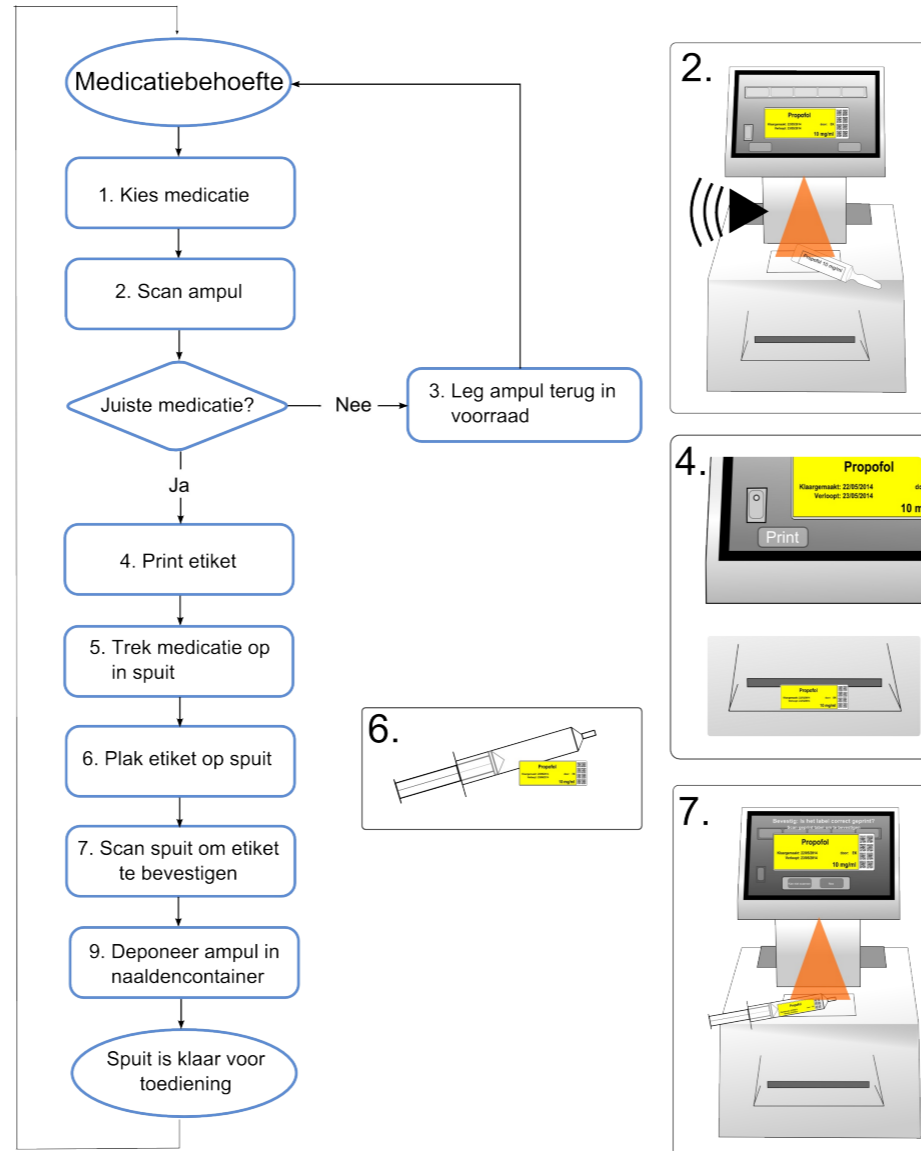

## Toediening medicatiespuiten

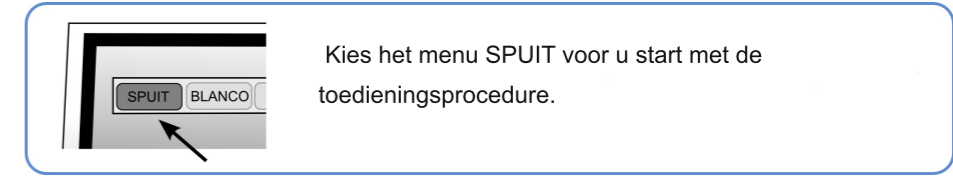

Kies het menu SPUIT voor u start met de toedieningsprocedure.

