


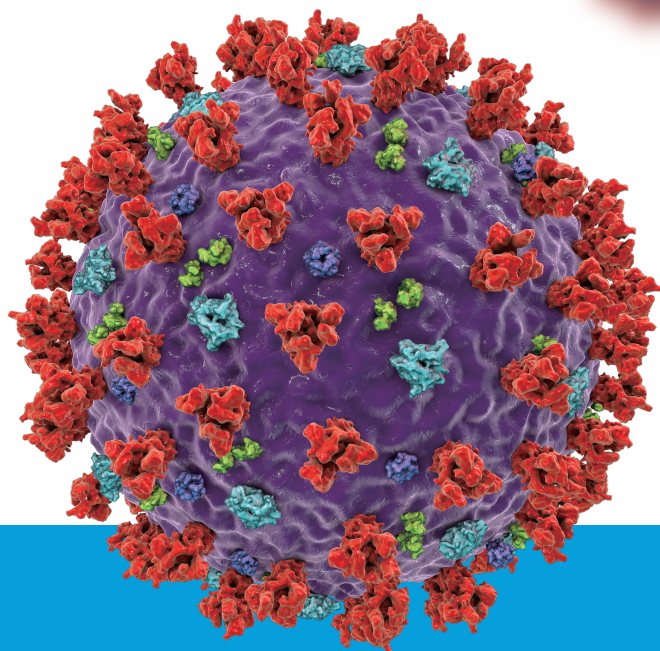

Flowflex™ SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

Deze **COVID-19 zelftest** is een **ondiepe** sneltest voorin de neus, voor het identificeren van een actieve COVID-19 infectie binnen de eerste 7 dagen na het begin van symptomen.

Deze test wordt geleverd als zelftest, **per individuele test verpakt**, met een **Nederlandse handleiding** voor o.a. consumenten gebruik, en niet als sneltest voor professionele gebruikers.

Deze COVID-19 zelftest heeft sinds 1 april 2021 een **onthefving van het ministerie van VWS**.

*bovenstaande foto is de foto van de sneltest verpakking, de zelftest verpakking zal aangepast zijn voor consumenten maar hier is nog geen fotomateriaal van beschikbaar.



Snel



Makkelijk te gebruiken



Accuraat

Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

De Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test is een laterale flow chromatografische immunoassay voor de kwalitatieve detectie van het nucleocapside-eiwitantigeen van SARS-CoV-2 met behulp van een wegwerp wattenstaafje dat rechtstreeks wordt afgenomen binnen de eerste zeven dagen na het begin van de symptomen.

- CE gemarkeerd & goedgekeurd
- Wegwerp wattenstaafje (voor een ondiepe test in de neus)
- Resultaten in 15 minuten
- Verpakt per stuk met nederlandse handleiding
- Uitstekende prestaties in vergelijking met traditionele methoden
- Opslag bij kamertemperatuur

Klinische Prestaties

De prestatie van de Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test werd vastgesteld met 304 neusuitstrijkjes die waren afgenomen bij individuele symptomatische patiënten (binnen 7 dagen na aanvang) die werden verdacht van COVID-19. De prestaties van de Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test werden vergeleken met een RT-PCR-methode.

Klinische prestaties van SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test


Methode	Resultaten	RT-PCR		Totale Resultaten
		Negatief	Positief	
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test	Negatief	269	1	270
	Positief	1	33	34
Totale Resultaten		270	34	304
PPA: 97.1% (83.8% - 99.9%)*		NPA: 99.6% (97.7% - 99.9%)*		OPA: 99.3% (97.5% - 99.9%)*

PPA-positieve procentuele overeenkomst; NPA - Negatieve procentuele overeenkomst; OPA - Algemene procentuele overeenkomst, * 95% betrouwbaarheidsintervallen

Geleverde materialen

- 1 Test Cassette
- 1 Nederlandse bijsluiter
- Extractiebufferbuisje
- Druppeldopje
- Wegwerp wattenstaafje

Testprocedure en Interpretatie

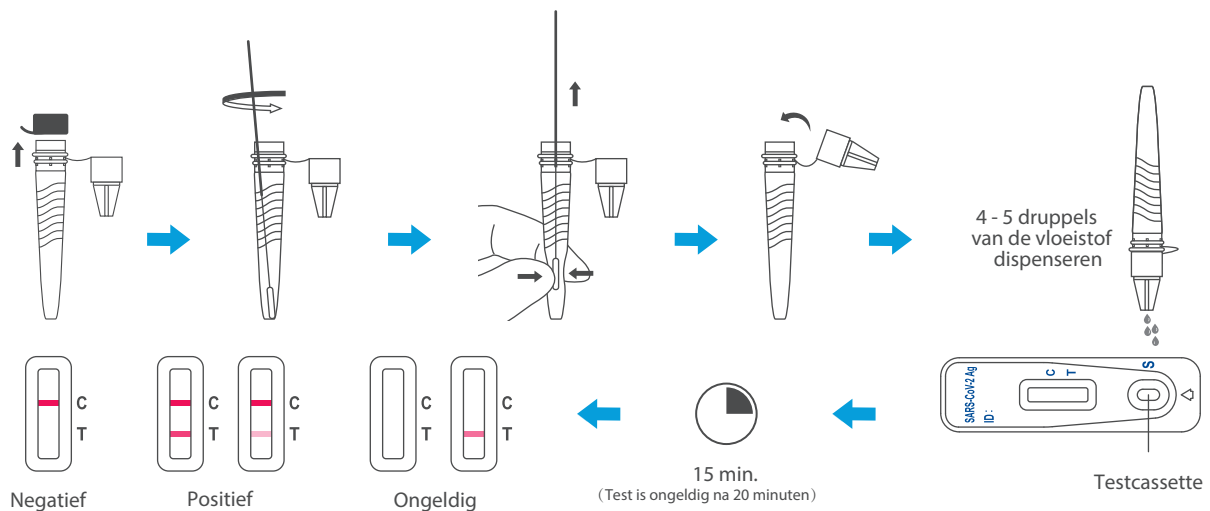

Productinformatie

Productnaam	Catalogusnummer	Formaat	Monsterafname	Inhoud
Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test		Cassette	Nasale wattenstaaf	1 Test/Kit



www.core-hygienics.com

Core Hygienics
Oud Camp 22
3155 DL Maasland
Nederland
+31 (0) 88 697 25 70
info@core-hygienics.com