


# HANDBUCH

## First15 Tourniquet

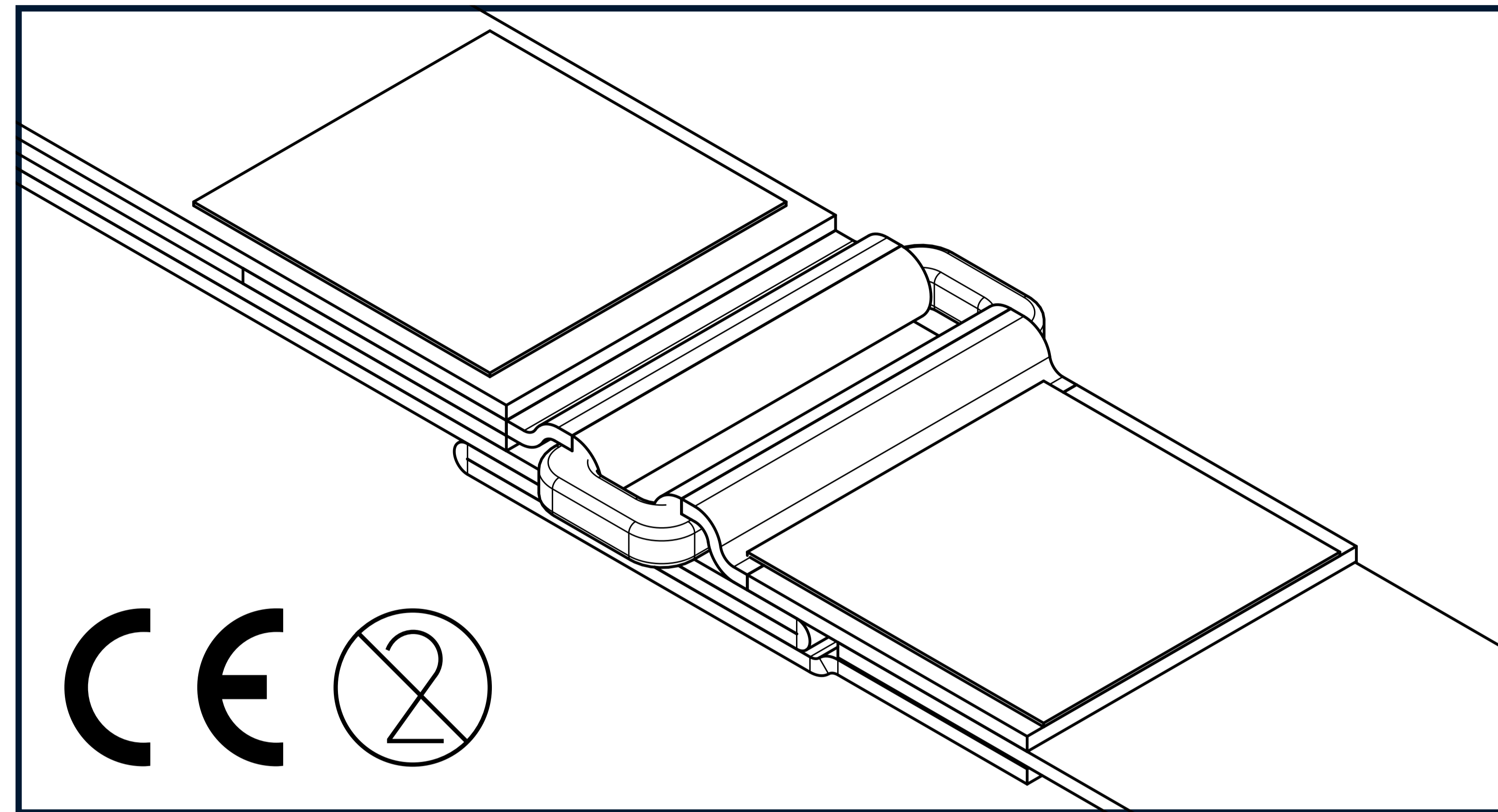

### Begrenzung der Haftung.

First15 B.V., seine Mitarbeiter, Vertreter, Auftragnehmer, Lieferanten und Händler übernehmen keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die sich aus der Anwendung und Nutzung des First15-tourniquet ergeben.

Der Nutzer übernimmt das gesamte Haftungsrisiko. Das First15 Tourniquet darf nur auf ärztliche Anweisung oder unter Aufsicht eines Arztes verwendet werden.

Melden Sie jeden Vorfall im Zusammenhang mit diesem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes/Mitgliedstaates, in dem sich der Anwender/Patient befindet.


Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1, für dessen ordnungsgemäße Verwendung eine spezielle Schulung erforderlich sein kann. Bitte beachten Sie die örtlichen oder behördlichen Richtlinien für die Verwendung dieses Geräts.

Der Einsatz einer Tourniquet ist das letzte Mittel und sollte nur in einer lebensbedrohlichen Situation und wenn die Blutung nicht gestoppt werden kann, angewendet werden.


# FIRST15

First15 B.V. Alle Rechte vorbehalten.  
Laan van Kronenburg 14. 1183 AS, Amstelveen


Weitere Informationen finden Sie unter:  
**WWW.FIRST15.ONLINE**

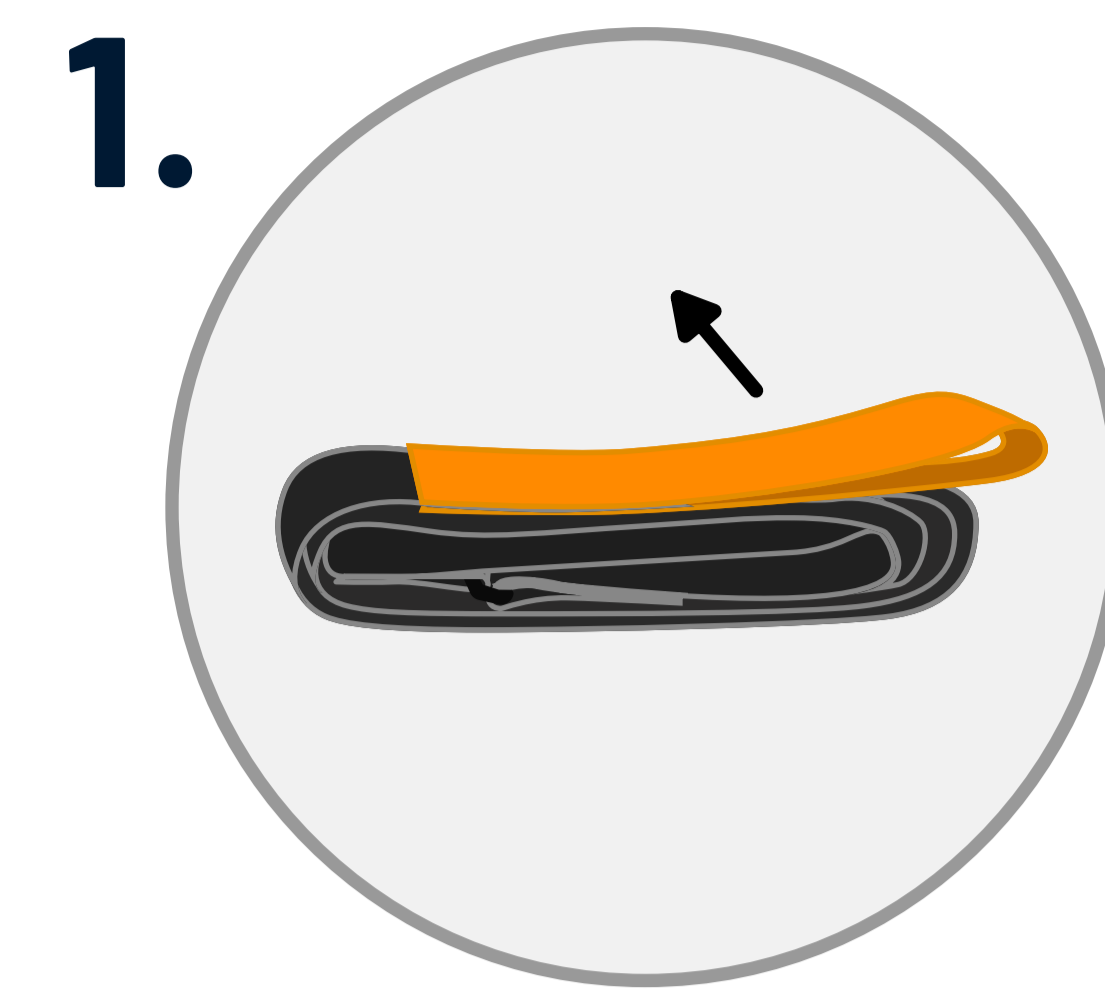

1. Öffnen Sie die Verpackung und rollen Sie das Tourniquet vollständig aus.

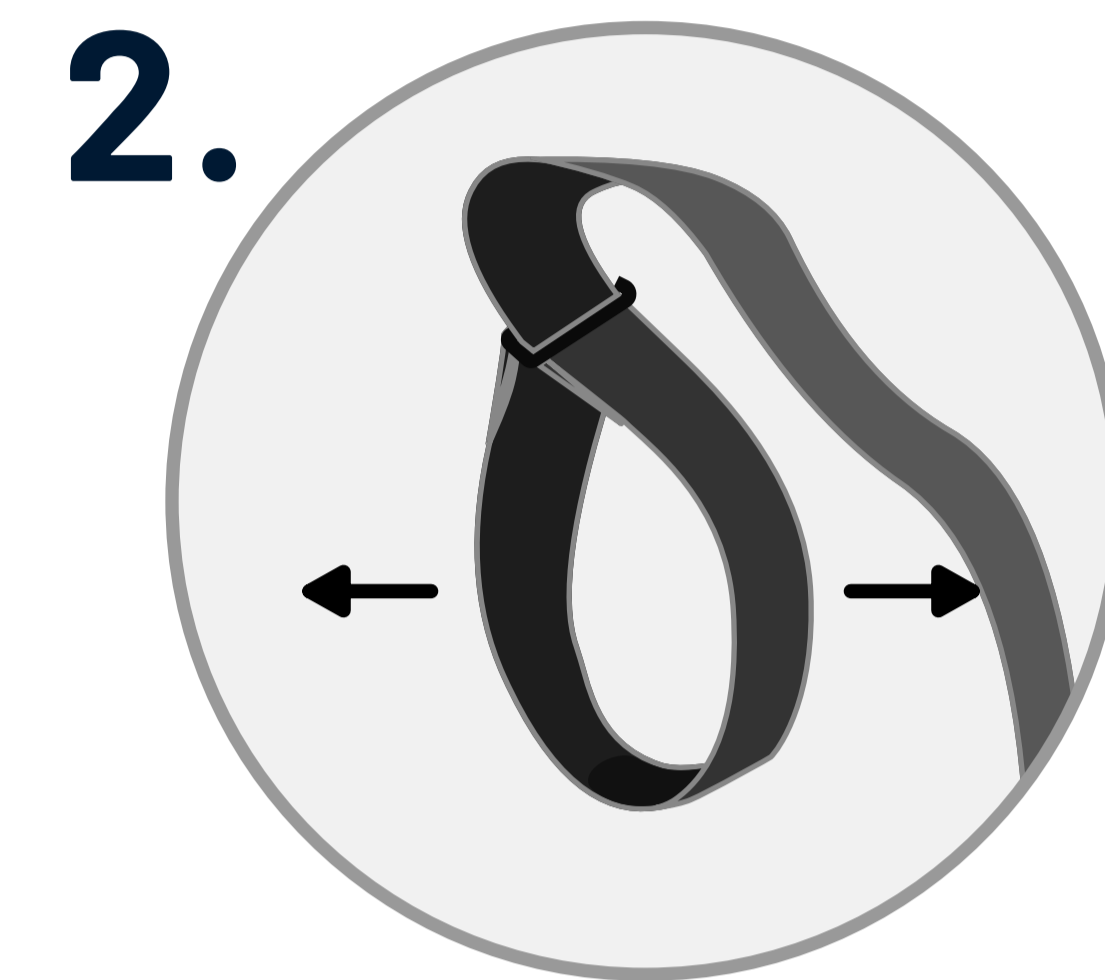

2. Vergrößern Sie die Schlaufe der Tourniquet so, dass sie über die betroffene Gliedmaße passt.

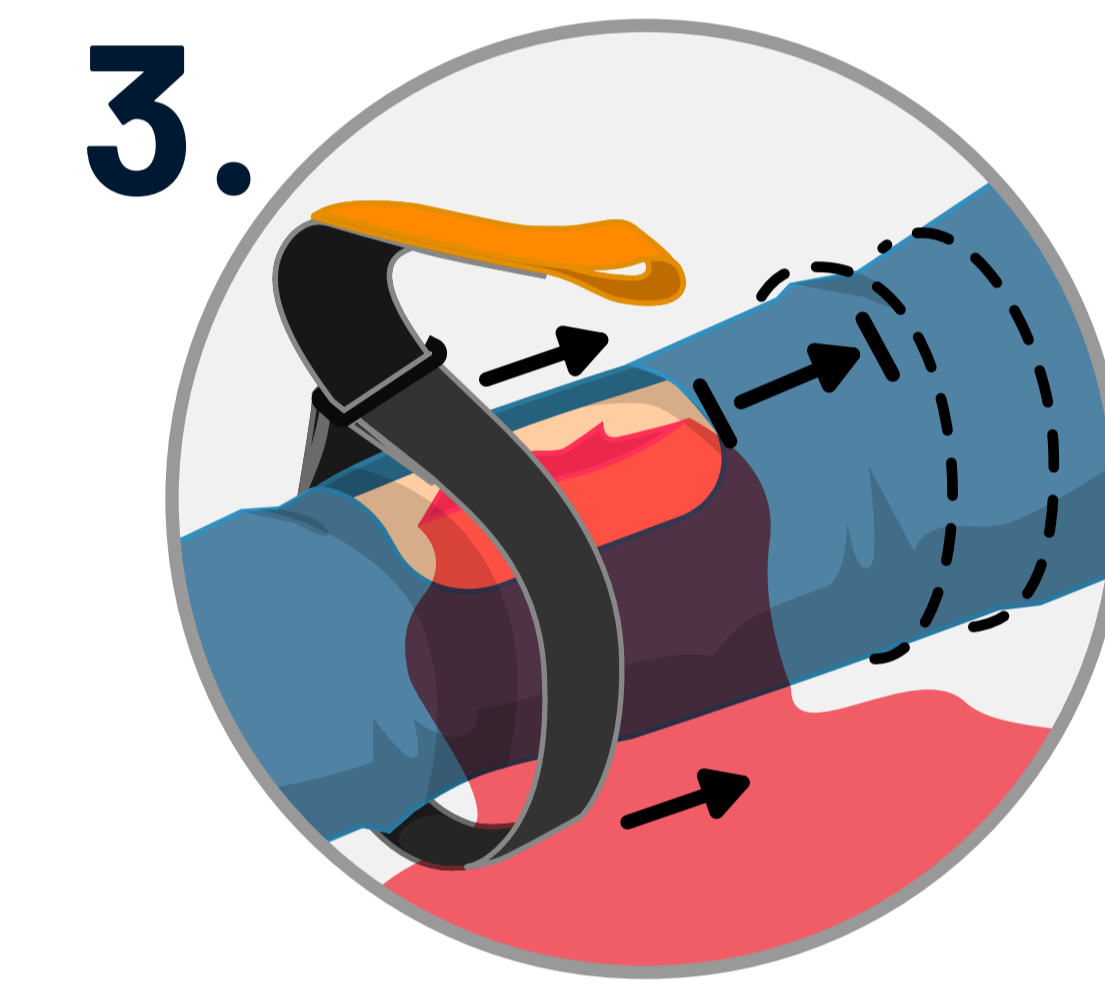



3. Legen Sie die Tourniquet über die betroffene Extremität, **oberhalb** der Blutung.

3.1 Legen Sie das Tourniquet mindestens **5 Zentimeter** über der Wunde an.

3.2 Legen Sie die Tourniquet am **Oberarm** oder **Schenkel** an.

! Das Tourniquet darf nur an einem Oberarm oder Schenkel angelegt werden.

✗ Legen Sie das Tourniquet **niemals** an einem Gelenk an!

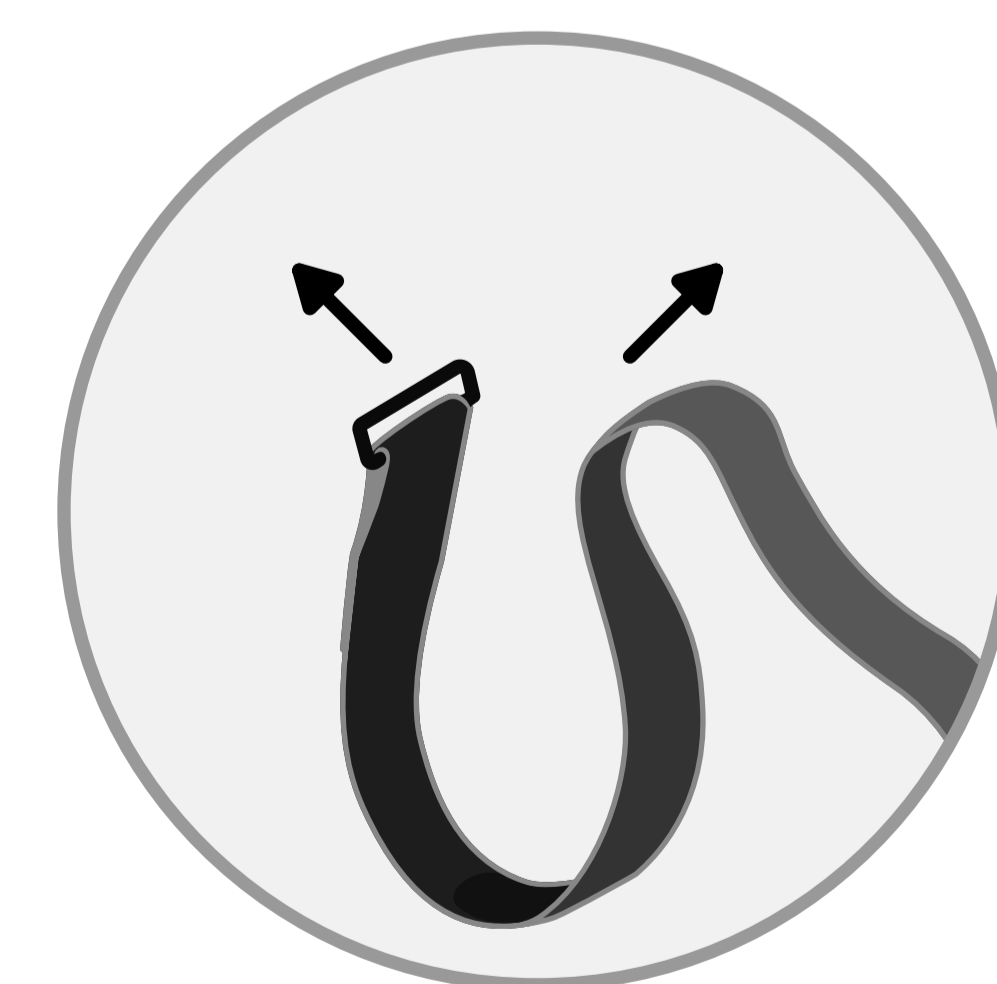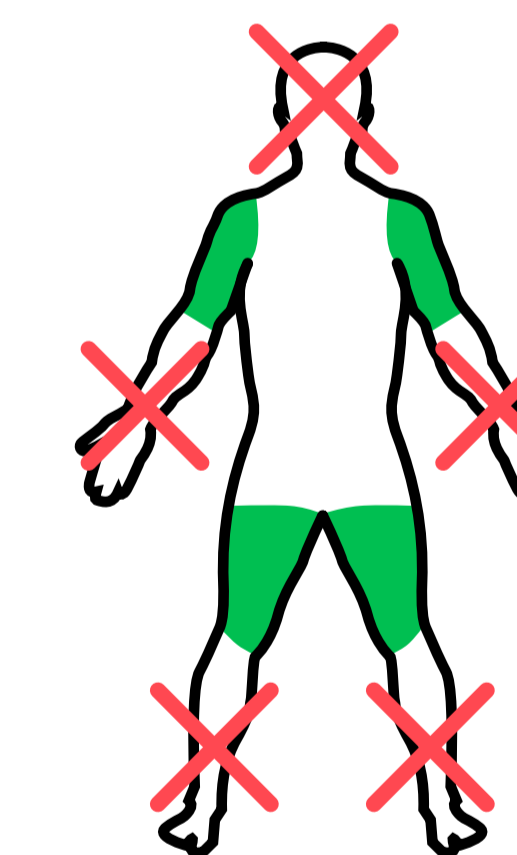

**ACHTUNG!**  
Ist es nicht möglich, die Schlaufe um das Bein oder den Arm zu legen:

Lösen Sie dann das Tourniquet vollständig. Wickeln Sie es um die Gliedmaße und befestigen Sie es, indem Sie das Ende wieder durch die Schnalle stecken.



4. Ziehen Sie das Band so, dass die Schlaufe fest um die Gliedmaße liegt.



5. Wickeln Sie das Band **so fest wie möglich** um die Gliedmaße und halten Sie die Kompression durch kräftiges Ziehen.

5.1 Nutzen Sie die gesamte Länge des Tourniquet.

! Prüfen Sie bei jeder Wicklung, ob die Blutung reduziert ist.



6. Wenden Sie beim letzten Zug mit dem Handgriff zusätzliche Kraft an und **sichern** Sie die Aderpresse mit dem Klettverschluss.

! Die Tourniquet ist fest genug angezogen, wenn die Blutung aufhört.



7. Prüfen Sie regelmäßig, ob der **Verschluss vollständig** ist.

! Prüfen Sie regelmäßig, ob sie noch vollständig geschlossen ist. Bewegung und Veränderungen der Muskelspannung können dazu führen, dass sich das Tourniquet lockert.

! Dieses Produkt ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. (Das Produkt darf nicht mehr als einmal verwendet werden).