

beurer

HA 80 Pair



NL Digitale hoorhulpen
Gebruiksaanwijzing

CE 1639

NEDERLANDS



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

Geachte klant,

We zijn blij dat u voor een product uit ons assortiment hebt gekozen. Onze naam staat voor hoogwaardige en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten op het gebied van warmte, gewicht, bloeddruk, bloedsuiker, lichaamstemperatuur, polsslag, zachte therapie, beauty, massage en lucht.

Met vriendelijke groet,
Uw Beurer-team

Inhoud

1. Omvang van de levering.....	3	8. Reiniging en onderhoud	27
2. Verklaring van de symbolen	5	9. Toebehoren en	
3. Voorgeschreven gebruik.....	7	reserveonderdelen	29
4. Waarschuwingen en		10. Wat te doen bij problemen	30
veiligheidsrichtlijnen	8	11. Verwijdering.....	35
5. Beschrijving van het apparaat	15	12. Technische gegevens.....	36
6. Ingebruikname.....	17	13. Garantie en service.....	37
7. Gebruik.....	19		

1. Omvang van de levering

Controleer of de buitenkant van de verpakking intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens de apparaten te gebruiken, moet worden gecontroleerd of de apparaten en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u de apparaten bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.

- 2 digitale hoorhulpen HA 80
- 8 oordoppen (in verschillende maten en typen)
- 2 vervangbare batterijen
- 1 micro-USB-oplaadkabel
- 1 schoonmaakborstel
- 1 droogcapsule
- 1 opbergdoos met oplaadfunctie
- 1 gebruiksaanwijzing









Kennismaking

De hoorhulpen dienen ter ondersteuning van het gehoor van mensen. Ze versterken daarvoor geluiden en geven deze vervolgens door aan het oor. De hoorhulpen kunnen organisch veroorzaakte gehoorschade noch voorkomen, noch verlichten.

Toch bieden ze u vele gebruiksmogelijkheden. Of u nu een film wilt kijken, met vrienden wilt praten of gewoon zin hebt om in het bos naar de geluiden van de natuur te luisteren – de hoorhulpen helpen u de geluiden luider en duidelijker te horen.

2. Verklaring van de symbolen

Op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

 WAARSCHUWING	Waarschuwing voor situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw gezondheid.
 LET OP	Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat.
 Aanwijzing	Verwijzing naar belangrijke informatie.
	Neem de gebruiksaanwijzing in acht.
	Serienummer
	Toegepast deel type B



Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).



Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.



Gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap






Fabrikant

Storage/Transport

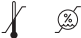

Toegestane temperatuur en luchtvochtigheid bij opslag en transport

<p>Operating</p> 	<p>Toegestane temperatuur en luchtvochtigheid bij gebruik</p>
	<p>Verwijder de verpakking overeenkomstig de milieu-eisen.</p>
<p>IP 21</p>	<p>Beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter van 12,5 mm en groter en tegen verticaal vallende druppels</p>
	<p>Te gebruiken tot</p>

3. Voorgeschreven gebruik

Gebruik de hoorhulpen uitsluitend ter ondersteuning van het gehoor van mensen. De apparaten zijn alleen bedoeld voor het in deze gebruiksaanwijzing beschreven gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik.

4. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen



WAARSCHUWING


- Laat uw gehoor altijd eerst door een arts of een gekwalificeerde audicien controleren voordat u de hoorhulpen gebruikt. Laat de hoorhulpen uitsluitend instellen door een hiervoor opgeleide specialist, zoals een KNO-arts, een audioloog of een gekwalificeerde medewerker van een hoorwinkel.
- Raadpleeg in geval van momentele of eerdere oorkwalen uw arts voordat u de hoorhulpen gebruikt.
- Gebruik de hoorhulpen NIET bij ontstekingen of infecties van het oor.
- Gebruik de hoorhulpen NIET als u een middenoorontsteking of een gehoorgangontsteking hebt.
- Stop het gebruik en raadpleeg uw arts als u bij het dragen van de hoorhulpen pijn ervaart of zich niet goed voelt.
- Stop het gebruik en raadpleeg uw arts als u bij het dragen van de hoorhulpen last krijgt van een oorontsteking, huidirritaties of een verhoogde productie van cerumen (oorsmeer).

- Stop in de volgende gevallen met het gebruik van de hoorhulpen en raadpleeg een arts:
 - U hebt last van uitslag of eczeem op delen van de huid die met de hoorhulpen in aanraking komen. (De hoorhulpen worden gemaakt van huidvriendelijk materiaal. In enkele gevallen kunnen er echter toch allergische reacties in de vorm van eczeem optreden.)
 - Na gebruik van de hoorhulpen hebt u last van afscheiding uit het oor c.q. moet uw oor behandeld worden.
 - Het hoorvermogen neemt plotseling aanzienlijk af.
- Raadpleeg onmiddellijk een arts als delen van de hoorhulp in het oor blijven steken. Probeer deze delen niet zelf uit het oor te halen.
- Stel eerst een laag volume in en verhoog het volume stapsgewijs zodra u aan de hoorhulpen gewend bent.
- Stel het volume NIET te hoog in, omdat dit het gehoor op de lange termijn extra kan beschadigen.
- Leen uw hoorhulpen NIET uit aan anderen en gebruik geen hoorhulpen van anderen. Als u dit toch doet, kunt u uw gehoor beschadigen of infecties oplopen.

- Geef uw hoorhulpen NIET voor gebruik aan anderen. Het gebruik van een hoorhulp die voor een andere persoon vervaardigd is, kan gehoorschade veroorzaken.
- De hoorhulpen zijn NIET geschikt voor gebruik bij kleine kinderen van 36 maanden of jonger.
- Het is zeer lastig om gehoorproblemen bij kinderen vast te stellen. Kinderen mogen alleen na een uitgebreid onderzoek bij een KNO-arts een hoorhulp toegewezen krijgen.
- Houd de hoorhulpen, de toebehoren en de batterijen buiten bereik van kinderen; zij kunnen deze inslikken of zich hieraan verwonden.
- Dit apparaat mag NIET worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met een beperkt fysiek, zintuiglijk of geestelijk vermogen of gebrek aan ervaring of kennis. Gebruik door deze personen is alleen toegestaan wanneer het plaatsvindt onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, of wanneer zij van deze persoon aanwijzingen hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat. Er dient toezicht te worden gehouden op kinderen, zodat zij niet met het apparaat spelen.
- Gebruik de hoorhulpen NIET in explosieve en gevaarlijke omgevingen.

- Gebruik de apparaten NIET in zuurstofrijke omgevingen of gedurende een langere periode.
- Neem in de volgende gevallen contact op met de fabrikant:
 - Als u hulp nodig hebt bij de instelling, het gebruik of het onderhoud van de hoorhulpen.
 - Als de apparaten tijdens het gebruik onverwacht gedrag vertonen of in geval van andere voorvallen.
- Wij adviseren u om een hoorhulp NIET te gebruiken als deze beschadigd is; neem in dat geval contact op met de verkoper of met de betreffende klantenservice.
- Schakel de apparaten onmiddellijk uit als ze defect zijn of als zich tijdens het gebruik storingen voordoen.
- Probeer de hoorhulpen in geen geval zelf te openen en/of te repareren. Laat reparaties alleen uitvoeren door de klantenservice of bij een geautoriseerd verkooppunt. Wanneer u deze instructie niet in acht neemt, vervalt de garantie.

Aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van accu's:

- Als vloeistof uit een accucel in aanraking komt met de huid of de ogen, moet u de betreffende plek met water spoelen en een arts raadplegen.
- Als een accu is gaan lekken, mag u het apparaat alleen aanraken met veiligheidshandschoenen en gooit u het weg zoals beschreven in hoofdstuk 10 Verwijdering of neemt u contact op met de klantenservice.
- Bescherm accu's tegen overmatige hitte.
-  **Explosiegevaar!** Werp accu's niet in vuur.
- Haal batterijen niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in stukken.
- Gebruik alleen laders die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Voordat u accu's gebruikt, moet u deze op de juiste wijze opladen. Neem te allen tijde de aanwijzingen van de fabrikant en de informatie in deze gebruiksaanwijzing voor het correct opladen van accu's in acht.
- Laad de accu volledig op voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt (zie hoofdstuk 6).
- Laad de accu voor een zo lang mogelijke levensduur minstens 2 keer per jaar volledig op.



LET OP


- Draag de hoorhulpen NIET in de buurt van sterke elektromagnetische velden of röntgenstralen.
- Draag de hoorhulpen NIET tijdens het nemen van een bad, tijdens het douchen of tijdens het zwemmen.
- Stel de apparaten niet bloot aan schokken, vocht, vuil, sterke temperatuurschommelingen, direct zonlicht en hoge luchtvochtigheid.
- In gesloten voertuigen kunnen in de zomer zeer hoge temperaturen ontstaan. Laat uw hoorhulpen daarom nooit in de auto liggen.
- Stel de apparaten niet bloot aan schokken en laat ze NIET vallen.
- Als de hoorhulpen in het water vallen, droog ze dan met een doek af en laat de hoorhulpen vervolgens door de verkoper controleren.
- Probeer de hoorhulpen nooit in een magnetron, een wasdroger of met behulp van een haardroger te drogen. Als u dit toch doet, kunnen de hoorhulpen beschadigd raken.
- Gebruik de hoorhulpen NIET in combinatie met een mobiele telefoon. (De radiogolven van mobiele telefoons kunnen storende geluiden veroorzaken of het volume dempen.)

- Draag de hoorhulpen NIET terwijl u cosmetica aanbrengt (bijvoorbeeld make-up, haarlak, parfum of zonnebrandcrème).
- Draag de hoorhulpen NIET tijdens kortegolftherapieën of medische behandelingen waarbij sterke radiofrequentie- of magneetvelden kunnen ontstaan.
- Bedien de regelaars zorgvuldig. Druk NIET te hard.
- Breng geen scherpe voorwerpen in de opening van de microfoon aan, omdat de microfoon hierdoor beschadigd kan raken.
- Raak de magneten van de hoorhulp NIET aan, omdat het apparaat hierdoor beschadigd kan raken.
- Raak de binnenzijde van het apparaat NIET aan. De binnenzijde van het apparaat bevat vele gevoelige onderdelen die nauwkeurig zijn ingesteld. Steek in geen geval met een naald of een soortgelijk voorwerp in de binnenzijde van de hoorhulp.
- De hoorhulpen moeten regelmatig worden onderhouden. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen tussen de oordop en de luidspreker aanwezig zijn. Deze kunnen de weergave van het geluid namelijk negatief beïnvloeden.

5. Beschrijving van het apparaat


Hoorhulp

- 1 Min-toets
- 2 Plus-toets
- 3 Programmatoets
- 4 Microfoon
- 5 Fixatiedraad
- 6 Oordop
- 7 Vervangbare batterij

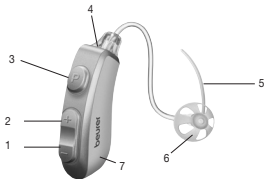


Opbergdoos met oplaadfunctie

- 1 Laadpositie linker hoorhulp
- 2 Oplaadpositie verwisselbare batterijen
- 3 Laadpositie rechter hoorhulp
- 4 Opbergpositie voor droogcapsule
- 5 Micro-USB-aansluiting
- 6 Droogcapsule

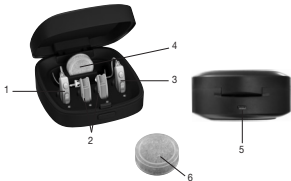

Schoonmaakborstel

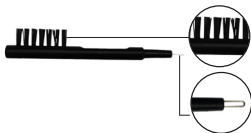

Borstel

Voor het schoonmaken van de hoorhulpen

Lus


Voor het verwijderen van oorsmeer in de oordop

6. Ingebruikname

Haal de hoorhulpen uit de verpakking en controleer of alles aanwezig is en of de apparaten en de toebehoren onbeschadigd zijn.


Opladen van de hoorhulpen met de opbergdoos met oplaadfunctie

Sluit de netvoeding aan op een stopcontact, sluit de meegeleverde micro-USB-kabel aan en verbind deze met uw opbergdoos met oplaadfunctie om de apparaten en batterijen op te laden.

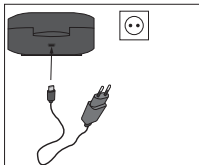


Knipperend groen licht:
apparaten en batterijen worden opgeladen.

Constant groen licht:
apparaten en batterijen zijn volledig opgeladen.
Meestal duurt het ongeveer 2 uur voordat de apparaten en batterijen volledig zijn opgeladen.

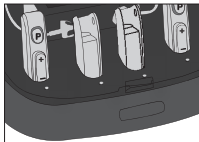

 Zorg er voordat u de hoorhulp in gebruik neemt voor dat de volumetoets op het laagste niveau is ingesteld.


Aanwijzing:

-  • Opladen kan gebeuren wanneer het deksel open of dicht is.
- Nadat de hoorhulpen volledig zijn opgeladen en tijdens een rustpauze kunt u ze bewaren in de opbergdoos met oplaadfunctie.

7. Gebruik

Uw hoorhulp aanpassen

1. Het geluidsslangetje is aangeduid met "2B" in rood of blauw. Rood is voor het rechteroor en blauw voor het linker oor.
2. Bevestig de oordoppen op het geluidsslangetje door deze over de groeven op het slangetje te schuiven totdat ze stevig vastzitten.

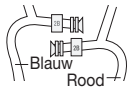

3. Plaats de behuizing van de hoorhulp achter het oor. De kromming van het geluidsslangetje moet comfortabel op het oor rusten (bij bril dragers naast het pootje van de bril).



4. Houd het geluidsslangetje vast en steek de oordoppen voorzichtig in de gehoorgang. Let erop dat u de oordop niet te diep in de gehoorgang plaatst. Als de oordop niet goed of niet aangenaam zit, probeert u een van de andere oordoppen.



5. Plaats de fixatiedraad langs uw oorschelp. Dit zorgt voor een stevigere pasvorm van de oordoppen in de oorschelp. Als u last heeft van de fixatiedraad, kunt u deze losmaken. De draad is niet noodzakelijk.



- i** Controleer of u de juiste maat oordoppen hebt gekozen, door uw hoofd langzaam omhoog en omlaag en vervolgens naar rechts en naar links te bewegen, terwijl u kauwbewegingen maakt. Als de oordop uit uw oor komt, is de oordop te klein. Als u een bril draagt, plaats de beugel dan tussen uw hoofd en de hoorhulp.

i **BELANGRIJK**

Steek het geluidsslangetje nooit zonder oordoppen in de gehoorgang. Let er ook op dat u het slangetje en de oordop niet te diep in de gehoorgang duwt.

In-/uitschakelen

Als u de hoorhulpen wilt in- of uitschakelen, houdt u de programmatoets op het apparaat gedurende drie (3) seconden ingedrukt totdat u een piepje hoort.



Het volume aanpassen

Plus-toets:

volume verhogen (kort drukken)

Min-toets:

volume verlagen (kort drukken)



Om geluiden vervolgens helder en duidelijk te kunnen horen, stelt u met behulp van de volumetoets het gewenste volume in.

i Aanwijzing:

- Controleer als u bij het dragen van de hoorhulp een zachte piep hoort of de oordop stevig genoeg in uw oor zit. Als de oordop niet stevig genoeg in uw oor zit, gebruikt u een van de andere oordoppen.
- De hoorhulp kan een bestaande beperking van het hoorvermogen niet genezen, maar er wel voor zorgen dat de gebruiker beter hoort en gesprekken beter kan volgen.
- Als u één piepje hoort, is het volume verhoogd of verlaagd.

- Als er twee keer achter elkaar een piepje klinkt, is het hoogst of laagst mogelijke volume bereikt.

Instelling van de hoorprogramma's


Als u het luisterprogramma wilt wijzigen, drukt u op de programmatoets.

P1: Normale modus (1 piepje):

geschikt voor rustige omgevingen, zoals thuis of op kantoor.


P2: Ruisonderdrukkingsmodus (2 piepjes):

geschikt voor gebruik buitenshuis, bijvoorbeeld onderweg, in de supermarkt of een restaurant.

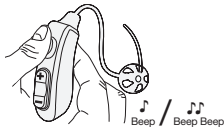

Batterij vervangen

als u de batterij van de hoorhulp wilt vervangen, houdt u de batterij met één hand vast en schuift u het bovenste deel van de hoorhulp met de andere hand in de tegenovergestelde richting. Neem nu de volledig opgeladen verwijderbare batterij en schuif deze op de hoorhulp. Nu is de hoorhulp weer klaar voor gebruik.

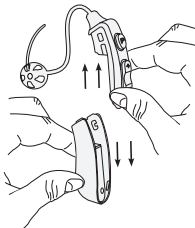

Geluidsslangetje vervangen

Voor de vervanging dient u het vervangende geluidsslangetje klaar te leggen. Controleer vooraf of de gekleurde markering klopt (rood is voor het rechteroor en blauw voor het linkeroor).

1. Voor een betere grip moet u de batterij van het apparaat verwijderen.

2. Houd het apparaat in de ene hand en pak het verbindingsstuk van het geluidsslangetje met het apparaat tussen de duim en wijsvinger van de andere hand.
 3. Draai het verbindingsstuk tegen de klok in en draai het apparaat tegelijkertijd met de klok mee.
 4. Zodra het verbindingsstuk ongeveer 90° is gedraaid, trekt u het geluidsslangetje naar boven toe weg. Houd het apparaat daarbij goed vast.
 5. Pak het nieuwe geluidsslangetje. Plaats het geluidsslangetje en draai het terwijl u een beetje druk uitoefent met de klok mee over het apparaat totdat de pijl aan de voorkant weer op één lijn ligt met de toetsen op het apparaat.
 6. Controleer of het geluidsslangetje goed zit voordat u de batterij opnieuw plaatst en het apparaat in gebruik neemt.
- Als u problemen hebt met het verwijderen van het geluidsslangetje, gebruik dan een pincet om het verbindingsstuk vast te grijpen.

Droogcapsule plaatsen

Er wordt een droogcapsule meegeleverd. Door het dragen van de hoorhulpen achter het oor komen de hoorhulpen in contact met de huid en dus bijvoorbeeld ook met zweet. Voor de verzorging van de apparaten moeten deze daarom na elk gebruik worden afgedroogd.

Haal de droogcapsule uit de verpakking en plaats deze met een beetje druk in de beoogde opberg-ruimte.

De capsule bevat een kleurindicator. Naarmate de droogprestaties afnemen, verandert de kleur van feloranje naar wit. Als de capsule witachtig is, heeft deze geen droogcapaciteit meer en moet deze worden vervangen.



In hoofdstuk „9. Zubehör- und Ersatzteile“ leest u waar u een nieuwe droogcapsule kunt krijgen.

Aanwijzing: voor ideale droogprestaties sluit u het deksel van de opbergdoos met oplaadfunctie na plaatsing van de hoorhulpen.

8. Reiniging en onderhoud



LET OP

- Houd de hoorhulp altijd schoon.
- Ga altijd voorzichtig met de producten om en zorg ervoor dat de oordop of de microfoon niet door vreemde voorwerpen wordt afgedekt. Hierdoor wordt de werking van de geluidsversterking namelijk negatief beïnvloed.
- Reinig de hoorhulpen en de oordoppen na elk gebruik met een schone, droge doek. Als het apparaat heel vuil is, kunt u de doek ook met mild zeepsop bevochtigen. Gebruik nooit schurende, bijtende of oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.
- Dompel de hoorhulp nooit onder in water, omdat er anders vocht kan binnendringen, waardoor de hoorhulp beschadigd kan raken.

- Maak voor het verwijderen van vastzittende oorsmeer uit de oordop gebruik van de meegeleverde schoonmaakborstel (zie de beschrijving van het apparaat).
- Laat de hoorhulp na de reiniging volledig drogen. Bewaar de hoorhulpen op een veilige, droge en schone plek en met de droogcapsule in de bijbehorende opbergdoos.
- De droogcapsule moet worden vervangen als de kleur van het granulaat van oranje in wit verandert (waar u een nieuwe droogcapsule kunt krijgen leest u in hoofdstuk “9. Toebehoren en reserveonderdelen”).

9. Toebehoren en reserveonderdelen

Toebehoren en reserveonderdelen zijn onder vermelding van het aangegeven productnummer verkrijgbaar via het betreffende servicepunt.

Omschrijving	Artikel-/bestelnummer
Droogcapsules HA 60/80/85 8 st.	641.15
Geluidsslangetje maat S	164.341
Geluidsslangetje maat L	164.342

10. Wat te doen bij problemen

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De hoorhulp neemt geen geluiden waar.	De hoorhulp is niet ingeschakeld.	Schakel de hoorhulp in zoals beschreven in hoofdstuk 7.
	De batterij is niet goed aangesloten op de hoorhulp.	Controleer of de batterij goed is aangesloten op de hoorhulp.
	De batterij is leeg.	Vervang de batterij en laad de lege batterij op in de opbergdoos met oplaadfunctie, zoals beschreven in hoofdstuk 6.
	De microfoon is vuil.	Maak de opening van de microfoon voorzichtig schoon met de schoonmaakborstel.
	De hoorhulp is beschadigd.	Neem contact op met de klantenservice.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Het geluid is zeer zwak en onduidelijk.	Het volume van de hoorhulp staat te laag.	Verhoog het volume zoals beschreven in hoofdstuk 7.
	De batterij is bijna leeg.	Vervang de batterij en laad de lege batterij op in de opbergdoos met oplaadfunctie, zoals beschreven in hoofdstuk 6.
	De oordop is vuil.	Verwijder het grove vuil met behulp van de schoonmaakborstel van de oordop en het voorste uiteinde van het slangetje. Verwijder vervolgens de oordop en maak hem schoon onder stromend water.
	De microfoon is vuil.	Maak de opening van de microfoon voorzichtig schoon met de schoonmaakborstel.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Het geluid is zeer zwak en onduidelijk.	De batterij is niet goed aangesloten op de hoorhulp.	Controleer of de batterij goed is aangesloten op de hoorhulp.
	De geïntegreerde luidspreker is mogelijk beschadigd.	Neem contact op met de klantenservice.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Er klinkt een onaangename fluittoon uit de hoorhulp.	De oordop van de hoorhulp past niet goed in het oor. Dit kan onaangename piepgeluiden (akoestische terugkoppeling) veroorzaken en de werking beperken.	Probeer een andere oordop te gebruiken. Er wordt geadviseerd een oordop te gebruiken, die goed zit. Neem bij twijfel contact op met de klantenservice.
	De microfoon van de hoorhulp is afgedekt.	Zorg ervoor dat de microfoon van de hoorhulp niet wordt afgedekt door delen van het oor of door grote delen van het haar. Hierdoor kan akoestische terugkoppeling ontstaan.
	Het volume van de hoorhulp staat te hard.	Zet het volume van de hoorhulp lager zoals beschreven in hoofdstuk 7.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De LED-lampjes van het laadstation branden niet.	De hoorhulp zit mogelijk niet goed in de uitsparing of de USB-kabel is niet goed aangesloten.	Controleer of de hoorhulp goed in de uitsparing zit en controleer of de USB-kabel goed is aangesloten op de opbergdoos en de netvoeding.
	De laadcontacten in de opbergdoos met oplaadfunctie zijn vuil.	Maak de laadcontacten voorzichtig schoon met een droge doek. Plaats de hoorhulp vervolgens opnieuw in de uitsparing.

11. Verwijdering

Verwijdering van accu's

- Deponeer de gebruikte, volledig lege accu's in de daarvoor bestemde afvalbakken of bied ze bij het afvalverwerkingsstation of de elektriciteitszaak aan als chemisch afval. U bent wettelijk verplicht de batterijen correct te verwijderen.
- Deze tekens kunt u aantreffen op accu's met schadelijke stoffen:
Pb = batterij bevat lood
Cd = batterij bevat cadmium
Hg = batterij bevat kwik



Algemene informatie over verwijdering

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. U kunt het apparaat inleveren bij gespecialiseerde inzamelpunten in uw land. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.



12. Technische gegevens

Max. geluidsniveau (OSPL90):	118 dB \pm 3 dB
Geluidsversterking:	43 dB \pm 5 dB
Totale harmonische vervorming:	\leq 3% @ 1600 Hz
Frequentiebereik:	200 ~ 6700 Hz
Ingangsgeluid:	\leq 35 dB
Spanning:	1,5 V ---
Voeding:	\leq 3 mA
Gebruiksduur:	\geq 26 uur
Omstandigheden voor gebruik:	Temperatuur: -10°C ~ +40°C Relatieve luchtvochtigheid: 30% ~ 75% Atmosferische druk: 700 ~ 1600 hPa

Omstandigheden voor opslag
en transport:

Temperatuur: -10°C ~ +55°C
Relatieve luchtvochtigheid: 10% ~ 90%
Atmosferische druk: 500 ~ 1600 hPa

Het serienummer staat op het apparaat.

13. Garantie en service

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (hierna “Beurer” genoemd) verleent onder de hierna genoemde voorwaarden en in de hierna beschreven omvang garantie voor dit product.

De hierna genoemde garantievoorwaarden laten de wettelijke garantieverplichtingen van de verkoper uit de koopovereenkomst met de koper onverlet.

De garantie geldt bovendien onverminderd de dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen.

Beurer garandeert de probleemloze werking en de volledigheid van dit product.

De wereldwijde garantieperiode bedraagt 3 jaar vanaf het moment van aankoop van het nieuwe, ongebruikte product door de koper.

Deze garantie geldt alleen voor producten die de koper als consument heeft aangeschaft en die de koper uitsluitend voor persoonlijke doeleinden in het kader van thuisgebruik gebruikt.

Het Duitse recht is van toepassing.

Als dit product tijdens de garantieperiode onvolledig of wat betreft de werking gebrekkig overeenkomstig de volgende bepalingen blijkt te zijn, zal Beurer overeenkomstig deze garantievoorwaarden een gratis vervangende levering of reparatie verzorgen.

Als de koper een garantieclaim wil indienen, neemt hij eerst contact op met de lokale verkoper: zie de meegeleverde lijst "Service International" met serviceadressen.

De koper krijgt dan nadere informatie over de afwikkeling van de garantieclaim, bijvoorbeeld over waar hij het product naartoe moet sturen of welke documenten nodig zijn.

Er kan alleen aanspraak op garantie worden gemaakt als de koper

- een kopie van de factuur/aankoopbon en
- het originele product

aan Beurer of een geautoriseerde partner van Beurer kan overleggen.

Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn

- slijtage die veroorzaakt is door normaal gebruik of verbruik van het product;
- met dit product meegeleverde toebehoren die bij correct gebruik slijten of verbruikt worden (bijvoorbeeld batterijen, accu's, manchetten, afdichtingen, elektroden, lampen, opzetstukken en inhalatortoebehoren);
- producten die oneigenlijk en/of anders dan vermeld in de bepalingen van de gebruiksaanwijzing gebruikt, gereinigd, opgeborgen of onderhouden zijn en producten die door de koper of door een niet door Beurer geautoriseerd servicecenter geopend, gerepareerd of omgebouwd zijn;

- schade die tijdens het transport tussen fabrikant en klant en/of tussen servicecenter en klant ontstaat;
- producten die als B-stockartikelen of als gebruikte artikelen gekocht zijn;
- gevolgschade die op een gebrek van dit product berust (voor dit geval kunnen echter aanspraken uit productaansprakelijkheid of uit andere dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen bestaan).

Reparaties of een complete vervanging verlengen in geen geval de garantieperiode.

Distributed by: Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com
www.beurer-healthguide.com



Shanghai International Holding Corporation GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Deutschland



Huizhou Jinghao Medical Technology Co., Ltd.,
FL6, Huicheng Industry Bld, Zhongkai High-tech Zone,
Huizhou, 516000, Guangdong, China

