

Loupe numérique 3.5" avec LED, Manuel

SA-9791



Indice

1. Image
2. Table des matières
3. Contenu de l'emballage
Conseils et avertissements
4. Fonctions et pièces
5. Manuel de l'utilisateur
Chargement
Mode couleur

Contenu




Loupe vidéo
Adaptateur pour le raccordement au réseau
Câble vidéo
Câble USB
Sac de protection
Chiffon de nettoyage
Manuel de l'utilisateur

Conseils et avertissements


1. N'utilisez pas la loupe numérique dans des environnements où de tels dispositifs sont interdits, une utilisation incorrecte peut entraîner des accidents graves.
2. Protéger la loupe numérique de l'eau et des autres liquides. Ne pas utiliser la loupe numérique avec des mains mouillées. Ne jamais utiliser la loupe numérique sous la pluie ou la neige. L'humidité peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Si vous remarquez de la fumée ou des odeurs provenant de votre loupe numérique, éteignez-la immédiatement. Eteignez-la immédiatement.
3. La loupe numérique peut devenir légèrement chaude pendant l'utilisation. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

4. Essuyez la loupe numérique avec un chiffon doux et sec.

Fonctions et pièces

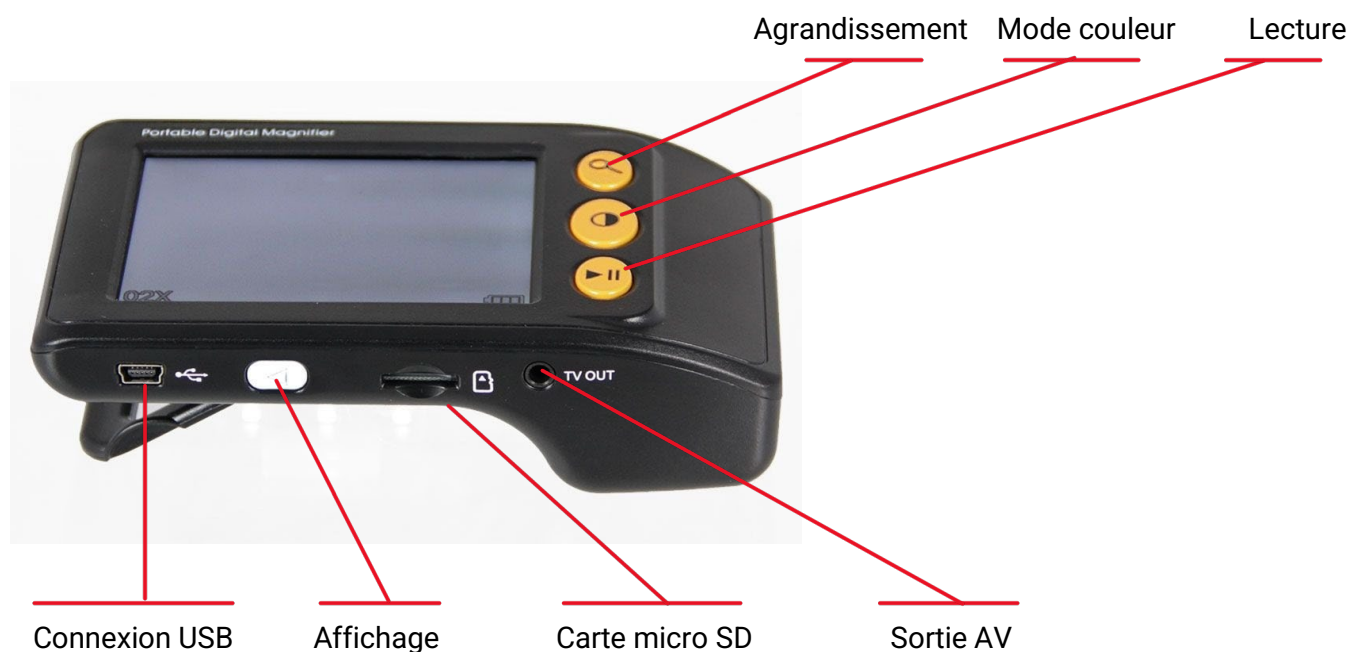

Eclairage LED

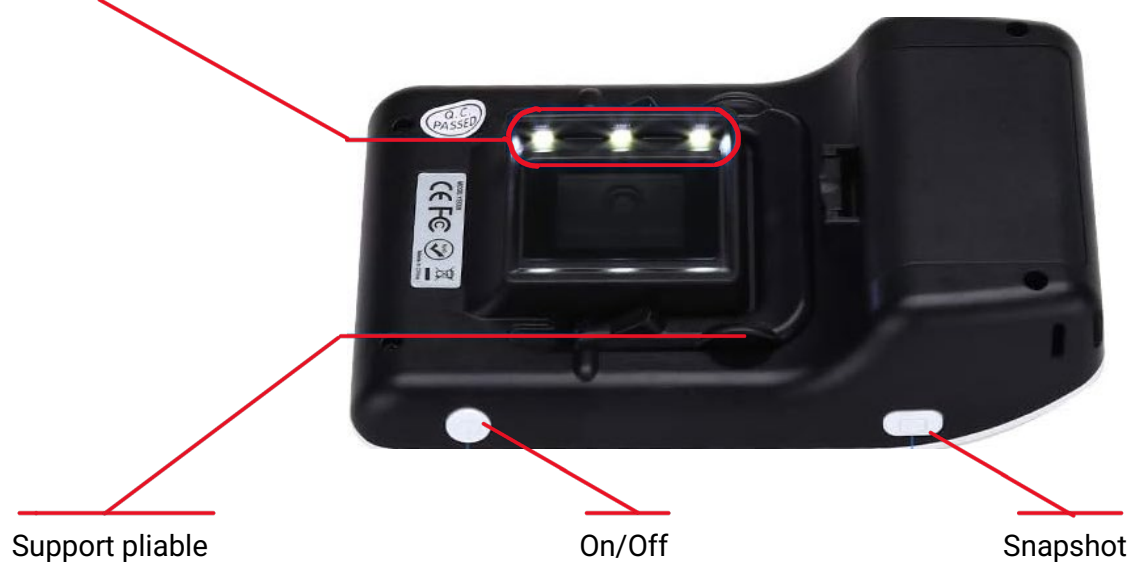

Manuel de l'utilisateur

1. Allumez votre appareil à l'aide du bouton d'alimentation
2. Insérez votre carte Micro SD dans la fente SD.
3. Déployez le support pour positionner votre loupe parallèlement au sujet.
4. Si nécessaire, vous pouvez allumer l'éclairage LED.



Ce bouton permet de régler l'agrandissement sur le mode souhaité 2x, 4x, 8x, 16x ou 25x.



Ce bouton vous permet de changer les couleurs utilisées sur l'écran,

Vous pouvez maintenant utiliser l'option d'enregistrement. Stockez ces enregistrements sur votre carte SD, que vous pourrez lire sur votre PC ou sur d'autres équipements.

Vous pouvez utiliser votre loupe numérique comme appareil d'enregistrement vidéo et lire les images directement sur votre téléviseur. Cela peut se faire via le câble AV. Le câble nécessaire est inclus.

L'enregistrement vidéo ou l'instantané peut également être lu sur votre PC, ce qui nécessite un convertisseur AV pour convertir votre signal analogique en signal numérique. Le câble de conversion n'est pas inclus dans l'emballage.

Chargement

La loupe numérique peut être rechargée à l'aide du câble USB fourni.

Mode couleur

Ce mode permet d'appeler 7 modes différents en fonction de ce qui donne le meilleur résultat d'image.



Ce bouton vous permet de visionner, de mettre en pause et d'arrêter la séquence.

Votre fournisseur

