

# GEBRUIKSAANWIJZING



**Deze gebruiksaanwijzing moet aan de gebruiker worden getoond!**

**Artikel- Nr.:** 10590-10  
**Typ:** Handgreep voor badtoegang



## **Bedieningshandleiding:**

Deze roestvrijstalen handgreep voor badtoegang, gemaakt van Mat. 1.4301, is geschikt als vasthoudelement voor badkuipen. De greep is uitgerust met 2 verstelbare badrandhouders, 2 borgschroeven en badbuffers. Door de schroeven los te draaien, kan de handgreep worden aangepast aan de grootte van de badkuip.

Het roestvrij staal moet regelmatig worden gereinigd en gedesinfecteerd om de levensduur te behouden. Gebruik voor het reinigen en desinfecteren alleen fosfaatvrije reinigings- en desinfectiemiddelen zonder schurende werking.

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het plaatsen van de handgreep.

## **Technische specificaties:**

Buisdiameter:	25 mm
Totale hoogte:	410 mm
Totale breedte:	320 mm
Handgreephoogte vanaf badrand:	130 mm
Totale diepte:	flexibel
Gewicht:	1,5 kg

## **Veiligheidsinstructies**

Zorg ervoor dat de handgreep niet heen en weer glijdt over de rand van de kuip. Voor de veiligheid van de gebruiker moet erop worden gelet dat de schroefverbinding goed vastzit. Dit artikel mag alleen worden gebruikt zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing (niet verkeerd gebruiken).

**De bedieningshandleiding en de veiligheids- en installatie-instructies moeten absoluut in acht worden genomen!**



### **VERDELER:**

**Drive Medical GmbH & Co. KG**  
Leutkircher Straße 44  
D-88316 Isny im Allgäu  
[www.drivemedical.de](http://www.drivemedical.de)