

# Oxivir Excel Wipe CE Instructiekaart

Beschikbaar in verpakking van 12 x 100 stuks



Gebruiksklaar voor snellere ontmetting doeltreffend tegen norovirussen



Bacteriedodend en volledig virusdodend in 30 seconden



Oxivir Excel is gecertificeerd als MDD - CE medisch hulpmiddel van Klasse IIa (conform de richtlijn medische hulpmiddelen).

Geen gevarenclassificaties


Voor desinfectie van:



Oppervlakken met een hoog besmettingsrisico




Afwasbare oppervlakken

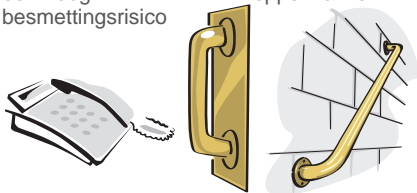


Vaak aangeraakte oppervlakken

Niet gebruiken op marmer en aluminium

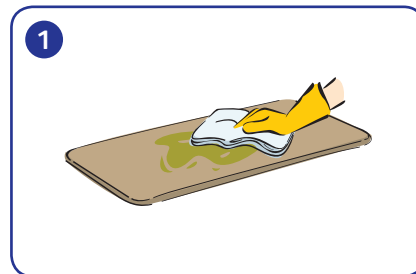


1 Verwijder grof vuil van het oppervlak.

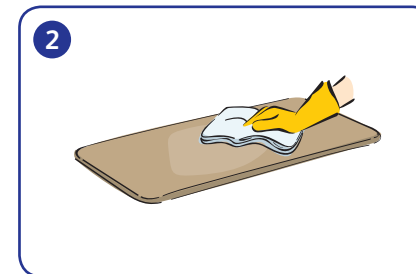

2 Reinig en ontsmet het oppervlak.



3 Laat het 30 seconden inwerken zodat het middel het virus kan doden, conform EN14476. Doeltreffend tegen virussen.

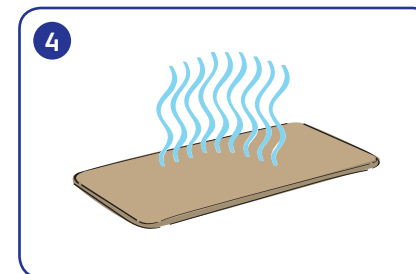

4 Laat drogen aan de lucht.