



Hygiëne voorop! 7 Tips voor het schoonmaken van uw onderzoeksbank.

Een schone en hygiënische onderzoeksbank is essentieel voor elke behandelaar of arts. Daarom delen wij 7 praktische tips om het kunstleder van uw onderzoeksbank schoon en hygiënisch te houden:

1. Maak na elke patiënt de bank schoon en voer een extra schoonmaak uit na een spreekuurperiode.
2. Het alleen vervangen van de papierrol is niet voldoende om optimale hygiëne te waarborgen.
3. Bij sterke vervuiling: gebruik een natte doek met zeepwater voor een grondige reiniging.
4. Vermijd handdesinfecteermiddelen of alcohol hoger dan 70%, dit kan witte vlekken veroorzaken in het kunstleder.
5. Gebruik geen agressieve schoonmaak- of schuurmiddelen.
6. Wij adviseren Oxyfoam van Ecolab, maar andere merken kunnen ook gebruikt worden. Test wel altijd eerst op een niet zichtbaar deel van de bank.
7. Gebruik een schone, droge doek in combinatie met het reinigingsproduct en wrijf dit goed uit over het hele oppervlak, inclusief zijkanten en naden.

Bij de aflevering van een Habru onderzoeksbank ontvangt u altijd gedetailleerde schoonmaakinstructies.