

# Immedia keuzehulp in-bed-glijstysteem


Immedia biedt een breed assortiment aan glij- en treklaken, afgestemd op verschillende behoeften en mogelijkheden van cliënten en zorgverleners. In deze keuzehulp vind je een selectie daarvan. We helpen je graag bij het kiezen.

## Fase 1: Cliënt is zelfredzaam (of stimuleren daarvan)

**SatinSheet Basislaken** helpt cliënt zelfstandig te draaien in bed

Kan de cliënt zijn/haar voeten gebruiken voor het draaien in bed?

Ja

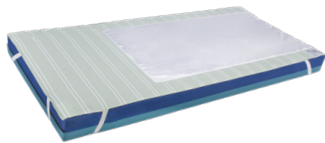

### SatinSheet 2D Basislaken Midi

- EIM4157S Midi Corner

Nee



### SatinSheet 2D Basislaken Maxi


- EIM4107S Maxi Corner (Elastiek om de hoeken)
- EIM4112S Fit (hoeslaken, geheel satijn voeteneinde)



## Fase 2: Zorgverlener helpt cliënt


Voeg aan het basislaken een **SatinSheet Treklaken** toe.

Wens om cliënt in 4 richtingen (4Directions) te kunnen verplaatsen?

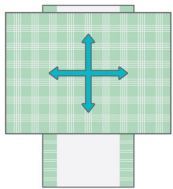

Ja

Nee, alleen zijwaarts

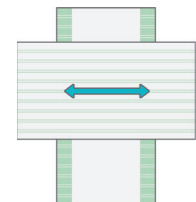

Is de cliënt incontinent?

Ja




### In2Sheet 4D Treklaken

- EIM4140SH (Midi)

Nee

### 4D Treklaken

- EIM4115SH (Midi)
- EIM4121SH (Maxi)

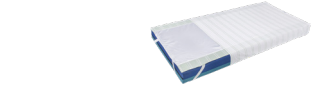

### 2D Treklaken

- EIM4118S (Midi)

### Voordeelset SatinSheet

- EIM4231SRCNL

(EIM4107S Basislaken Maxi + EIM4115SH 4D Treklaken Midi)



### Fase 3. Cliënt is in hoge mate afhankelijk van zorgverleners

Keuze voor compleet in-bed systeem **TwinSheet4Glide** of **4WayGlide** voor de zeer afhankelijke cliënt

