



Gebruiksklare sneldesinfectie van medische hulpmiddelen en algemene oppervlakken op basis van alcohol.

mikrozid[®] AF wipes

Onze pluspunten

- gebruiksklaar
- in verschillende formaten doekjes verkrijgbaar
- zeer breed werkingsspectrum, inclusief virusclaim
- korte inwerktijd van 1 minuut
- geen strepen of residu / snelle droging
- aldehydevrij
- geregistreerd bij het Ctgb als biocidePT02 (desinfectie van oppervlakken)
- toelatingsnummer 14020 N

Toepassingsgebied

Alcoholische sneldesinfectie voor medische hulpmiddelen [CE 0297] en algemene oppervlakken. Geschikt voor:

- eenheden waar patiënten behandeld worden
- onderzoekstafels
- OK-tafels en aangrenzende werkvlakken
- oppervlakken van medische apparatuur
- algemene (kleine) oppervlakken

Gebruiksaanwijzing

A. NL WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT ALS BIOCIDE

- Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen), mycobacteriën, gisten en schimmels, omkapselde virussen en een beperkt aantal niet-omkapselde virussen, op harde oppervlakken (incl. apparaten en materialen) in
- ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
 - de ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg;
 - productieruimtes in de farmaceutische en cosmetische industrie;
 - transportmiddelen bestemd voor mensen,

met uitzondering van oppervlakken die in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen hiervoor. De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B. GEBRUIKSAANWIJZING ALS BIOCIDE

Algemeen: Mikrozid AF wipes is een gebruiksklaar product en is bestemd voor desinfectie van harde oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen, inclusief ziekenhuizen en overige instellingen voor de gezondheidszorg en productie ruimtes voor farmaceutische en cosmetische industrie. Behandel geen oppervlakken die gevoelig zijn voor alcohol, o.a. acryl glas e.d..

Toepassing: Volg de hygiëne voorschriften van de fabrikant tijdens het bijvullen en invoegen van het eerste doekje. De te desinfecteren oppervlakken eerst grondig reinigen. Het daarbij gebruikte reinigingsmiddel goed afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Bevochtig de te behandelen oppervlakken met de geïmpregneerde doekjes en zorg ervoor dat de te behandelen oppervlakken gedurende de aangegeven inwerktijd volledig bevochtigd blijven. Het product verdampt volledig. Alleen vochtige doekjes zijn werkzaam, doekjes na uitdroging niet gebruiken. Na gebruik de verpakking van de doekjes goed afsluiten.

Dosering: gebruik zoveel mikrozid AF wipes dat de behandelde oppervlakken gedurende de inwerktijd vochtig blijven - 1 mikrozid AF wipe is geschikt voor maximaal 0,3 m² oppervlak - 1 mikrozid AF jumbo wipe is geschikt voor maximaal 0,5 m² oppervlak.

Minimale inwerktijd bacteriën, mycobacteriën, gisten, omkapselde virussen en een beperkt aantal niet-omkapselde virussen: 1 min.

Schimmels: 5 min.

Waarschuwing: Ontvlambaar, houd verwijderd van open vuur.

GEBRUIK MEDISCH HULPMIDDEL: niet geschikt voor het desinfecteren van invasieve medische hulpmiddelen.



mikrozid[®] AF wipes

Productinformatie

Samenstelling:
100 g oplossing bevat: Werkzamestof 25 g Ethanol (94 %), 35 g. Propan-1-ol

Chemisch-fysische gegevens van de werkzame stof

Dichtheid	circa 0,89 g/cm ³ / 20 °C / van de werkzame stof
Kleur	kleurloos
pH	Niet van toepassing
Viscositeit, dynamisch	Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt	27 °C / Methode : DIN 51755 Part 1 / van de werkzame stof
Vorm	Waterachtig-alcoholische oplossing van nonwoven

Expert reports en informatie

Een overzicht van alle rapporten en literatuur betreffende de mikrozid producten is terug te vinden op internet via website www.schuelke.nl.

Voor individuele vragen kunt u zich wenden tot ons Benelux kantoor: 0031(0) 23 535 26 34 of internationaal 0049 (0)40 521 00 666

Speciaal advies

Oogcontact vermijden. Alcohol gevoelige oppervlakken (zoals bijvoorbeeld acrylglas) niet met dit product behandelen. Voor een alternatief product verwijzen wij u naar de mikrozid[®] sensitive range. Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Zie veiligheidsinformatieblad voor gevaren- en veiligheidsadvies.

Bestelinformatie

Artikel	Eenheid	Artikel nr.
mikrozid AF wipes Jumbo Ref-NL-200 ST BT	12/Doos	70001453
mikrozid AF wipes-NL 150 ST DS 14x17.5cm	10/Doos	109128
mikrozid AF wipes Jumbo-NL-200 ST DS 20x27cm	10/Doos	109319
mikrozid AF wipes Ref-NL- 20x 150 ST DS 14x17.5cm	1/Doos	109129

Accessoires

Accessoires	Artikel nr.
Wandhouder voor mikrozid bussen	134417
Wandhouder voor mikrozid jumbo bussen	134421

Verwante producten

- mikrozid[®] PAA wipes
- mikrozid[®] sensitive wipes

Milieu

schülke producten worden vervaardigd onder vooruitstrevende, veilige, spaarzame en milieuvriendelijke omstandigheden. Wij hanteren hoge kwaliteitseisen.



Schülke & Mayr GmbH bezit een fabrikanten autorisatie conform sectie 13 paragraaf 1 van de Duitse Medicijnwet en certificaten van GMP compliance voor medische producten.

schülke Benelux
Schülke & Mayr Benelux B.V.
Oudeweg 8d
2013 CC Haarlem, Nederland
Tel: +31 (0) 23 535 26 34
www.schuelke.nl
salesbenelux@schuelke.com

schülke hoofdkantoor
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Duitsland
Tel: +49 40 - 52100 - 0
Fax: +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com