

Sustitución de las columnas de zeolita

1. Apague el dispositivo y desconecte la fuente de alimentación de CA o CC (si está conectado).
2. Retire el dispositivo de la bolsa de transporte.
3. Retire la batería del dispositivo.
4. Pulse los cuatro botones de liberación ubicados en la parte superior del dispositivo para retirar la cubierta superior del dispositivo como se muestra en la Fig. 9.
5. Use la herramienta incluida en el kit de sustitución de las columnas de zeolita para girar las columnas hacia la izquierda, 3 - 4 vueltas, hasta que se puedan sacar tirando hacia arriba, hacia la parte superior del dispositivo.
6. Repita el proceso para la segunda columna
7. Saque las columnas de zeolita del embalaje, quite el tapón del módulo de zeolita e inmediatamente coloque la columna de zeolita de sustitución. Atención: No deje la columna de zeolita expuesta.
8. Instalar la columna de zeolita de sustitución, con la rosca en la parte superior del dispositivo, tal y como se muestra en la Fig. 10.
9. Apriete con la mano la columna.
10. Use la herramienta para finalizar la instalación.








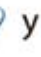




Fig. 9



Fig. 10

- Atención! No apriete demasiado!**
11. Repita los pasos 8 - 10 para sustituir la segunda columna.
 12. Vuelva a colocar la cubierta superior en el dispositivo apretando hacia abajo sobre la parte superior del dispositivo, hasta que los cuatro botones encajen en su sitio
 13. Vuelva a insertar la batería en el dispositivo.
 14. Conectar el dispositivo a una fuente de alimentación de CA o CC.

No encienda!

15. Pulse el botón de silencio de la alarma  y de la batería  al mismo tiempo, hasta que aparezca en la pantalla "Test de fugas".
 - a. El dispositivo indicará el progreso con decimales a la derecha del texto "Test de fugas" („Leak test“).
 - b. Cuando se haya completado, el dispositivo indicará "Test Aprobado" („Test passed“) o "ha fallado" („Test failed“).
 - i Si se ha superado la prueba, pulse el botón de la batería  para salir y continúe con el paso 16.
 - ii Si aparece prueba fallida - Pulse el botón batería  para salir, a continuación, repita los pasos 4-15.
16. Si la prueba de fugas ha pasado, ponga el contador de horas del dispositivo a cero.
 - a. Presione simultáneamente los botones  y  hasta que aparezca "Diagnóstico" („Diagnostics“).
 - b. Pulse el botón  o  para desplazarse hasta que, en el menú de diagnóstico aparezca "XXXH Módulo", donde se verá durante cuantas horas se usó el anterior módulo de zeolita.
 - c. Apriete el botón de silencio de alarma  hasta que en el contador de horas aparezca "0H módulo" („0H Sieve“).
 - d. Presione el botón de la batería  para salir del modo de diagnóstico.
 - e. El dispositivo está ahora listo para ser utilizado.