

Procédure de changement de la colonne

Le concentrateur est équipé de deux colonnes (tubes en métal), situées derrière le filtre à particules. Si une procédure de réparation est requise, ces deux colonnes seront retirées et remplacées. Lors de ces procédures de maintenance, le temps nécessaire pour effectuer toutes ces étapes sans gêne est prévu.

1. Éteignez le concentrateur en appuyant sur le bouton marche / arrêt pour mettre l'appareil hors tension.
2. Débranchez le concentrateur.
3. Allongez le concentrateur sur le côté.
4. Appuyez sur les deux boutons de verrouillage situés sur les côtés de l'appareil pour retirer le couvercle de fond du concentrateur et accéder aux deux colonnes.
5. Appuyez sur le bouton de verrouillage avec le pouce ou l'index et tirez la colonne à l'aide de l'anneau attaché à l'embout de la colonne pour la sortir du concentrateur.
6. Retirez complètement la colonne du concentrateur.
7. Répétez les étapes 5 et 6 pour retirer l'autre colonne.

Installation des nouvelles colonnes (tubes en métal) :

8. Retirez les caches anti-poussière du haut et du bas de chaque colonne. Au total, deux caches anti-poussière doivent être retirés sur chaque colonne. Assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière ou de débris à l'endroit où se trouvaient les caches anti-poussière.
9. Insérez la nouvelle colonne dans le concentrateur. Ne laissez pas la colonne exposée après le retrait des caches anti-poussière. Insérez-la immédiatement dans le concentrateur afin de minimiser l'exposition à l'environnement.
10. Une fois la colonne entièrement insérée, remplacez le bouton de verrouillage à ressort en position complètement fermée.
11. Répétez les étapes 9 et 10 pour installer l'autre colonne.
12. Remplacez le couvercle inférieur et remettez le concentrateur debout.
13. Branchez le cordon d'alimentation sur le concentrateur et sur la prise électrique. **N'allumez pas** le concentrateur.
14. Appuyez sur le bouton Plus  pendant dix secondes. Les indicateurs de débit 1, 3 et 5 s'allument et la colonne est réinitialisée. Relâchez le bouton Plus .
15. Appuyez sur le bouton marche / arrêt  pour allumer le concentrateur et l'utiliser normalement.

REMARQUE : les instructions relatives au changement des colonnes ne doivent être appliquées que lorsqu'une procédure de maintenance est requise. Les colonnes ne doivent être retirées que pendant la procédure de maintenance.