

Modelo de ajuste y elección del tamaño

1. Imprima esta hoja de papel.
2. Use tijeras para recortar las almohadillas a lo largo de las líneas punteadas. Los contornos representan el tamaño real.
3. La **almohadilla grande es la opción considerada estándar** y es ideal para mascarillas de tamaño mediano, grande y extra grande. La almohadilla pequeña es ideal para mascarillas de tamaño pequeño, extra pequeño y petite.
4. Coloque los trozos de papel recortado sobre su rostro, para determinar cuál es el tamaño correcto de la almohadilla a utilizar. **Si se encuentra entre los dos tamaños, recomendamos usar el tamaño grande.**



A modo de orientación, las alas de la almohadilla deben terminar entre las pupilas y las comisuras exteriores de los párpados, como se muestra en la figura anterior.

La almohadilla se puede colocar fácilmente en diversos ángulos, para adaptarla a la forma de los rasgos de cada persona.

La elección del tamaño y el ajuste correctos aumentan la comodidad que ofrece la mascarilla.



Ideal para mascarillas de tamaño
MEDIANO, GRANDE y EXTRA GRANDE

Almohadilla grande

Ancho mayor: 10,7 cm (4,2") Altura mayor: 5,1 cm (2,0")



Ideal para mascarillas de tamaño
PEQUEÑO, EXTRA PEQUEÑO y PETITE

Almohadilla pequeña

Ancho mayor: 8,9 cm (3,5") Altura mayor: 3,8 cm (1,5")