

Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid
Medische Microbiologie en Infectieziekten C70
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
☎ 024-3657515

Artsen - microbioloog mw. drs. J. Berkhout
 mw. dr. C.F.M. van der Donk
 dr. J.F.G.M. Meis
 dr. B. Mulder
 mw. dr. M. Nabuurs-Franssen
 prof. dr. A. Voss

Moleculair biologoog dr. A.I.M. de Groot

Voor algemene voorwaarden, aanvullende informatie betreffende afname en diagnostiek zie vademecum www.medischemicrobiologie.nl

patiënt (verplicht om in te vullen)

BSN nummer:
patiëntnummer (indien bekend):
geboortenaam:
partnernaam:
voorletters:
geboortedatum:
geslacht (m/v):
adres:
postcode / woonplaats:

aanvrager (verplicht om in te vullen)

naam zorgverlener:
AGB-code zorgverlener*:
instelling / afdeling:
AGB-code instelling*:
straat:
postcode / woonplaats:
telefoon / sein:

*zoals vermeld in Vektis (AGB-register)
AGB-code zorgverlener altijd in relatie met AGB-code werklocatie

datum afname

datum kweek 1: .. / .. /

 kweek 2: .. / .. /

 kweek 3: .. / .. /


 kweek 4: .. / .. /

 kweek 5: .. / .. /

voorschrift voor het afnemen van een (peri-)anale kweek

In de kartonnen envelop zitten 5 kweekstokjes (eSwab), plastic zakje (SafetyBag), vocht absorberend vloeipapier en dit formulier. Wij vragen u vriendelijk om op 5 opeenvolgende dagen, iedere dag één (peri-)anale kweek bij uzelf af te nemen of af te laten nemen.

afname van de kweek

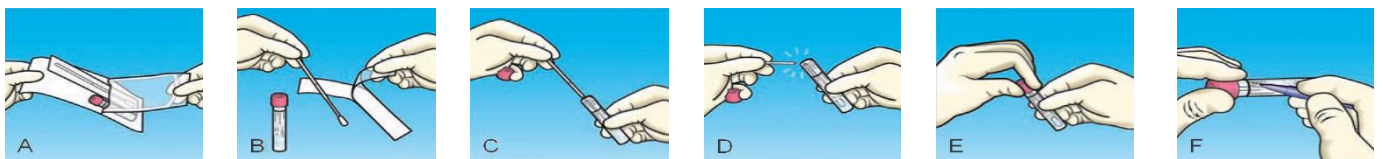

- A) open de verpakking
- B) pak het kweekstokje bovenaan vast en wrijf met het uiteinde van de kweekstok stevig over de huid direct rondom en licht in de anus, indien er ontlasting aan de kweekstok komt is dat alleen maar beter voor de kweek.
- C) draai op steriele wijze de dop los en breng de kweekstok in de vloeistof
- D) breek bovenste deel van de kweekstok ter hoogte van de breuklijn (rode streep) af
- E) draai dop stevig vast
- F) noteer naam, het nummer van de kweek 1, 2, 3 ,4 of 5 en de datum waarop de kweek is afgenomen

Bewaar de afgenomen kweken tot aan verzending in de koelkast, bijvoorbeeld in SafetyBag.

waarschuwing

Bij spatten van de vloeistof; op de huid deze onmiddellijk met water en zeep afwassen, in de ogen deze onmiddellijk overvloedig spoelen met water. Mocht er toch nog irritatie ontstaan, neem dan contact op met uw arts.

invullen van het formulier

Het aanvraagformulier bevat rechtsboven al een sticker met uw persoonlijke gegevens. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, wilt u dan uw naam, geboortedatum geslacht, BSN invullen, en indien bekend uw CWZ patiëntnummer. Tenslotte vragen wij u op dit formulier de datum in te vullen waarop u de kweken heeft afgenomen. Zie hierboven onder datum afname.

insturen van kweken

zie achterzijde

Bloed, feces, urine of ander lichaamsmateriaal dat na het onderzoek overblijft, kan gebruikt worden voor kwaliteitscontroles of innovaties / verbeteringen van de testen in ons laboratorium. Dit is noodzakelijk om goede diagnostiek te kunnen blijven bieden en geschiedt op anonieme wijze. Indien patiënt bezwaren heeft tegen nader gebruik van lichaamsmateriaal dit vakje aankruisen.

insturen van de kweken

Nadat u de laatste kweek nummer 5 heeft afgenomen, doet u de 5 kweken in de bijgeleverde plastic zak (genaamd SafetyBag) met het vocht absorberend vloeipapier en plakt de SafetyBag dicht (zelfklevende sluiting, na verwijderen van de beschermstrip).

De afgesloten SafetyBag en dit ingevulde formulier stopt u in de bijgeleverde kartonnen envelop en plakt deze dicht. U kunt de envelop als brief versturen met de post (géén postzegel nodig) of afgeven op een van de prikposten van het CWZ in de regio (www.cwz.nl).

De screening is gratis, er worden geen kosten in rekening gebracht.

verzending

per post naar:

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Antwoordnummer 2203
6500 WC Nijmegen

of afgeven op:

prikposten CWZ in de regio (www.cwz.nl)
prikpost B82 CWZ
loket laboratorium C70 CWZ

voor meer informatie ☎ 024-3658167