

## Wie legt man den Leckschutz richtig an?


**1. Fest verschließen:** Die Maske muss fest am Hals sitzen, so dass der Hund sie nicht nach vorne abstreifen kann!

**2. Nicht sofort kürzen:** Beobachten Sie zuerst, wie der Hund sich mit der Maske verhält. Wenn der Hund ein lockeres Fell hat oder besonders gelenkig ist, sollte man den NOVAGUARD so weit kürzen, dass er nicht an seine Wunden kommt. Wenn eine Wunde an der Rute oder den Hinterläufen ist, benötigt es oft maximale Länge oder bestenfalls einen Ring weniger. Bei Wunden an Bauch, Seite und Vorderpfoten ist es meistens 1 Ring weniger oder manchmal auch 2. Bei Wunden an Hals, Schulter oder Brust können meist alle 3 Ringe abgeschnitten werden.

**3. Seitenstreifen einstellen:** Wenn der Hund einen sehr breiten Kopf hat, stecken Sie den Seitenstreifen in den 1. und 2. Schlitz - dann ist der Ohrausschnitt beim Anziehen grösser. Wenn die richtige Position gefunden wurde, sollten die Seitenstreifen durch möglichst viele



Schlitzte „geflochten“ werden. Achten Sie darauf, dass der farbige **Seitenstreifen** immer **außen endet!** Die Seitenstreifen müssen in mindestens den ersten beiden Schlitzten stecken. In diesem Fall und wenn Ihr Tier den Leckschutz stark beansprucht (z.B. sehr aktive Hunde), empfiehlt sich eine zusätzliche Fixierung des Seitenstreifens (notfalls mit jeweils einer Niete durch das dickere Ende des Seitenstreifens).

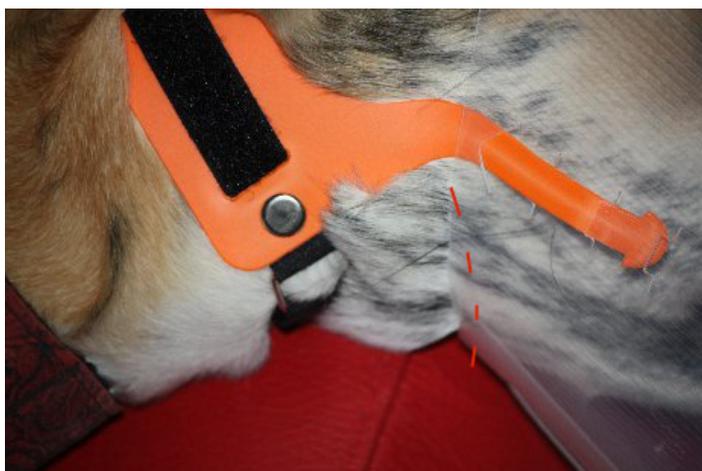

**4. Unter dem Hals erweitern:** Wenn der NOVAGUARD Leckschutz die richtige Größe hat, jedoch unter dem Hals etwas einschneidet, kann der Rand vorsichtig ausgeschnitten und damit erweitert werden. Anschließend feilt man die geschnittene Kante glatt oder klebt Leukoplast rundherum.

## Wie sitzt der NOVAGUARD Leckschutz richtig?

1. Vor und hinter den Ohren ist genug Platz;
2. Der Leckschutz sitzt fest und wackelt nicht;
3. Der Leckschutz schneidet den Hals nicht ein;
4. \*Der Abstandhalter kann etwas nach unten sinken, was normal ist.